

INSIDE

UN RESUMEN DE TODAS LAS NOTICIAS DE ANTHOGYR

axiomx3[®]

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS



**UNA MIRADA
EN PROFUNDIDAD**

A AXIOM X3[®], NUESTRA NUEVA
SOLUCIÓN DE IMPLANTE

PÁGINA 3

ENTREVISTA

A LOS DOCTORES
FRANÇOIS VIGOUROUX
Y FABIAN HIRSCH

PÁGINA 12


Anthogyr
A Straumann Group Brand

CIFRAS CLAVE*

CRECIMIENTO GLOBAL DE LOS INGRESOS **+4,3 %**

INGRESOS DE IMPLANTOLOGÍA **+6,3 %**

INGRESOS POR REGIÓN GEOGRÁFICA

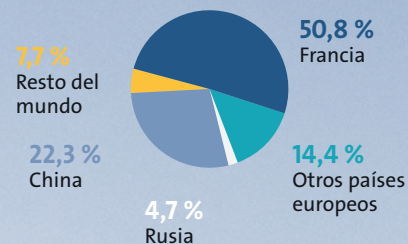

NÚMERO DE IMPLANTES VENDIDOS POR PAÍS **+7,9 %**

343 EMPLEADOS **+8 %** I+D de los ingresos

*A finales de septiembre de 2022 frente a 2021

“AXIOM X3®, VAMOS A EXPLORAR JUNTOS NUEVOS MUNDOS”

Veamos cuánto hemos avanzado desde el lanzamiento inicial de Axiom® en 2009. Ahora, 13 años después, hemos lanzado Axiom X3®. Más que nunca, seguiremos trabajando mano a mano contigo. Y seguiremos innovando en nuestro camino, aportando valor a través de la simplicidad, la «sofisticación definitiva».* Gracias a la unión de los esfuerzos de nuestro esmerado personal con el de nuestros embajadores y probadores, ahora podemos ofrecerte una solución de implante que combina rendimiento con adaptabilidad, preservación con cuidado y eficacia con libertad. **Lo mejor de la innovación y la co-construcción.**



Un enfoque colaborativo: algo que nosotros y vosotros seguimos fomentando juntos.

El nombramiento de Philippe Neimark como Director General es un paso más para la compañía, ya que nuevamente vamos «más allá de las fronteras» y aceleramos nuestro desarrollo internacional. Deseo a Philippe lo mejor en su nuevo cargo.

Por último, muchas gracias a cada uno de vosotros, nuestros queridos clientes, por vuestra lealtad y confianza.

¡Feliz lectura! 🍷

Éric Genève
VicePresidente, Anthogyr

*Cita de Leonardo da Vinci.

Directeur de publication : Valérie Genève Responsable communication : Laëtitia Martin-Berne
Rédacteurs : Agnès Payre, Laëtitia Martin-Berne, Laëtitia Rigaud (Bulb) Crédits photo : Anthogyr, Bertrand Prudhon, 3D Nyvalis, Dr François Vigouroux, Dr Fabian Hirsch, JBL
Design : Anthogyr, Kalistene



Dirección editorial: Valérie Genève Responsable de comunicaciones: Laëtitia Martin-Berne Colaboradores: Agnès Payre, Laëtitia Martin-Berne, Laëtitia Rigaud (Bulb) Créditos de las fotografías: Anthogyr, Bertrand Prudhon, 3D Vision Nyvalis, Dr. François Vigouroux, Dr. Fabian Hirsch, JBL Diseño: Anthogyr, Kalistene

“DESCUBRE LA NUEVA SOLUCIÓN DE CIRUGÍA GUIADA INTEGRAL”



Con la solución de cirugía guiada INTEGRAL, recorre un camino de confianza.


INTEGRAL es una solución quirúrgica totalmente guiada desarrollada para tratar todos tus casos guiados con la flexibilidad que necesitas.

La gama INTEGRAL te ofrece la libertad de adaptarte a tus necesidades clínicas de la forma más precisa posible. Los kits e instrumentos inteligentes se han diseñado para mejorar la precisión y ergonomía de los procedimientos quirúrgicos.

INTEGRAL es una solución abierta que te permitirá integrarte a los principales flujos de trabajo. Disfruta de la predictibilidad, la seguridad y los procedimientos mínimamente invasivos de la cirugía guiada.

Elije INTEGRAL y su característico diseño desarrollado para aumentar tu eficacia quirúrgica.

- + FLEXIBILIDAD
- + ERGONOMÍA Y RENDIMIENTO
- + PRECISIÓN
- + LIBERTAD

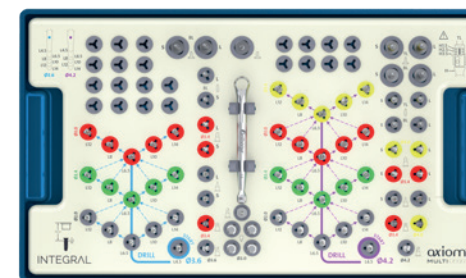

INTEGRAL
Guided surgery



Más información
sobre nuestra Cirugía
Guiada INTEGRAL

“NUESTROS PRÓXIMOS EVENTOS”



AEEDC, Dubái
Del 7 al 9 de
febrero de 2023



IDS 2023, Colonia
Del 14 al 18 de
marzo de 2023

“AXIOM X3®, EL HOGAR DE LA PRESERVACIÓN ÓSEA”

El lanzamiento de Axiom X3® marca otro audaz paso adelante en nuestra búsqueda de satisfacer las necesidades de la implantología dental moderna. Nuestro último implante es la cumbre de nuestros logros, ya que llevamos la preservación ósea todavía más allá, hasta el corazón mismo de la consulta dental.



Catherine Berruyer,
Directora de producto

Yanik Segginger,
director de marketing

El ecosistema de Axiom® sigue evolucionando

Desde su lanzamiento original en 2009, el sistema Axiom® no ha dejado de evolucionar. Primero llegó Axiom® REG. Luego Axiom® PX. Y ahora Axiom X3®, el producto de más de 15 años de conocimiento del sector y las aportaciones de los clientes. Entre los implantólogos, el sistema Axiom® es reconocido por la comodidad de uso durante la cirugía y por el rendimiento de sus componentes protésicos. Ahora Axiom® ha ido un paso más allá, y ayuda a los profesionales a afrontar los retos de la implantología.

Axiom X3®: el hueso es oro

Axiom X3® realmente tenía un gran trabajo que hacer, ya que debía adaptarse a diferentes prácticas y a cada indicación clínica (incluida la carga inmediata), todo ello preservando el hueso y sin necesidad de cambiar de kit quirúrgico. Y eso sin mencionar la necesidad de inmediatez y simplicidad de la implantología moderna. El ambicioso proyecto de desarrollo de este

implante de próxima generación debía cubrir todas las eventualidades. ¿Cómo lo hizo Axiom X3®? Es su diseño único, doblemente patentado, y su estructura innovadora lo que garantiza el anclaje universal a la vez que preserva el hueso.

¿SABÍAS QUE...?

Los profesionales disponen de un flujo de trabajo más sencillo en hueso denso gracias a la reducción de los instrumentos, a una perforación más flexible en hueso blando para mejorar la estabilidad del implante, a una inserción y orientación óptimas, así como a una gestión del inventario optimizada gracias a la compatibilidad total con toda la gama Axiom®.

Los pacientes se benefician de procedimientos menos invasivos, mejor preservación ósea, menos tiempo en la consulta del dentista, así como tiempos de tratamiento cortos o intermedios. Por lo tanto, Axiom X3® hace un trabajo especialmente bueno al equipar a los profesionales para que puedan hacer frente a cualquier desafío clínico, independientemente del perfil del paciente. 🌟

¿Cómo se está lanzando al mercado esta nueva solución?

“Axiom X3® debía cumplir muchas expectativas”.

Yanik Segginger

Estamos demostrando nuestra capacidad de apoyar de forma creativa y fomentar el crecimiento de nuestros clientes y socios. Organizamos un lanzamiento de producto en seis regiones simultáneamente, en concreto en los países del Benelux, España, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. Nuestro despliegue continúa ahora con Alemania, el sudeste asiático, Oriente Medio y China hasta su finalización en 2025.

Incluso la campaña de lanzamiento fue «Más allá de las fronteras».

La campaña de marketing se ajustaba perfectamente a nuestra identidad: divertirse abordando proyectos ambiciosos, haciendo cosas que nadie más hace, adoptando un enfoque fresco, dando que hablar. Entre la fiesta Livestream del 10 de marzo y los pedidos que estamos recibiendo ahora, creo que es seguro decir que el lanzamiento ha sido todo un éxito. 🌟

¿Qué diferencia Axiom X3® de Axiom® REG y PX?

Más que diferencia, creo que la palabra es evolución o mejora. Axiom X3® es una evolución natural de sus predecesores, REG y PX. Se integra completamente en el ecosistema Axiom®, que ha sido líder desde 2009 en cuanto a comodidad de uso durante la cirugía y rendimiento de sus componentes protésicos. Con Axiom X3®, el objetivo era llevar Axiom® todavía más lejos. ¿Cómo podemos combinar mejor rendimiento y flexibilidad en un único implante para satisfacer mejor las necesidades de la implantología moderna, especialmente la inmediatez?

¿Qué han hecho los odontólogos de estas mejoras?

“Axiom X3® es el resultado de casi 15 años de diálogo y aportaciones de los clientes sobre el sistema Axiom®”.

Catherine Berruyer

Para desarrollar este implante, utilizamos íntegramente tanto una fase de co-construcción upstream con usuarios de Axiom® como una fase de pruebas downstream con más de 63 profesionales de toda Europa. Este enfoque colaborativo de la innovación es lo que permite a Axiom X3® proporcionar soluciones reales a los desafíos actuales, entre los que se incluyen la mínima invasividad, la calidad de anclaje, la inmediatez y la sencillez cotidiana.

¿Axiom X3® ya es un éxito?


Todo lo que rodea a Axiom X3® es intrépido, desde su desarrollo hasta su comercialización y lanzamiento. Pero lo que los odontólogos más valoran es la continua innovación. ¡Esto define Anthogyr a la perfección! 🌟



“ INNOVACIÓN EN ACCIÓN ”

Justo cuando parecía que ya se habían probado todos los diseños de implantes, Anthogyr sorprende al mercado con un diseño completamente novedoso que lleva el valor añadido a otro nivel. Adéntrate en la mentalidad de innovación que subyace a esta destreza tecnológica.

«Anthogyr acelera la innovación».

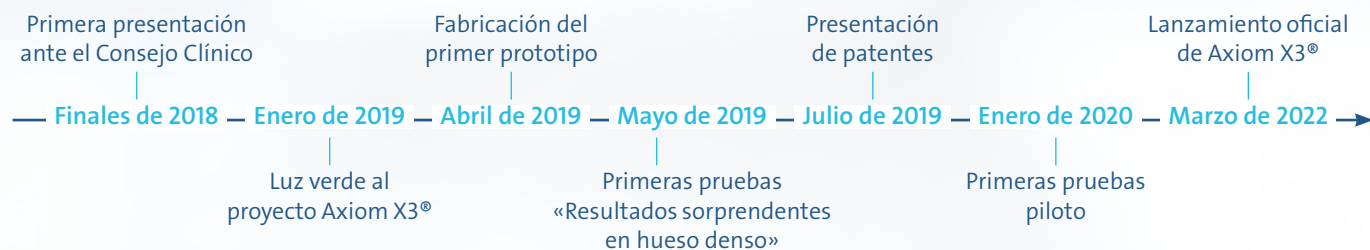

Al principio, hubo co-construcción

El implante Axiom X3® de próxima generación es sin duda único, con su mejora del rendimiento y su diseño optimizado. No obstante, los 3 últimos años de I+D que condujeron al mismo fueron igual de impresionantes. Empezando por el origen del proyecto, que se creó en torno a las aportaciones de los odontólogos. A finales de 2018, cuando Anthogyr reunió a reconocidos cirujanos orales para llevar a cabo unos encuentros mensuales, **el hueso de alta densidad y el entorno post-extracción pronto surgieron como áreas problemáticas.**

Esto llevó a Hervé Richard, director de diseño de implantes de Anthogyr, a soñar a lo grande: ¿podríamos construir algo «diferente, más universal, más inmediato, pero compatible con el mismo kit quirúrgico? ¿Y podríamos hacerlo y preservar nuestro recurso más preciado: el hueso de diferente densidad?»

Un diseño exclusivo

Como de costumbre, el ingenio de la respuesta reside en el conocimiento y la inspiración. La solución era bajar cada dos roscas, como la escalera de doble hélice del castillo de Chambord.

Laboratorio de pruebas de I+D, Sallanches, Francia



Longitudes de rosca alternas en el implante Axiom X3®

Lo que no es tan fácil como parece, ya que un nuevo diseño significa un nuevo proceso y una nueva máquina.

Al fabricar un implante convencional, la herramienta de formación de roscas crea una rosca helicoidal única con una profundidad definida. Con Axiom X3®, la herramienta también crea una segunda rosca con una profundidad ligeramente diferente. Esto provoca una bajada cada dos zonas. Como el implante ya no roza el hueso en las zonas inferiores, el torque se reduce y el implante se puede insertar en hueso denso sin necesidad de un macho de rosca. Sin embargo, Axiom X3® nunca habría visto la luz sin una enorme inversión en maquinaria nueva.

«Otros se habrían dado por vencidos; pero fuimos a por todas y nunca dejamos de creer», dice Hervé con una sonrisa.

2 patentes presentadas

Unos meses después, un equipo de dos ingenieros, cuyo trabajo se mantuvo confidencial, fabricó el primer prototipo. Luego vino una batería de pruebas. Los resultados fueron mucho más allá de nuestras expectativas en hueso denso y en una serie de características. En julio de 2019, se habían presentado dos patentes.

La rapidez con la que superamos las dificultades técnicas fue tan asombrosa como la eficacia del implante final. En realidad, **Axiom X3® hace todo lo que esperábamos, solo que mucho mejor de lo esperado. Proporciona un anclaje universal, una inserción extremadamente sencilla, una mejora de la estabilidad, además de adaptabilidad a todas las densidades óseas y situaciones clínicas, incluida la carga inmediata.**



HERVÉ RICHARD, director de diseño de implantes y BENOÎT CHAUVIN, director de I+D

¿Qué tipo de mentalidad se necesita para llegar a una innovación de este tipo?

B.C.: Fueron necesarios 18 meses desde el lanzamiento de la idea hasta el análisis de los primeros casos clínicos. Es mucho menos tiempo de los 3-4 años que se suelen necesitar. Todo el proceso se aceleró al contar con un equipo pequeño, ágil y muy unido que se invirtió en el proyecto. La organización fue fantástica, especialmente entre aquellos implicados desde el principio y los miembros más jóvenes del equipo que se sumaron más tarde. ¡Nunca dudé de que íbamos a conseguirlo!

H.R.: En Anthogyr, el proceso innovador es cualquier cosa menos un libro de texto. Siempre intentamos mantenernos un paso por delante y eso a veces puede significar asumir riesgos, como decir sí a una idea poco convencional o decir «¡Vamos!» cuando nuestros competidores se hubieran dado por vencidos.


¿Te sorprendieron los resultados de las primeras pruebas clínicas?

B.C.: Ero la primera vez que profesionales internacionales participaban en nuestras pruebas. Fue fantástico. Esperábamos ventajas como la adaptabilidad, la velocidad y la simplicidad. Para lo que no estábamos preparados era para la sensación de «suavidad» que hizo que la colocación resultara muy cómoda para nuestros cirujanos. Hemos tenido especialmente en cuenta estos comentarios. Al fin y al cabo, se trata de que los profesionales disfruten, ¿no es así?

H.R.: También hubo una reacción muy positiva cuando añadimos 2 diámetros grandes a la gama (5,8 y 6,4 mm). En términos generales, la satisfacción del cliente no se produce por sí sola. La idea original fue sometida a un número colosal de retoques. **Se necesitaron 700 horas de trabajo en total, 4 veces más que para un implante convencional.** Por eso Axiom X3® no es solo un producto de la innovación, sino de 15 años de experiencia y conocimiento del sector.

“UNA TRANSICIÓN SATISFACTORIA A LA PRODUCCIÓN EN MASA”

El lanzamiento de Axiom X3® simultáneamente en toda Europa no era algo que se pudiera improvisar. El lanzamiento formaba parte de una estrategia de desarrollo que se sumaba a los servicios comercializados por Anthogyr, por lo que requirió una inversión en recursos adicionales. Pero no fueron solo las inversiones las que hicieron que este proyecto fuera un éxito. Fueron nuestros valores como compañía.

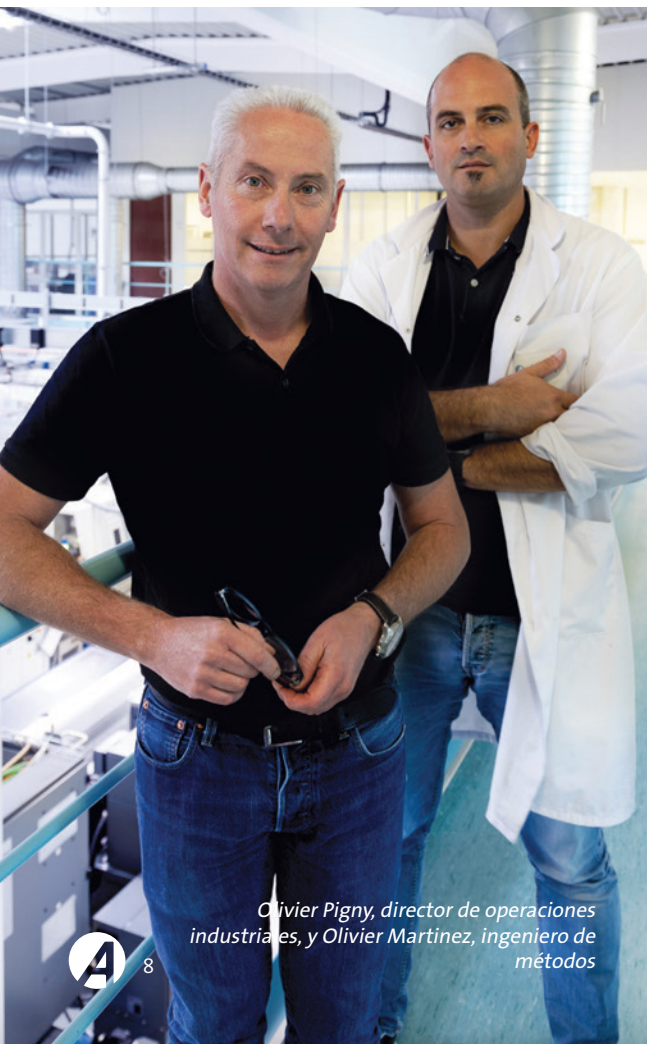

Olivier Pigny, director de operaciones industriales, y Olivier Martinez, ingeniero de métodos

Anticipación a las necesidades futuras

En salud, más que en cualquier otro sector, no hay margen de error. Para estar listos en marzo de 2022 y comenzar la implantación en los mercados de la Europa occidental en mayo, los equipos de producción tenían trabajo que hacer.

«Las primeras pruebas piloto se llevaron a cabo durante el confinamiento en 2020, con un pequeño equipo trabajando en una máquina reservada para la tarea. Eso fue después de un año de preparación y diálogo con la dirección de operaciones e I+D. Para estar listos para la fecha de lanzamiento, nos aseguramos de establecer con antelación sistemas de muestreo de calidad y de validarlos bien. Esto nos ayudó a estar al tanto del inventario y la reposición», explica Olivier Martinez, ingeniero de métodos de Anthogyr. Eso protegió a los equipos técnicos de cualquier sorpresa desagradable cuando la producción comenzó en octubre de 2021 y los palés abandonaron la fábrica 5 meses después. «La prioridad número uno era satisfacer la demanda. Quedarse sin existencias no era una opción. Por ejemplo, para asegurarnos de que nuestra inversión en máquinas se mantenía por

«Con Axiom X3®, hemos demostrado que podemos mejorar la producción sin renunciar a la calidad.»

Olivier Pigny, director de operaciones industriales



Planta de producción de Axiom X3®, Sallanches, Francia

delante de la demanda creciente se requería una planificación a medio plazo. Por el momento, se tarda entre 6 meses y 1 año en adquirir una nueva máquina. En total, se fabricaron 35.000 implantes para el lanzamiento», afirma Olivier Pigny, director de operaciones industriales.

Seguir adaptándose

Otra faceta de la anticipación, y la que más importa, es saber adaptarse continuamente. Desde el prototipo que sale de la mesa del ingeniero hasta la producción a gran escala, la flexibilidad y la agilidad en cada paso del proceso son lo que marca la diferencia. Por eso el proyecto fue inicialmente supervisado por un equipo *ad hoc* que incluía a I+D, Operaciones Industriales y Producción. «La clave del éxito comercial de Axiom X3® fue contar con un grupo de personas que trabajaran especialmente bien juntas», afirma Olivier Martinez. Y lo hicieron bien, porque tuvimos que programar 700 horas de fresado complejo, con la dificultad añadida de tener que construir herramientas a medida para la tarea, ya que las estándar no funcionaban con todos los perfiles del implante.

Control total sobre la cadena de valor

El conocimiento experto de Anthogyr fue el ingrediente clave de Axiom X3®. Eso y el hecho de que se aplicaran las mismas normas de calidad a cada etapa de la producción. Nuestro nuevo implante no solo tiene un diseño innovador. Desde el fresado y el chorreo de arena hasta la interfaz de conexión, Anthogyr ha gestionado cuidadosamente cada proceso a lo largo del camino desde el lanzamiento de la gama Axiom® en 2009. «Uno de nuestros puntos fuertes es nuestra total independencia. Toda la fase de diseño y fabricación se gestiona internamente, y nuestros procesos han sido

35.000 IMPLANTES PARA EL LANZAMIENTO

Si el lanzamiento de Axiom X3® parece enorme, el lanzamiento comercial ha sido igual de gigantesco. Después de Francia y Europa están Oriente Medio, el sudeste asiático y China. Se espera que se complete en 2025.

La mejor de las suertes a nuestros compañeros que tendrán las máquinas funcionando a plena capacidad.



probados y validados exhaustivamente. Por eso hemos sido capaces de garantizar una calidad de extremo a extremo y de reaccionar en tiempo real [...] Nuestra prioridad era mantener los estándares de calidad de Anthogyr al mismo tiempo que maximizamos la productividad.

Un logro hecho posible por el ingenio y la cohesión de nuestros equipos», concluye Olivier Pigny. Tanto a la hora de mantenernos un paso por delante, invertir donde fuera necesario, inventar nuevas soluciones, avanzar juntos o nunca darnos por vencidos, Axiom X3® cumplió todas las expectativas.



“AXIOM X3® LIVESTREAM, ¡QUÉ NOCHE!”



Mira la repetición
de **Axiom X3®**
Livestream

Anthogyr presenta Axiom X3®
en un evento presencial único
en su categoría



Después de una campaña de teaser cuidadosamente orquestada, Anthogyr organizó una fiesta Livestream en Chamonix para 150 cirujanos orales e implantólogos, así como más de 900 asistentes en línea de 70 países.


En consonancia con la ambiciosa fase de desarrollo de Axiom X3®, en 2022 hicimos todo lo posible por captar la atención del mundo. Este evento único se transmitió en inglés con traducciones en directo al francés, español, italiano y alemán. En el evento intervinieron 11 cirujanos orales y especialistas en implantología de toda Europa, quienes hablaron de su experiencia clínica con nuestra innovadora solución de implante. El público cautivado disfrutó de debates sobre una amplia variedad de temas, entre los que se incluían la estabilidad y la osteointegración, la preservación ósea, los protocolos modificados y la justificación, la inserción controlada, la guía, el anclaje universal y el impacto del diseño de Axiom X3®. Los asistentes ya están listos para atender nuevos perfiles de pacientes.

Axiom X3® llega más allá de las fronteras con un lanzamiento fuera de este mundo. 🌌



“

UN VISTAZO A NUESTRO VÍDEO DE LANZAMIENTO”

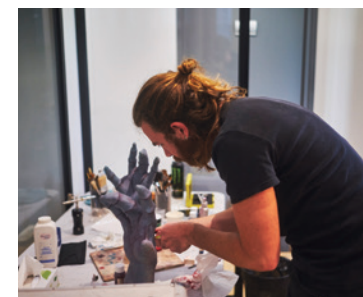

Fue necesaria una sesión de maquillaje sin precedentes de 3 horas para dar vida a nuestro paciente extraterrestre, incluidos 3 maquilladores y 1 diseñador de vestuario.



Nuestro personal tuvo la oportunidad de contribuir al vídeo de lanzamiento de Axiom X3® y ver cómo fue filmado durante 2 días en el centro de París por un equipo formado por unos 20 profesionales.

«Un vídeo *real* para comunicar nuestro mensaje de forma diferente. Eso es lo que somos. Incluso en el marketing, hacemos cosas que nadie más haría. Innovar, cautivar, sorprender a la gente».



Mira el **making of** del
vídeo de lanzamiento
de Axiom X3®

“AXIOM X3®, MÁS INFORMACIÓN CLÍNICA DE LA QUE NUNCA ANTES HABÍAMOS TENIDO.”

9 PAÍSES
63 PROFESIONALES
706 IMPLANTES COLOCADOS

Nicolas Courtois, nuestro director de investigación y asuntos clínicos, nos cuenta sobre los comentarios positivos recibidos por unanimidad después de algunos meses de uso.



Nicolas Courtois
director de investigación y asuntos clínicos

CLÍNICAMENTE PROBADO —Y APROBADO.


Protocolos más cortos y sencillos para preservar la propia anatomía oral de los pacientes, mejorar la comodidad y acortar la duración de la cirugía. Hasta un **52 % más de hueso preservado** en comparación con un implante convencional en hueso blando.

- **Acorta el protocolo de perforación hasta en 2 pasos** (dependiendo de la densidad ósea).
- **Diseño y estabilidad probados** alrededor de los implantes Axiom® BL*

*Chacun D, Gritsch K, Droguet G, et al. Retrospective cohort study of bone level implants up to 7 years of follow-up. Journal of Clinical Periodontology 2022;49(S23):143–288.

**Esposito M, Salina S, Rigotti F, et al. Multicentre within-person randomised controlled trial of 0.5 mm versus 1.5 mm subcrestal placement of dental implants with internal conical connection Five-year post-loading results. Clinical Trials in Dentistry 2020;2(3):77–89.

Existe una verdadera emoción en la comunidad dental en cuanto a Axiom X3®. Los resultados de **preservación ósea** y **los tiempos de procedimiento más cortos** demuestran por qué esta innovadora solución de implante aporta un verdadero valor a profesionales y pacientes. Para el lanzamiento, Anthogyr interactuó incansablemente con un panel de más de 60 profesionales de toda Europa en busca de su opinión. Cada uno con su visión y su sensibilidad, se embarcaron en el mismo proceso de co-construcción. Estos resultados se basan en la gama de implantes Axiom® BL, con su sólido rendimiento y sus excelentes datos clínicos a largo plazo**.

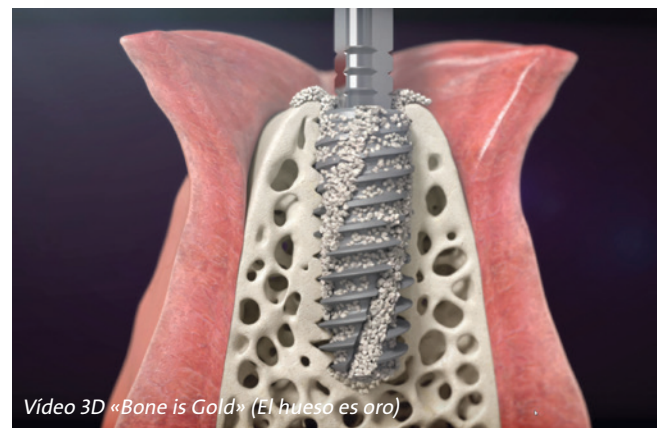

Vídeo 3D «Bone is Gold» (El hueso es oro)



DESCUBRE NUESTROS CASOS PRÁCTICOS Y VÍDEOS CLÍNICOS:


Dr. Philippe Colin, Francia y
Sr. Fabio Levratto, técnico dental,
Mónaco

**VENTAJAS DEL IMPLANTE
AXIOM X3® EN LA ESTABILIDAD
PRIMARIA EN LA REGIÓN
MAXILAR**



axiomx3® Anthogyr

Dr. Claude Authelain, Francia
**RESTAURACIÓN ESTÉTICA CON
AXIOM X3®: EXTRACCIÓN,
IMPLANTACIÓN Y CARGA
INMEDIATA**

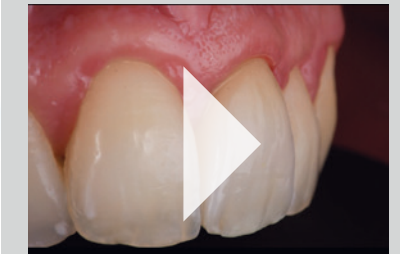

Dr. Damien Carrotte, Francia
**RESTAURACIÓN DE ARCADE
COMPLETA SOBRE 4
IMPLANTES AXIOM X3®**




axiomx3® Anthogyr

Dr. Jean-Baptiste Verdino, Francia
**COLOCACIÓN Y CARGA
INMEDIATAS DE IMPLANTE DE
UNA RESTAURACIÓN
DE ARCADE COMPLETA
SOPORTADA POR 4 IMPLANTES
AXIOM X3®**




axiomx3® Anthogyr

Dr. Pierre Bruet, Francia
**REHABILITACIÓN BIMAXILAR
CON AXIOM X3®: EXTRACCIÓN,
IMPLANTACIÓN Y CARGA
INMEDIATA**

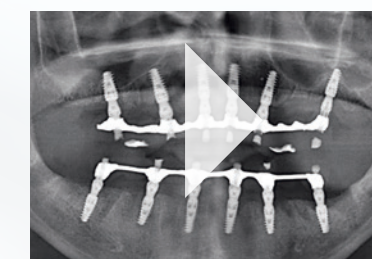

Dr. Chloé Monnot, Francia
**REHABILITACIÓN UNITARIA
DE UN ALVÉOLO CICATRIZADO
EN EL MAXILAR POSTERIOR
CON UN AXIOM X3®**

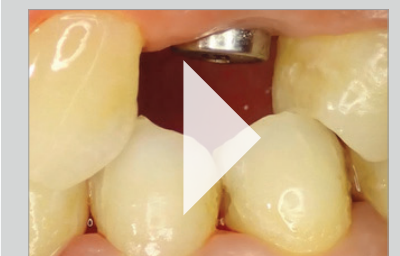

Encuentra
todo nuestro
contenido
clínico en
nuestro sitio
web



PROBARON LA VERSIÓN BETA DE AXIOM X3®

DR. FRANÇOIS VIGOUROUX Y DR. FABIAN HIRSCH. EL UNO ES FRANCÉS, EL OTRO ALEMÁN. AMBOS PASARON VARIOS MESES PROBANDO NUESTRA NUEVA SOLUCIÓN DE IMPLANTE EN SUS CONSULTAS. Y AMBOS FUERON CONQUISTADOS. NOS REUNIMOS CON 2 APASIONADOS CON SÓLIDOS PRINCIPIOS.



François y su auxiliar, Jennifer Galoup



DR. FRANÇOIS VIGOUROUX, Cadaujac/Pessac Léognan, Francia
Consulta dental con 4 dentistas. François ejerce en alianza con su auxiliar dental/de formación
ESPECIALIDADES: Implantología, periodoncia y formación

@dr_francois_vigouroux

DR. FABIAN HIRSCH, Zeuthen, Alemania
Consulta dental con 2 dentistas + 2 higienistas dentales (10 empleados)
ESPECIALIDADES: Implantología y prótesis implantosoportadas

¿Cómo empezó tu relación con Anthogyr?

Dr. François Vigouroux: Me interesé por la compañía en cuanto empecé a ejercer hace 10 años. Sus estándares clínicos se ajustaban perfectamente a lo que yo quería hacer. Y era una marca francesa. He trabajado exclusivamente con Anthogyr durante varios años, además de como formador del Anthogyr Campus. Este año, 2022, ha sido la primera vez que me han pedido que fuera probador clínico de su nuevo implante, Axiom X3®.

«Anthogyr apunta más alto. Quieren facilitar al máximo la vida de los profesionales. Como siempre digo, una vez que los pruebas, no hay vuelta atrás».

Dr. Fabian Hirsch

Dr. Fabian Hirsch: Di una charla sobre sustitutos óseos en una conferencia en 2014. Un colega de Fráncfort, el Dr. Anke Isser, habló en el mismo evento sobre el sistema Axiom®. Lo encontré fascinante y rápidamente me di cuenta de que el sistema era exactamente lo que necesitaba. Probé algunos implantes Axiom® PX la semana siguiente. La simplicidad y el rendimiento del sistema me engancharon de inmediato.

Ambos habéis trabajado con Anthogyr durante un tiempo. ¿Cómo describiríais vuestra relación con la marca?

Dr. F.V.: Es más que el producto o servicio en sí. Me siento como parte de una familia. La mentalidad de la compañía y de su gente está muy en línea con mi forma de ser y pensar. Es tan fácil y agradable de usar. Su uso es tan sencillo. **Soy fan de Anthogyr tanto por la gente como por la calidad de sus productos.**

Dr. F.H.: Estoy de acuerdo. Por mi parte, es muy sencillo: He sido fan desde el principio; incluso durante el breve período de tiempo en que Anthogyr dejó de estar disponible en Alemania, hacía los pedidos directamente en Francia. ¡Creo que eso lo dice todo!

Ahora sois embajadores de Axiom X3®. ¿Qué os llevó a participar en el lanzamiento de este producto en concreto?

Dr. F.V.: Me pidieron que fuera probador del nuevo implante. Acepté inmediatamente porque sabía a qué dificultades me enfrentaba en mi trabajo y estaba seguro de que su próxima innovación sería la solución.

Dr. F.H.: La primera vez que se presentó el producto en Sallanches, pude ver las ventajas y de inmediato entendí en qué era innovador. Hago muchos protocolos de carga inmediata y Axiom X3® acaba de poner fin a las limitaciones.


A propósito de esto, ¿cuáles dirías que son las ventajas de este nuevo implante?

Dr. F.V.: Se pueden utilizar con cualquier indicación siempre que uno se sienta cómodo con la técnica. Puede que todavía conserve algún otro implante, pero es sobre todo para mayor tranquilidad.

Dr. F.H.: Estoy de acuerdo. No hay contra-indicaciones. Además, hemos conseguido reducir todavía más los tiempos de los procedimientos. Además, entre tú y yo, creo que el Axiom X3® es más agradable. **Como cirujano, la sensación al insertar este implante es incomparable.**

¿Podrías contarnos un poco más sobre la fase de pruebas beta?

Dr. F.V.: Empecé a trabajar con Axiom X3® en septiembre de 2021 y lo utilizo casi exclusivamente desde el pasado mes de marzo. Creo que tardas un tiempo en acostumbrarte, como a domar un purasangre o a conducir un Ferrari. Puede que sea el mejor coche del mundo e increíblemente

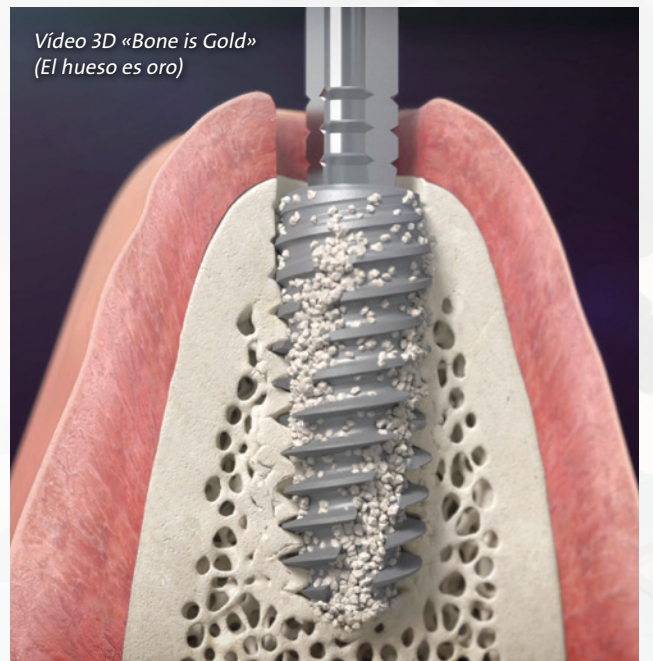

potente, pero primero debes aprender a controlarlo. Siempre que conozcas el hueso y tengas buena destreza, rápidamente resulta cómodo de usar.

Dr. F.H.: La fase de prueba fue un éxito tanto para mí como para mis pacientes. Cargué inmediatamente los implantes Axiom X3® en casi todos esos casos. **Los pacientes estaban también contentos con los tiempos de tratamiento más cortos, ya que la operación duraba menos tiempo y eran necesarias menos visitas postoperatorias.**

¿Cuáles fueron las ventajas definitivas para ti y tus pacientes?

Dr. F.V.: Uso menos fresas. Puedo ir más rápido porque hay menos pasos. La preservación ósea es mejor. Y como la interfaz de conexión y el sistema protésico son exactamente los mismos que en Axiom® Multi Level®, a mi auxiliar le resulta más fácil gestionar el inventario. No tengo que preocuparme de qué implante utilizar. Solo elijo el diámetro y la longitud. Esto evita parte de la presión. Axiom X3® es realmente la solución para la implantología moderna.

Dr. F.H.: Estamos encantados de poder incorporar Axiom X3® a nuestra práctica diaria. Nos encanta la calidad constante de los productos de Anthogyr y la mentalidad innovadora de la compañía. 🌟

Como cirujano, la sensación al insertar este implante es incomparable.

Dr. François Vigouroux



Fabian y su auxiliar, Simone Hecht

#Evento

“GIRA EUROPEA DE AXIOM X3® LISTOS PARA EL DESPEGUE.”

¿Cómo puede ayudarte nuestra solución a alcanzar nuevos niveles y mejorar continuamente la atención que prestas a tus pacientes?

Para responder a esta pregunta y como continuación del lanzamiento de Axiom X3® el pasado marzo, hemos organizado una serie de eventos en toda Europa. Esta es tu oportunidad de descubrir Axiom X3® en un lugar cerca de ti.

De Sevilla a Roma con paradas en Lyon, Marsella y Burdeos, viajaremos a más de 4 países, 15 ciudades y 34 conferencias hasta finales de noviembre de 2022.

Esta será la oportunidad perfecta para conocernos e interactuar con nuestros embajadores clínicos. Las opiniones clínicas que se presentarán te mostrarán por qué el nuevo diseño de Axiom X3® puede ayudarte a alcanzar nuevos niveles y mejorar continuamente la atención que prestas a tus pacientes. No dejes pasar la oportunidad de debatir sobre Axiom X3® con nosotros. 🍷

4 PAÍSES:
FRANCIA, BENELUX,
ESPAÑA E ITALIA
15 CIUDADES
34 CONFERENCIAS



Descubre todo
lo que necesitas
saber sobre la
Gira de Axiom X3®



axiomX3[®]

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS.

Descubre nuevos territorios para responder mejor a las necesidades de tus pacientes.

Benefícate de una solución de implante adaptada a la diversidad clínica, que respeta y preserva el entorno más preciado: el hueso.

Descubre Axiom X3[®], una nueva experiencia, más allá de tus fronteras.

Más
información



anthogyr.es

Anthogyr

A Straumann Group Brand

