


10

Comment réaliser une prothèse unitaire provisoire sur Axiom® TL ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

PRÉPARATION

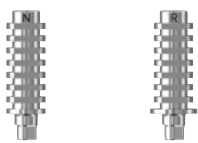

Piliers temporaires indexés Axiom® TL
Réf. **TC100-N** Réf. **TC100-R**



Analogues d'implant Axiom® TL
Réf. **TA100-N** Réf. **TA100-R**



Vis M 1.6 provisoire titane
Réf. **TS161**



Vis de laboratoire longue
Réf. **TS162**



Vis de laboratoire courte
Réf. **TS163**

MISE EN PLACE



Clé dynamométrique de prothèse
Réf. **INCCD**

OU




Torq Control
Réf. **15501**



Clé hexagonale
Réf. **INCHELV** ou **INCHXLV**



Mandrin hexagonal
Réf. **INMHECV** ou **INMHELX** ou **INMHEXLV**

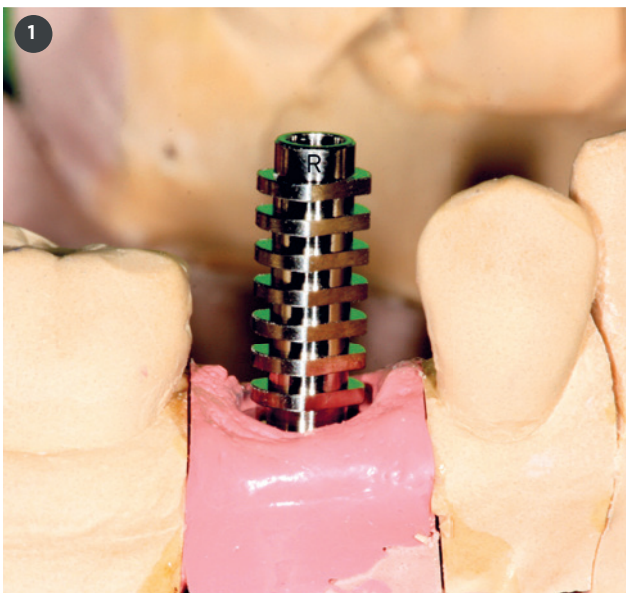

1. Préparation de la prothèse

Les piliers temporaires sont disponibles dans 2 diamètres de plateforme (N:Ø4.0 et R:Ø4.8). Ceux-ci sont identifiables par la lettre N ou R présente sur la pièce.

Visser le pilier temporaire sur le maître modèle à l'aide d'une clé hexagonale. ① Serrage manuel modéré (<10 N.cm). Préparer le pilier temporaire et le retoucher si nécessaire. Des vis de laboratoire en version longue ou courte sont disponibles pour ces étapes. Réaliser la prothèse provisoire. Avant le polissage de la prothèse, protéger la plateforme du pilier provisoire à l'aide d'un analogue du diamètre correspondant. Les analogues sont identifiables par un code couleur :

Bleu = Plateforme R = 4.8

Rose = Plateforme N = 4.0



2. Mise en place de la prothèse en bouche

Fixer la prothèse à l'aide de la vis M 1.6 titane Axiom® TL livrée avec le pilier à 25 N.cm à l'aide de la clé dynamométrique de prothèse (Réf. **INCCD**) et d'une clé hexagonale ou du TORQ CONTROL et d'un mandrin hexagonal.

Obturer le fût de vissage puis refermer avec du composite. **2**

À RETENIR

- IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

COMPOSANTS	IDENTIFICATION	DIAMÈTRE
Analogue	Rose	4.0 mm
	Bleu	4.8 mm
Pilier provisoire	Lettre N	4.0 mm
	Lettre R	4.8 mm
Vis laboratoire	Bleue	-
Vis provisoire	Titane	-

- Des vis de laboratoire dédiées sont disponibles pour la préparation.
- Avant le polissage de la prothèse, protéger la plateforme du pilier provisoire à l'aide d'un analogue du diamètre correspondant.

Crédits photos : Dr Colin, Dr Verdino - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale - Classes I, IIa et IIb – Marquage CE 0459 LNE /G-MED
Fabricant : Anthogyr SAS. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.