

healfit[®] SH



HEALFIT[®] SH
MANUEL D'UTILISATION

**NOUS VOUS REMERCIONS POUR LA CONFIANCE
QUE VOUS NOUS ACCORDEZ EN CHOISSANT
DE TRAVAILLER AVEC LA SOLUTION
IMPLANTAIRE AXIOM®.**

Ce document contient les informations nécessaires à l'utilisation du dispositif Axiom® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom® Bone Level et Axiom® Tissue Level, ainsi que l'ensemble du listing des composants.

Votre réussite sera la nôtre. Notre réseau commercial et notre équipe d'experts se tiennent à votre entière disposition pour vous fournir tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin.

Anthogyr



Ce manuel seul ne suffit pas à l'utilisation sans risque des dispositifs médicaux Anthogyr. Veuillez consulter les instructions d'utilisation spécifiques aux produits disponibles sur le site ifu.anthogyr.com.

La parution de ce manuel annule et remplace toutes les versions antérieures.

VOS NOTICES DIRECTEMENT EN LIGNE IFU.ANTHOGR.COM

Vous pouvez désormais consulter les instructions (instructions d'utilisation et manuels) des implants et des pièces prothétiques Anthogyr au format PDF sur notre site ifu.anthogyr.com à l'aide d'un lecteur PDF (type Adobe Acrobat Reader).



COMMENT UTILISER LE SITE ?

Ce portail met à disposition les dernières instructions d'utilisation des produits Anthogyr.

Pour trouver celle de votre dispositif, veuillez suivre les étapes suivantes :

1- Sélectionnez votre pays.

2- Saisissez la référence, la désignation ou le code UDI-DI de votre produit dans le champ de recherche.

3- Validez votre recherche.

Vous obtiendrez les instructions d'utilisation du produit recherché au format PDF que vous pourrez consulter en ligne et/ou imprimer.

4- Modifiez la langue.

Nos instructions d'utilisation sont disponibles en plusieurs langues. La langue qui apparaît par défaut est la langue officielle du pays sélectionné. Si vous souhaitez la modifier, sélectionnez la langue souhaitée en cliquant dans le menu de choix de langues.

MISE À JOUR DES INFORMATIONS

Les instructions d'utilisation sont mises à jour régulièrement et signalées par le pictogramme « New ». Elles peuvent avoir un impact sur la sécurité du patient.

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à éviter les sauvegardes locales et vous conseillons de toujours consulter le portail Anthogyr.

Pour accéder aux instructions archivées, cliquez sur « View old document versions » (« Voir les anciennes versions de ce document »).

Vous pouvez également recevoir les instructions d'utilisation au format papier sans frais supplémentaires.

Pour cela, remplissez le formulaire disponible dans l'onglet « Contact » ou adressez-nous la demande lors de votre prochaine commande.

Pensez à préciser la langue souhaitée.

Le document vous sera délivré dans un délai de 7 jours calendaires.

Nous restons à votre disposition pour tout commentaire ou suggestion, via l'onglet « Contact ».

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|-----------|
| Gamme Healfit® SH | 6 |
| 1. Présentation de la gamme | 6 |
| A. PRÉSENTATION DE LA GAMME | 6 |
| B. CODIFICATION | 6 |
| C. CODES COULEUR DES PIÈCES PROTHÉTIQUES | 7 |
| D. IDENTIFICATION DES HEALFIT® SH | 7 |
| 2. Connexions implantaires | 8 |
| A. AXIOM® BL | 8 |
| B. AXIOM® TL | 9 |
| Choix de la Healfit® SH | 10 |
| 1. Forme anatomique recommandée en fonction de la position de la dent | 10 |
| 2. Dimensions des Healfit® SH | 11 |
| 3. Exigence relative à la hauteur de Healfit® SH | 12 |
| 4. Compatibilité | 13 |
| A. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH BL ET FLEXIBASE® BL UNITAIRE | 13 |
| B. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH BL ET X-BASE® BL UNITAIRE | 14 |
| C. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH TL ET FLEXIBASE® OU X-BASE® TL UNITAIRE | 14 |
| 5. Planification | 15 |
| A. UTILISATION D'UN LOGICIEL DE PLANIFICATION IMPLANTAIRE | 15 |
| B. UTILISATION DE LA JAUGE DE HAUTEUR HEALFIT® SH | 16 |
| Utilisation de la Healfit® SH BL | 18 |
| 1. Choix de la Healfit® SH BL | 18 |
| 2. Pose de la Healfit® SH BL sur l'implant | 18 |
| 3. Prise d'empreinte | 19 |
| 4. Retrait de la Healfit® SH BL de l'implant | 20 |
| Utilisation de la Healfit® SH TL | 21 |
| 1. Choix de la Healfit® SH TL | 21 |
| 2. Pose de la Healfit® SH TL sur l'implant | 21 |
| 3. Prise d'empreinte | 22 |
| 4. Retrait de la Healfit® SH TL de l'implant | 22 |
| Conception et fabrication de la restauration prothétique unitaire | 22 |
| Bibliothèques Healfit® SH | 23 |
| 1. Installation des bibliothèques CAD | 23 |
| A. EXOCAD | 23 |
| B. 3SHAPE | 25 |
| C. DENTALWINGS / CARES | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Structure des bibliothèques CAD | 27 |
| A. EXOCAD | 27 |
| B. 3SHAPE | 31 |
| C. DENTALWINGS / CARES | 34 |
| 3. Copie du profil gingival | 37 |
| A. EXOCAD | 37 |
| B. 3SHAPE | 48 |
| C. DENTALWINGS / CARES | 52 |

RÉFÉRENCES DES COMPOSANTS

59

GAMME HEALFIT® SH

1. Présentation de la gamme


A. PRÉSENTATION DE LA GAMME

Cicatrisez, sculptez, prenez l'empreinte : le tout avec une solution unique, clé en main.

Healfit® SH comporte une gamme de 34 références de vis de cicatrisation, toutes scannables et anatomiques, pour vos restaurations unitaires sur implants Axiom® Bone Level et Axiom® Tissue Level.

À partir de l'étude de centaines de profils de dents, les 5 formes anatomiques Healfit® SH ont été conçues pour favoriser une cicatrisation proche de la dent naturelle tout en préservant les volumes osseux et tissulaires. Elles sont ainsi le partenaire de choix pour les protocoles immédiats.


Solution logicielle ouverte et compatible avec les principaux logiciels CAD/CAM, Healfit® SH apporte la flexibilité d'une prise d'empreinte conventionnelle ou numérique, couplée à un flux de travail accessible pour les restaurations prothétiques au cabinet ou au centre d'usinage Anthogyr.

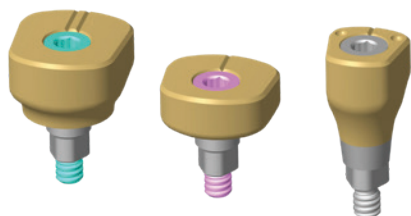


Healfit® SH TL R Healfit® SH TL N Healfit® SH BL

B. CODIFICATION

COMPOSITION DES RÉFÉRENCES HEALFIT® SH BL

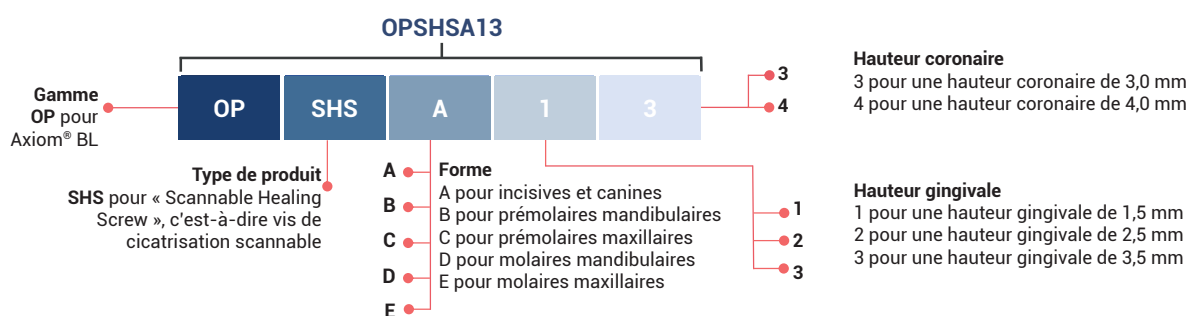

COMPOSITION DES RÉFÉRENCES HEALFIT® SH TL

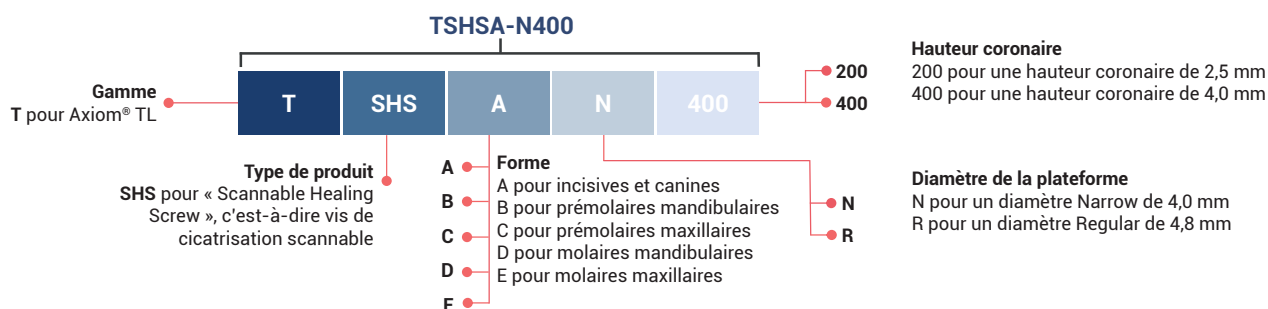




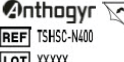
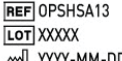
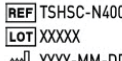


C. CODES COULEUR DES PIÈCES PROTHÉTIQUES

Avant d'ouvrir le packaging, toujours vérifier les informations relatives à la pièce prothétique.

Afin d'identifier facilement la gamme de produits, des codes couleurs ont été ajoutés sous le pictogramme placé sur l'étiquette.

Ces codes couleurs correspondent à ceux déjà utilisés pour l'identification des implants.

| Exemple d'étiquette Healfit® SH pour implants Axiom® BL | | | Exemple d'étiquette Healfit® SH pour implants Axiom® TL | | |
|---|--|--|---|--|--|
|  REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL |  REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL |  REF OPSHSA13 LOT XXXXX Axiom BL |  REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL |  REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL |  REF TSHSC-N400 LOT XXXXX Axiom TL |
|  REF OPSHSA13 LOT XXXXX YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD de HEALFIT SH BL A GH1.5 KH3.0 it HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 es HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 pt HEALFIT SH BL A AG1.5 AC3.0 (01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(17)YYMMDD(10)XXXXX en HEALFIT SH BL A GH1.5 CH3.0 fr HEALFIT SH BL A HG1.5 HC3.0 | | |  REF TSHSC-N400 LOT XXXXX YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD de HEALFIT SH TL N C KH4.0 it HEALFIT SH TL N C AC4.0 es HEALFIT SH TL N C AC4.0 pt HEALFIT SH TL N C AC4.0 (01)XXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(17)YYMMDD(10)XXXXX en HEALFIT SH TL N C CH4.0 fr HEALFIT SH TL N C HC4.0 | | |


Des étiquettes de traçabilité décollables et repositionnables sont jointes au conditionnement de chaque pièce prothétique. Elles doivent être conservées dans le dossier médical du patient.

D. IDENTIFICATION DES HEALFIT® SH

Afin d'identifier les différentes Healfit® SH, chaque produit comporte des indicateurs visuels.

INDICATEURS HEALFIT® SH BL

Rainures = indicateur de hauteur coronaire (HC)
Doivent être orientées vers la face vestibulaire

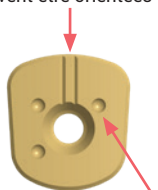

Points = indicateur de hauteur gingivale (HG)




Rainures = indicateur de longueur de vis en fonction des hauteurs gingivale et coronaire de la Healfit® SH
1 pour une hauteur gingivale de 1,5 + hauteur coronaire de 3
2 pour une hauteur gingivale de 2,5 + hauteur coronaire de 3
3 pour une hauteur gingivale de 3,5 + hauteur coronaire de 3
4 pour une hauteur gingivale de 3,5 + hauteur coronaire de 4

Couleur de vis = indicateur de type d'implant
Gris pour Axiom® BL

INDICATEURS HEALFIT® SH TL

Rainures = indicateur de hauteur coronaire (HC)
Doivent être orientées vers la face vestibulaire

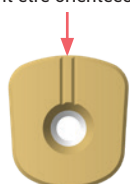

Rainures = indicateur de longueur de vis en fonction de la hauteur coronaire de la Healfit® SH

Couleur de vis = indicateur de type d'implant
Rose pour Axiom® TL plateforme N
Bleu pour Axiom® TL plateforme R


RÉSUMÉ DE LA GAMME COMPLÈTE

| | | FORME | | | | | | |
|----------------|---------|-------------|----|---|---|---|---|---|
| | | HG | HC | A | B | C | D | E |
| HEALFIT® SH BL | 1,5 | 3,0 | |  |  |  |  |  |
| | 2,5 | 3,0 | |  |  |  |  |  |
| | 3,5 | 3,0 | |  |  |  |  |  |
| | 3,5 | 4,0 | |  |  |  |  |  |
| | | Plate-forme | HC | A | B | C | D | E |
| HEALFIT® SH TL | N – 4,0 | 2,5 | |  |  |  | | |
| | N – 4,0 | 4,0 | |  |  |  | | |
| | R – 4,8 | 2,5 | | |  |  |  |  |
| | R – 4,8 | 4,0 | | |  |  |  |  |

2. Connexions implantaires

A. AXIOM® BL

Par sa connexion prothétique avec un diamètre unique de 2,7 mm, la gamme prothétique Healfit® SH BL est compatible avec l'ensemble des implants Axiom® BL, quels que soient le diamètre, la longueur et le profil (REG, PX, X3) de l'implant choisi.

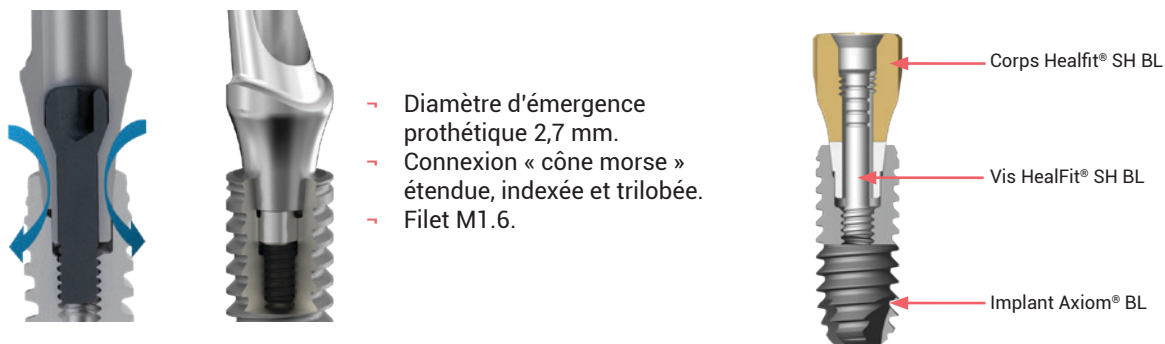

B. AXIOM® TL


Les implants Axiom® TL présentent deux connexions, qui sont les mêmes, quels que soient le diamètre, la longueur et le profil (REG, PX, X3) de l'implant choisi. La gamme Healfit® SH TL est compatible avec tous les implants Axiom® TL utilisant la connexion M1.6 indexée décrite ci-après :



CONNEXION INLINK® :





- Pour les restaurations complètes transvissées fixes
- 2 diamètres de plateforme : (N : Ø4,0 et R : Ø4,8).
- Hauteur minimum de la prothèse : 4,2 mm.
- Encombrement minimum en largeur de la prothèse : 4,2 x 5,2 mm.
- Connexion à plat non indexée.
- Fixation par verrouillage (verrou + bague).
- Filet M2.8.

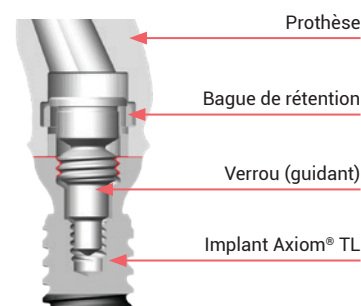

CONNEXION M1.6 INDEXÉE :




- Pour les restaurations unitaires ou plures transvissées.
- 2 diamètres de plateforme : (N : Ø4,0 et R : Ø4,8).
- Connexion indexée trilobée.
- Fixation par vissage (vis).
- Filet M1.6.

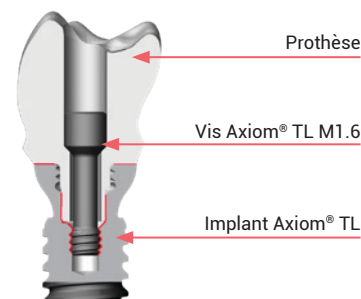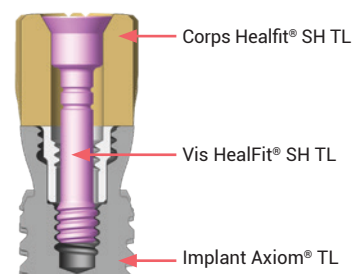

CONNEXION INTERNE M1.6 PLATE :



- Pour les restaurations plures transvissées ou les prothèses amovibles.
- 2 diamètres de plateforme : (N : Ø4,0 et R : Ø4,8).
- Connexion à plat non indexée.
- Fixation par vissage (vis).
- Filet M1.6.

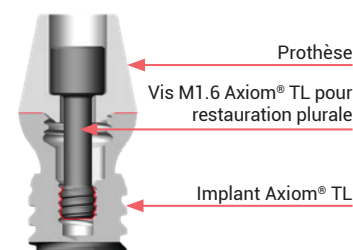

CHOIX DE LA HEALFIT® SH

1. Forme anatomique recommandée en fonction de la position de la dent

Les HealFit® SH sont disponibles dans différentes formes anatomiques pour favoriser une restauration tissulaire plus proche de la forme de la dent naturelle. Comme indiqué dans l'illustration ci-après, Anthogyr recommande les choix suivants :

Forme A pour :


- incisives maxillaires et mandibulaires
- canines maxillaires et mandibulaires

Forme B pour prémolaires mandibulaires

Forme C pour prémolaires maxillaires


Forme D pour molaires mandibulaires

Forme E pour molaires maxillaires

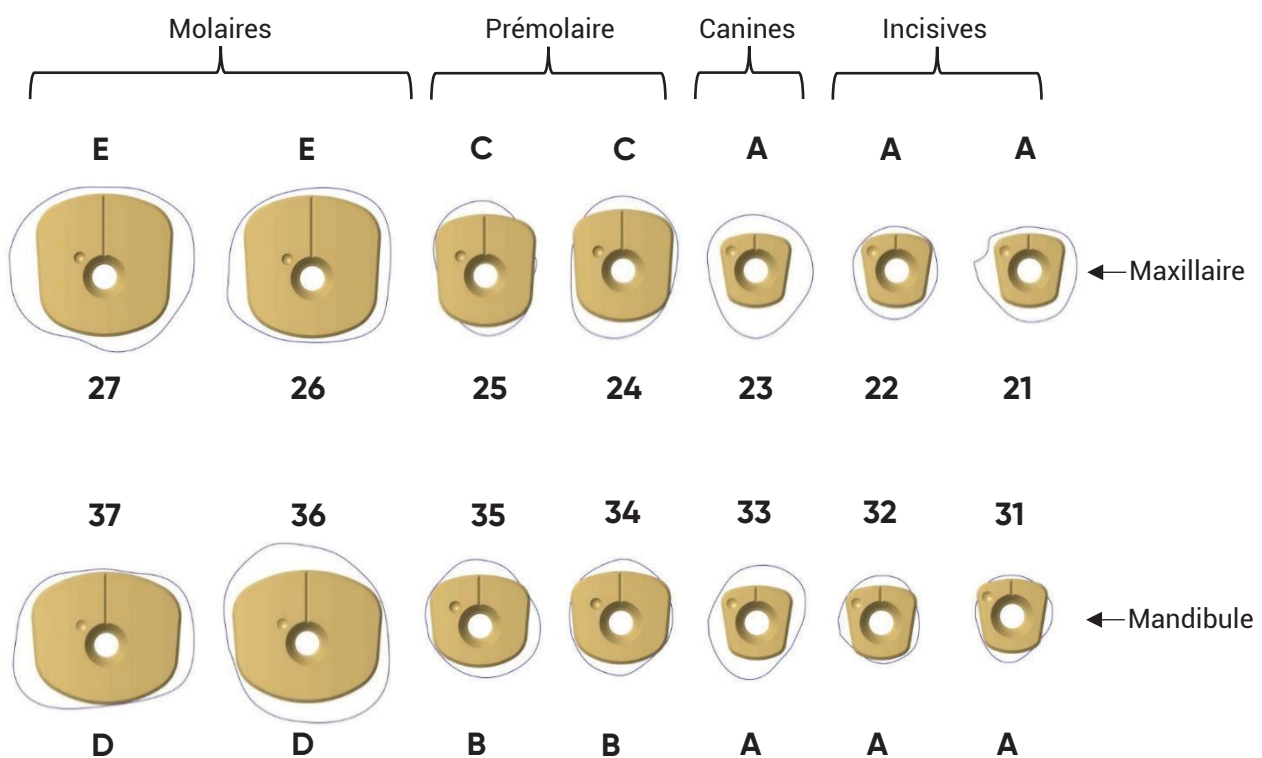


2. Dimensions des Healfit® SH

HEALFIT® SH BL :

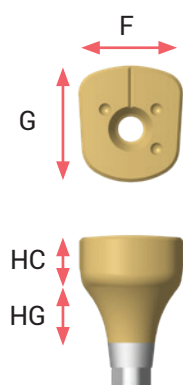

| Forme | F | G | HG | HC | Référence Healfit® SH |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| A | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 3,0 | OPSHSA13 |
| | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | OPSHSA23 |
| | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | OPSHSA33 |
| | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | OPSHSA34 |
| B | 6,2 | 5,6 | 1,5 | 3,0 | OPSHSB13 |
| | 6,2 | 5,6 | 2,5 | 3,0 | OPSHSB23 |
| | 6,2 | 5,6 | 3,5 | 3,0 | OPSHSB33 |
| | 6,2 | 5,6 | 3,5 | 4,0 | OPSHSB34 |
| C | 6,2 | 6,8 | 1,5 | 3,0 | OPSHSC13 |
| | 6,2 | 6,8 | 2,5 | 3,0 | OPSHSC23 |
| | 6,2 | 6,8 | 3,5 | 3,0 | OPSHSC33 |
| | 6,2 | 6,8 | 3,5 | 4,0 | OPSHSC34 |
| D | 9,2 | 8,0 | 1,5 | 3,0 | OPSHSD13 |
| | 9,2 | 8,0 | 2,5 | 3,0 | OPSHSD23 |
| | 9,2 | 8,0 | 3,5 | 3,0 | OPSHSD33 |
| | 9,2 | 8,0 | 3,5 | 4,0 | OPSHSD34 |
| E | 8,4 | 8,6 | 1,5 | 3,0 | OPSHSE13 |
| | 8,4 | 8,6 | 2,5 | 3,0 | OPSHSE23 |
| | 8,4 | 8,6 | 3,5 | 3,0 | OPSHSE33 |
| | 8,4 | 8,6 | 3,5 | 4,0 | OPSHSE34 |



HEALFIT® SH TL :

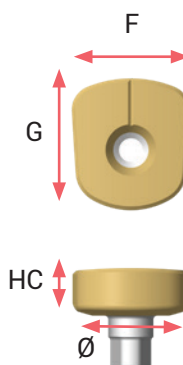


| Forme | F | G | Ø plate-forme | HC | Référence Healfit® SH |
|-------|-----|-----|---------------|-----|-----------------------|
| A | 4,5 | 4,5 | N | 2,5 | TSHSA-N200 |
| | 4,5 | 4,5 | N | 4,0 | TSHSA-N400 |
| B | 6,2 | 5,6 | N | 2,5 | TSHSB-N200 |
| | 6,2 | 5,6 | N | 4,0 | TSHSB-N400 |
| | 6,2 | 5,6 | R | 2,5 | TSHSB-R200 |
| | 6,2 | 5,6 | R | 4,0 | TSHSB-R400 |
| C | 6,2 | 6,8 | N | 2,5 | TSHSC-N200 |
| | 6,2 | 6,8 | N | 4,0 | TSHSC-N400 |
| | 6,2 | 6,8 | R | 2,5 | TSHSC-R200 |
| | 6,2 | 6,8 | R | 4,0 | TSHSC-R400 |
| D | 9,2 | 8,0 | R | 2,5 | TSHSD-R200 |
| | 9,2 | 8,0 | R | 4,0 | TSHSD-R400 |
| E | 8,4 | 8,6 | R | 2,5 | TSHSE-R200 |
| | 8,4 | 8,6 | R | 4,0 | TSHSE-R400 |

3. Exigence relative à la hauteur de Healfit® SH

Pour garantir la qualité et la précision de la prise d'empreinte ou du scannage, la Healfit® SH doit être placée 1,5 mm au-dessus du tissu mou.

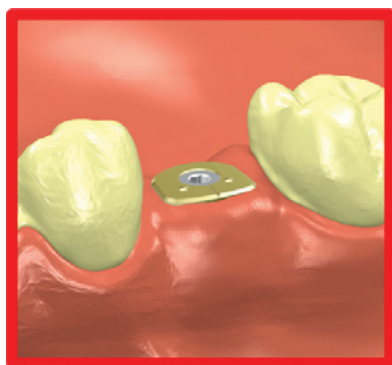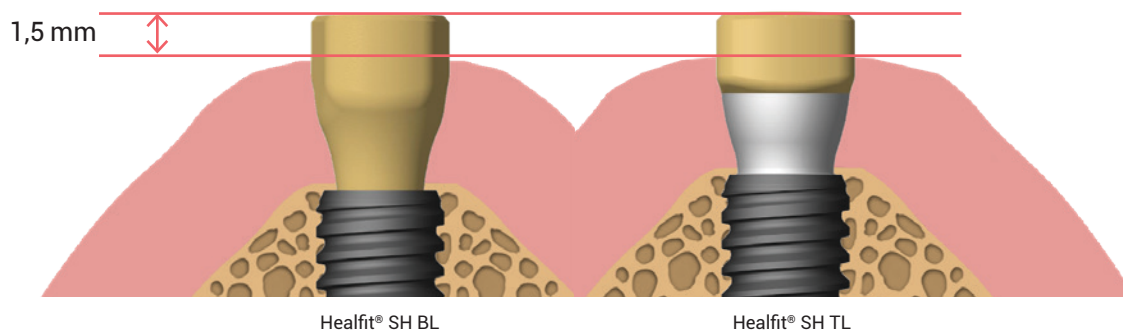

Healfit SH placée trop en profondeur

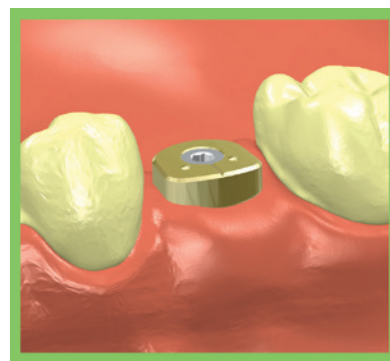






Healfit SH placée correctement
(dépassement de 1,5 mm)

4. Compatibilité

A. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH BL ET FLEXIBASE® BL UNITAIRE

Afin de garantir la continuité du profil d'émergence entre la Healfit® SH BL et la Flexibase® BL, Anthogyr recommande de sélectionner la Flexibase® BL de la façon suivante :

| | | | | Flexibase® BL | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Ø4,0 | | | Ø5,0 | | |
| | | | | HG1,5 | HG2,5 | HG3,5 | HG1,5 | HG2,5 | HG3,5 |
| | | | | HC3,5 | HC3,5 | HC3,5 | HC3,5 | HC3,5 | HC3,5 |
| | | | | OPFLEX413 | OPFLEX423 | OPFLEX433 | OPFLEX513 | OPFLEX523 | OPFLEX533 |
| Healfit® SH BL | Forme A  | HG1,5 HC3 | OPSHSA13 | ✓ | | | | | |
| | | HG2,5 HC3 | OPSHSA23 | | ✓ | | | | |
| | | HG3,5 HC3 | OPSHSA33 | | | ✓ | | | |
| | | HG3,5 HC4 | OPSHSA34 | | | ✓ | | | |
| | Forme B  | HG1,5 HC3 | OPSHSB13 | | | | ✓ | | |
| | | HG2,5 HC3 | OPSHSB23 | | | | | ✓ | |
| | | HG3,5 HC3 | OPSHSB33 | | | | | | ✓ |
| | | HG3,5 HC4 | OPSHSB34 | | | | | | ✓ |
| | Forme C  | HG1,5 HC3 | OPSHSC13 | | | | ✓ | | |
| | | HG2,5 HC3 | OPSHSC23 | | | | | ✓ | |
| | | HG3,5 HC3 | OPSHSC33 | | | | | | ✓ |
| | | HG3,5 HC4 | OPSHSC34 | | | | | | ✓ |
| | Forme D  | HG1,5 HC3 | OPSHSD13 | | | | | | |
| | | HG2,5 HC3 | OPSHSD23 | | | | | | |
| | | HG3,5 HC3 | OPSHSD33 | | | | | | |
| | | HG3,5 HC4 | OPSHSD34 | | | | | | |
| | Forme E  | HG1,5 HC3 | OPSHSE13 | | | | | | |
| | | HG2,5 HC3 | OPSHSE23 | | | | | | |
| | | HG3,5 HC3 | OPSHSE33 | | | | | | |
| | | HG3,5 HC4 | OPSHSE34 | | | | | | |

B. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH BL ET X-BASE® BL UNITAIRE

Afin de garantir la continuité du profil d'émergence entre la Healfit® SH BL et la X-Base® BL, Anthogyr recommande de sélectionner la X-Base® BL de la façon suivante :


| | | | | Embase X-Base® BL Accès Droit et Accès Angulé | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Ø4,0 | | | Ø5,0 | | | Ø6,0 | | |
| | | | | HG1,5 | HG2,5 | HG3,5 | HG1,5 | HG2,5 | HG3,5 | HG1,5 | HG2,5 | HG3,5 |
| | | | | OPFLEX414 OPFLEX416 OPFLEX414-AA OPFLEX414-AAU OPFLEX416-AA OPFLEX416-AAU | OPFLEX424 OPFLEX426 OPFLEX424-AA OPFLEX424-AAU OPFLEX426-AA OPFLEX426-AAU | OPFLEX434 OPFLEX436 OPFLEX434-AA OPFLEX434-AAU OPFLEX436-AA OPFLEX436-AAU | OPFLEX514 OPFLEX516 OPFLEX514-AA OPFLEX514-AAU OPFLEX516-AA OPFLEX516-AAU | OPFLEX524 OPFLEX526 OPFLEX524-AA OPFLEX524-AAU OPFLEX526-AA OPFLEX526-AAU | OPFLEX534 OPFLEX536 OPFLEX534-AA OPFLEX534-AAU OPFLEX536-AA OPFLEX536-AAU | OPFLEX614 OPFLEX616 OPFLEX614-AA OPFLEX614-AAU OPFLEX616-AA OPFLEX616-AAU | OPFLEX624 OPFLEX626 OPFLEX624-AA OPFLEX624-AAU OPFLEX626-AA OPFLEX626-AAU | OPFLEX634 OPFLEX636 OPFLEX634-AA OPFLEX634-AAU OPFLEX636-AA OPFLEX636-AAU |
| Healfit® SH BL | Forme A | HC4 | OPSHSA13 | ✓ | | | | | | | | |
| | | HC6 | OPSHSA23 | | ✓ | | | | | | | |
| | | HC4 AA | OPSHSA33 | | | ✓ | | | | | | |
| | | HC4 AA U | OPSHSA34 | | | ✓ | | | | | | |
| | Forme B | HC6 AA | OPSHSB13 | | | | ✓ | | | | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSB23 | | | | | ✓ | | | | |
| | | HC6 AA | OPSHSB33 | | | | | | ✓ | | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSB34 | | | | | | ✓ | | | |
| | Forme C | HC6 AA | OPSHSC13 | | | | ✓ | | | | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSC23 | | | | | ✓ | | | | |
| | | HC6 AA | OPSHSC33 | | | | | | ✓ | | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSC34 | | | | | | ✓ | | | |
| | Forme D | HC6 AA | OPSHSD13 | | | | | | | ✓ | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSD23 | | | | | | | | ✓ | |
| | | HC6 AA | OPSHSD33 | | | | | | | | | ✓ |
| | | HC6 AA U | OPSHSD34 | | | | | | | | | ✓ |
| | Forme E | HC6 AA | OPSHSE13 | | | | | | | ✓ | | |
| | | HC6 AA U | OPSHSE23 | | | | | | | | ✓ | |
| | | HC6 AA | OPSHSE33 | | | | | | | | | ✓ |
| | | HC6 AA U | OPSHSE34 | | | | | | | | | ✓ |

AA = Accès Angulé

AAU = Accès Angulé, version U

C. COMPATIBILITÉ ENTRE HEALFIT® SH TL ET FLEXIBASE® OU X-BASE® TL UNITAIRE

| | | | | Flexibase® TL plateforme N | X-Base® plateforme N | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | HC3,5 | HC4,0 | | | HC6,0 | | |
| | | | | IN | IN | IN AA | IN AA U | IN | IN AA | IN AA U |
| | | | | TFLEX-N | TFLEX-N4-S | TFLEX-N4-SAA | TFLEX-N4-SAAU | TFLEX-N6-S | TFLEX-N6-SAA | TFLEX-N6-SAAU |
| Healfit® SH TL Plateforme N | Forme A | HC2,5 | TSHSA-N200 | ✓ | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSA-N400 | | | | | | | |
| | Forme B | HC2,5 | TSHSB-N200 | | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSB-N400 | | | | | | | |
| | Forme C | HC2,5 | TSHSC-N200 | | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSC-N400 | | | | | | | |

| | | | | Flexibase® TL plateforme R | X-Base® TL plateforme R | | | | | |
|--------------------------------|---------|-------|------------|--|-------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| | | | | HC3,5 | HC4,0 | | | HC6,0 | | |
| | | | | IN | IN | IN AA | IN AA U | IN | IN AA | IN AA U |
| | | | | TFLEX-R | TFLEX-R4-S | TFLEX-R4-SAA | TFLEX-R4-SAAU | TFLEX-R6-S | TFLEX-R6-SAA | TFLEX-R6-SAAU |
| Healfit® SH TL Plateforme R | Forme B | HC2,5 | TSHSB-R200 |  | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSB-R400 | | | | | | | |
| | Forme C | HC2,5 | TSHSC-R200 | | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSC-R400 | | | | | | | |
| | Forme D | HC2,5 | TSHSD-R200 | | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSD-R400 | | | | | | | |
| | Forme E | HC2,5 | TSHSE-R200 | | | | | | | |
| | | HC4 | TSHSE-R400 | | | | | | | |

IN = indexée

AA = accès angulé

Remarque : les vis de cicatrisation Healfit® SH TL ne sont pas compatibles avec les embases titane TL pour restaurations plures.


5. Planification

Il est important de réaliser une évaluation préclinique et de mettre en œuvre un plan de traitement tenant compte des contraintes anatomiques afin de sélectionner la Healfit® SH la plus appropriée.

A. UTILISATION D'UN LOGICIEL DE PLANIFICATION IMPLANTAIRE


EXEMPLE DE LOGICIELS COMPATIBLES

Les principaux logiciels de planification permettent de choisir la forme et la hauteur des Healfit® SH les mieux adaptées au cas clinique.

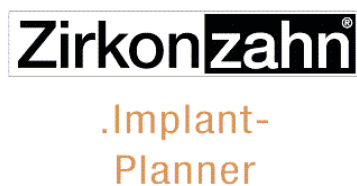

B. UTILISATION DE LA JAUGE DE HAUTEUR HEALFIT® SH


Pour choisir la hauteur de Healfit® SH la plus adaptée au cas clinique après la pose de l'implant, vous pouvez utiliser la jauge Healfit®.

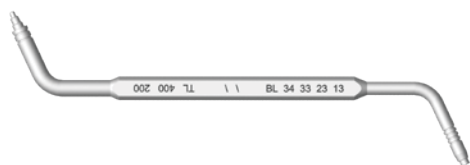

Caractéristiques :

- Livrée non stérile
- Réutilisable
- Jauge de hauteur pour Healfit® SH BL et Healfit® SH TL


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

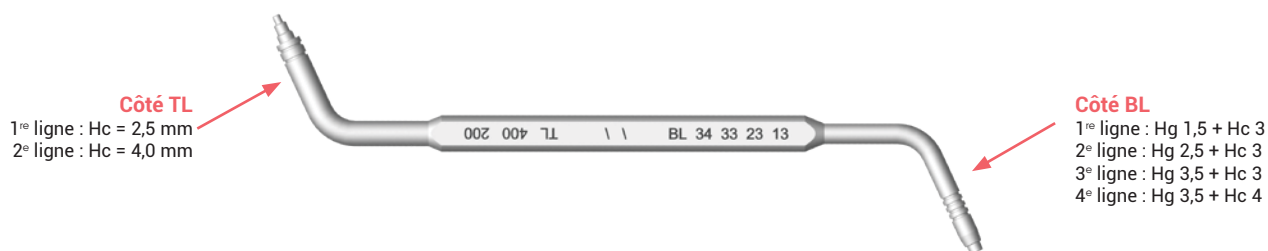


PROTOCOLE D'UTILISATION :

- Placer le côté BL ou le côté TL de la jauge de hauteur dans l'implant Axiom® BL ou Axiom® TL afin de déterminer la hauteur idéale pour la HealFit® SH. Les rainures de la jauge correspondent aux hauteurs HealFit® disponibles et à la limite de la gencive afin de garantir un dépassement de 1,5 mm.


Côté BL

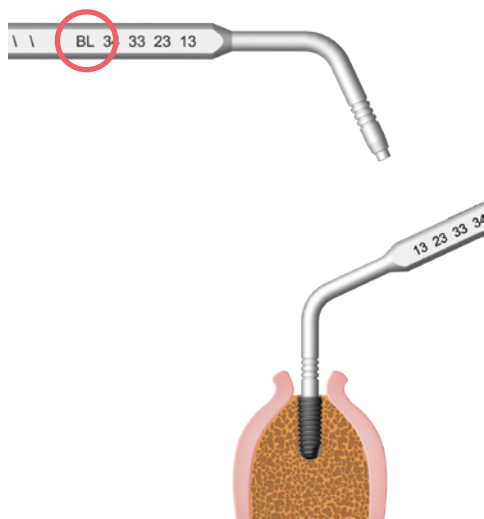


Côté TL

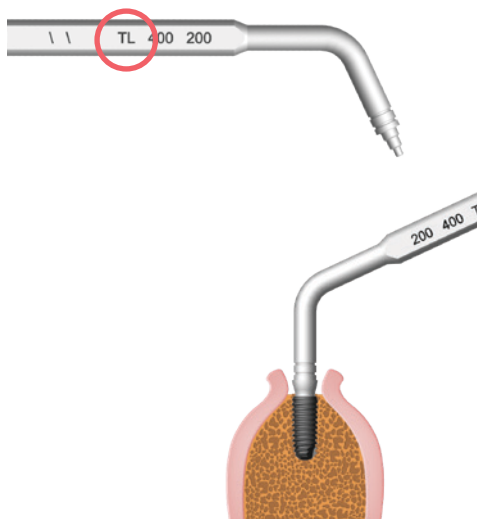

- Choisir la référence de la HealFit[®] SH la plus adaptée, en veillant à ce que la référence sélectionnée dépasse la gencive d'au moins 1,5 mm.

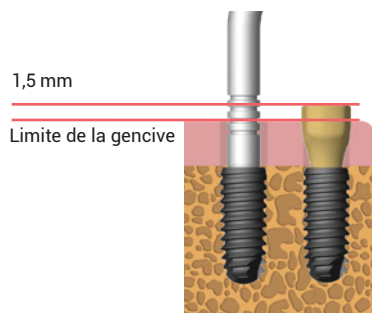

- Exemple avec implant Axiom[®] BL : Limite de la gencive alignée avec la 2e ligne = Choix de la Healfit SH BL Hg 2,5 + Hc 3

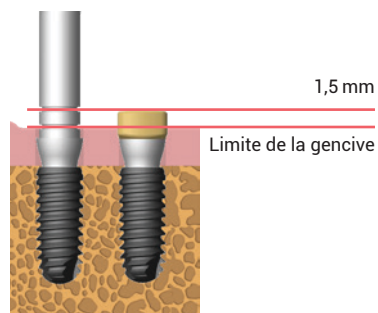

- Exemple avec implant Axiom[®] TL : Limite de la gencive alignée avec la 1re ligne = Choix de la Healfit SH TL Hc 2,5

UTILISATION DE LA HEALFIT® SH BL



Caractéristiques :

- Destinée aux restaurations unitaires sur implants Axiom® BL
- Livrée stérile
- Usage unique
- Vis M1.6 et corps principal livrés démontés
- Interface antirotation


1. Choix de la Healfit® SH BL

Choix de cinq formes anatomiques (A, B, C, D ou E), trois hauteurs gingivales (1,5, 2,5 ou 3,5 mm) et deux hauteurs coronaires (3,0 ou 4,0 mm).


Veuillez consulter le paragraphe « Choix de la Healfit® SH » à la page 10.

2. Pose de la Healfit® SH BL sur l'implant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

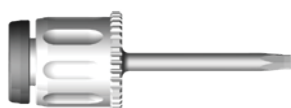

Clé manuelle de chirurgie
OPCS100

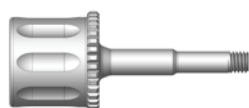

FACULTATIF
Préhenseur pour pilier Axiom® BL
(corps uniquement)
INEXPS / INEXPL



Healfit® SH BL
Catalogue p. 59

PROTOCOLE D'UTILISATION

Option 1

→ Placez le corps de la HealFit® SH dans l'implant (avec le préhenseur pour pilier Axiom® BL INEXPS / INEXPL si besoin), en veillant à l'orientation vestibulaire de la ou des rainure(s) située(s) sur la surface supérieure de la HealFit® SH.

→ Placez la vis M1.6 dans le corps de la HealFit® SH à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100.

→ Serrez manuellement la vis M1.6 de la HealFit® SH (<10 Ncm) à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100, sans forcer la vis de cicatrisation dans l'implant.

→ Suturez autour de la HealFit® SH pour commencer la période de cicatrisation, en veillant à ce que la partie coronaire dépasse d'au moins 1,5 mm du tissu mou, afin de permettre la future prise d'empreinte.




Option 2

→ Assemblez la vis et le corps de la Healfit® SH en dehors de la bouche.

→ Placez la Healfit® SH montée dans l'implant à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100 en veillant à l'orientation vestibulaire de la ou des rainure(s) située(s) sur la surface supérieure de la HealFit® SH.

→ Serrez manuellement la vis M1.6 de la HealFit® SH (<10 Ncm) à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100, sans forcer la vis de cicatrisation dans l'implant.

→ Suturez autour de la HealFit® SH pour commencer la période de cicatrisation, en veillant à ce que la partie coronaire dépasse d'au moins 1,5 mm du tissu mou, afin de permettre la future prise d'empreinte.

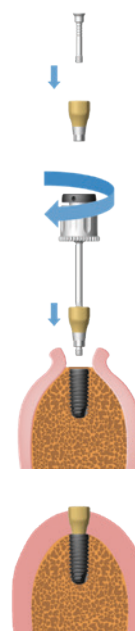

3. Prise d'empreinte

EXIGENCES

- Veillez à ce que la HealFit® SH soit complètement vissée dans l'implant. En cas de doute, réalisez des radiographies périapicales perpendiculaires aux connexions.
- Veillez à ce que la partie coronaire dépasse d'au moins 1,5 mm du tissu mou.

EMPREINTE NUMÉRIQUE

Au cabinet dentaire :

- Numérisation de la région d'intérêt, de la région opposée et de l'occlusion.
- Contrôle de la qualité du scannage.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation LABSIDE.

Remarque :

Il est nécessaire de communiquer la référence de Healfit® SH au laboratoire.

EMPREINTE CONVENTIONNELLE

Au cabinet dentaire :

- Prenez une empreinte conventionnelle à l'aide d'un porte-empreinte du commerce.
- Envoyez-la au laboratoire.

Remarque :

Il est nécessaire de communiquer la référence de Healfit® SH au laboratoire.

Au laboratoire dentaire :


- Numérisez le maître modèle à l'aide d'un scanner de laboratoire.

CONCEPTION ET FABRICATION DE LA PROTHÈSE


Se référer à la rubrique spécifique à la page 22.

4. Retrait de la Healfit® SH BL de l'implant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

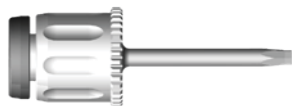


Clé manuelle de chirurgie
OPCS100

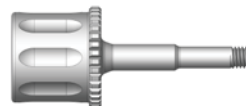

FACULTATIF
Préhenseur pour pilier Axiom® BL
(corps uniquement)
INEXPS / INEXPL


PROTOCOLE D'UTILISATION

- Après la phase de cicatrisation, connectez une clé hexagonale à la vis M1.6 de la Healfit® SH.

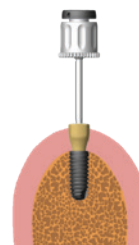

Option 1

- Dévissez manuellement la vis M1.6 de l'implant et retirez la vis de cicatrisation.

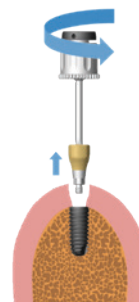


Option 2


Si la Healfit® SH BL est coincée dans l'implant Axiom® BL :

- Dévissez manuellement la vis M1.6 et retirez-la de l'implant.
- Vissez le corps du INEXPS / INEXPL dans le corps de la Healfit® SH BL.
- Déconnectez la Healfit® SH BL coincée de l'implant en utilisant le corps du INEXPS / INEXPL comme préhenseur.

Remarque : Seul le corps de l'extracteur de pilier INEXPS / INEXPL doit être utilisé pour extraire une Healfit® SH BL coincée. La tige de l'extracteur n'est pas compatible avec la Healfit® SH BL.

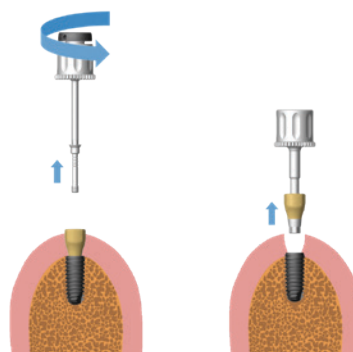

UTILISATION DE LA HEALFIT® SH TL

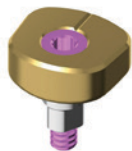

Caractéristiques :

- Destinée aux restaurations unitaires sur implants Axiom® TL
- Livrée stérile
- Usage unique
- Vis M1.6 livrée montée (vis captive)
- Interface antirotation

1. Choix de la Healfit® SH TL

Choix de cinq formes anatomiques (A, B, C, D ou E), deux plateformes (N/Ø4,0 et R/Ø4,8) et deux hauteurs coronaires (2,5 ou 4,0 mm).

Veuillez consulter le paragraphe « Choix de la Healfit® SH » à la page 10.

2. Pose de la Healfit® SH TL sur l'implant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE




Clé manuelle de chirurgie
OPCS100



Healfit® SH TL
Catalogue p. 60

PROTOCOLE D'UTILISATION

- Insérez la Healfit® SH montée dans l'implant à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100 en veillant à l'orientation vestibulaire de la ou des rainure(s) située(s) sur la surface supérieure de la HealFit® SH.
- Serrez manuellement la vis M1.6 de la HealFit® SH (<10 Ncm) à l'aide de la clé manuelle de chirurgie OPCS100, sans forcer la vis de cicatrisation dans l'implant.
- Suturez autour de la HealFit® SH pour commencer la période de cicatrisation, en veillant à ce que la partie coronaire dépasse d'au moins 1,5 mm du tissu mou, afin de permettre la future prise d'empreinte.

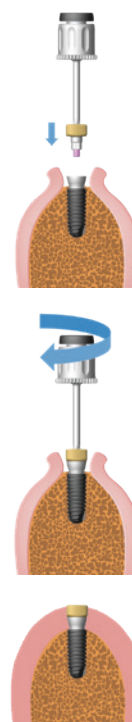


3. Prise d'empreinte

Veuillez consulter le paragraphe « Prise d'empreinte » à la page 19.

4. Retrait de la Healfit® SH TL de l'implant

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

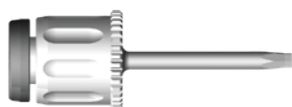


Clé manuelle de chirurgie
OPCS100

PROTOCOLE D'UTILISATION

→ Après la phase de cicatrisation, connectez une clé hexagonale à la vis M1.6 de la Healfit® SH.

→ Dévissez manuellement la vis M1.6 de l'implant et retirez la vis de cicatrisation.

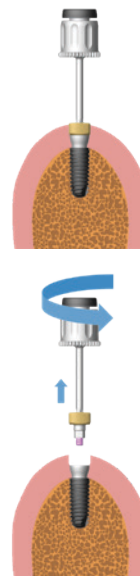

CONCEPTION ET FABRICATION DE LA RESTAURATION PROTHÉTIQUE UNITAIRE

Remarque : avant de démarrer le processus, il est nécessaire d'identifier la Healfit® SH sur le fichier scan. Veillez à ce que la référence ait été communiquée au laboratoire dentaire.

- Concevez la restauration prothétique dans le logiciel de CAD sélectionné.
- Fabrication de la prothèse.
- Si besoin, vous pouvez concevoir et imprimer un modèle compatible avec un analogue pour modèle imprimé Anthogyr.

Veuillez vous référer au :

- guide LABSIDE pour obtenir plus d'information sur la numérisation et la conception de la prothèse,
- paragraphe sur les bibliothèques Healfit SH à la page 23 pour obtenir plus d'informations sur les bibliothèques Healfit SH et la façon de copier le profil gingival.

BIBLIOTHÈQUES HEALFIT® SH

1. Installation des bibliothèques CAD

A. EXOCAD

Remarque :

Si vous mettez à jour la bibliothèque « Labside Healfit® SH BL », veuillez à supprimer tous les fichiers de la bibliothèque « Labside Healfit® SH BL » précédente.

Si vous mettez à jour la bibliothèque « Labside Healfit® SH TL », veuillez à supprimer tous les fichiers de la bibliothèque « Labside Healfit® SH TL » précédente.

Lors du téléchargement de la bibliothèque, veuillez sélectionner la version de la bibliothèque correspondant à votre version d'Exocad. Par exemple, utilisez le filtre « **Exocad-Elafsina** » pour **Elafsina** et les versions ultérieures.

INSTALLATION


→ Dézippez le premier fichier zip :

| Nom du fichier zip : | Dossiers qu'il contient : |
|---|--|
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip README_Healfit_SH_manual_link.pdf |
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip README_Healfit_SH_manual_link.pdf |


→ Dézippez le deuxième fichier zip :

| Nom du fichier zip : | Dossiers qu'il contient : |
|---|--|
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_exoCAD_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr-Labside-HealfitSH-BL Anthogyr-Labside-ModelCreator |
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_exoCAD_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr-Labside-HealfitSH-TL Anthogyr-Labside-ModelCreator |


Pour localiser l'emplacement d'ExoCAD® sur votre PC, effectuez un clic droit sur l'icône DentalCADApp et sélectionnez « Ouvrir l'emplacement du fichier ».

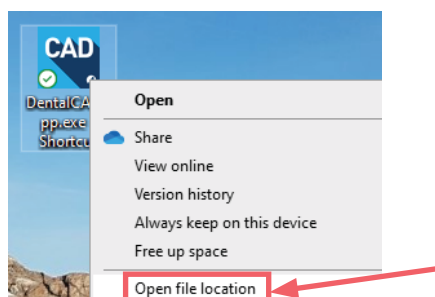


→ Ouvrez le dossier DentalCADApp :

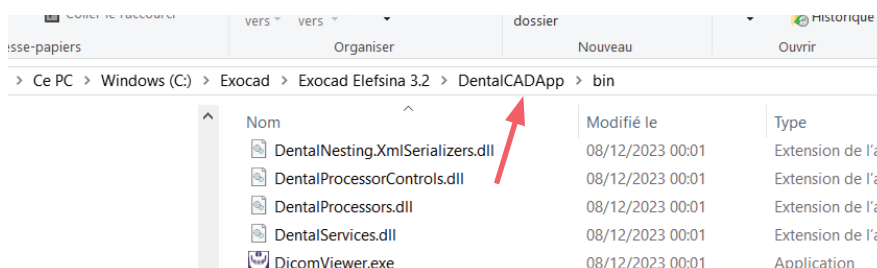


→ Ouvrez le dossier « library » (bibliothèque) :

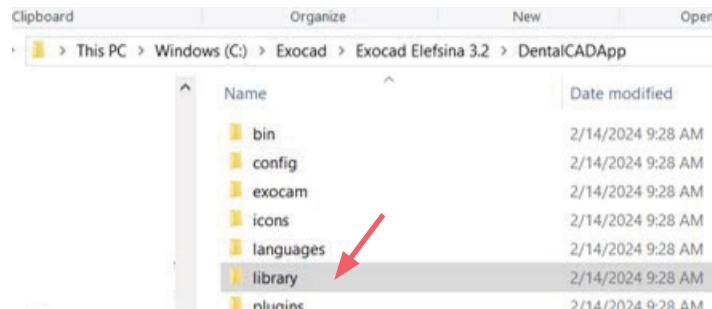

→ Collez les dossiers Healfit® SH BL et Healfit® SH TL dans le dossier « implant »


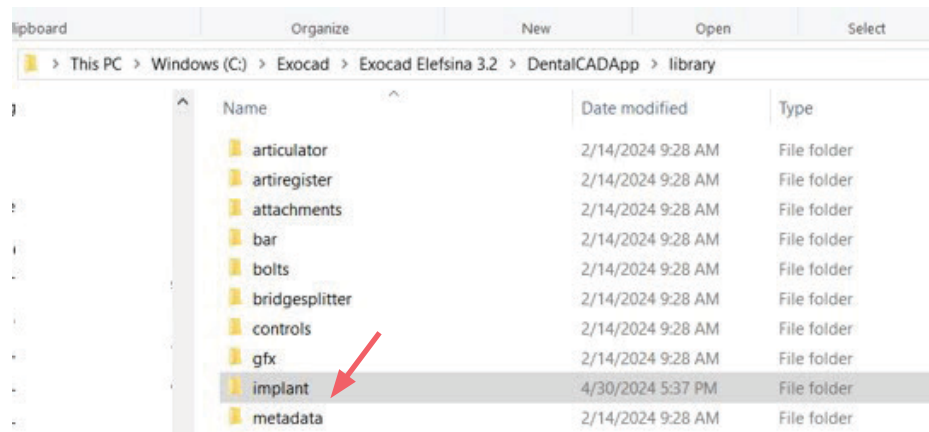


→ Collez le dossier Anthogyr_Labside_ModelCreator dans le dossier « \modelcreator\ implants » :

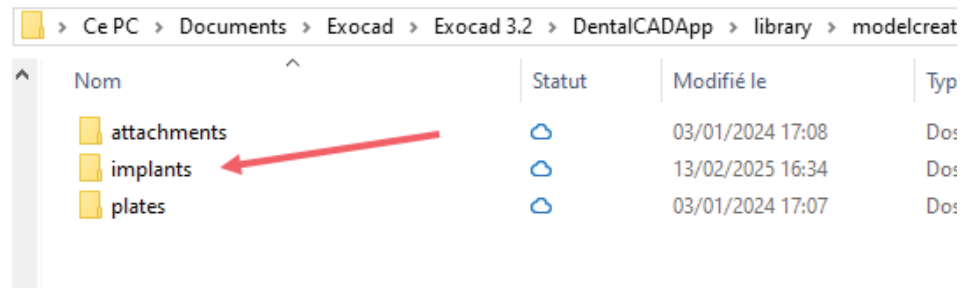

Remarque :

Si vous avez installé d'autres bibliothèques Anthogyr Healfit® SH et d'autres bibliothèques Anthogyr (bibliothèques Anthogyr Labside Flexibase®, Anthogyr Labside PreFace et Anthogyr Labside X-Base®), vous devriez avoir uniquement un dossier Anthogyr Labside Model Creator :

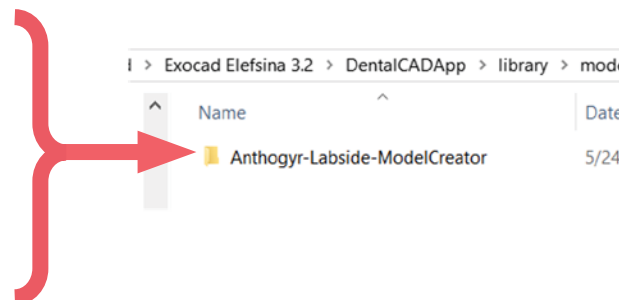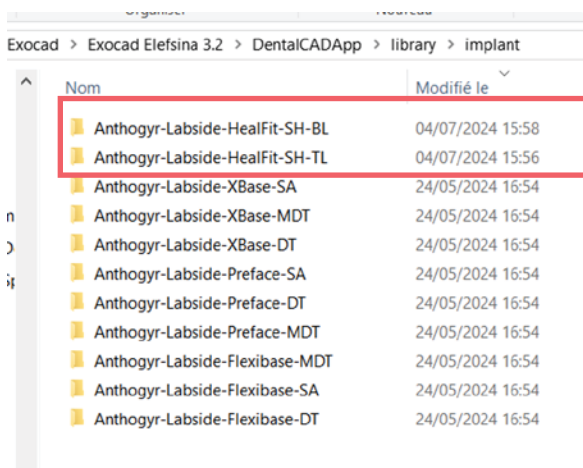

B. 3SHAPE

Veillez à sélectionner la bibliothèque compatible avec la version de votre logiciel. Lors du téléchargement de la bibliothèque Healfit® SH depuis notre site web, veuillez **sélectionner le filtre correspondant à votre version de 3Shape**. Par exemple, le filtre « 2023 » pour 3Shape version 2023.

Remarque :

Si vous mettez à jour la bibliothèque « Anthogyr Labside Healfit® SH BL », veillez à supprimer tous les fichiers de la bibliothèque « Healfit® SH BL » précédente.


Si vous mettez à jour la bibliothèque « Anthogyr Labside Healfit® SH TL », veillez à supprimer tous les fichiers de la bibliothèque « Healfit® SH TL » précédente.

INSTALLATION

Dézippez le fichier zip selon la version 3Shape :

| Nom du fichier zip : | Dossiers qu'il contient : |
|---|--|
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_3Shape_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr_Labside_HealfitSH_BL_3Shape_VX.XX.XX.dme README_Healfit_SH_manual_link.pdf |
| Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_3Shape_VX.XX.XX.zip | <ul style="list-style-type: none"> Anthogyr_Labside_HealfitSH_TL_3Shape_VX.XX.XX.dme README_Healfit_SH_manual_link.pdf |

- Ouvrez le panneau de commande 3Shape Dental System.
- Allez dans Import/Export :

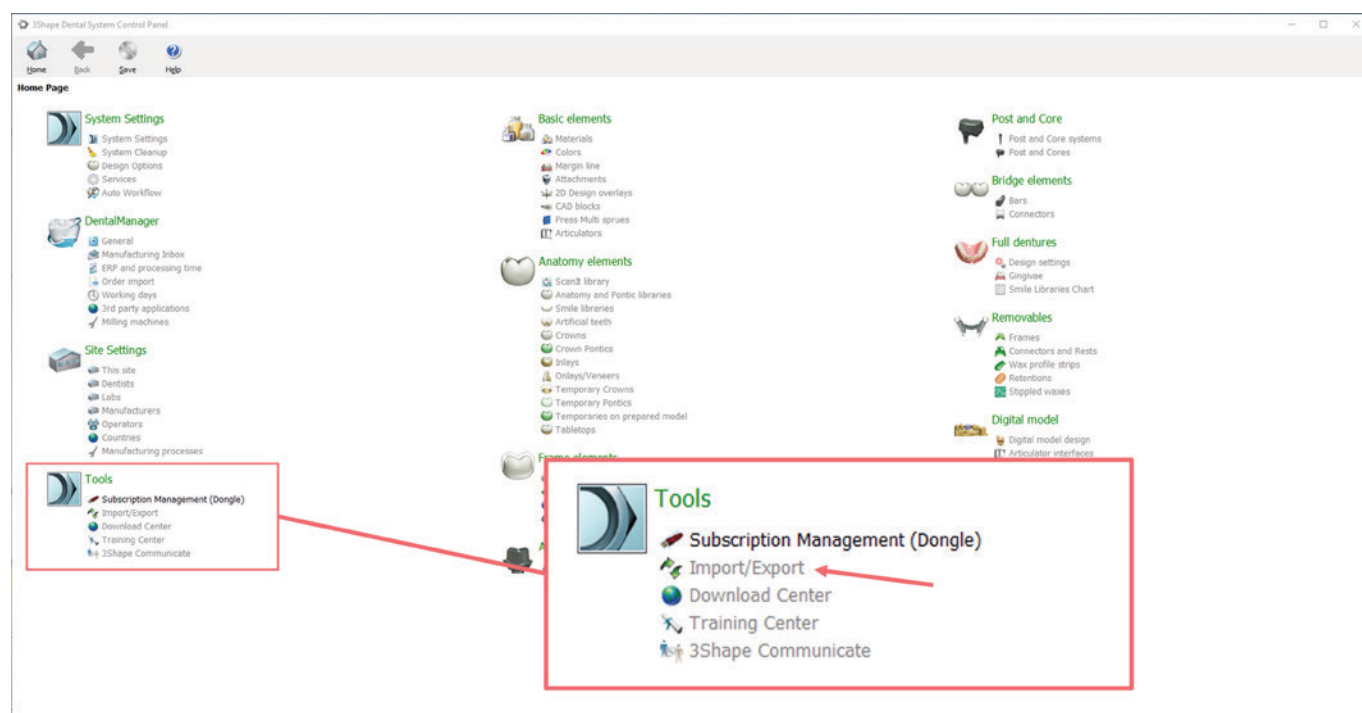

- Importez le fichier .dme : Cliquez sur « Import materials » et sélectionnez le fichier .dme.



- Enregistrez, puis fermez le panneau de commande.
- Redémarrez le système CAD dentaire.

C. DENTALWINGS / CARES


Remarque :

Si vous disposez d'une « licence à vie », veuillez contacter votre revendeur.

Les bibliothèques DentalWings et CARES® Visual sont mises à jour directement depuis le logiciel :

Ouvrez le logiciel Straumann Dental Desktop et cliquez sur « Update ».

Des mises à jour sont détaillées dans la colonne de droite.

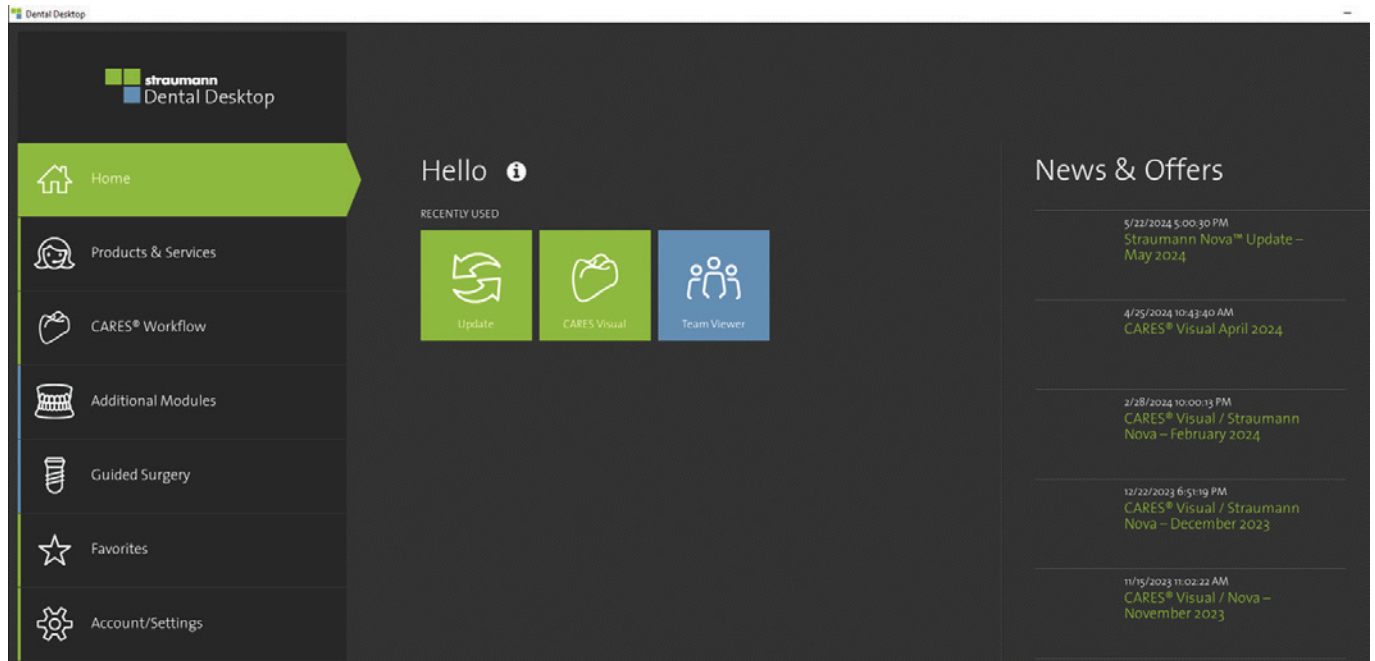


2. Structure des bibliothèques CAD


A. EXOCAD

Deux bibliothèques différentes : Healfit® SH BL et Healfit® SH TL.

- Veuillez sélectionner la bibliothèque correspondant à la Healfit® SH en bouche.

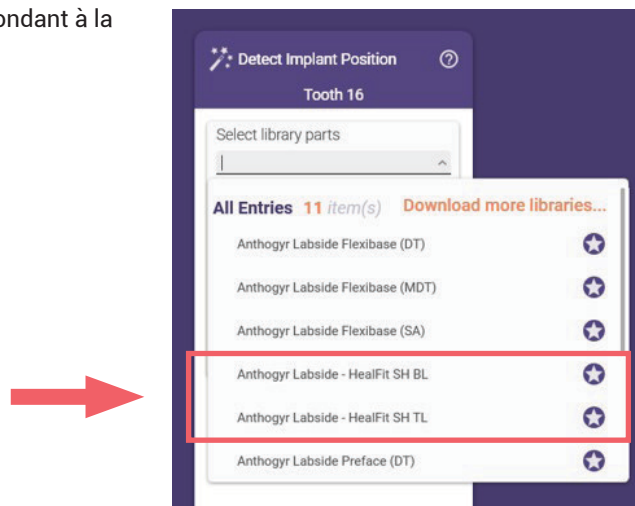

- Au deuxième niveau, sélectionnez la référence Healfit® SH implantée et le type de restauration sur pilier désiré : Flexibase®, X-Base® avec fût droit, X-Base® avec Accès Angulé ou PreFace.

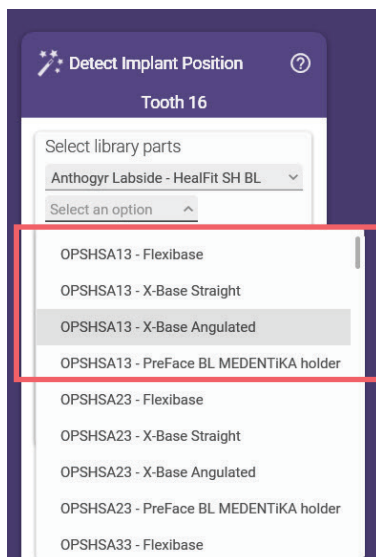

Exemple de type de restauration sur pilier pour une vis de cicatrisation OPSHSA13

- Au dernier niveau, sélectionnez le pilier désiré pour la restauration. Pour plus de détails, voir les exemples ci-après.

ZOOM SUR LA HEALFIT® SH BL


La bibliothèque est divisée selon la référence Healfit® SH, puis selon la gamme d'embase titane. Consultez les exemples ci-dessous :

Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour Flexibase®

Structure sur toutes les versions Exocad

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec Flexibase®.

Dans cet exemple, la Flexibase® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSA13 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les FlexiBase® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

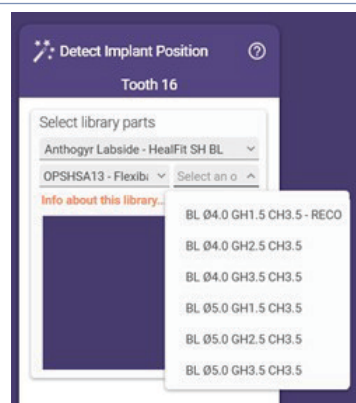


Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour X-Base® avec fût droit

Structure sur toutes les versions Exocad

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec X-Base® (puits de vis droit uniquement).

Dans cet exemple, la X-Base® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSB23 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

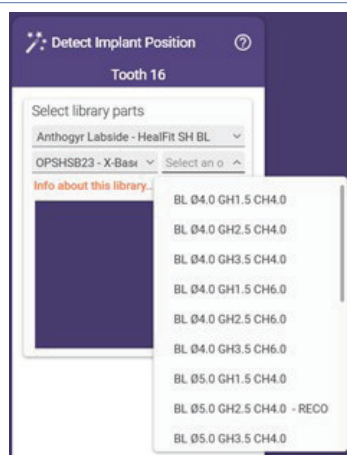


Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour X-Base® avec Accès Angulé

Structure pour Exocad Rijeka et versions antérieures

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).

Dans cet exemple, la X-Base® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSC13 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

Seules les angulations de 10°, 15°, 20° et 25° sont disponibles.

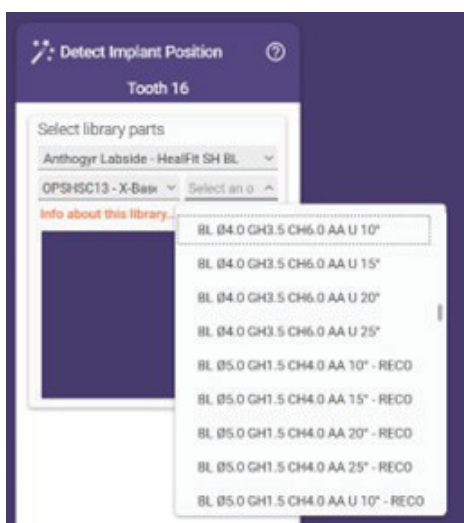


Structure pour Exocad Elefsina et versions ultérieures

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).

Dans cet exemple, la X-Base® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSC13 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

Toutes les angulations de 0° à 25° sont disponibles.

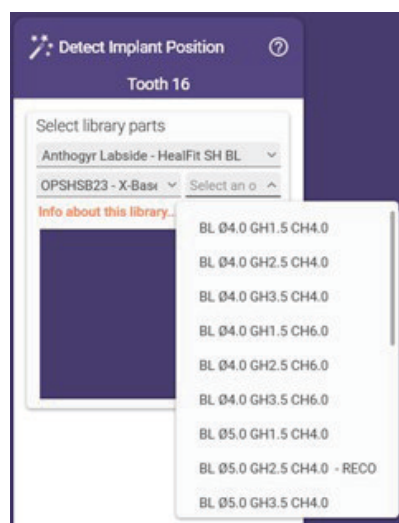


Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour PreFace BL MEDENTIKA

Structure sur toutes les versions Exocad

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec les piliers PreFace BL Medentika.

Dans cet exemple, le PreFace qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHA23 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de tous les piliers PreFace recommandés comporte le suffixe « RECO ».

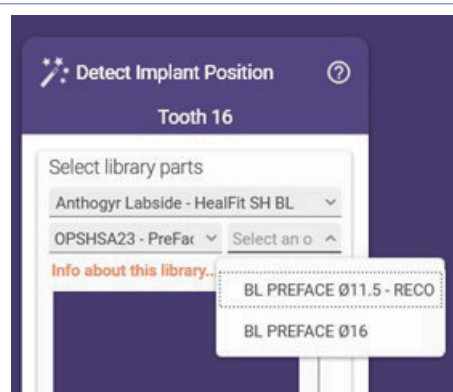


ZOOM SUR LA HEALFIT® SH TL

Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour Flexibase®

Structure sur toutes les versions Exocad


Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec Flexibase®.

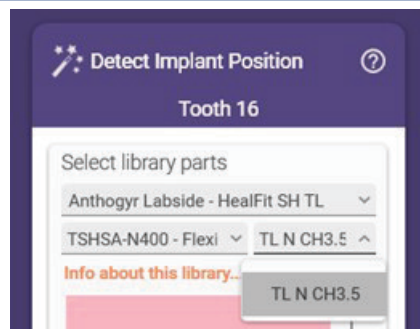

Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour X-Base® avec fût droit

Structure sur toutes les versions Exocad

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec X-Base® (puits de vis droit uniquement).

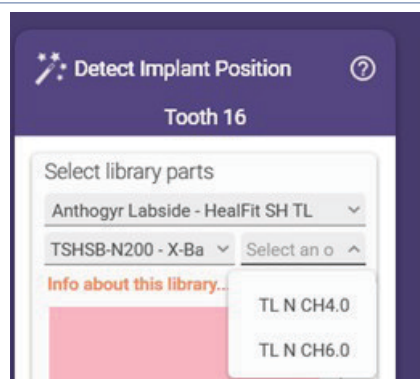

Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour X-Base® avec Accès Angulé

Structure pour Exocad Rijeka et versions antérieures



Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).

Seules les angulations de 10°, 15°, 20° et 25° sont disponibles.

Structure pour Exocad Elefsina et versions ultérieures

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).


Toutes les angulations de 0° à 25° sont disponibles.

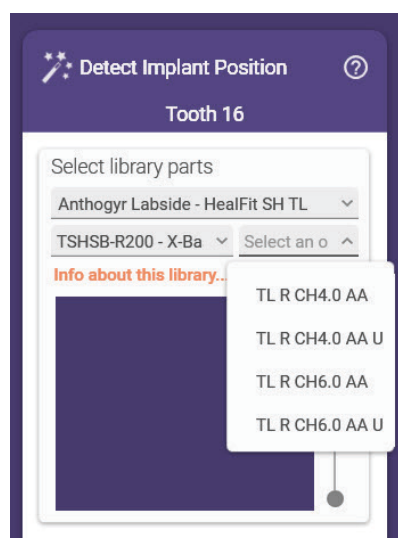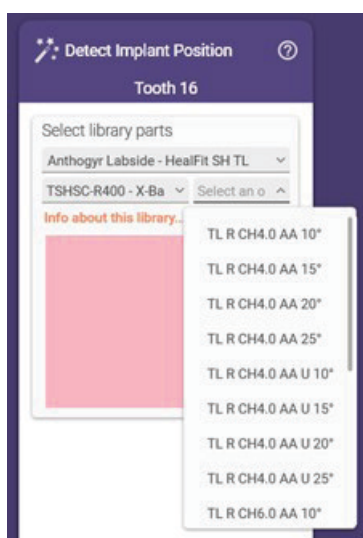

Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour PreFace TL MEDENTIKA

Structure sur toutes les versions Exocad


Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec les piliers PreFace TL Medentika.

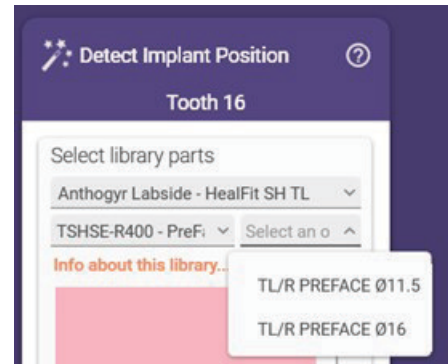


B. 3SHAPE

Deux bibliothèques différentes sont disponibles : Healfit® SH BL et Healfit® SH TL

- Veuillez sélectionner la bibliothèque correspondant à la Healfit® SH en bouche.

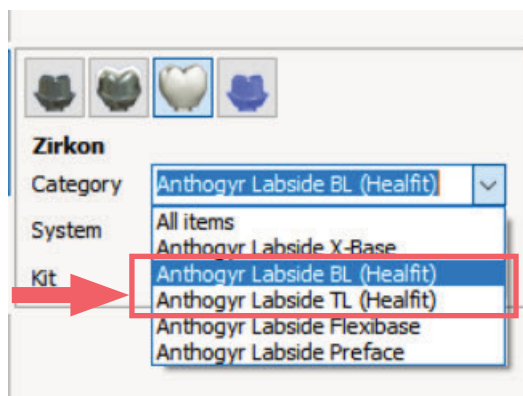

- Au deuxième niveau, sélectionnez la référence Healfit® SH implantée et le type de restauration sur pilier désiré : Flexibase®, X-Base® avec fût droit, X-Base® avec Accès Angulé ou PreFace.

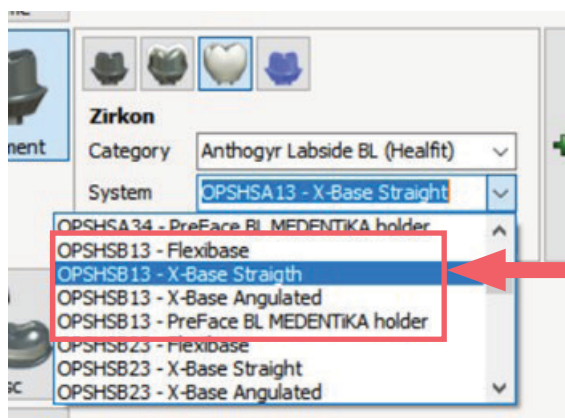

Exemple de type de restauration sur pilier pour une vis de cicatrisation OPSHSB13


- Au dernier niveau, sélectionnez le pilier désiré pour la restauration. Pour plus de détails, voir les exemples ci-après.

ZOOM SUR LA HEALFIT® SH BL

Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour Flexibase®

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec Flexibase®.

Dans cet exemple, la Flexibase® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSA13 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les FlexiBase® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

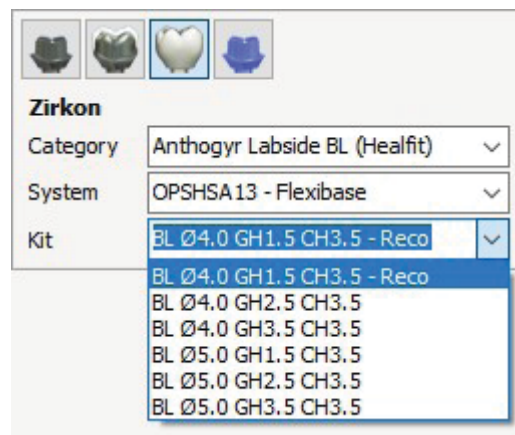

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▾

System: OPSHSA13 - Flexibase ▾


Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH3.5 - Reco ▾

- BL Ø4.0 GH1.5 CH3.5 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH3.5
- BL Ø4.0 GH3.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH1.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH2.5 CH3.5
- BL Ø5.0 GH3.5 CH3.5

Exemple de la structure avec Healfit® SH BL pour X-Base® avec fût droit

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec X-Base® (puits de vis droit uniquement).

Dans cet exemple, la X-Base® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSB23 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

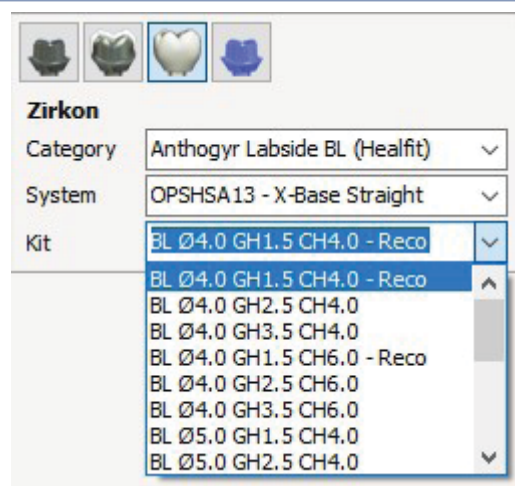

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▾

System: OPSHSA13 - X-Base Straight ▾


Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 - Reco ▾

- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0
- BL Ø4.0 GH3.5 CH4.0
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0
- BL Ø4.0 GH3.5 CH6.0
- BL Ø5.0 GH1.5 CH4.0
- BL Ø5.0 GH2.5 CH4.0

Exemple de la structure pour Healfit® SH BL pour X-Base avec Accès Angulé

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).

Dans cet exemple, la X-Base® qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHSC13 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

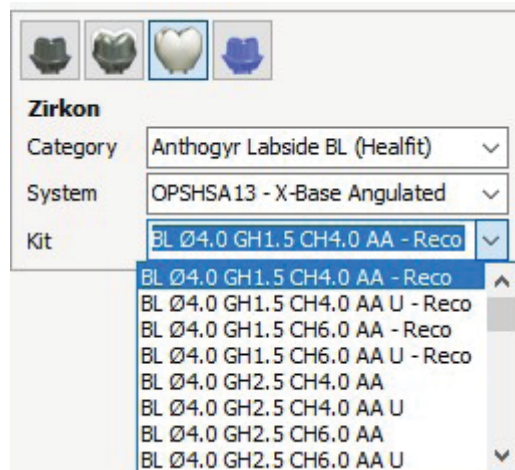

Zirkon

Category: Anthogyr Labside BL (Healfit) ▾

System: OPSHSA13 - X-Base Angulated ▾


Kit: BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA - Reco ▾

- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH4.0 AA U - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 AA - Reco
- BL Ø4.0 GH1.5 CH6.0 AA U - Reco
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0 AA
- BL Ø4.0 GH2.5 CH4.0 AA U
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0 AA
- BL Ø4.0 GH2.5 CH6.0 AA U

Exemple de la structure pour Healfit® SH BL pour PreFace BL MEDENTIKA

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH BL compatible avec les piliers PreFace BL Medentika.


Dans cet exemple, le PreFace qu'il est recommandé d'utiliser avec la vis de cicatrisation OPSHA23 est dénommée « RECO ». Pour toutes les autres références Healfit® SH BL, le nom de toutes les X-Base® recommandées comporte le suffixe « RECO ».

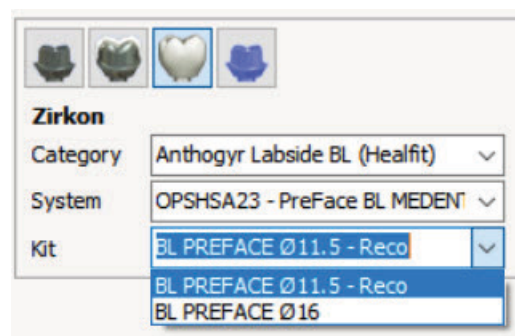

ZOOM SUR LA HEALFIT® SH TL


Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour Flexibase®

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec Flexibase®.

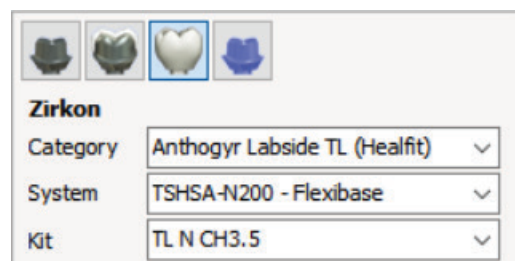


Exemple de structure pour X-Base® avec fût droit

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec X-Base® (puits de vis droit uniquement).

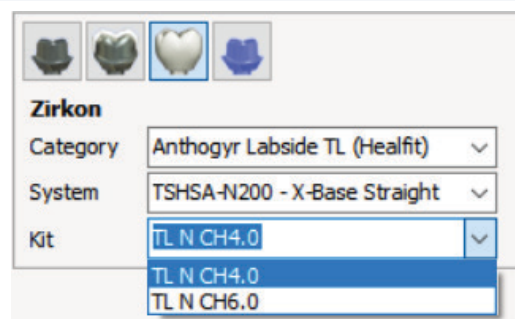


Exemple de la structure pour Healfit® SH TL pour X-Base avec Accès Angulé

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec X-Base® (puits de vis angulé uniquement, en version standard et version U).

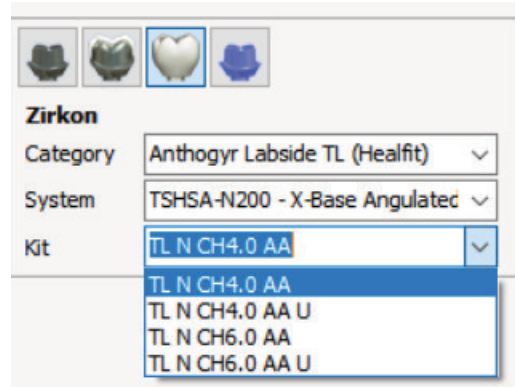

Exemple de la structure avec Healfit® SH TL pour PreFace TL MEDENTIKA

Ces niveaux sont destinés à la gamme Healfit® SH TL compatible avec les piliers PreFace TL Medentika.

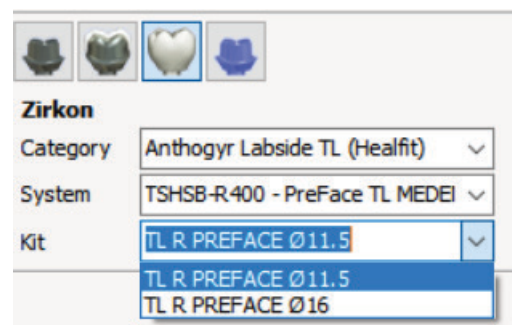


Pour de plus amples informations sur les spécifications relatives aux embases X-Base®, veuillez consulter le manuel d'utilisation LABSIDE.

C. DENTALWINGS / CARES

Les pièces Healfit® SH ont été ajoutées au menu des scanbodies.

Uniquement les pièces HealFit® SH compatibles avec l'implant apparaîtront. Consultez l'exemple ci-dessous :

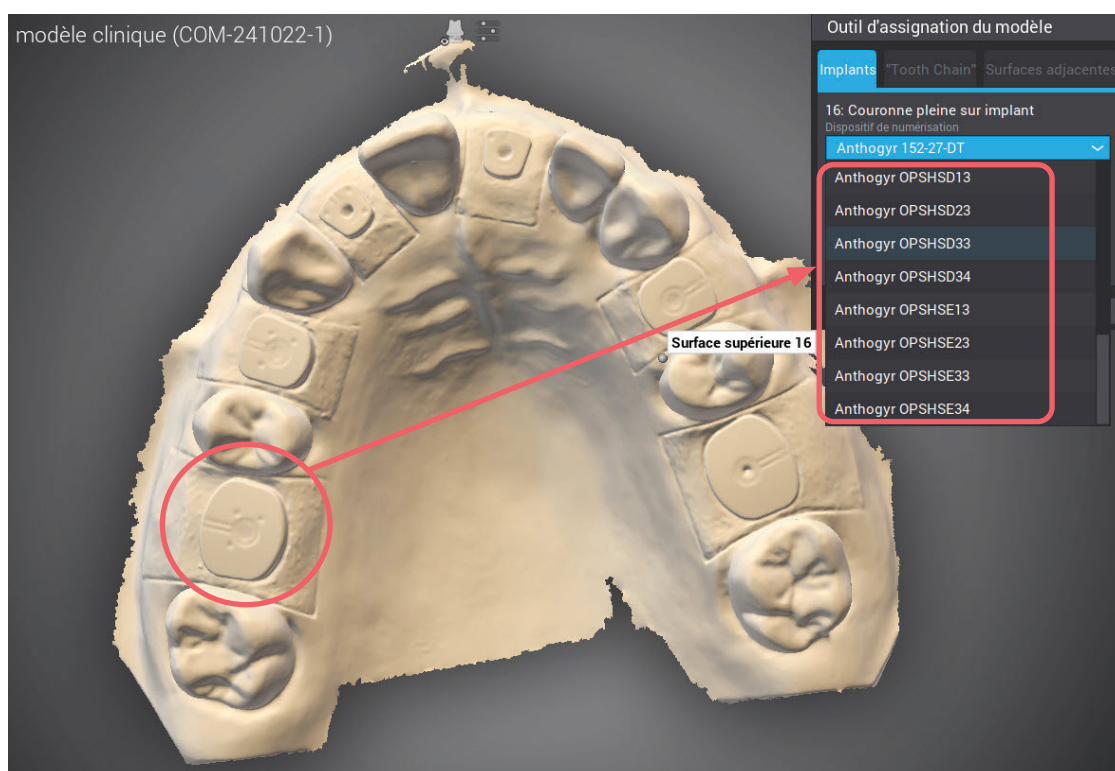


Pour de plus amples informations sur la structure et les spécifications relatives aux embases X-Base, veuillez consulter le manuel d'utilisation LABSIDE.

ZOOM SUR LE CHOIX DE SCANBODY :


Les références Healfit® SH apparaissent selon la compatibilité implantaire :

Exemple avec implant Axiom® BL :

Pièces Healfit® SH compatibles

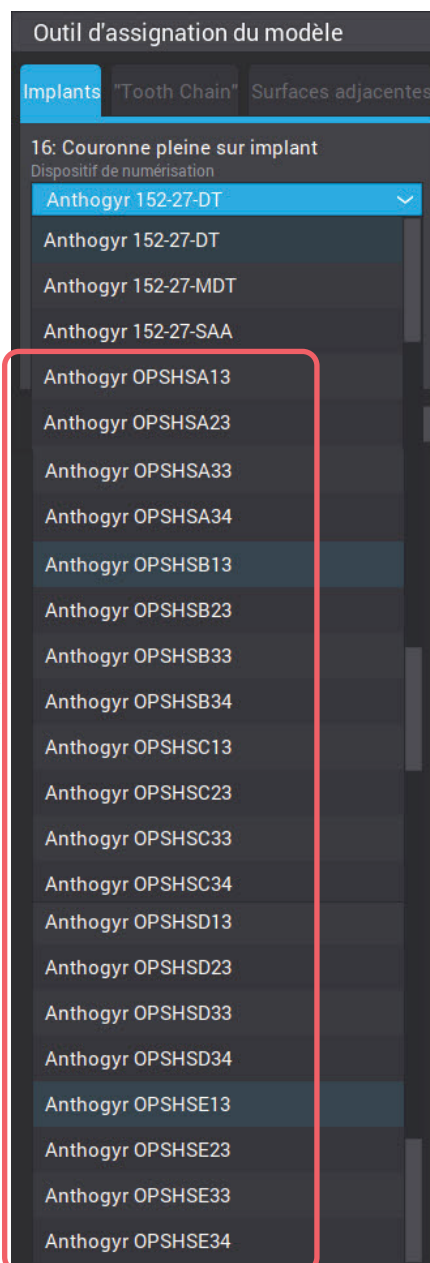


Exemple avec implant Axiom® TL plateforme N :

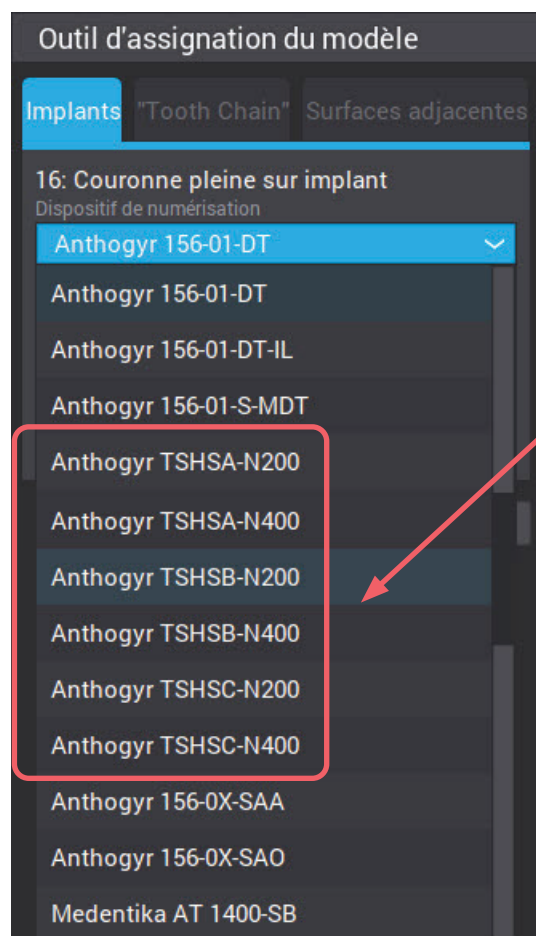


Pièces
Healfit® SH
compatibles

Exemple avec implant Axiom® TL plateforme R :

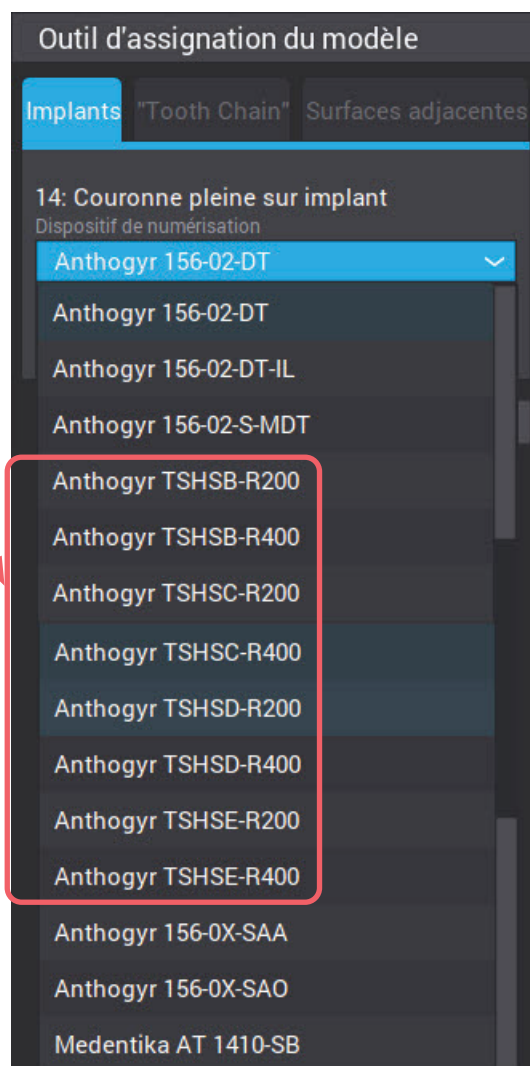

3. Copie du profil gingival

Les fichiers 3D des profils d'émergence des HealFit® SH sont disponibles sur votre site Web, à la page des bibliothèques Labside sous le nom : **Anthogyr Labside Healfit SH – Emergence Profile 3D-Files**.

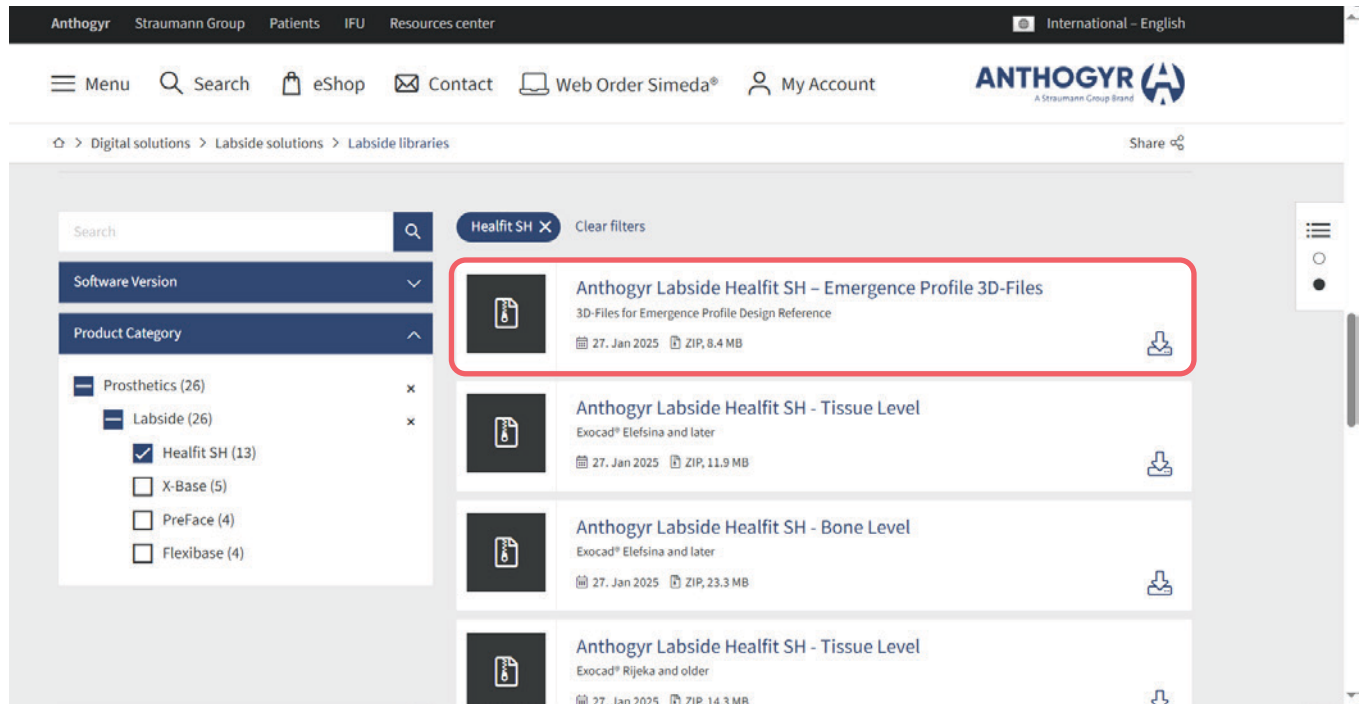


- Ces fichiers peuvent être utilisés avec la bibliothèque Exocad pour la conception semi-automatique du profil gingival (option 1).
- Ces fichiers peuvent être utilisés avec la bibliothèque CARES et Dental Wings pour la conception manuelle du profil gingival.

A. EXOCAD

Il y a deux manières de concevoir le profil gingival de la prothèse en fonction de la forme de la Healfit® SH choisie :

Option 1 : Méthode semi-automatique avec fichier supplémentaire

1. Remplissez le formulaire de commande comme d'habitude : client, nom, technicien, etc.

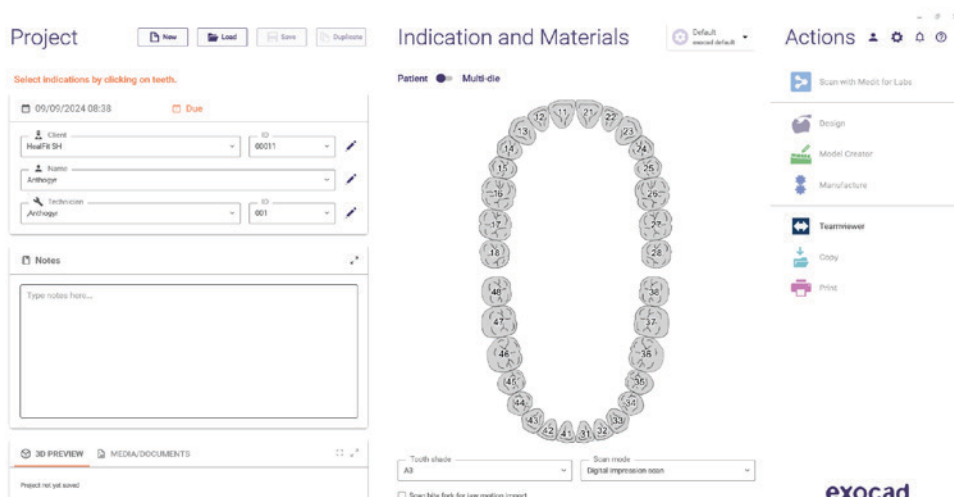


2. Choisissez la dent :

- Dans la fenêtre suivante, choisissez le type de restauration, le matériau désiré et les autres paramètres comme dans l'image ci-après.

Il est important de sélectionner « **Pre-op model** » (Modèle pré-op) dans la section « Additional Scan » (Scan supplémentaire), car cela permet au logiciel d'ajuster la forme gingivale à la prothèse en fonction de la HealFit® SH sélectionnée.



Les étapes à suivre sont les suivantes : (a) Type de couronne > (b) Material (Matériau) > (c) Shade (Teinte) > (d) Screw-retained (Transvissé) > (e) Pre-op model (Modèle pré-op) > (f) Scan Body in Main Scan (Scanbody dans scan principal).

Après avoir renseigné tous les paramètres, cliquez sur OK.

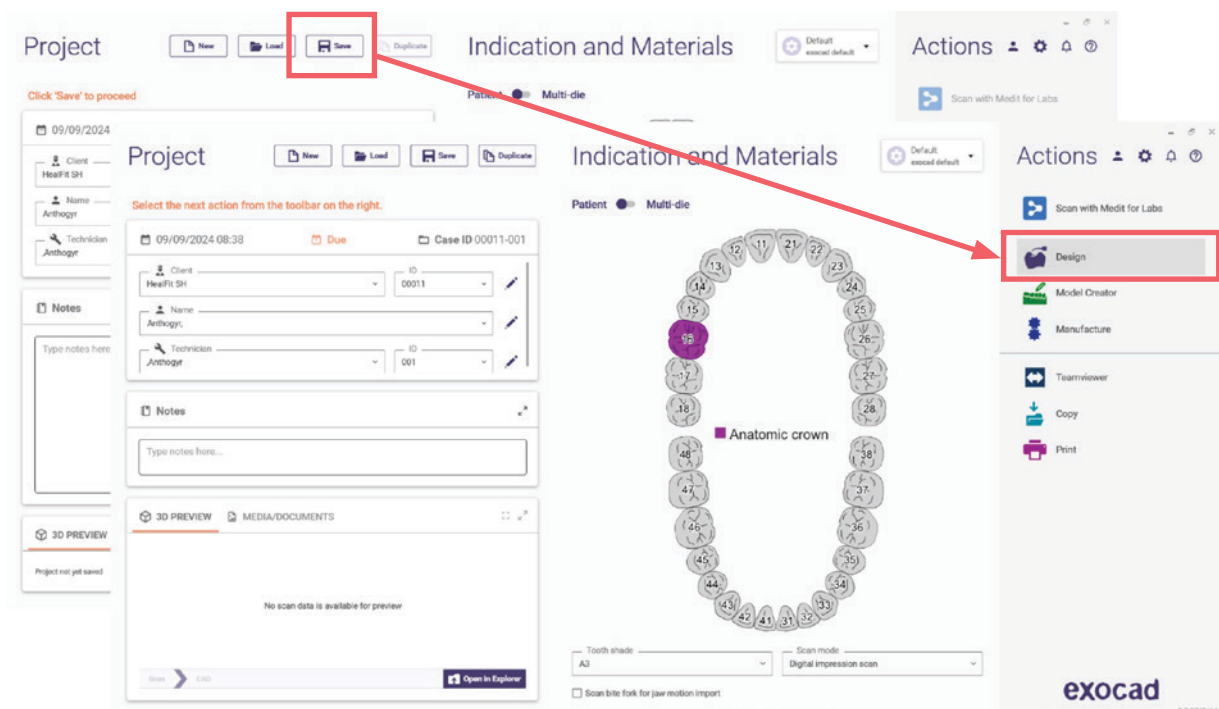


Remarque : avant de passer aux étapes suivantes, il est nécessaire d'identifier la Healfit® SH sur le fichier scan.


3. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur Design (Conception).
4. Dans les fenêtres suivantes :
 - a. Première fenêtre : Sélectionnez le fichier scan (avec Healfit® SH comme scanbody).
 - b. Deuxième fenêtre : Sélectionnez le fichier STL de la Healfit® SH.

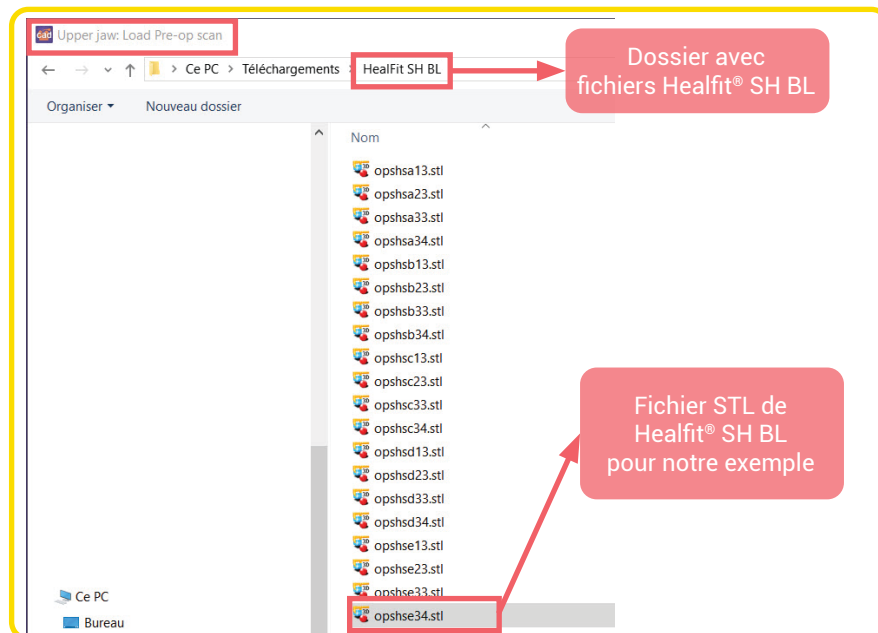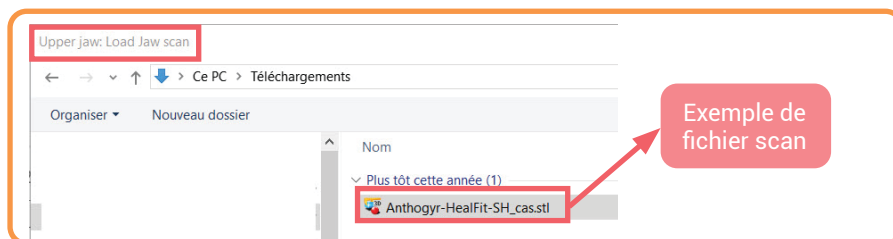

5. Ajustez l'orientation du scan comme d'habitude.
6. Alignez le fichier scan et le fichier STL Healfit® SH (fichier pré-op).
 - a. Réalisez un préalignement manuel.
 - b. Puis réalisez l'alignement en cliquant sur 3 points. Voir l'image ci-après.


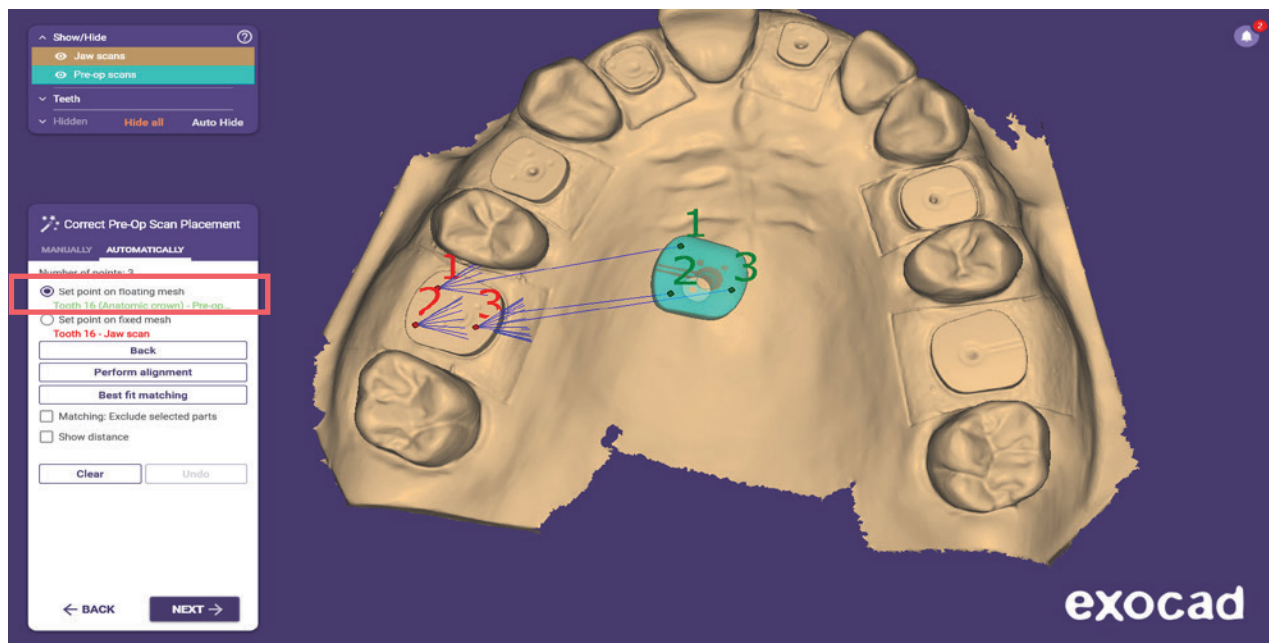


- c. Cliquez sur « Perform alignment » (Effectuer l'alignement).
- d. Cliquez sur la meilleure correspondance tout en appuyant sur CTRL. Cela vous permettra d'utiliser la barre de couleur pour vérifier que l'alignement est correct. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Cut view (Vue de coupe) pour vérifier l'alignement. Voir l'image ci-après.

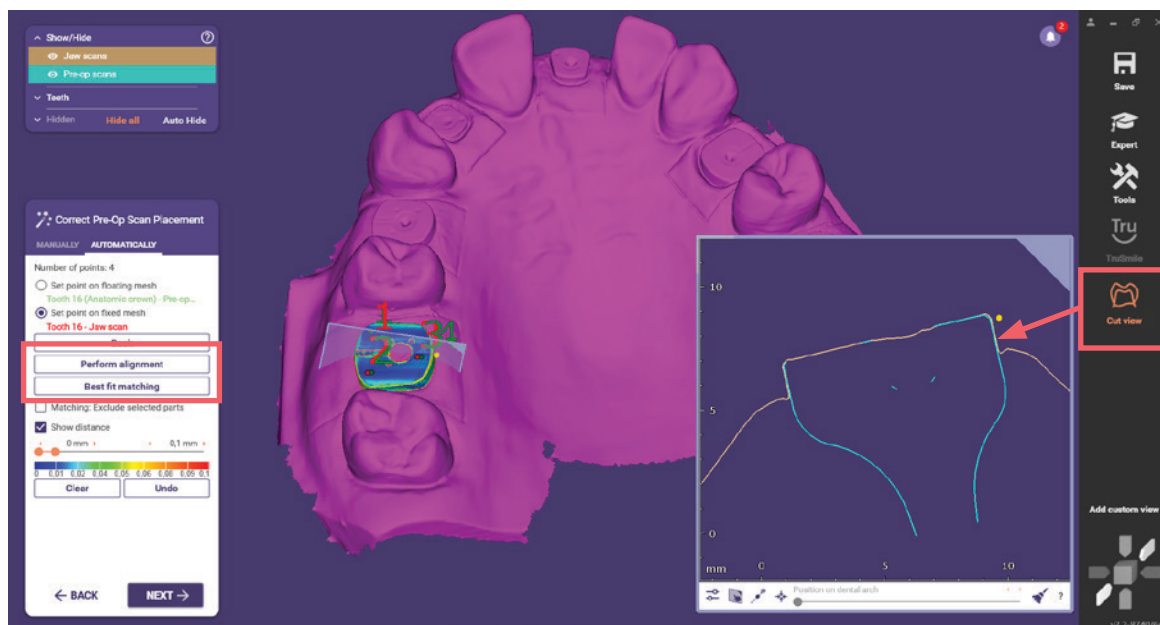

7. Sélectionnez la bibliothèque appropriée.

- a. Une fois la bibliothèque sélectionnée, coupez la HealFit® SH (scanbody) en faisant glisser le curseur. Voir l'image ci-après.

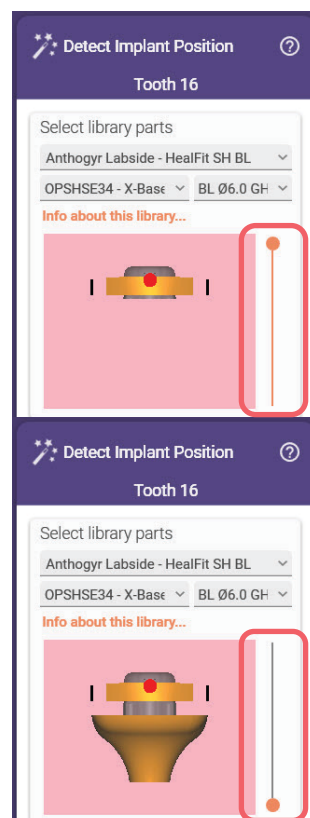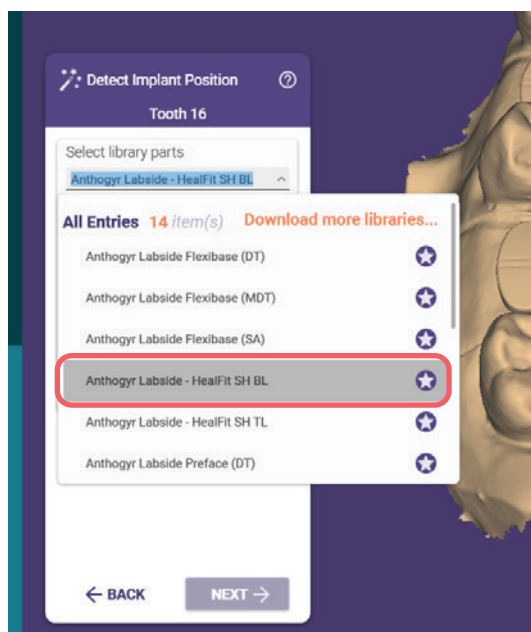


b. Poursuivez l'alignement.


Vérifiez toujours que l'alignement est correct en appuyant sur CTRL lors du recalage. Voir les exemples dans les images ci-après :



8. Définissez le profil d'émergence.
9. Placez la dent modèle.
10. Dans la section Abutment Bottoms (Bases des piliers), réduisez la base (en gris ci-après) jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pour obtenir un meilleur résultat, il est possible de paramétrer la valeur sur 0 mm.
Veuillez noter que vous devez ajuster les points de contact et la forme **avant tout ajustement de la partie gingivale**.

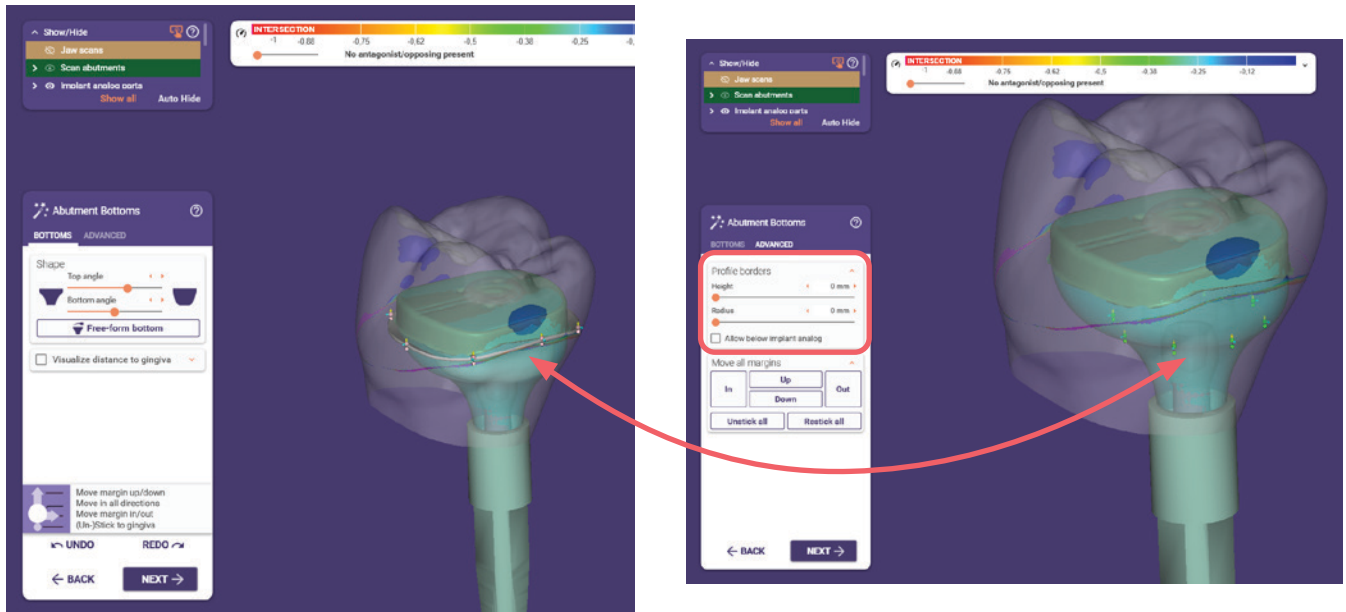


11. Puis sélectionnez le mode Expert
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option **Adapt to Pre-Op Scan** (Adapter au modèle de situation).

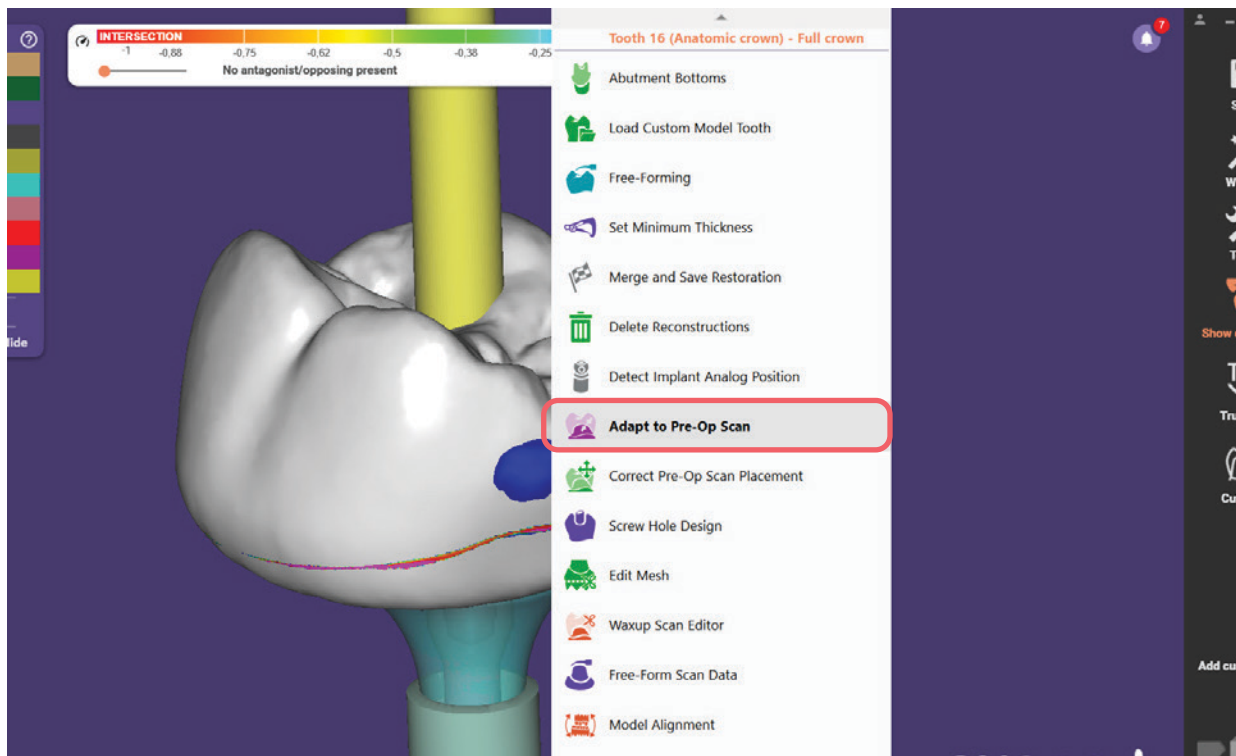


- b. Dans la fenêtre suivante, cochez « Exclude selected parts » (Exclure les parties sélectionnées).
- c. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez toutes les autres parties. Ces parties correspondent au maillage qui **ne sera pas adapté** en fonction de la forme de la Healfit® SH.

Dans l'image ci-après, la zone rouge correspond au maillage qui ne sera pas adapté, la zone orange correspond au maillage à adapter et la zone bleue correspond au fichier de Healfit® SH.

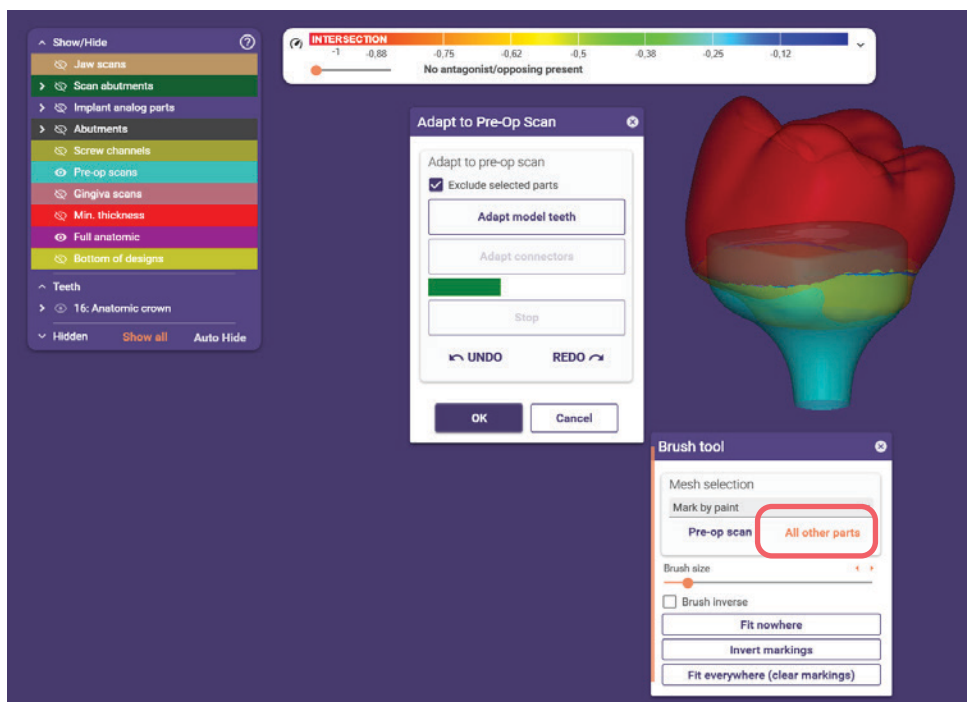


- d. Une fois tous les maillages sélectionnés, cliquez sur « Adapt model teeth » (Adapter les dents modèles). Répétez les étapes c et d si nécessaire.
- N'oubliez pas de vérifier que la forme ajustée est appropriée à l'intégralité du cas (partie gingivale, face médiale et distale, etc.)

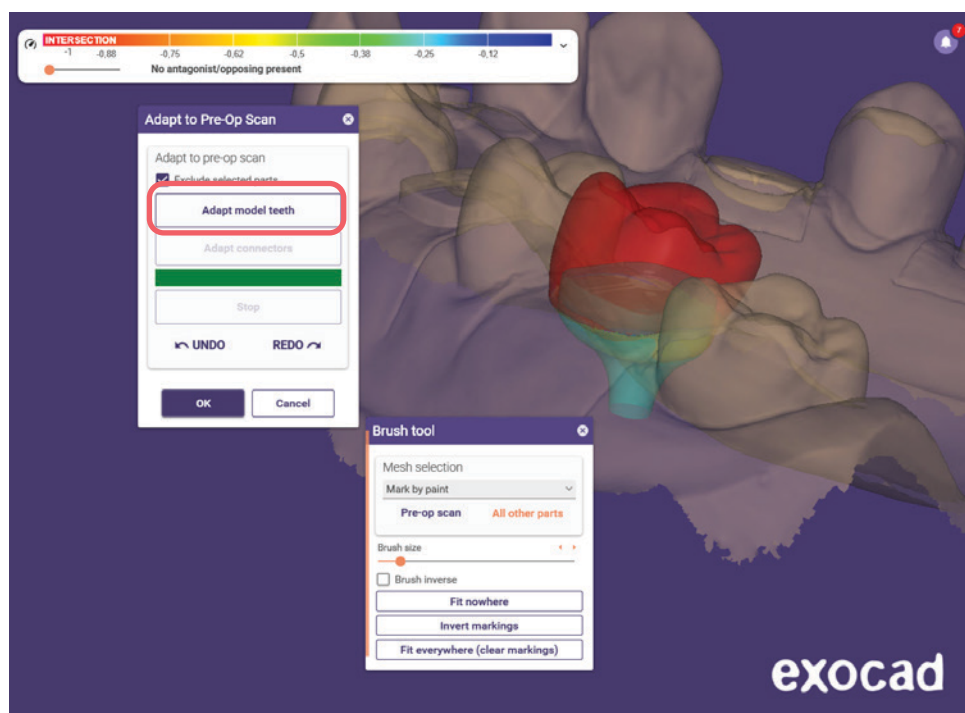

12. Cliquez sur Wizard (Assistant) en haut à droite de la fenêtre, puis dans le module suivant, cliquez sur le module Free-forming (Modelage) et modifiez la prothèse si nécessaire (lissage, coupe des intersections ou autres).
13. Finalisez la conception de la prothèse comme d'habitude.

Option 2 : Méthode manuelle

1. Remplissez le formulaire de commande comme d'habitude : client, nom, technicien, etc.

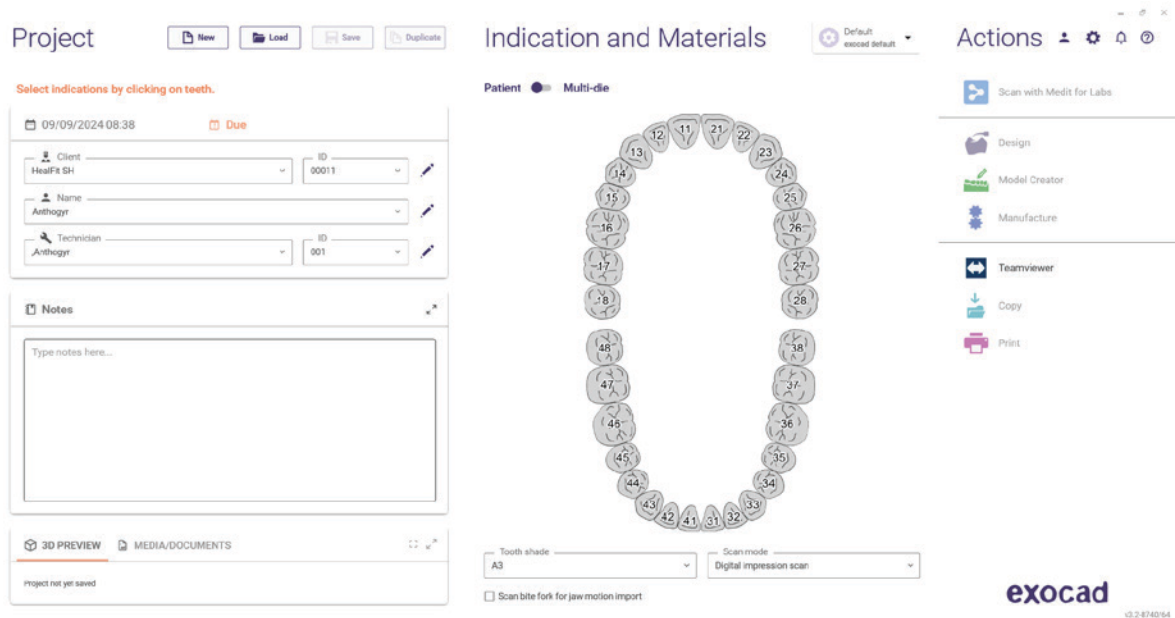



2. Choisissez la dent :

- a. Dans la fenêtre suivante, choisissez le type de restauration, le matériau désiré et les autres paramètres comme dans l'image ci-après.

Les étapes à suivre sont les suivantes : (a) Type de couronne > (b) Material (Matériau) > (c) Shade (Teinte) > (d) Screw-retained (Transvissé) > (e) Scan Body in Main Scan (Scanbody dans scan principal).


Après avoir renseigné tous les paramètres, cliquez sur OK.

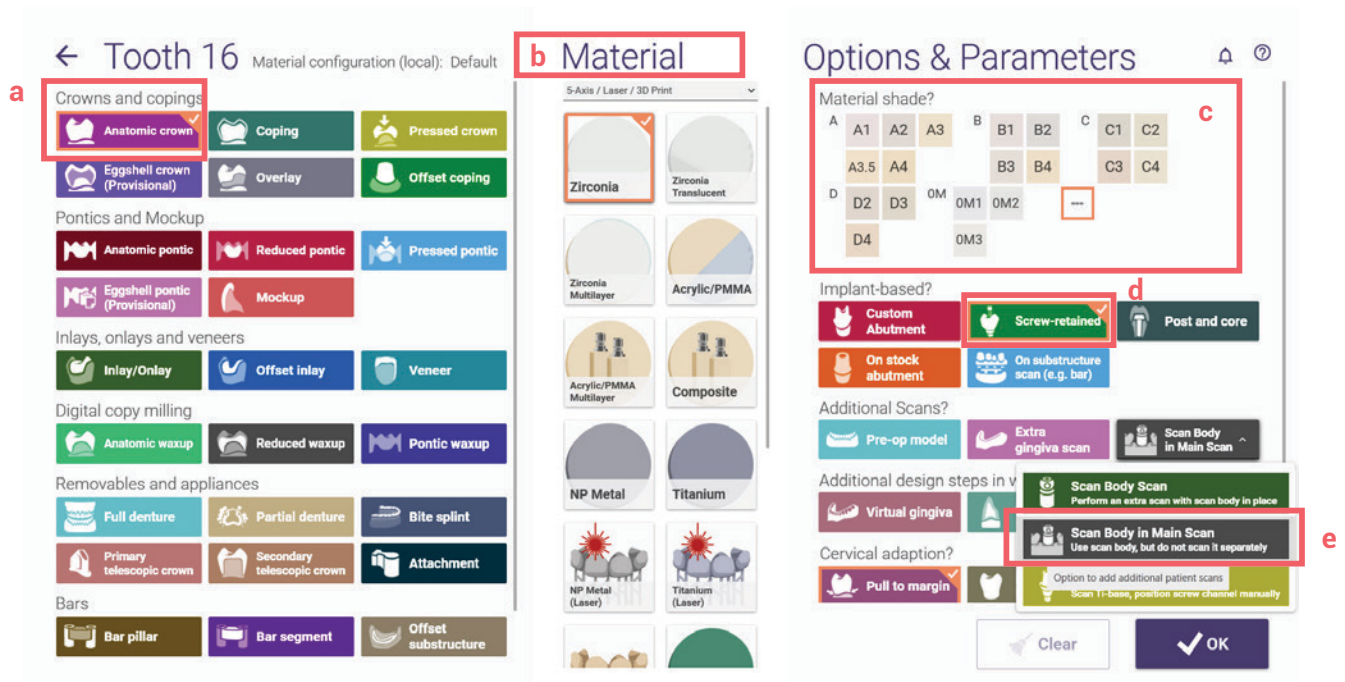

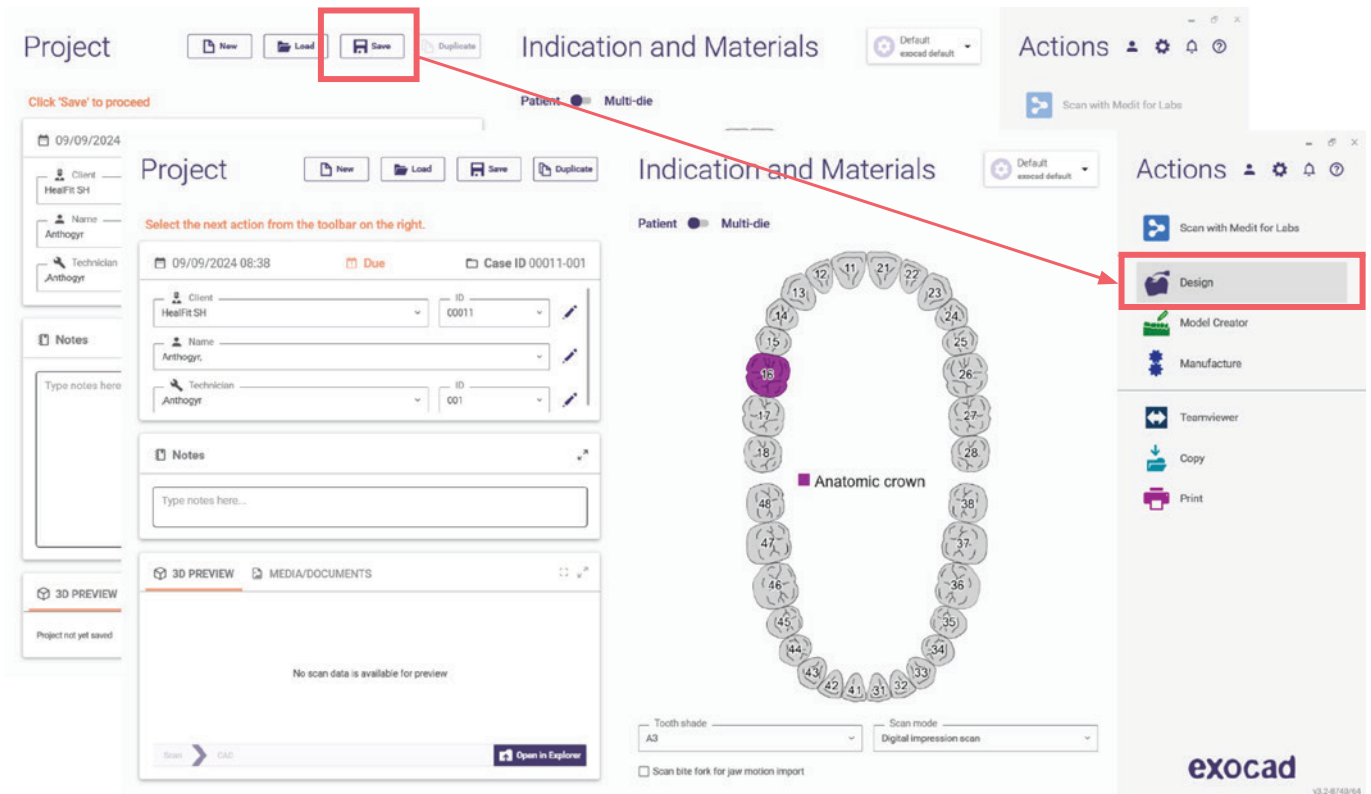



Remarque : avant de passer aux étapes suivantes, il est nécessaire d'identifier la Healfit® SH sur le fichier scan.

3. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur Save (Enregistrer), puis cliquez sur Design (Conception).
4. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez le fichier scan (avec Healfit® SH comme scanbody).

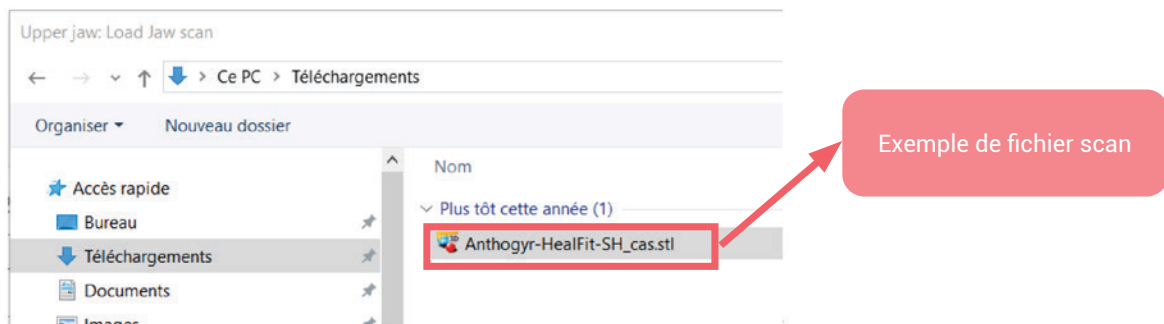


5. Ajustez l'orientation du scan comme d'habitude.

6. Sélectionnez la bibliothèque appropriée.
 - a. Une fois la bibliothèque sélectionnée, coupez la HealFit® SH (scanbody) en faisant glisser le curseur. Voir les images ci-après.

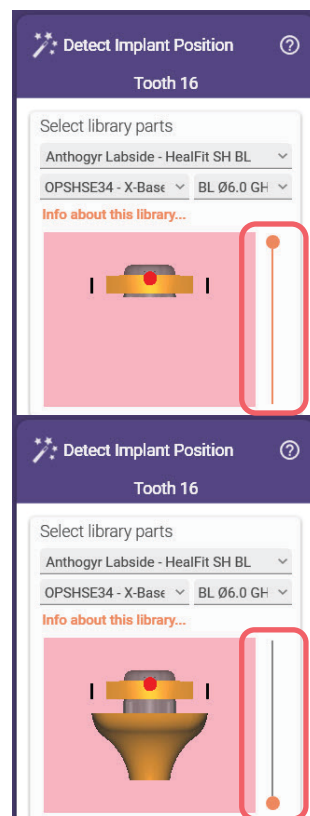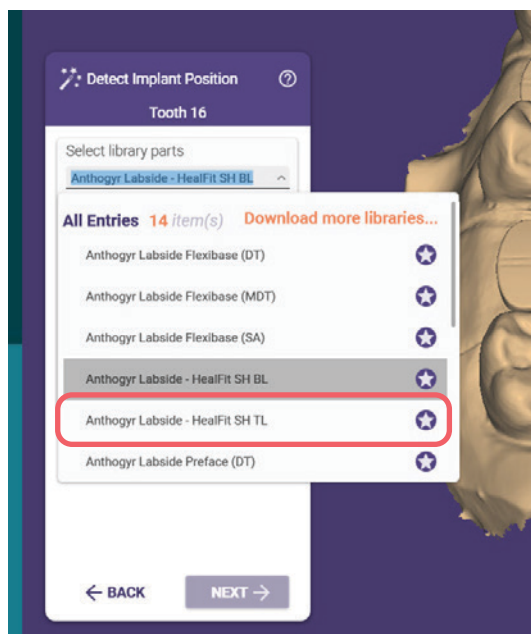


- b. Poursuivez l'alignement.
Vérifiez toujours que l'alignement est correct en appuyant sur CTRL lors du recalage. Voir les exemples dans les images ci-après :

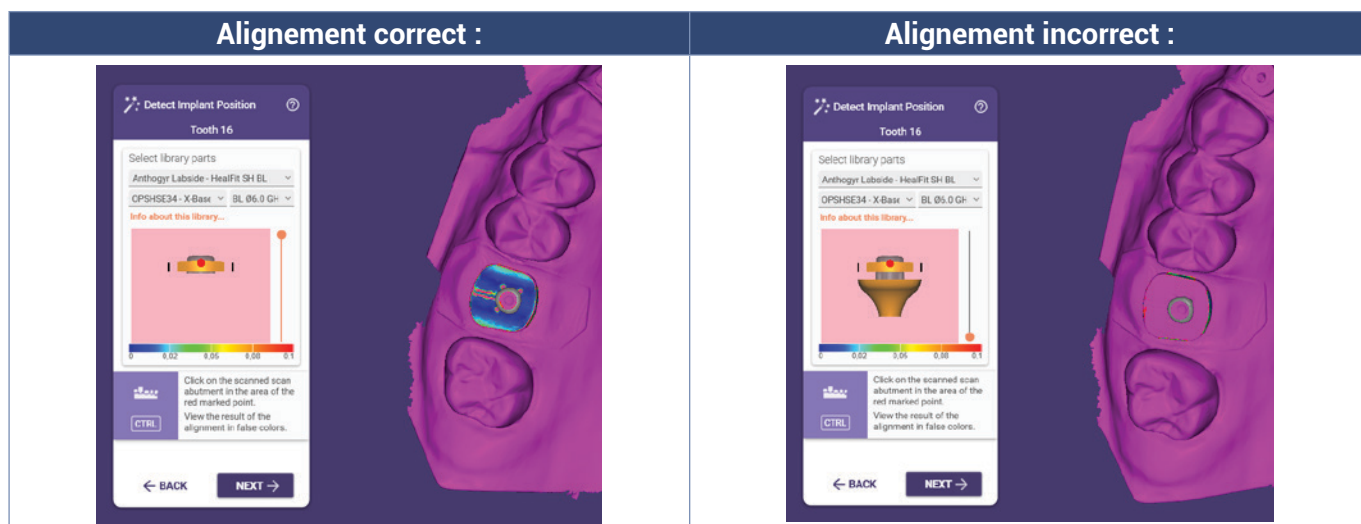


7. Définissez le profil d'émergence.
8. Placez la dent modèle.


9. Dans la section Abutment Bottoms (Bases des piliers), définissez la forme de la Healfit® SH autant que possible (en procédant manuellement).
 - a. Pour ce faire, vous devez afficher le marqueur de numérisation (« Scan marker (geometry) », en orange ci-après). Pour une meilleure visibilité, vous pouvez également masquer le scan de la mâchoire et la couche anatomique complète.

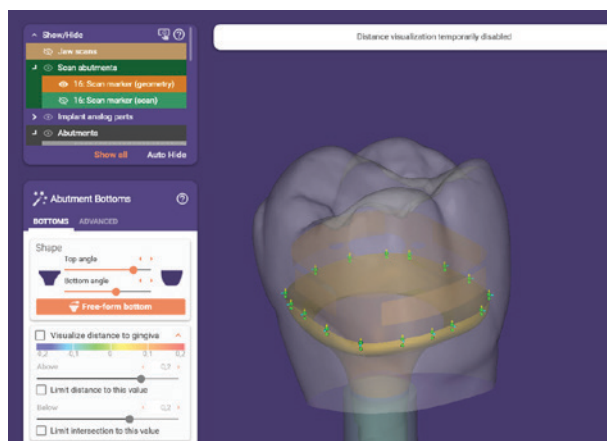

- b. Lorsque le marqueur de numérisation apparaît, vous pouvez placer autant de points que nécessaire pour respecter la forme de la Healfit® SH (vue du haut).

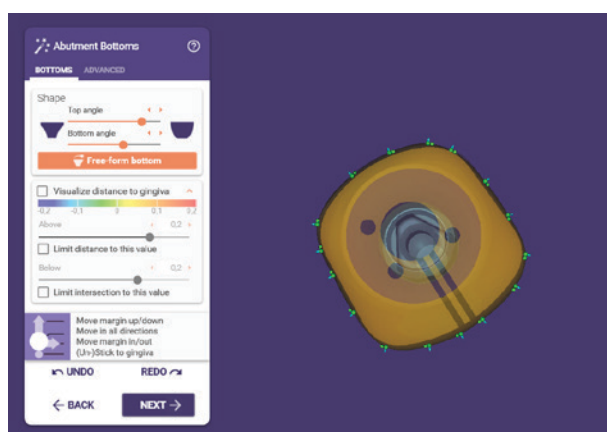

- c. Vous pouvez également modifier les angles supérieurs et inférieurs pour obtenir une forme gingivale similaire à la Healfit® SH et utiliser l'option Free-form bottom (Modelage base) (image de gauche ci-après). Si nécessaire, vous pouvez modifier certaines options dans la section Advanced (Options avancées) (image de droite ci-après).

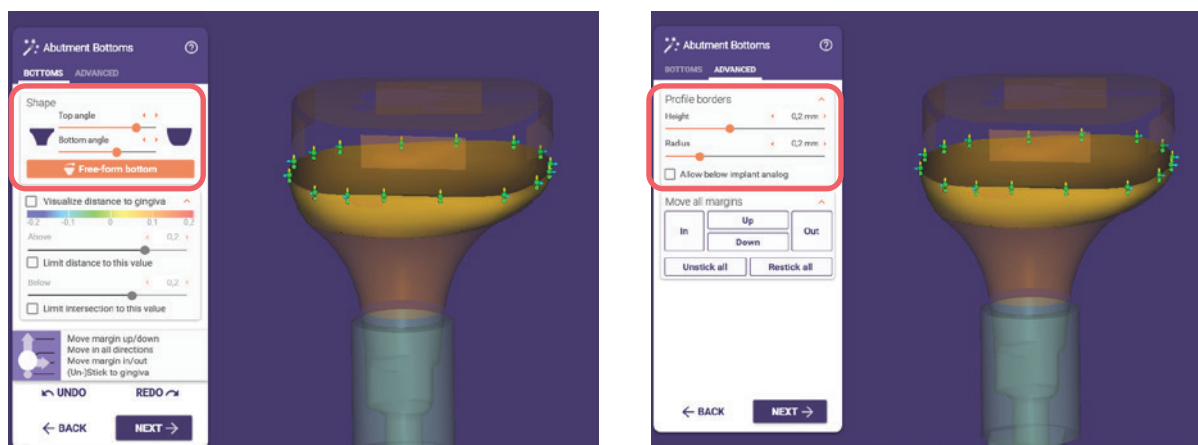


10. Dans le module suivant, cliquez sur le module Free-forming (Modelage) et modifiez la prothèse si nécessaire (lissage, coupe des intersections ou autres).
11. Finalisez la conception de la prothèse comme d'habitude.


B. 3SHAPE

Option 1 : Méthode manuelle


1. Remplissez le formulaire de commande comme d'habitude :
 - a. Numéro de commande, client, informations sur le patient, etc.
 - b. Choisissez la dent ou les dents ainsi que le type de restauration.
 - c. Sélectionnez la bibliothèque appropriée :
 - i. Selon la Healfit® SH en bouche : Healfit® SH BL ou TL ;
 - ii. Selon le type d'embase en titane utilisé pour la prothèse (Flexibase®, X-Base® avec fût droit ou Accès Angulé, PreFace).

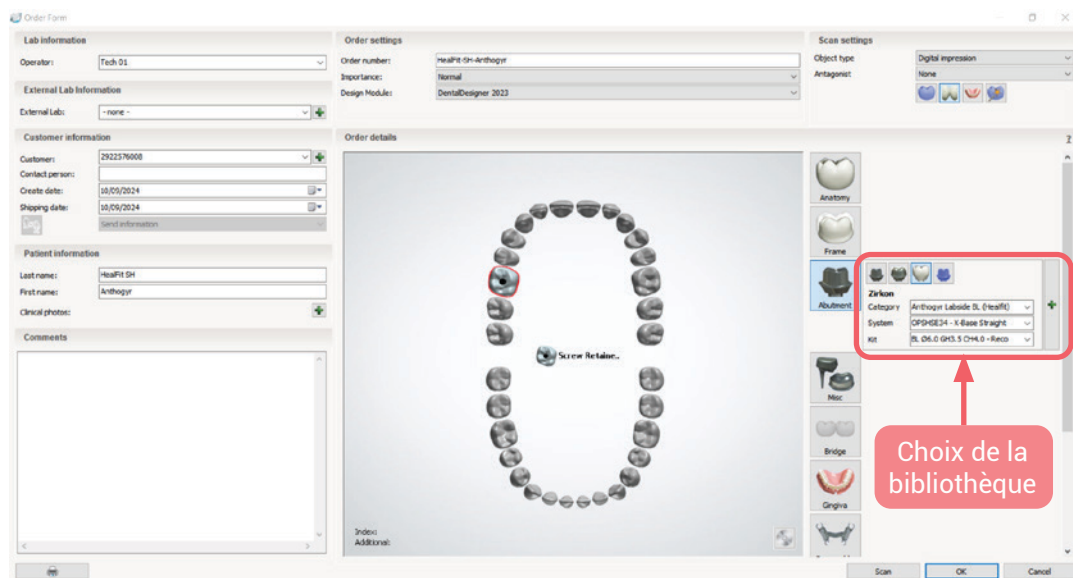

2. Importez le fichier scan.
3. Définissez l'alignement occlusal comme d'habitude et modifiez le fichier scan si nécessaire.
4. Alignez le scanbody ; il s'agit dans ce cas-ci de la Healfit® SH.
Deux méthodes d'alignement sont possibles : à un point ou à trois points.
 - a. Alignement à un point :

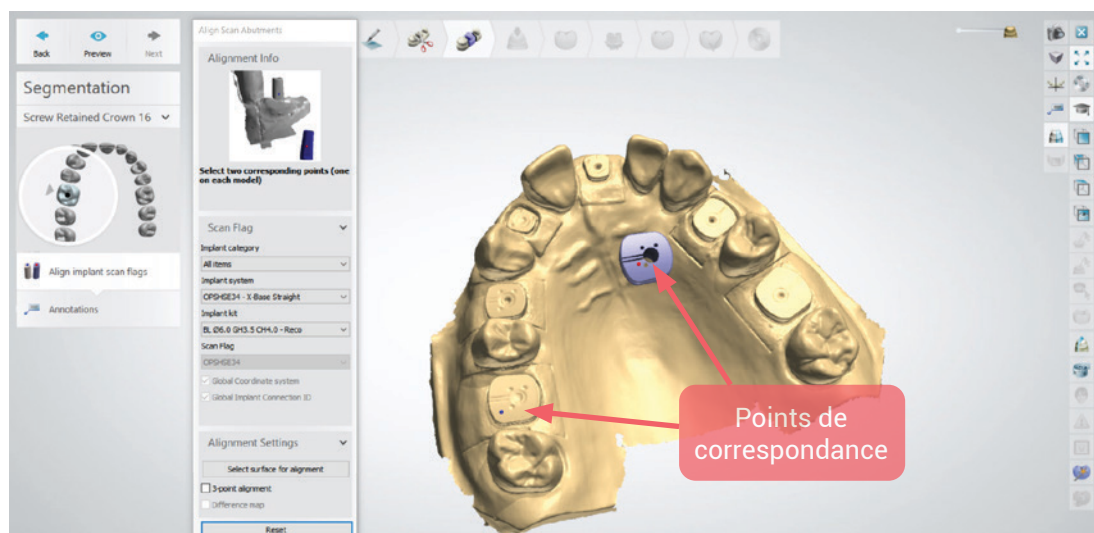


- b. Alignement à trois points : Vous devez cocher la case 3-point alignment (Alignement à 3 points) avant de cliquer sur les points de correspondance dans chaque fichier.

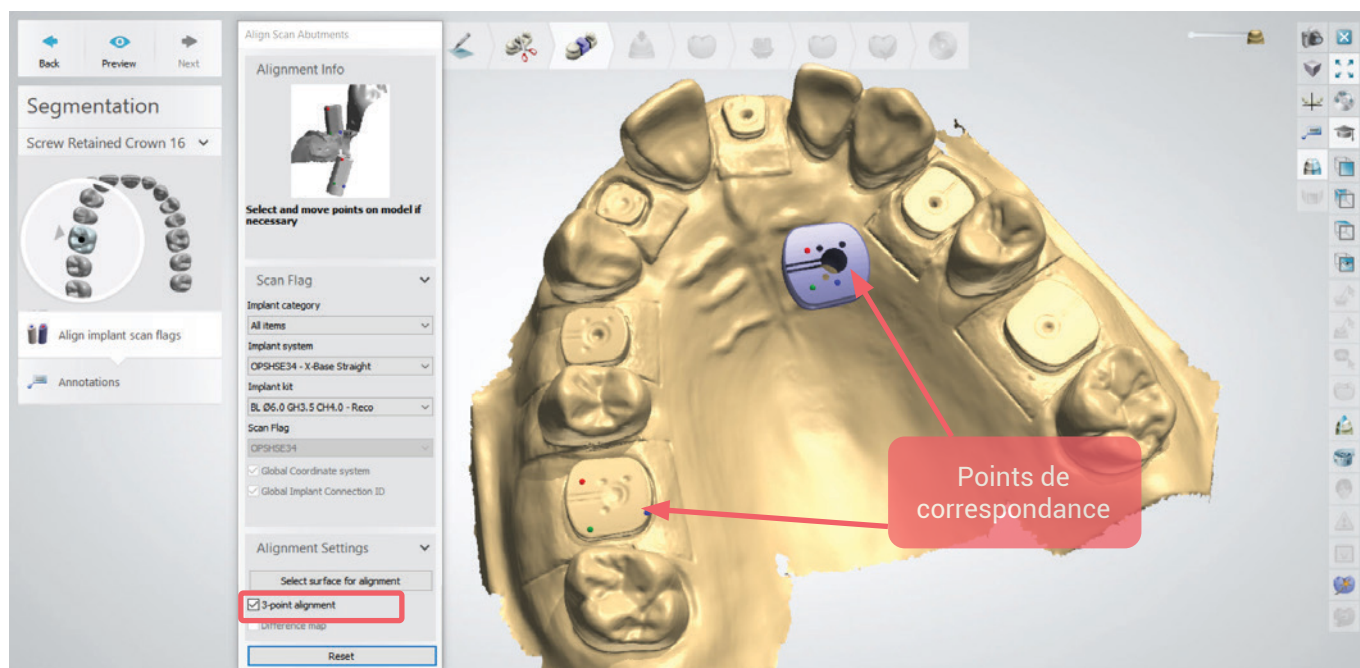


Si l'une de ces options d'alignement génère un message d'erreur, modifiez l'alignement en utilisant l'autre option.



Veillez toujours à vérifier que l'alignement est correct en utilisant l'option « Difference map » (Carte différentielle). Si l'alignement est correct, du gris doit apparaître comme dans l'image ci-après.

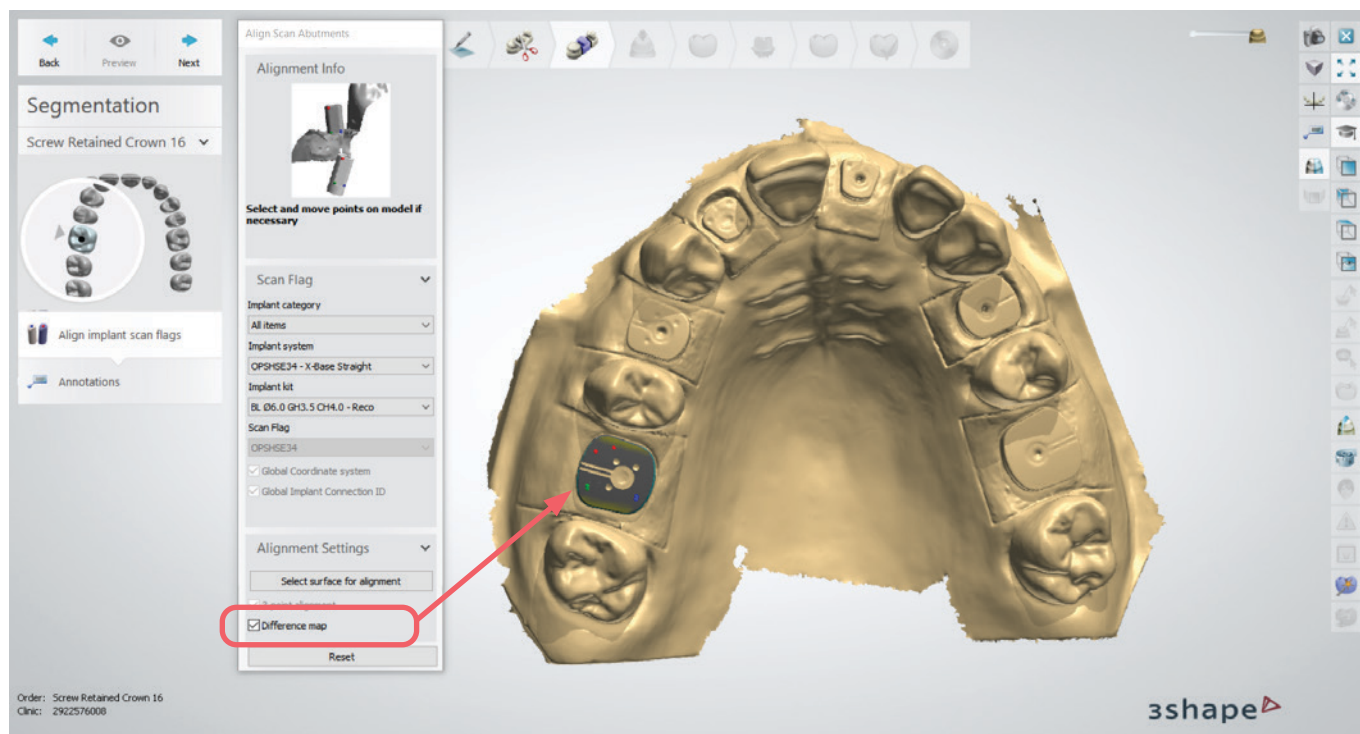


5. Définissez la direction d'insertion.
6. Placez la dent modèle.
7. Définissez le profil d'émergence et veillez à définir la forme de la Healfit® SH aussi loin que possible (en procédant manuellement).
 - a. Pour ce faire, vous devez afficher la géométrie du scanbody. En outre, pour une meilleure visibilité, vous pouvez masquer l'empreinte numérique, la conception préliminaire de l'anatomie et d'autres couches.

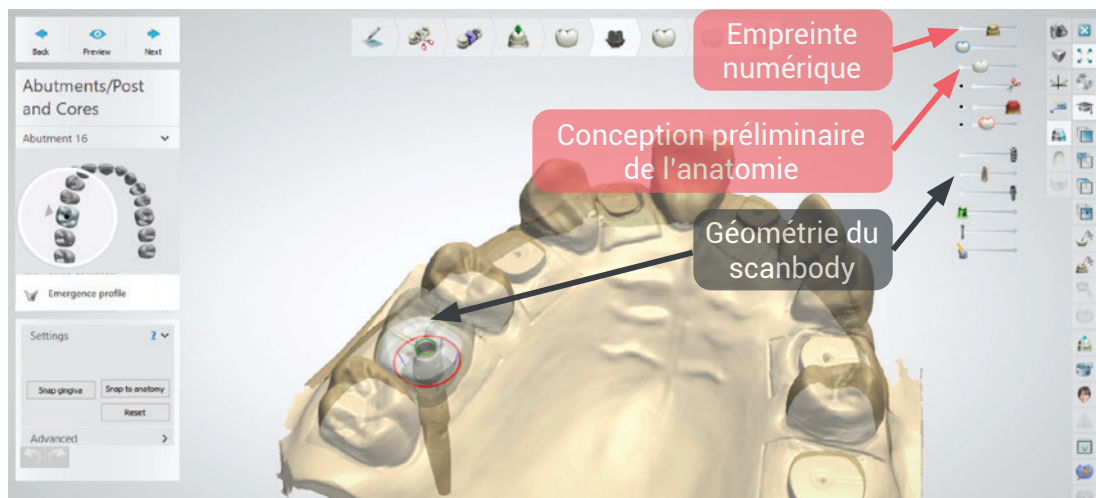

- b. Lorsque le scanbody apparaît, vous pouvez placer autant de points que nécessaire pour respecter la forme de la Healfit® SH sur le profil d'émergence (vue du haut, points rouges). Vous devez également modifier la partie gingivale (vue de face, points verts). Ci-après, en gris, vous pouvez voir la forme du scanbody et du profil d'émergence.

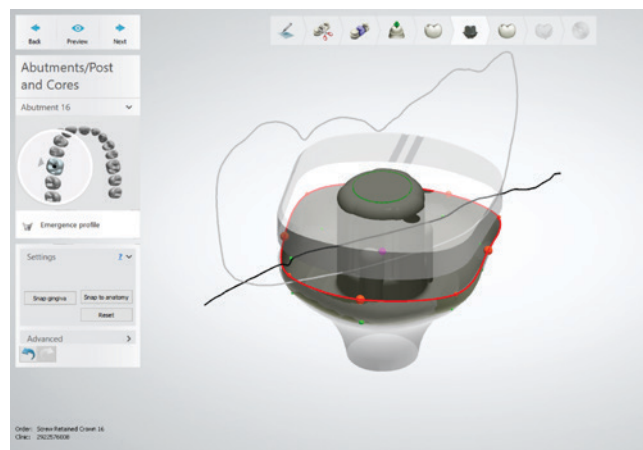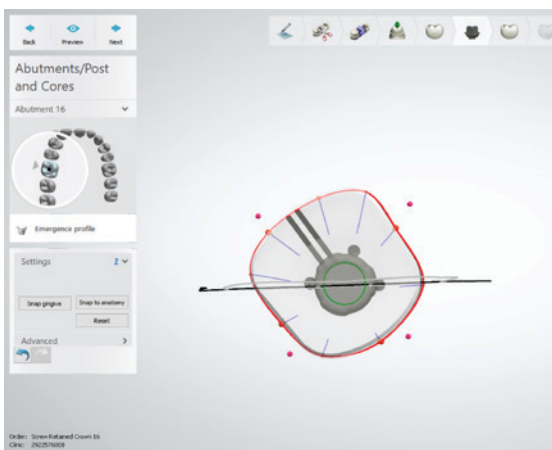

8. Dans le module suivant, Anatomy design (Conception de l'anatomie), vous pouvez sculpter la prothèse à l'aide de l'option Wax knife (Couteau à cire) pour ajouter/retirer de la matière ou lisser la surface. Pour finaliser la prothèse, veillez toujours à afficher la couche de scanbody par transparence afin de vérifier que la conception correspond au profil de la Healfit® SH.

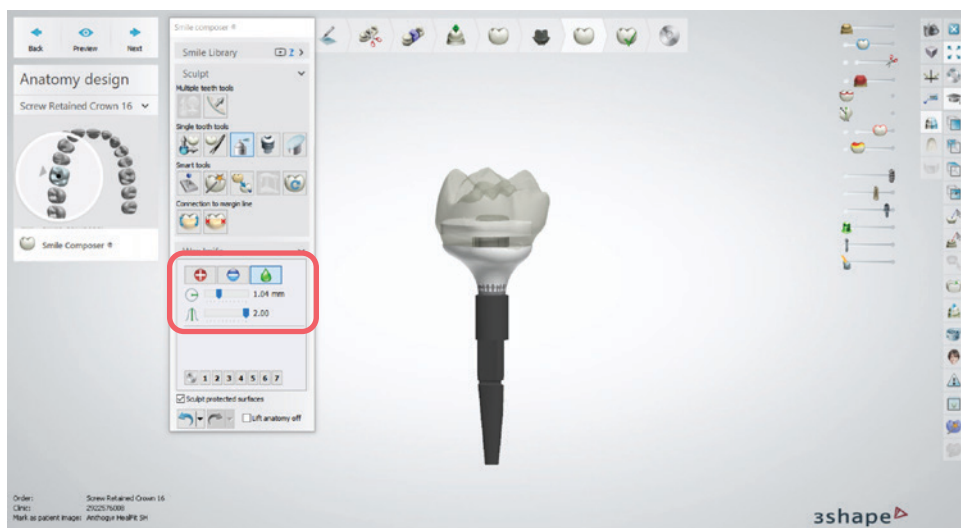


9. Finalisez la conception de la prothèse comme d'habitude.

Option 2 : Méthode semi-automatique (uniquement pour la version 2024)


Pour la version 3Shape 2024, en plus de la méthode manuelle (comme avec les versions antérieures), une option supplémentaire est disponible : la méthode semi-automatique.

Pour cette option, vous devez cocher la case « **Snap exit profile** ». Des points guides se déplaceront sur le profil gingival (points rouges et verts sur l'image ci-dessous) et seront placés automatiquement en fonction de la géométrie du scanbody. **La position de ces points peut être modifiée** si nécessaire afin d'adapter le profil gingival à cette étape.

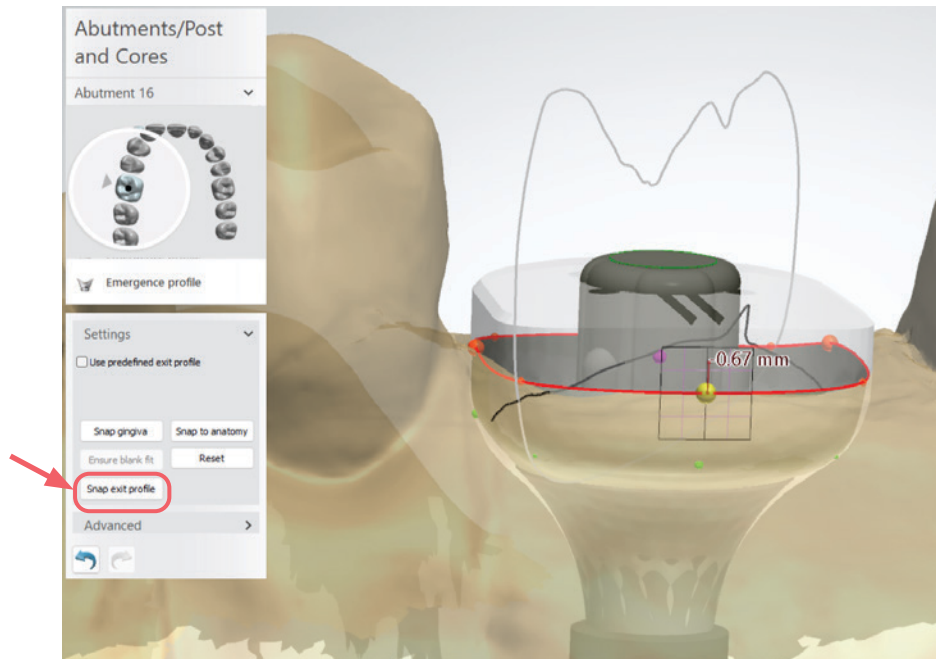


Si vous souhaitez modifier ensuite le profil gingival, vous pourrez le faire à l'étape « Finalize » (finaliser). Pour ce faire, vous devez sélectionner :

- (a) Sculpt Anatomy design (Sculpter la conception de l'anatomie) > (b) Sculpt toolkit (Boîte d'instrument pour sculpter) >
- (c) Sélectionnez parmi les différents instruments proposés > (d) Cochez la case « **Sculpt protected surfaces** » (Sculpter les surfaces protégées) > (e) Vous pouvez alors commencer la modification du profil gingival.

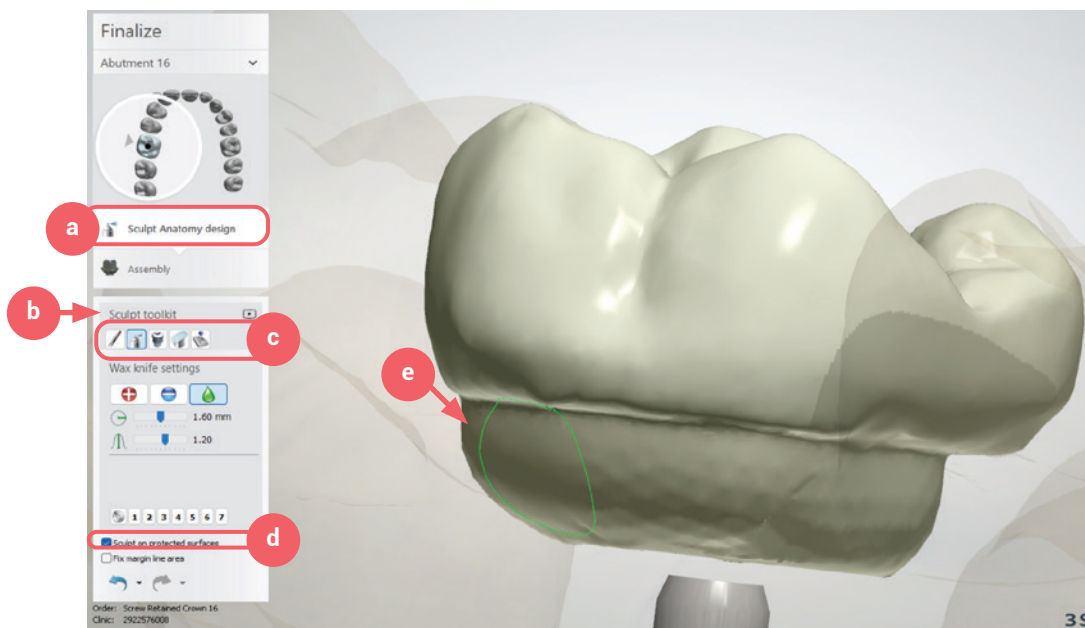


C. DENTALWINGS / CARES

- Remplissez le formulaire de commande comme d'habitude.
- Ajoutez le fichier scan, puis ajoutez le fichier 3D de la forme de la Healfit SH comme fichier gingival.

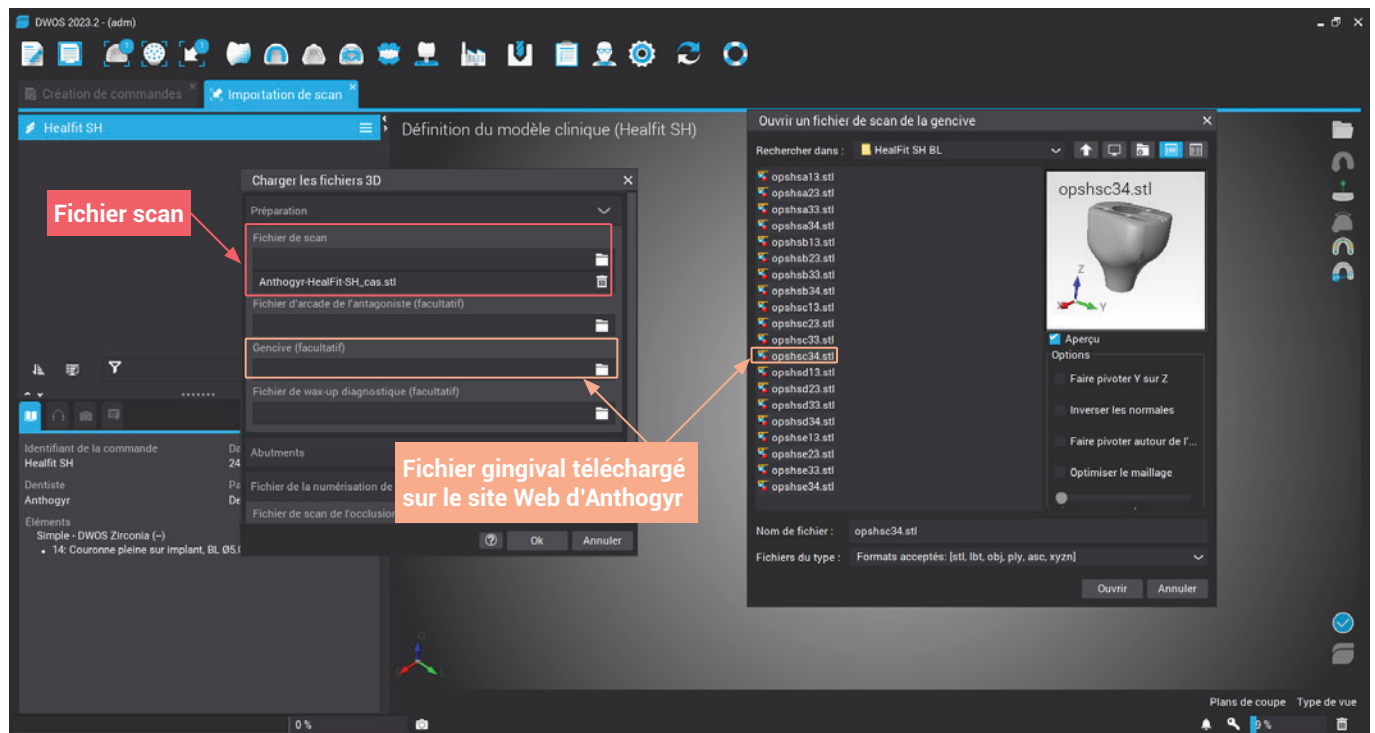


- Pour effectuer l'alignement du scanbody, sélectionnez la référence Healfit® SH en bouche.

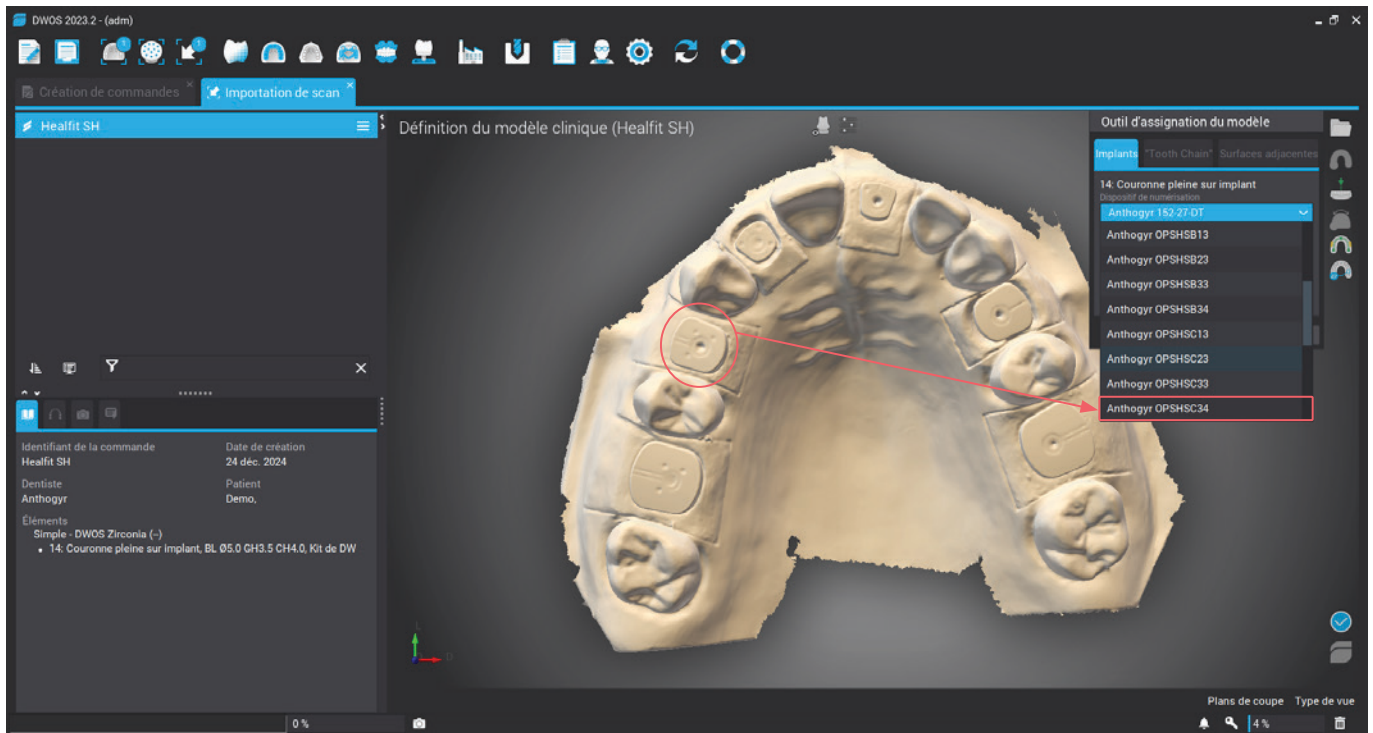


- Ensuite, aligner le fichier 3D (fichier gingival) avec le fichier scan de la façon suivante. Deux options sont disponibles :

Option 1 : Méthode automatique


- Sur le fichier gingival, effectuez un clic droit. Dans le nouveau menu, sélectionnez l'option « Reposition gingiva » (repositionner la gencive).

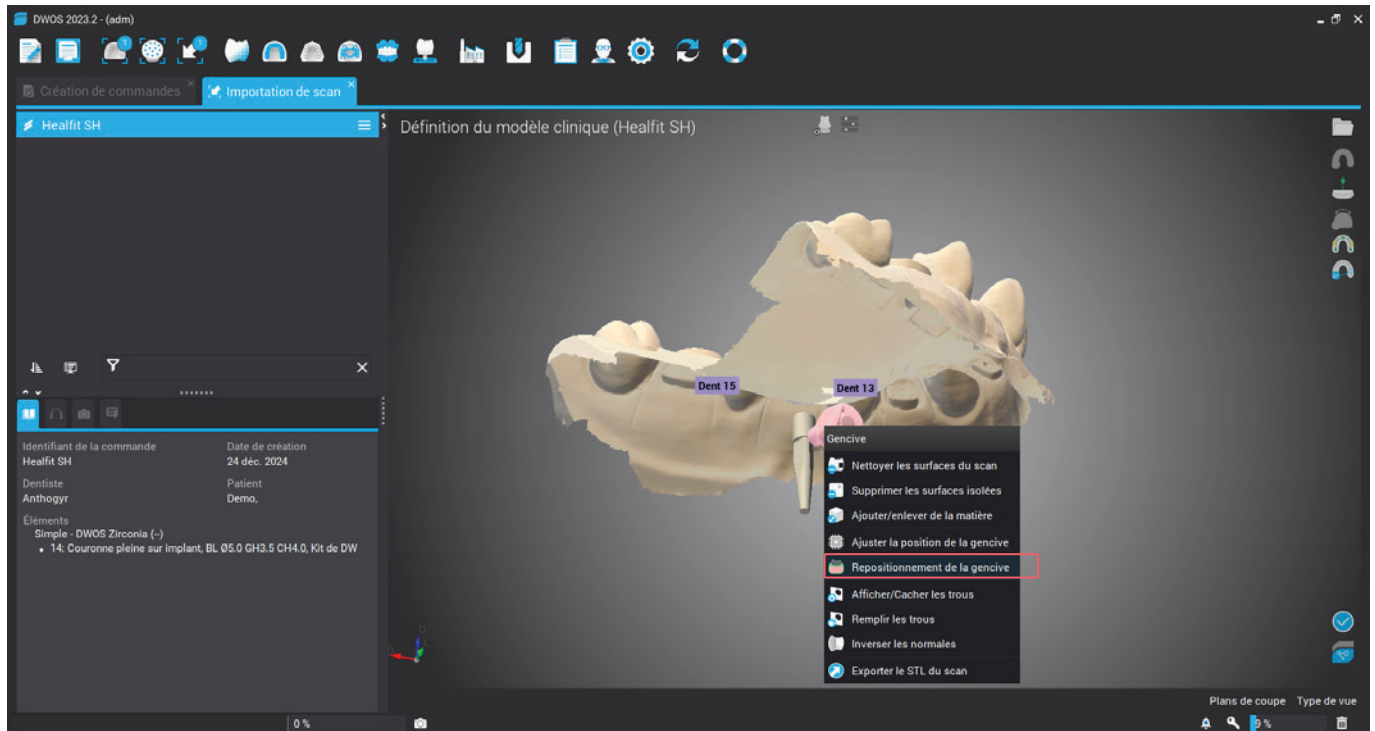

- Dans la nouvelle fenêtre, réaliser l'alignement avec **3 points**, puis cliquez sur « **Precise repositioning** » (**Repositionnement précis**).
- Vérifiez que l'alignement a été réalisé correctement.

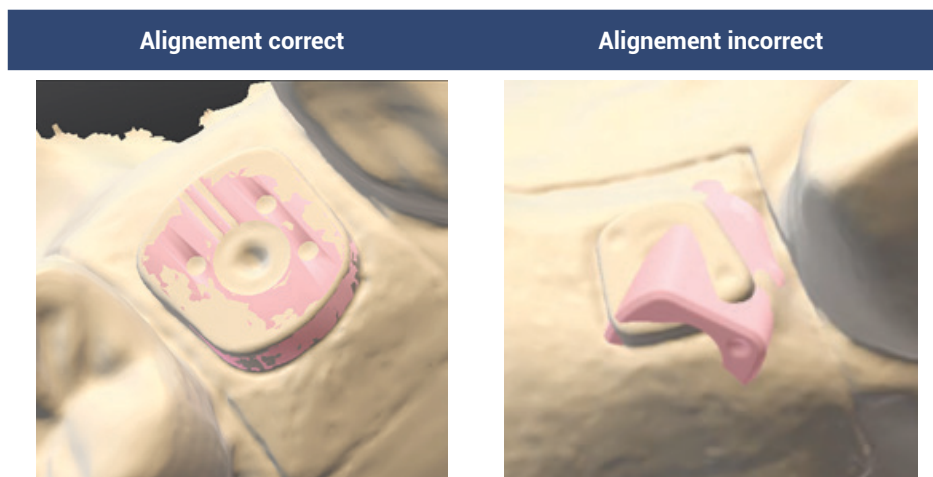


- Cliquez ensuite sur « OK » si l'alignement est correct, ou passez à l'Option 2 dans le cas contraire.

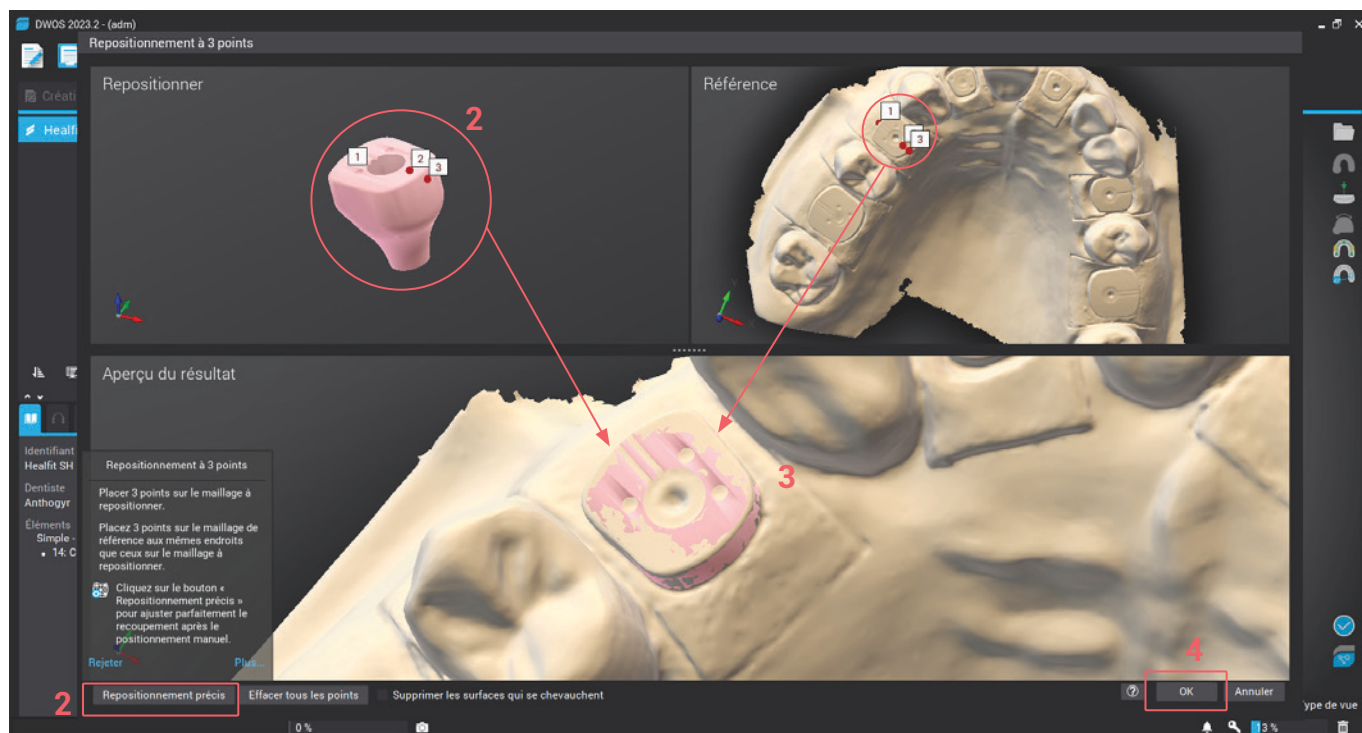


Option 2 : Méthode manuelle


1. Sur le fichier gingival, effectuez un clic droit. Dans le nouveau menu, sélectionnez l'option « Reposition gingiva » (repositionner la gencive).

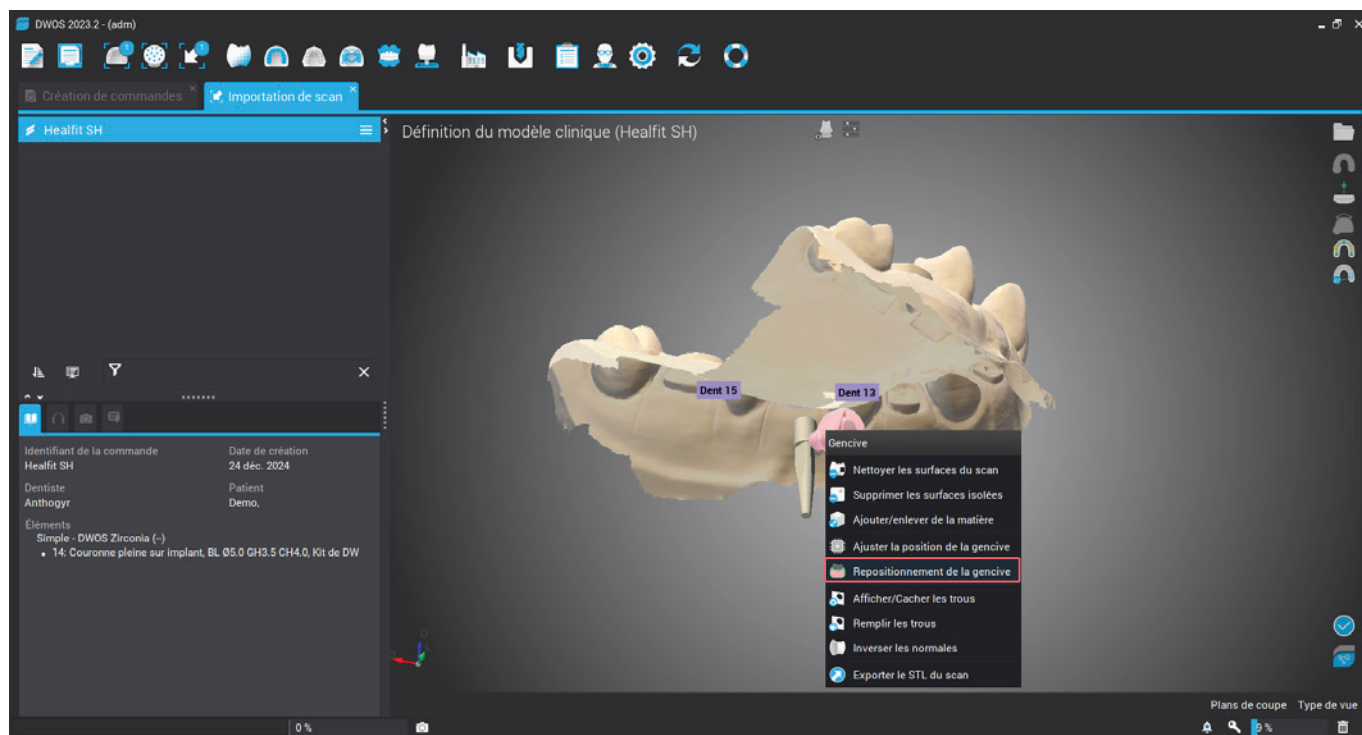


2. Dans la nouvelle fenêtre, réaliser l'alignement avec **3 points** puis cliquez sur « OK ».

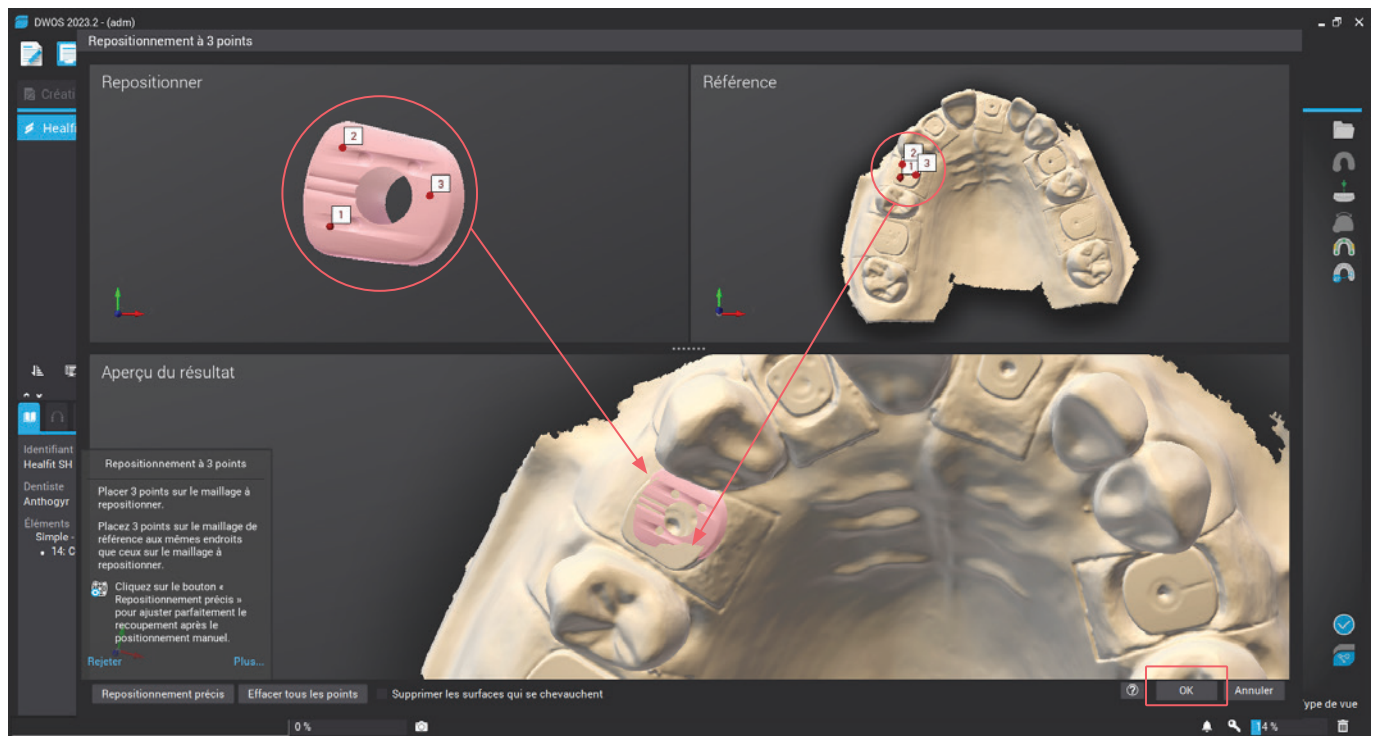


- Effectuez ensuite un clic droit (sur le fichier rose > fichier gingival) et sélectionnez l'option « Adjust gingiva position » (ajuster la position de la gencive).

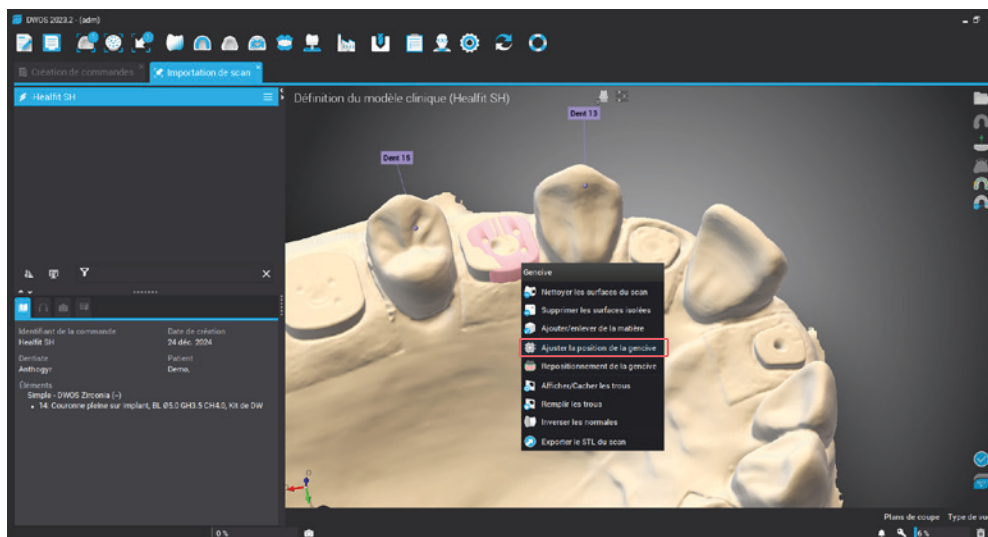

- Vous pouvez désormais utiliser les points qui apparaissent (rose pour la position et jaune pour la rotation) ou utiliser les fenêtres droites (flèches) pour modifier la position/rotation du fichier gingival. Le cas échéant, vous pouvez modifier l'incrément de chaque étape.

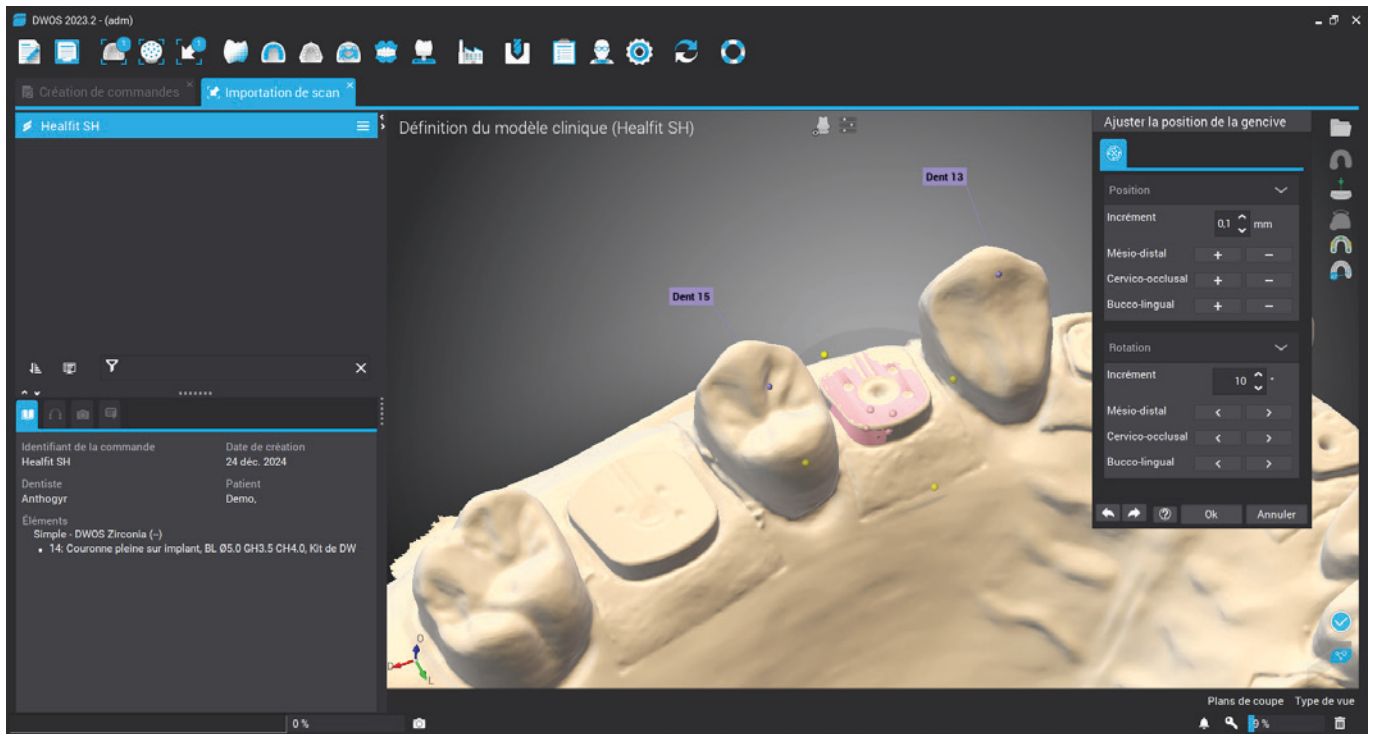


- Une fois l'alignement du fichier gingival terminé, procédez à la conception de la prothèse comme d'habitude. Pour concevoir le profil gingival, vous devez afficher le fichier gingival en cliquant sur cette option. Vous pouvez également modifier la transparence du fichier.

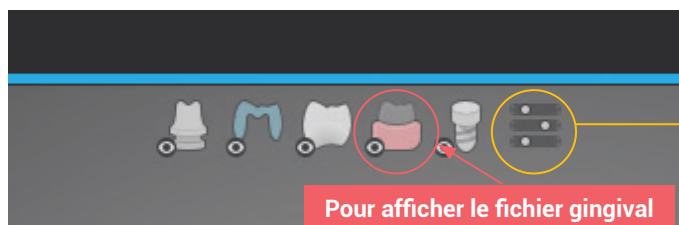


Pour afficher le fichier gingival

Pour modifier la transparence du fichier gingival

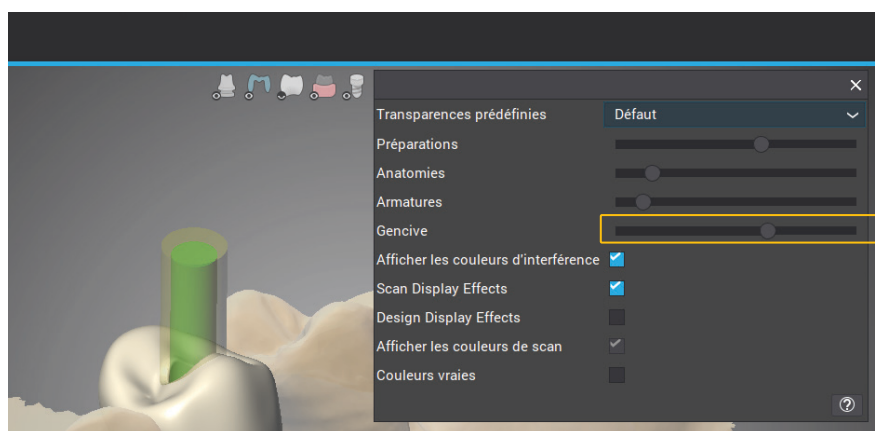


- Pour modifier le profil gingival : sur le fichier prothèse, effectuez un clic droit. Vous pouvez utiliser différentes options selon vos préférences :

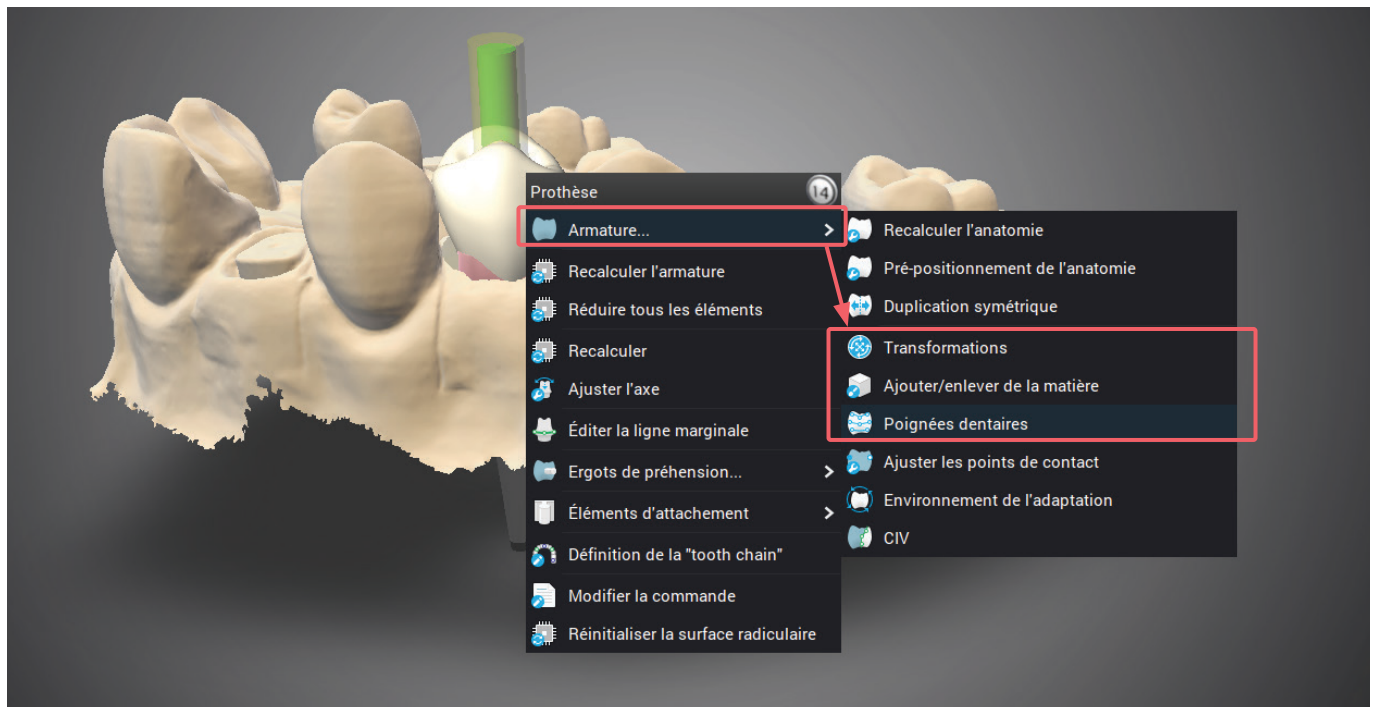


RÉFÉRENCES DES COMPOSANTS

| Healfit® SH pour Axiom® BL | | | | RÉFÉRENCE |
|---|----------------------------------|--------|--------|-----------|
|  | Healfit® SH – Forme A | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse | | | |
| | Healfit® SH | Hg 1,5 | Hc 3,0 | OPSHSA13 |
| | Healfit® SH | Hg 2,5 | Hc 3,0 | OPSHSA23* |
|  | Healfit® SH – Forme B | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse | | | |
| | Healfit® SH | Hg 1,5 | Hc 3,0 | OPSHSB13 |
| | Healfit® SH | Hg 2,5 | Hc 3,0 | OPSHSB23* |
|  | Healfit® SH – Forme C | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse | | | |
| | Healfit® SH | Hg 1,5 | Hc 3,0 | OPSHSC13 |
| | Healfit® SH | Hg 2,5 | Hc 3,0 | OPSHSC23* |
|  | Healfit® SH – Forme D | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse | | | |
| | Healfit® SH | Hg 1,5 | Hc 3,0 | OPSHSD13 |
| | Healfit® SH | Hg 2,5 | Hc 3,0 | OPSHSD23* |
|  | Healfit® SH – Forme E | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse | | | |
| | Healfit® SH | Hg 1,5 | Hc 3,0 | OPSHSE13 |
| | Healfit® SH | Hg 2,5 | Hc 3,0 | OPSHSE23* |
| | Healfit® SH | Hg 3,5 | Hc 3,0 | OPSHSE33 |
| | Healfit® SH | Hg 3,5 | Hc 4,0 | OPSHSE34 |
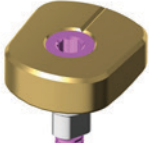
| Healfit® SH pour Axiom® TL | | | | RÉFÉRENCE |
|---|--|--------|----------|-------------|
|  | Healfit® SH – Forme A | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse déjà montée | | | |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,0 / N | TSHSA-N200* |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,0 / N | TSHSA-N400 |
|  | Healfit® SH – Forme B | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse déjà montée | | | |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,0 / N | TSHSB-N200* |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,0 / N | TSHSB-N400 |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,8 / R | TSHSB-R200 |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,8 / R | TSHSB-R400 |
|  | Healfit® SH – Forme C | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse déjà montée | | | |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,0 / N | TSHSC-N200* |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,0 / N | TSHSC-N400 |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,8 / R | TSHSC-R200 |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,8 / R | TSHSC-R400 |
|  | Healfit® SH – Forme D | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse déjà montée | | | |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,8 / R | TSHSD-R200 |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,8 / R | TSHSD-R400* |
|  | Healfit® SH – Forme E | | | |
| | Ti-6Al-4V ELI | | | |
| | Vis M1.6 Healfit® incluse déjà montée | | | |
| | Healfit® SH | Hc 2,5 | Ø4,8 / R | TSHSE-R200 |
| | Healfit® SH | Hc 4,0 | Ø4,8 / R | TSHSE-R400* |

* Références représentées

| Instrument Healfit® SH | | RÉFÉRENCE |
|---|-------------------------------------|-----------|
|  | Jauge de hauteur Healfit® SH | OPJCSHS |
| | Ti-6Al-4V ELI | |

REMARQUE

REMARQUE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REMARQUE



2237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tel. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.fr
Email: contact@anthogyr.com
Validity Date: 2025-05
REF: HEALFIT-SH_NOT_FR
SAP code: 708005
Index: B



Crédits photos : Anthogyr – Tous droits réservés – Photos non contractuelles

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale – Classe I, IIa et IIb – CE0459

Organisme notifié : GMED – Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels d'utilisation.