

ClearCorrect®
Behandlungs
optionen

clearcorrect
A Straumann Group Brand



Inhalt

- 3** Fallkomplexität
- 4** Behandlungsoptionen
- 6** FLEX-Option im Detail
- 7** MINI-Option im Detail
- 8** ONE-Option im Detail
- 9** TWO-Option im Detail
- 10** UNLIMITED-Option im Detail
- 11** Quellen

Fallkomplexität

Beurteilen Sie die Komplexität einer Alignerbehandlung anhand der vorliegenden Befunde/Indikationen und der gemeinsam mit dem Patienten festgelegten Ziele. Die passende Behandlungsoption leitet sich anschließend aus der Art der Malokklusion, den gewünschten Zahnbewegungen und den benötigten Alignerschritten sowie Ihrer Einschätzung zur Vorhersagbarkeit der Bewegungen ab.

Wichtig:

Mittels ClearCorrect® Alignern können grundsätzlich alle unten aufgeführten Befunde und Indikationen in Ihrer Praxis behandelt werden. Berücksichtigen Sie im Vorfeld, ob sich der vorliegende Patientenfall hinsichtlich der Fallkomplexität, der gewünschten Ziele des Patienten sowie der vorliegenden Befunde für eine Alignerbehandlung eignet. Planen Sie beispielsweise mehrere Malokklusionen zu behandeln, handelt es sich um einen weitaus komplexeren

Fall als wenn nur eine der vorhandenen Malokklusionen behandelt wird. Die im Weiteren genannten Richtlinien und Empfehlungen sind daher Vorschläge in Abhängigkeit der Gesamtkomplexität eines jeden Patientenfalls. Sie sind nicht abschließend. Es obliegt Ihnen als Behandler, die Situationen patientenindividuell zu bewerten und die daraus resultierenden Handlungsschritte einer Alignertherapie abzuwägen und ggf. anzuwenden.

Ziele

Legen Sie gemeinsam mit dem Patienten die Ziele der ClearCorrect® Behandlung fest.

Berücksichtigen Sie dabei Folgendes:

- Sprechen Sie über die aktuelle Situation des Patienten
- Finden Sie heraus, was mit der Alignertherapie behandelt werden soll
- Beziehen Sie die Wünsche und Bedürfnisse des Patienten mit ein
- Klären Sie den Patienten auf, was er für das gewünschte Ergebnis tun muss
- Besprechen Sie alle gesundheitlichen Vorteile

Befunde/Indikationen

- Engstände
- Rotationen
- Offener Biss (anterior und posterior)
- Tiefbiss
- Fehlende Zähne/Lückenschluss
- Fehlgeformte Zähne
- Kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlung
- Aplasien
- Extraktionstherapie
- Kreuzbiss (anterior und posterior)
- Klasse I; Klasse II:1, Klasse II:2 und Klasse III Behandlungen
- Präprothetische Kieferorthopädie

Patientenspezifisch zu berücksichtigen:

- Zahn- und Kieferfunktionsstörungen (CMD)
- Stoffwechsel
- Parodontalerkrankung
- Patientencompliance
- Ziele/Erwartungen



Behandlungsoptionen

Sie haben die Wahl zwischen fünf Behandlungsoptionen und können so je nach Komplexität des Falles die für Sie und Ihren Patienten geeignete Variante wählen. Grundsätzlich eignen sich die ClearCorrect® Behandlungsoptionen für

- Kieferorthopädische Fehlstellungen
- Präprothetisch bzw. im Vorfeld chirurgischer Eingriffe
- Ästhetische Korrekturen
- Präventive Maßnahmen
- Ergänzung weiterer Therapien (z. B. ABC-Behandlungen)

	FLEX	MINI
Aligneranzahl	Individuell	Bis zu 12 Sets
Laufzeit	Individuell	6 Monate
Inkludierte Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten pro Aligner und Behandlungsplan • Zusatzkosten für neue Behandlungsplanungen, Revisionen, Retainer und Ersatzschienen 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Revision à 12 Sets • Behandlungsplanung
Retainerbestellung	Individuell	<ul style="list-style-type: none"> • Zusatzkosten für Retainer • Bestellung innerhalb der Laufzeit
Preis	<ul style="list-style-type: none"> • Je Aligner/Retainer 42,50€ • Je benötigte Behandlungsplanung 102€ 	Einmalig 875€
Klinischer Umfang	Sehr einfache Basisbewegungen	Geringe und vorhersagbare Bewegungen



Wurde eine Behandlungsoption gewählt und die Produktion der Aligner gestartet, kann die Behandlungsoption nachträglich nicht geändert werden.

Bei den Behandlungsoptionen Mini, One, Two und Unlimited schließen Sie einen Vertrag mit einer Laufzeit von 6 Monaten, 1 Jahr, 2 Jahren oder 5 Jahren ab. Sie erhalten daher die Rechnung direkt nach Vertragsabschluss und somit ggf. früher als die erste Lieferung.

Bestellungen von Revision(en) und Retainer-Sets müssen innerhalb der Behandlungslaufzeit erfolgen.

ONE

TWO

UNLIMITED

Bis zu 24 Sets

Bis zu 48 Sets

Unbegrenzt

1 Jahr

2 Jahre

5 Jahre

- 1 Revision à 24 Sets
- Behandlungsplanung
- 1 Retainer-Set

- 2 Revisionen à 48 Sets
- Behandlungsplanung
- 2 Retainer-Sets

- Unbegrenzte Aligneranzahl
- Neuplanungen

Innerhalb der Laufzeit

Innerhalb der Laufzeit

2 Sets alle 6 Monate
innerhalb der Laufzeit

Einmalig 1.289 €

Einmalig 1.599 €

Einmalig 1.959 €

Geringe bis moderate
Bewegungen

Moderate Bewegungen

Komplexe Bewegungen

FLEX-Option im Detail

Ideal für einfache Basisbewegungen in einem/beiden Kiefer(n)

Bei dieser Behandlungsoption bezahlen Sie nur das, was Sie benötigen.
Kosten fallen je Aligner, je Behandlungsplanung, je Retainer und je Revision an.

Einsatzempfehlung

- Leichte kieferorthopädische Rezidive (primär in einem Kiefer) und/oder Revisionen, die mit **bis zu 8 Alignersritten** behandelt werden können
- Leichte kieferorthopädische Rezidive in beiden Kiefern und/oder Revisionen, die **mit 5 Alignersritten oder weniger** behandelt werden können
- Bei hoher Patientencompliance und hohem Wissenstand zur Biomechanik von Alignern


Indikationen/Klinischer Umfang

- Geringe Rotationen
- Leichter Eng- und Lückenstand
- Leichte kieferorthopädische Rezidive
- Kleinere Frontzahnbewegungen

Geeignet für




Geringe Rotation

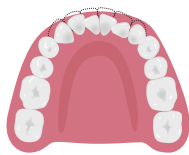

Korrektur eines leichten Engstands



Proklination oder labiale Kronenkipfung

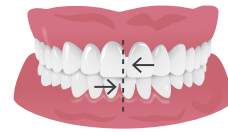

Leichte Mittellinienverschiebung

Die Aligneranzahl und Behandlungslaufzeit sind individuell. Alle Aligner werden Ihnen auf einmal zugeschickt. Der Fall gilt nach dem Versand als abgeschlossen.

Zielgruppe

- Sehr erfahrene Behandler
- **Ziehen Sie für die 3D-Behandlungsplanung nicht nur die vorgegebene Anzahl der Alignersritte in Betracht, sondern berücksichtigen Sie auch die Vorhersagbarkeit und den Schwierigkeitsgrad bestimmter Zahnbewegungen**

MINI-Option im Detail

Ideal für kieferorthopädische Rezidive

Bei dieser Behandlungsoption erhalten Sie innerhalb von 6 Monaten bis zu 12 Aligner-Sets (je Set OK und UK) und eine Revision mit bis zu 12 Aligner-Sets, inkl. beider Behandlungsplanungen.

Einsatzempfehlung

- Leichte kieferorthopädische Rezidive (in beiden Kiefern), die **mit 8 bis 12 Alignersritten** behandelt werden können
- Bei vorhersagbaren und geringen Zahnbewegungen

Indikationen/Klinischer Umfang


- Geringe Rotationen
- Leichter Eng- und Lückenstand
- Kieferorthopädische Rezidive
- Kleinere Frontzahnbewegungen
- Diastema mediale
- Kleinere Expansion des Zahnbogens

Die Laufzeit von 6 Monaten beginnt mit dem Versand der Aligner. Alle Aligner werden Ihnen auf einmal zugeschickt. Der Fall gilt nach dem Versand als abgeschlossen.

Zielgruppe

- Sehr erfahrene Behandler, welche die Vorhersagbarkeit der Bewegungen einschätzen können
- Für Einsteiger mit erster Erfahrung und bei einfachen Fällen mit der Unterstützung durch erfahrene Anwender
- **Ziehen Sie für die 3D-Behandlungsplanung nicht nur die vorgegebene Anzahl der Alignersritte in Betracht, sondern berücksichtigen Sie auch die Vorhersagbarkeit und den Schwierigkeitsgrad bestimmter Zahnbewegungen**

Geeignet für

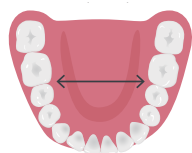

Kleinere Ausformung oder Expansion des Zahnbogens




Geringe Rotation




Korrektur eines leichten Engstands



Korrektur eines leichten Lückenstands

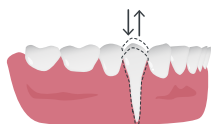

Sehr kleine Intrusionen und Extrusionen

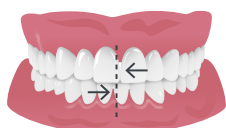

Leichte Mittellinienverschiebung



Proklination oder labiale Kronenkipplung

Hinweis: Diese Richtlinien sind nur Vorschläge, wenn es darum geht, über die Komplexität eines Falls zu entscheiden; sie sind nicht absolut. Als behandelnder Arzt müssen Sie die notwendigen Patientenuntersuchungen durchführen und bestimmen, ob der Patient für eine Alignertherapie geeignet ist.

ONE-Option im Detail

Ideal für leichte/moderate Fälle und Bewegungen

Bei dieser Behandlungsoption erhalten Sie innerhalb von einem Jahr bis zu 24 Aligner-Sets (je Set OK und UK) sowie eine Revision mit bis zu 24 Aligner-Sets und ein Retainer-Set für Ihre Behandlungspläne.

Einsatzempfehlung

- Leichtere bis leicht-moderate kieferorthopädische Fehlstellungen in beiden Kiefern, die **mit 14 bis 20 Alignersritten** behandelt werden können
- Bei geringen bis moderaten Bewegungen

Indikationen/Klinischer Umfang


- Leichte bis moderate Rotation
- Leichter bis moderater Eng- und Lückenstand
- Leichte bis moderate Kreuzbiss-Überstellung
- Präprothetische Behandlung
- Geringe Verbesserung von Overjet und Überbiss

Die Laufzeit von einem Jahr beginnt mit dem Versand der ersten Aligner-Sets. Die Aligner werden Ihnen zu je 12 Sets zugeschickt. Die Revision darf nicht von dem eigentlichen Behandlungsziel abweichen.

Zielgruppe

- Sehr erfahrene Behandler mit Fällen bis zu 20 Schritten
- Einsteiger bei leichten Fällen mit max. 16 Schritten
- **Ziehen Sie für die 3D-Behandlungsplanung nicht nur die vorgegebene Anzahl der Alignersritte in Betracht, sondern berücksichtigen Sie auch die Vorhersagbarkeit und den Schwierigkeitsgrad bestimmter Zahnbewegungen, die die vorgegebene Schrittzahl verlassen**

Geeignet für

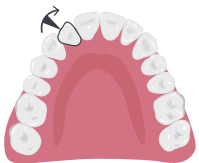

Leichte bis moderate Rotation



Leichter bis moderater Engstand



Geringe Verbesserung von Overjet



Leicht proklinierte Zähne



Leichte Korrektur gekippter Zähne



Leichter bis moderater Kreuzbiss



Geringe Verbesserung von Tiefbiss



Leichter bis moderater Lückenstand

TWO-Option im Detail

Ideal für moderate Fälle und Bewegungen

Bei dieser Behandlungsoption erhalten Sie innerhalb von zwei Jahren bis zu 48 Aligner-Sets (je Set OK und UK) sowie zwei Revisionen zu je 48 Schritten und 2 Retainer-Sets für Ihre Behandlungsplanungen.

Einsatzempfehlung

- Moderate kieferorthopädische Fehlstellungen in einem oder beiden Kiefern, die **mit 20 bis 30 Alignerschritten** behandelt werden können
- Bei moderaten Bewegungen
- Bei hohem Fokus auf Retention

Die Laufzeit von zwei Jahren beginnt mit dem Versand der ersten Aligner-Sets. Die Aligner werden Ihnen zu je 12 Sets zugeschickt. Die Revisionen dürfen nicht von dem eigentlichen Behandlungsziel abweichen.


Indikationen/Klinischer Umfang

- Moderate bis starke Rotation
- Moderater bis starker Eng- und Lückenstand
- Moderate bis starke Kreuzbiss-Überstellung
- Präprothetische Behandlung
- Verbesserung von Overjet und Überbiss
- Milde bis moderate vertikale Abweichungen (Tiefbiss/offener Biss)

Zielgruppe

- Sehr erfahrene Behandler
- Einsteiger bei leichten bis leicht-moderaten Fällen, da Revision Sicherheit bietet
- **Ziehen Sie für die 3D-Behandlungsplanung nicht nur die vorgegebene Anzahl der Alignerschritte in Betracht, sondern berücksichtigen Sie auch die Vorhersagbarkeit und den Schwierigkeitsgrad bestimmter Zahnbewegungen**

Geeignet für

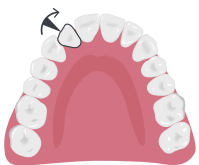

Moderate bis starke Rotation



Moderater bis starker Engstand



Verbesserung von Overjet



Moderat proklinierte Zähne



Korrektur gekippter Zähne



Moderater bis starker Kreuzbiss



Leichter bis moderater Tiefbiss



Moderat bis starker Lückenstand

Hinweis: Diese Richtlinien sind nur Vorschläge, wenn es darum geht, über die Komplexität eines Falls zu entscheiden; sie sind nicht absolut. Als behandelnder Arzt müssen Sie die notwendigen Patientenuntersuchungen durchführen und bestimmen, ob der Patient für eine Alignertherapie geeignet ist.

UNLIMITED-Option im Detail

Ideal für komplexe Fälle und Bewegungen

Bei dieser Behandlungsoption steht Ihnen innerhalb von fünf Jahren eine unbegrenzte Anzahl an Behandlungsplanungen, Aligner-Sets und Revisionen zur Verfügung. 2 Retainer-Sets alle 6 Monate innerhalb der Laufzeit sind inkludiert.


Einsatzempfehlung

- Breites Spektrum moderater bis komplexer kieferorthopädischer Fehlstellungen in beiden Kiefern, die mit **mehr als 30 Alignersritten** behandelt werden können
- Bei einer Kombination von leichten, moderaten und komplexeren Zahnbewegungen
- Behandlung von Patienten mit geringer Compliance und bei Behandlungsunterbrechungen

Indikationen/Klinischer Umfang

- Starker Eng- und Lückenstand
- Extraktionsbehandlung
- Überbiss- und Overjetkorrektur
- Bei komplexen chirurgischen Fällen
- Kombinationsbehandlungen mit Hilfsmitteln¹⁾
- AP-Korrekturen (z. B. Klasse II)²⁾


Geeignet für

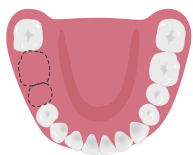


Extraktionen



Komplexe Frontzahnrotationen

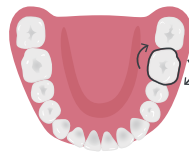

Molarenrotationen

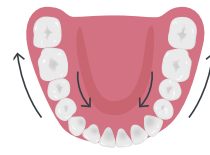


Distalisierung oder Mesialisierung




Starker offener Biss



Korrektur einer tiefen Spee-Kurve

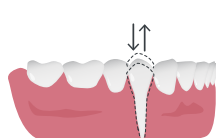

Intrusionen und Extrusionen

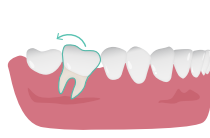

Molarenaufrichtung



Kurze klinische Kronen



Starker Tiefbiss

Die Laufzeit von fünf Jahren beginnt mit dem Versand der ersten Aligner-Sets. Die Aligner werden Ihnen zu je 12 Sets zugeschickt. Der Fall wird nicht automatisch wegen Inaktivität abgeschlossen. Neuplanungen sind jederzeit möglich. Die Revision darf von dem eigentlichen Behandlungsziel abweichen.

Zielgruppe

- Sehr erfahrene Behandler
- Einsteiger mit leichten bis leicht-moderate Fällen («Learn & Correct-Kultur»)
- **Ziehen Sie für die 3D-Behandlungsplanung nicht nur die vorgegebene Anzahl der Alignersritte in Betracht, sondern berücksichtigen Sie auch die Vorhersagbarkeit und den Schwierigkeitsgrad bestimmter Zahnbewegungen**



Quellen

- 1) "Eruption guidance in the mixed dentition: A case report" Weon Kim, Tae & Park, Jae. (2008). The Journal of clinical pediatric dentistry. 32. 331-9. 10.17796/jcpd.32.4.gt1504402674437p
- 2) "Creative Adjuncts for Clear Aligners, Part 1: Class II Treatment"
S. Jay Bowman DMD, MSD, Frank Celenza DDS, John Sparaga DMD,
Moschos A. Papadopoulos DDS, DMD, Kenji Ojima DDS,
James Cheng-Yi Lin DDS
www.jco-online.com/archive/2015/02/83/



Wir sind für Sie da!

clearcorrect.support.de@straumann.com

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
D-79100 Freiburg
Tel.: 0761 / 4501 0
www.straumann.de



www.clear-correct.de
0761 4501 777

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

DE500639 01/24

clearcorrect
A Straumann Group Brand