

Aligner-Checkliste

Patientendaten/Informationen:

- Name des Patienten liegt vor
- Geburtsdatum des Patienten liegt vor
- Alter des Patienten ist bestimmt
- Biotyp des Patienten ist definiert

Patientenhistorie/Anamnese:

- „Gesunde/normale“ Mundgesundheit liegt vor
- Parodontaler Zustand/Weichgewebszustand ist analysiert
- Zahnzustand des Patienten ist analysiert (Fehlende Zähne/lockere Zähne / Zahnmorphologie/ Ankylose/Kronen/Brücken/Wurzelresorption)
- Mögliche dentale Vorbehandlung(en) sind besprochen
- CMD-Problematiken sind besprochen oder ausgeschlossen
- Zahntraumata sind ausgeschlossen bzw. sind behandelt
- Mögliche Implantat-Setzungen sind bekannt
- Habits des Patienten sind bekannt bzw. können ausgeschlossen werden (z. B. Bruxismus)
- Extraorale Untersuchung (Makroästhetik/Gesichtsanalyse) abgeschlossen
- Extraorale Untersuchung (Miniästhetik/Lächelanalyse) abgeschlossen
- Intraorale Untersuchung (Mikroästhetik/Okklusion/Zahnbogenanalyse) abgeschlossen
- Zahnmedizinische Bedingungen sind analysiert (sagittale/- vertikale/- und transversale Ebene)
- Die Molaren- und Eckzahnbeziehung ist festgestellt
- Es liegen keine Kontraindikationen vor
- Es liegt keine unsichtbare Pathologie vor
- Bestehende Patientenwünsche z. B. „diastema mediale beibehalten“ sind bekannt

Aligner-Checkliste

Alignerinformationen:

- Hauptbeschwerde/Hauptanliegen/Motivationsgrund/Behandlungsergebnis des Patienten ist geklärt
- Die Fallkomplexität ist festgestellt (leicht/moderat/komplex)
- Behandlungsansatz/Therapieansatz (ästhetischer Ansatz/vollständige Zahnbogenkorrektur) sind mit dem Patienten besprochen
- Über die mögliche Nutzung von Hilfsmittel wie z. B. Attachments oder Elastics ist der Patient aufgeklärt
- Alle notwendigen Hilfsmittel in der Aligner-Therapie (z. B. ASR-Set, Komposit für Attachments oder Elastics etc.) sind in der Praxis vorhanden
- Patient wurde über die Aligner-Therapie aufgeklärt (Vor- und Nachteile)
- Patient ist über Retentionsmöglichkeiten in der Aligner-Therapie aufgeklärt
- Patient ist über mögliche Risiken in der Aligner-Therapie aufgeklärt
- Patient ist über Pflege- und Reinigungshinweise sowie Tragedauer informiert
- Patient hat Kostenvoranschlag erhalten
- Mögliche Finanzierungsmöglichkeiten sind dem Patienten bekannt bzw. sind besprochen

Benötigte Unterlagen/Doktorportal:

- Klinische Bilder (intraoral und extroral) sind vorhanden
- Intraorale Scans sind angefertigt oder Abdrücke sind vorhanden
- Röntgenbilder sind vorhanden (optional)
- Individuelle und/oder spezifische Anweisungen des Falles sind in der Verschreibung notiert
- Patienteneinwilligung ist unterschrieben
- Fall ist vollständig verschrieben und eingereicht
- Behandlungsplanung ist evaluiert/optimiert/freigegeben
- Behandlungsplanung ist mit dem Patienten geteilt