

ClearCorrect® Treatment Planning Service

Was ist ein Treatment Planning Service?

Bei einem Treatment Planning Service (TPS) handelt es sich um einen externen Partner bzw. ein Team aus Kieferorthopäden, Zahnärzten und Technikern, die Behandler bei der 3D-Behandlungsplanung in der Aligner-Therapie unterstützen und betreuen.

Serviceumfang:

- Planung und Optimierung der 3D-Behandlungsplanung(en)
- Übernahme der Kommunikation mit den ClearCorrect-Planungstechnikern
- Fachkundige kieferorthopädische Unterstützung durch klinische Experten

Mit welchem Partner arbeitet ClearCorrect zusammen?

ClearCorrect kooperiert mit ClearForward, einer internationalen Full-Service Organisation, die sich auf die kieferorthopädische Unterstützung für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Dentallabore im Rahmen der Aligner-Therapie spezialisiert hat.

Die für die Zusammenarbeit erstellte Website und ein für ClearCorrect-Behandler separater Portalzugang ermöglicht einen einfachen und schnellen Einstieg in die Zusammenarbeit in der Aligner-Therapie:

clearcorrect.clear-forward.com

Die Mehrwerte



Selbstvertrauen:

Klinische Sicherheit und Weiterbildung in der Alignerbehandlung durch qualitatives Mentorship.

Rentabilität:

Erhöhung der Profitabilität durch kürzere Behandlungszeiten pro Fall und höhere Behandlungsvolumina.

Planbare Ergebnisse:

Optimale Fallplanungen ohne lange Kommunikationsschleifen für planbare und vorhersagbare Behandlungsergebnisse.

Zufriedene Patienten:

Steigerung der Patientenzufriedenheit dank optimaler Plan-Vorhersagbarkeit und geringere Anzahl an Revisionen.

Das Paket

Das Angebot

Optimierung, Bewertung und Überprüfung des 3D-Behandlungsplanes durch erfahrene Experten.

Der Service

Sichtung der Patientenakten	✓
Behandlungsplanübersicht	✓
Optimierte 3D-Behandlungsplanung	✓
Unlimitierte Modifikationen	✓
2 Revisionen (weitere Revisionen kostenpflichtig)	✓
Support zur Behandlungsplanung	✓

199 €

Das Resultat

Umfassender Behandlungsplan, der komplexe Bewegungen erkennt und Fallstricke bei der Behandlung vermeidet.

Spezialpreis
von ClearCorrect und
ClearForward für das
Jahr 2022:

199 €

Hinweise und Tipps während des TPS-Prozesses

Vor der Optimierung der 3D-Behandlungsplanung

- Ausführliche **Verschreibung des Patientenfalls im ClearCorrect Doktorportal** und **Falleinreichung** durch Behandler, damit 1. Version des Behandlungsplanes erstellt wird.
- **Registrierung** im ClearForward-Portal und ClearForward als Partner im Doktorportal hinzufügen
- **Auftrag zur Optimierung** der Behandlungsplanung über das ClearForward-Portal an ClearForward übermitteln.

Während der Optimierung der 3D-Behandlungsplanung

- Benachrichtigungen der ClearCorrect-Techniker im Doktorportal können unberücksichtigt bleiben.
- Während der Optimierung keine Änderungen im Doktorportal bis zur 1. Behandlungsplanung vornehmen
- **Dauer** bis zur finalen Behandlungsplanung **ca. 10 Tage**
- Automatische Information per Mail über optimierte Behandlungsplanung seitens ClearForward

Nach der Optimierung der 3D-Behandlungsplanung

- **Freigabe der Behandlungsplanung durch Behandler*in im Doktorportal**
- Rechnungsversand seitens ClearForward erfolgt nach Freigabe der Behandlungsplanung

Die Beauftragung des Treatment Planning Service – einzelne Schritte

Schritte 1–2 einmalig ausführen!

Schritte:



Behandler



ClearForward

1

1x

Registrierung bei ClearForward (= Treatment Planning Partner)

- **Konto anlegen** im ClearForward Portal unter: Welcome to ClearCorrect (clearcorrect.clear-forward.com)
- **Wichtig:** Aktivierungslink in der Eingangsbestätigung innerhalb von 48 Stunden bestätigen, um Konto-Erstellung abzuschließen.

2

1x

ClearForward als Partner im Doktorportal hinzufügen

- In der Menüleiste des ClearCorrect-Doktorportals im Bereich „Mein Konto“, **Partner auswählen**, um ClearForward als externen Partner zu hinterlegen.
- **Wichtig:** Berechtigung „Behandlungsplanungen ablehnen“ für TPS-Partner vergeben. Bitte nutzen Sie bei der Anlage folgende Mailadresse: clearcorrect@clear-forward.com

3

Schritte 3–8 pro Fall ausführen!

Fall im Doktorportal anlegen und einreichen

- Patientenfall unter dem Menüpunkt **Neuen Fall anlegen** im ClearCorrect-Doktorportal anlegen.
- **Patientenfall inkl. ausgefüllter Verschreibung** und aller relevanten Unterlagen (Scans/Fotos etc.) bei ClearCorrect einreichen.

ClearCorrect Techniker beginnt mit der Erstellung der 1. Version der 3D-Behandlungsplanung.

4

Fall im Doktorportal mit ClearForward teilen

- **Entsprechenden Patientenfall** unter Fälle verwalten mit ClearForward als bereits hinzugefügter Partner teilen.
- **Wichtig:** Der entsprechende Patientenfall ist damit ClearForward als Treatment Planning Partner zugewiesen.

5

3D-Behandlungsplanungsservice im ClearForward Portal einreichen

- In das erstellte ClearForward-Konto einloggen, Aufträge auswählen und den TPS-Service für 199 € pro Patientenfall beauftragen.
- **Wichtig:** Mit diesem Schritt ist ClearForward als TPS-Partner für den spezifischen Fall kostenpflichtig für die Optimierung der 3D-Behandlungsplanung beauftragt.

Welcome to
ClearCorrect

clearcorrect.
clear-forward.com

6

Sichten und Überprüfen der 3D-Behandlungsplanung

- Sobald die Optimierung der 3D-Behandlungsplanung seitens ClearForward abgeschlossen ist, Erhalt einer E-Mail an die angegebene Mailadresse.
- Optimierte **3D-Behandlungsplanung** des spezifischen Falles im Doktorportal bzw. in der Planungssoftware **einsehen, bewerten** und **evaluieren**.

optional

7

Optional mögliche Änderungen einreichen

- Mögliche Änderungswünsche an der optimierten 3D-Behandlungsplanung können im ClearForward-Portal im Patientenfall unter „Änderungen einreichen“ an ClearForward übermittelt werden.

8

Freigabe der finalen 3D-Behandlungsplanung

- Bei optimaler und zufriedenstellender Behandlungsplanung, **Freigabe der 3D-Behandlungsplanung** im ClearCorrect-Doktorportal und im ClearForward-Portal unter „Planung freigeben“ durch Behandler.

Hinweis:

Start und Produktion
der Aligner seitens
ClearCorrect und direkte
Rechnungsstellung
seitens ClearForward an
Behandler

**Sie haben weitere Fragen?
Dann wenden Sie sich an den ClearCorrect Support.**

Telefon: 0761 4501 777

clearcorrect.support.de@straumann.com

Clinical Advisor

Fallbesprechungen und Beratung zur klinischen Umsetzung der Aligner-Behandlung.

straumann.com/group/de/de/discover/clinicaladvisor

ClearCorrect Support

Onboarding für die Registrierung und Beauftragung des TPS-Partners (= ClearForward).

ClearForward

Optimierung der Behandlungsplanung und Beantwortung von Fragen zur Planung im Doktorportal.