



ClearCorrect 承認・シェアリンク・不承認

3Dセットアップ承認

3～5営業日後に3Dセットアップが届きます。

ケースの詳細

ケース # 299490

性別 女性
生年月日 1996/08/20
治療 下顎: 上顎

ケースカテゴリ セットアップが承認待ちです
ケースステータス 治療セットアップの評価
バージョン 1 製造開始日時 2018/05/18
Case type 推奨

アクションが必要です ドキュメント 履歴

治療のセットアップ



技術ノート
We have treated upper and lower arches and aligned teeth to improved the overjet, IPR added as needed. Engagers placed for retention and to help intrusion/extrusion and rotation. Thank you!

共有治療
あなたは誰と治療のセットアップへのリンクを共有することができます [ショー患者リンク](#)

Review Setup Version 1

不承認 承認

画面をクリックして、3Dセットアップ動画を確認します。

3Dセットアップ動画をチェック

動画を確認後、「バック」をクリック



[Redacted] [バック](#)

[Redacted] • 場合 # 267708 • Unlimited •
2019/08/21 • バージョン 2

ステップ 21 週 41-42

■ [Redacted] に:
12 • 11 • 21 • 22 • 23 • 43 • 33


着用 2 週. 自宅で次のステップを開始します。

ドラッグ 回転します **スクロール** ズーム **空間** /一時停止
を再生します。

← 前 → 次 ↑ スタート ↓ リテナー

3Dセットアップの承認

ケースの詳細

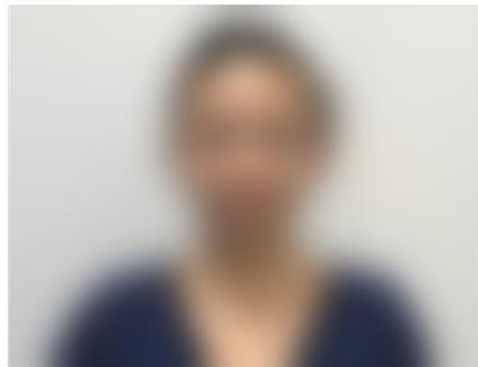

ケース #299490

性別 女性
生年月日 1996/08/20
治療 下顎:上顎

ケースカテゴリ セットアップが承認待ちです
ケースステータス 治療セットアップの評価
バージョン 1 製造開始日時
2018/05/18
Case type 推奨

アクションが必要です

ドキュメント

履歴

治療のセットアップ



Preview Setup Version 1

技術ノート

We have treated upper and lower arches and aligned teeth to improved the overjet, IPR added as needed. Engagers placed for retention and to help intrusion/extrusion and rotation. Thank you!

共有治療

あなたは誰と治療のセットアップへのリンクを共有することができます ショー患者リンク

不承認

承認

3Dセットアップに修正点がなければ
「承認」をクリック

発注



Preview Setup Version 1

価格プラン(Unlimited または Flex) をチェック

Unlimited 価格 ¥220,000
 Flex 価格 ¥169,000

Charge ¥220,000 fee to:
Final invoice will be sent by legal entity of Straumann.
[Straumann General Terms and Conditions](#)

クーポン ▼ 出荷方法 ▼


小計:	¥220,000
合計:	¥220,000 ⓘ

キャンセル

- 送信ボタンをクリックして発注完了
- およそ22営業日後にアライナー到着します。
* 土日は除く

不承認

ケースの詳細

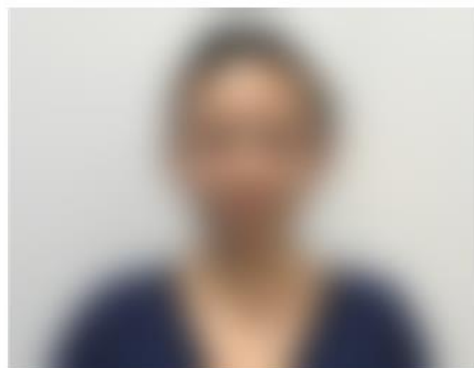

ケース # 299490

性別 女性
生年月日 1996/08/20
治療 下顎;上顎

ケースカテゴリ セットアップが承認待ちです
ケースステータス 治療セットアップの評価
バージョン 1 製造開始日時
2018/05/18
Case type 推奨

アクションが必要です

ドキュメント

履歴

治療のセットアップ



Preview Setup Version 1

技術ノート

We have treated upper and lower arches and aligned teeth to improved the overjet, IPR added as needed. Engagers placed for retention and to help intrusion/extrusion and rotation. Thank you!

共有治療

あなたは誰と治療のセットアップへのリンクを共有することができます [ショー患者リンク](#)

不承認

承認

3Dセットアップの修正を希望の際は
不承認をクリック

不承認



Preview Setup Ver

3Dセットアップの修正理由を

以下3つより選択:

- 1.指示のみで修正
- 2.指示と新しいSTLデータで修正 *
- 3.治療をキャンセル

非難セットアップの理由

- 以下の手順に従ってセットアップを修正
- 新しい感想を送信
- 治療を続行したいケースを閉じないでください。

指示*

フィールドは必須です

upper

フィールドは必須です

使用するデータ

lower

指示にコメントを入力

キャンセル

送信

* 新しいSTLデータを送信したい場合は、再度STLデータをアップロードします。

送信ボタンをクリックして承認完了

3～5営業日後に新しい3Dセットアップが届きます

* 土日は除く









3Dセットアップの共有 (シェアリンク)



ドキュメント



履歴

- 「履歴」をクリックし、承認された治療セットアップバージョンの右端の  をクリック。

	位相2到着 Oct 15, 2019	
	位相1到着 Jul 30, 2019	
	承認された治療セットアップバージョン4 Jul 3, 2019	
	治療セットアップ版3不承認 Jul 1, 2019	




➤ 「 Preview Setup Version 」 をクリック

ドキュメント	履歴
 位相2到着 Oct 15, 2019	👁
 位相1到着 Jul 30, 2019	👁
 承認された治療セットアップバージョン4 Jul 3, 2019 技術者のメモ: We have corrected the placement of LR3 as per decline notes. Thank You! Preview Setup Version	✍





3Dセットアップ

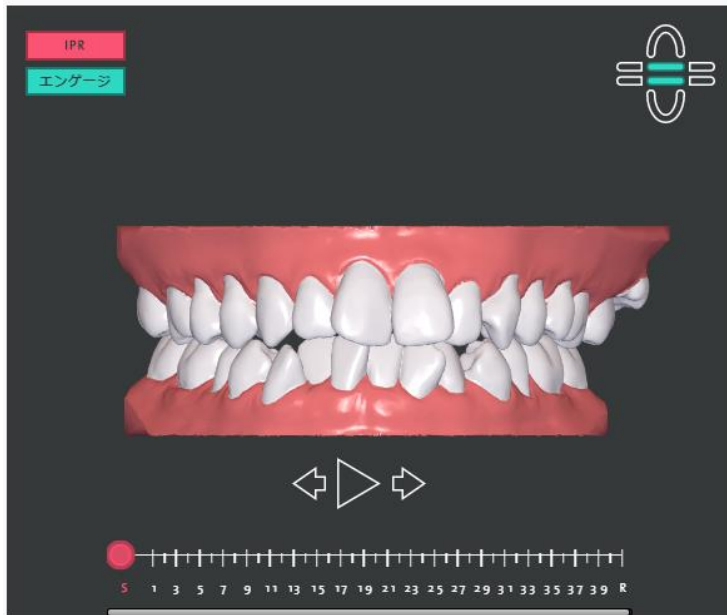

➤ 3Dセットアップがご覧いただけます。

共有(シェアリンク)

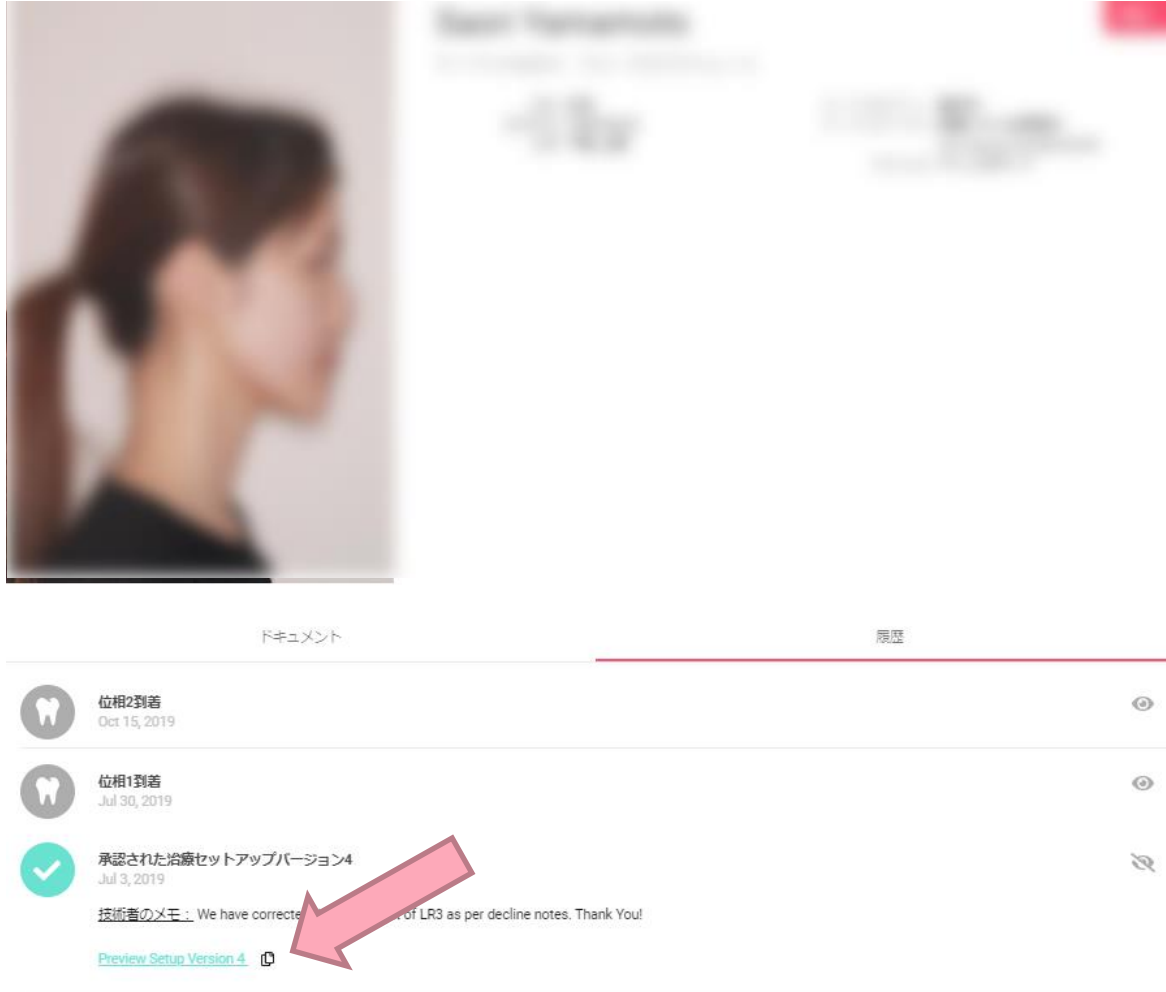

➤  をクリックするとリンク先がコピーされます。メールなどに貼付てください。