

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С БИБЛИОТЕКАМИ MEDENTIKA

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

IPS

Оригинальная система имплантатов



Microcone Quattrocone Quattrocone30

Имеет всего два диаметра платформы NI и RI

[Каталог Who is Who](#)



MPS

Реплика для других систем имплантатов
Представляет широкий ассортимент полностью
зарегистрированной в РФ протетики



[Ознакомиться с наличием систем
на сайте магазина](#)



ГДЕ СКАЧАТЬ БИБЛИОТЕКИ?

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ



Пройти по [ссылке на сайт](#), далее в фильтрах выбрать нужную библиотеку ([расшифровка на стр. 4–12](#)) и скачать

ВАРИАНТ ВТОРОЙ



Пройти в [наш интернет магазин](#), выбрать необходимую протетику и там же скачать нужную библиотеку ([пример на стр. 13](#))

ГДЕ СКАЧАТЬ БИБЛИОТЕКИ?

В данном разделе есть удобный фильтр поиска библиотек для Exocad и 3Shape

А также фильтр по типу библиотек

Цифровые решения > Библиотеки CAD/CAM

Поиск

Компания-партнер

- ☐ 3Shape (28)
- ☐ exocad (12)

Страна

- ☐ Глобальный (32)
- ☐ Соединенные Штаты Америки (20)

Product Reference

- ☐ Printed Model (26)
- ☐ Multi-Unit Abutment (8)
- ☐ Ti-Base 2.Generation (7)
- ☐ Ti-Base ASC Flex (6)
- ☐ MedentiBase Abutment (4)
- ☐ MedentiCAD (3)
- ☐ PreFace Abutment (3)
- ☐ TI-Forms (2)

[- Показать меньше](#)

Рабочая последовательность

- ☐ Цифровой (38)

MEDENTIKA TI-Forms Abutment all series (local milling)
exocad - V22-09
18. окт. 2022 ZIP, 26.5 MB

MEDENTIKA Printanalog all series (local printing)
exocad - V22-10
05. окт. 2022 ZIP, 23.9 MB

MEDENTIKA Titanium Bases 2nd generation all series (centralized milling)
exocad - 1.1
30. авг. 2022 ZIP, 26.0 MB

MEDENTIKA MedentiCAD (centralized milling Straumann)
exocad - 2.0
25. авг. 2022 ZIP, 31.7 MB

MEDENTIKA MedentiCAD all series (centralized milling Straumann)
3Shape DS 2019 - 1.1.1
22. авг. 2022 ZIP, 22.9 MB

MEDENTIKA MedentiCAD all series (centralized milling Straumann)
3Shape DS 2020 - 1.1.1
22. авг. 2022 ZIP, 22.9 MB

MEDENTIKA MedentiCAD all series (centralized milling Straumann)
3Shape DS 2021 - 1.1.1
22. авг. 2022 ZIP, 22.9 MB

MEDENTIKA Titanium Bases 2nd generation all series (centralized

Software Download Center

2 результатов найдено

Дата

Поиск



exocad X

Ti-Base 2.Generation X

Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (5)

☒ exocad (2)

Страна

☐ Глобальный (2)

Product Reference

- ☒ Ti-Base 2.Generation (2)
- ☐ MedentiBase Abutment (2)
- ☐ MedentiCAD (2)
- ☐ Multi-Unit Abutment (2)
- ☐ Printed Model (1)
- ☐ Ti-Base ASC Flex (1)
- ☐ PreFace Abutment (1)
- ☐ TI-Forms (1)

- Показать меньше



MEDENTiKA Titanium Bases 2nd generation all series (centralized milling)

exocad - 1.1

30. авг. 2022 ZIP, 26.0 MB



MEDENTiKA Titanium Bases 2nd generation all series (local milling)

exocad - V21-05

23. авг. 2021 ZIP, 43.3 MB



Библиотека для титановых оснований MEDENTiKA 2 поколения (все серии)



Software Download Center

2 результатов найдено

Дата

Поиск

exocad X

MedentiBase Abutment X

Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (2)

☒ exocad (2)

Страна

☐ Глобальный (2)

Product Reference

☐ Ti-Base 2.Generation (2)

☒ MedentiBase Abutment (2)

☐ MedentiCAD (2)

☐ Multi-Unit Abutment (2)

☐ Printed Model (1)

☐ Ti-Base ASC Flex (1)

☐ PreFace Abutment (1)

☐ TI-Forms (1)

- Показать меньше



MEDENTiKA Stockabutments

exocad - V21-07.1

15. дек. 2021 ZIP, 44.8 MB



MEDENTiKA MedentiBASE all series (local milling)

exocad - V21-05

23. авг. 2021 ZIP, 7.9 MB



Библиотека для титановых оснований MedentiBASE
(все серии)



Мульти-юнит MedentiBASE

Позволяет вам изготавливать широкий спектр многоэлементных конструкций и мостовидных протезов для верхней и нижней челюсти, как с помощью цифрового, так и аналогового протокола.



Сканмаркер MedentiBASE

Может использоваться для сканирования и оцифровки модели.



Титановое основание MedentiBASE

Подходит для адгезивной фиксации многоэлементных балочных конструкций и мостовидных протезов.



Адгезивный колпачок MedentiBASE

Может использоваться для изготовления многоэлементных балочных конструкций и мостовидных протезов с винтовой фиксацией.




Временные титановые колпачки MedentiBASE

Титановый колпачок Flex позволяет работать с различными показателями высоты основания. Поддерживает высокие реставрации, как для временных, так и для постоянных процедур.



MEDENTIBASE И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

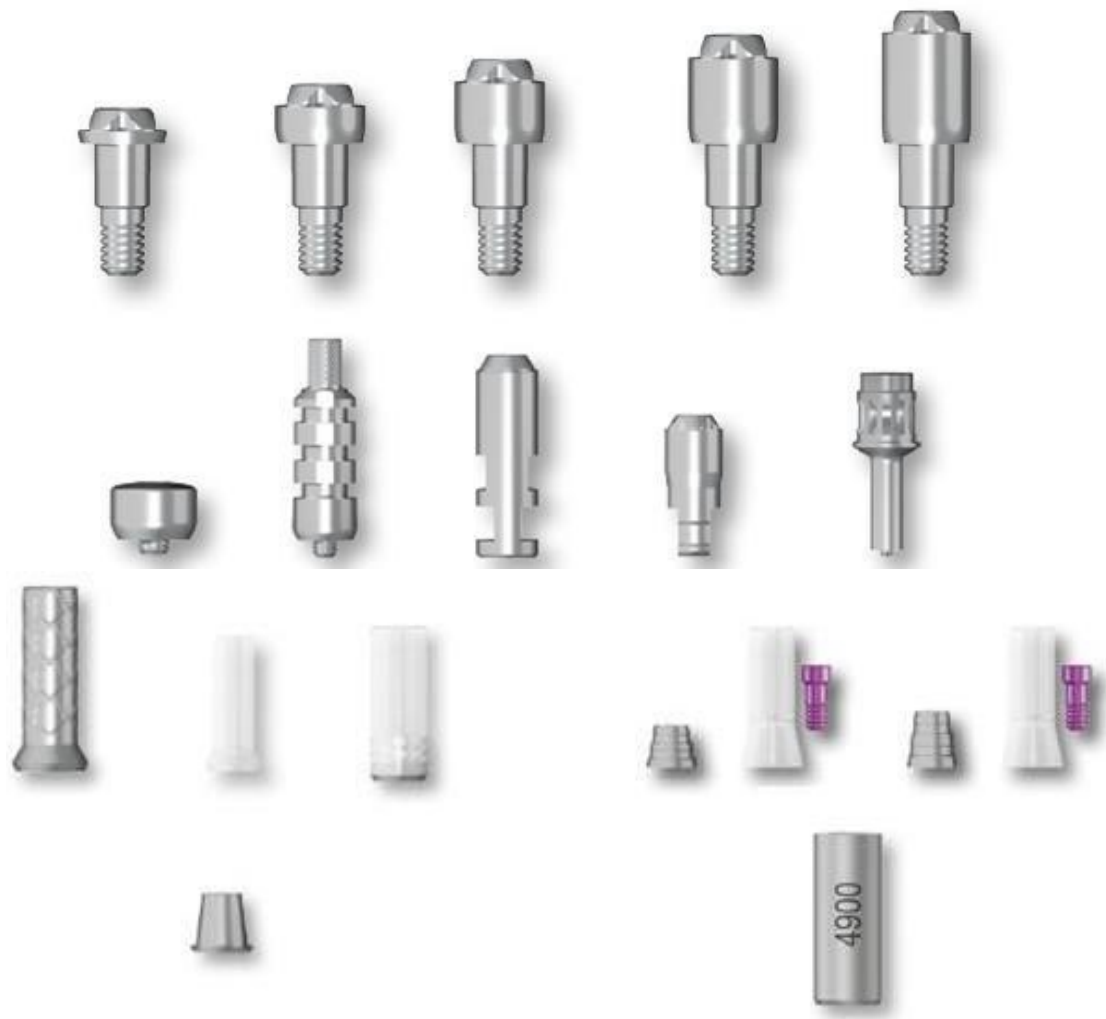

- MedentiBASE аналогичен по принципу действия прямому Multi-Unit. На его основе с помощью вспомогательных компонентов могут быть созданы многоопорные реставрации.
- Имеет большое количество вспомогательных компонентов, может быть отсканирован с уровня абатмента.
- Доступен в 5 вариантах по высоте десны.

Software Download Center

2 результатов найдено

Поиск

exocad X Multi-Unit Abutment X Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (6)

☒ exocad (2)

Страна

☐ Глобальный (2)

Product Reference

☐ Ti-Base 2.Generation (2)

☐ MedentiBase Abutment (2)

☐ MedentiCAD (2)

☒ Multi-Unit Abutment (2)

☐ Printed Model (1)

☐ Ti-Base ASC Flex (1)

☐ PreFace Abutment (1)

☐ TI-Forms (1)

[- Показать меньше](#)

MEDENTiKA Stockabutments
exocad - V21-07.1
15. дек. 2021 ZIP, 44.8 MB

MEDENTiKA Multi-unit all series (local milling)
exocad - V21-05
01. июл. 2021 ZIP, 5.9 MB

Библиотека для Multi-unit абатментов, в том числе и для прямой фрезеровки (без титанового основания)



Мульти-юнит — прямой и угловой

Идеально подходит для индивидуальных многоэлементных реставраций или в качестве индивидуализируемого основания для реставраций в эстетически значимых отделах.



Титановое основание для мульти-юнита

Титановое основание для вклеивания в мостовидные конструкции/протезы (пассивная посадка). Титановое основание ASC для вклеивания в мостовидные конструкции/протезы с возможностью использования углового винтового канала.




Сканмаркер для мульти-юнита

Сканмаркер для цифрового слепок прямых мульти-юнитов и сканмаркер для цифрового слепок угловых мульти-юнитов 17° и 30°.



Временные титановые колпачки для мульти-юнитов

Титановый колпачок Flex поставляется с различными показателями высоты трубовидного элемента. Поддерживает высокие реставрации, как для временных, так и для постоянных процедур.

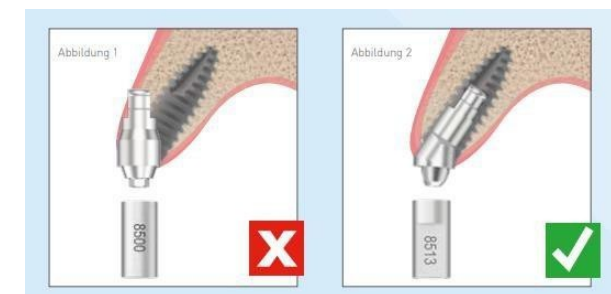

Software Download Center

1 результатов найдено

Дата

Поиск

exocad X Printed Model X Очистить фильтры

Компания-партнер

- ☐ 3Shape (25)
- ☒ exocad (1)

Страна

- ☐ Глобальный (1)
- ☐ Соединенные Штаты Америки (1)

Product Reference

- ☐ Ti-Base 2.Generation (2)
- ☐ MedentiBase Abutment (2)
- ☐ MedentiCAD (2)
- ☐ Multi-Unit Abutment (2)
- ☒ Printed Model (1)
- ☐ Ti-Base ASC Flex (1)
- ☐ PreFace Abutment (1)
- ☐ TI-Forms (1)

- Показать меньше



MEDENTiKA Printanalogs all series (local printing)
exocad - V22-10
05. окт. 2022 ZIP, 23.9 MB



**Библиотека 3D аналогов
(для моделей напечатанных на 3D принтерах)**



Аналог CAD/CAM

Аналоги CAD/CAM обладают высокой радиальной и аксиальной устойчивостью, специально разработаны для печатных моделей.

Software Download Center

1 результатов найдено

Дата

Поиск

exocad X

Ti-Base ASC Flex X

Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (5)

☒ exocad (1)

Страна

☐ Глобальный (1)

Product Reference

☐ Ti-Base 2.Generation (2)

☐ MedentiBase Abutment (2)

☐ MedentiCAD (2)

☐ Multi-Unit Abutment (2)

☐ Printed Model (1)

☒ Ti-Base ASC Flex (1)

☐ PreFace Abutment (1)

☐ TI-Forms (1)

[- Показать меньше](#)



MEDENTiKA Titanium Bases ASC-Flex all series (local milling)

exocad - V21-05.1

15. дек. 2021 ZIP, 188.6 MB



Библиотека для титановых оснований 3-го поколения, с угловой шахтой и различными поддесневыми высотами ASC-Flex



Software Download Center

1 результатов найдено

Поиск

exocad X PreFace Abutment X Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (2)

☒ exocad (1)

Страна

☐ Глобальный (1)

Product Reference

☐ Ti-Base 2.Generation (2)

☐ MedentiBase Abutment (2)

☐ MedentiCAD (2)

☐ Multi-Unit Abutment (2)

☐ Printed Model (1)

☐ Ti-Base ASC Flex (1)

☒ PreFace Abutment (1)

☐ TI-Forms (1)

[- Показать меньше](#)


MEDENTiKA PreFace Abutment all series (local milling)

exocad - V21-05.1

15. дек. 2021 ZIP, 27.7 MB

[Загрузить](#)

Библиотека PreFace (Премилл абатментов)

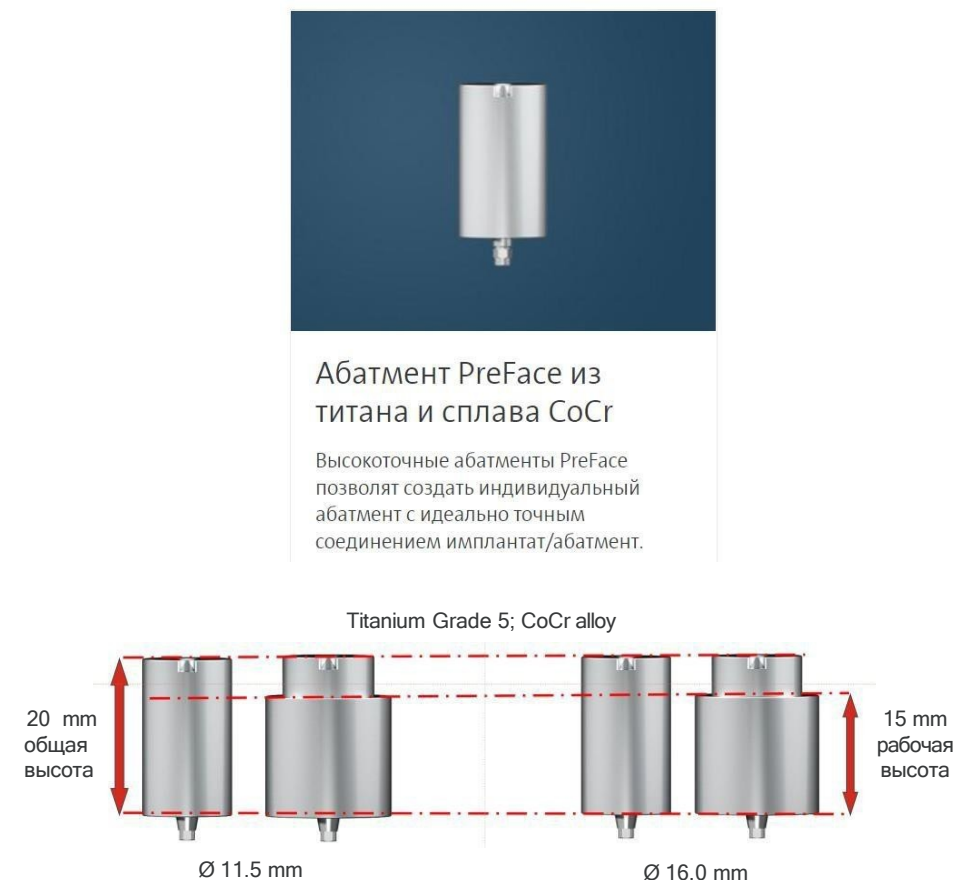

Software Download Center

1 результатов найдено

Дата

Поиск

exocad X

TI-Forms X

Очистить фильтры

Компания-партнер

☐ 3Shape (1)

☒ exocad (1)

Страна

☐ Глобальный (1)

Product Reference

☐ Ti-Base 2.Generation (2)

☐ MedentiBase Abutment (2)

☐ MedentiCAD (2)

☐ Multi-Unit Abutment (2)

☐ Printed Model (1)

☐ Ti-Base ASC Flex (1)

☐ PreFace Abutment (1)

☒ TI-Forms (1)

- Показать меньше



MEDENTiKA TI-Forms Abutment all series (local milling)

exocad - V22-09

18. окт. 2022 ZIP, 26.5 MB



Библиотека Premill (Премилл абатментов) для
фрезерных машин Amann Girrbach (недоступно
для России)




Абатмент PreFace из титана и сплава CoCr

Высокоточные абатменты PreFace
позволят создать индивидуальный
абатмент с идеально точным
соединением имплантат/абатмент.

ГДЕ СКАЧАТЬ БИБЛИОТЕКИ?

[Ссылка на магазин Straumann](#)

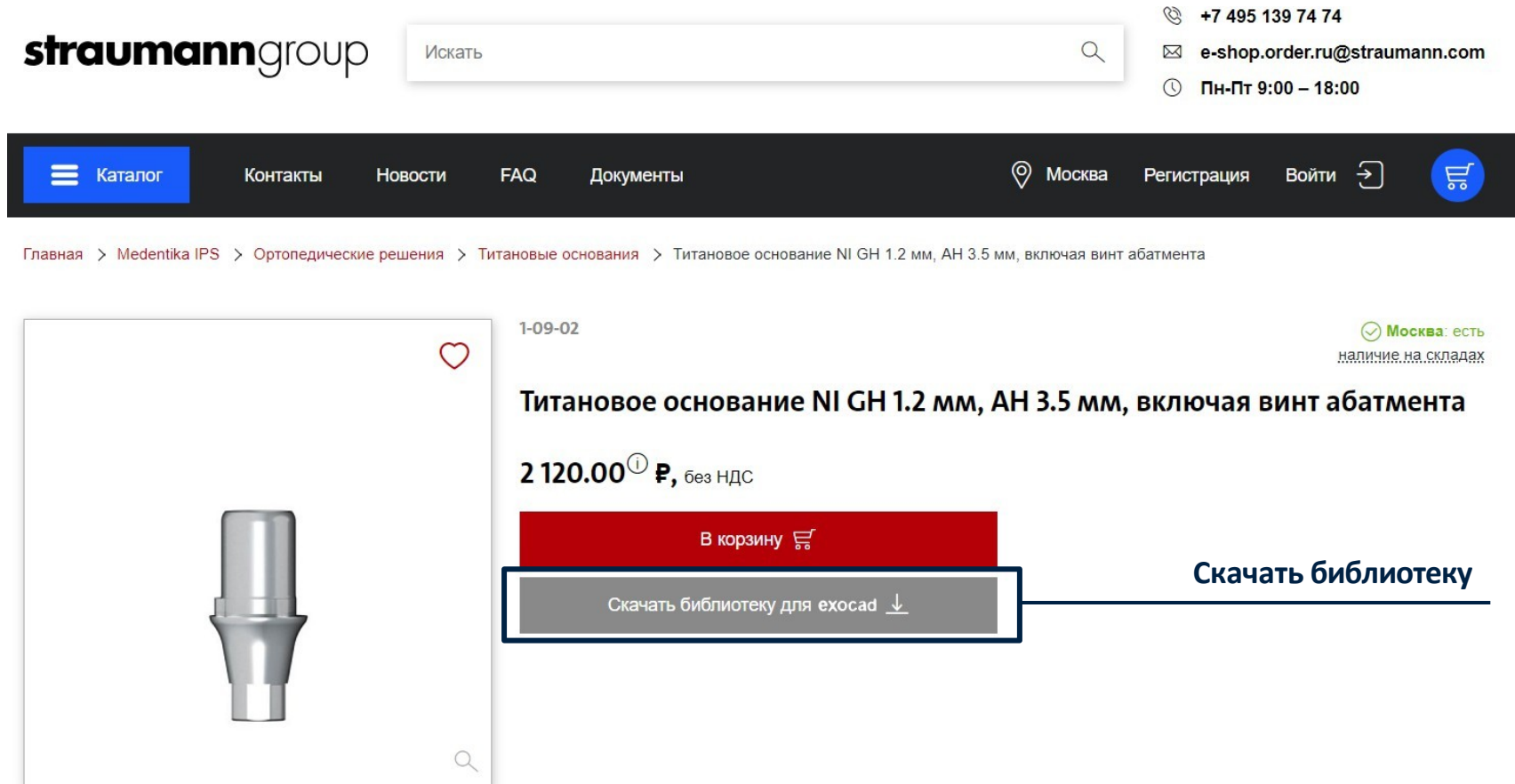

The screenshot shows the Straumann website interface. At the top, the 'straumanngroup' logo is on the left, and contact information is on the right: a phone icon with '+7 495 139 74 74', an email icon with 'e-shop.order.ru@straumann.com', and a clock icon with 'Пн-Пт 9:00 – 18:00'. Below this is a dark navigation bar with links: 'Каталог' (highlighted in blue), 'Контакты', 'Новости', 'FAQ', 'Документы', 'Москва' (with a location pin), 'Регистрация', 'Войти', and a shopping cart icon. The breadcrumb trail reads: 'Главная > Medentika IPS > Ортопедические решения > Титановые основания > Титановое основание NI GH 1.2 мм, АН 3.5 мм, включая винт абатмента'. The product image shows a grey titanium base. To its right, the date '1-09-02' is displayed. A green status message says 'Москва: есть наличие на складах'. The product title is 'Титановое основание NI GH 1.2 мм, АН 3.5 мм, включая винт абатмента'. The price is '2 120.00 ₺, без НДС'. There are two buttons: a red 'В корзину' button and a grey 'Скачать библиотеку для eхосad' button, which is highlighted with a blue box and a line pointing to the text 'Скачать библиотеку' on the right. A heart icon is in the top right of the image area, and a magnifying glass icon is in the bottom right.

straumanngroup

Искать

+7 495 139 74 74
e-shop.order.ru@straumann.com
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Каталог Контакты Новости FAQ Документы Москва Регистрация Войти

Главная > Medentika IPS > Ортопедические решения > Титановые основания > Титановое основание NI GH 1.2 мм, АН 3.5 мм, включая винт абатмента

1-09-02

Москва: есть наличие на складах

Титановое основание NI GH 1.2 мм, АН 3.5 мм, включая винт абатмента

2 120.00 ₺, без НДС

В корзину

Скачать библиотеку для eхосad

Скачать библиотеку

КАК И КУДА УСТАНОВИТЬ БИБЛИОТЕКИ?



MEDENTiKA_PreF
ace_all-series_loc
al-milling_V24-07
.zip



MEDENTiKA_Ti-B
ase_2.Generation
_all-series_local-
milling_V24-07





После того, как вы скачали архив, **разархивируйте его**




Перед тем, как добавлять библиотеки, убедитесь, что **папки разархивировались сразу с файлами, а не «папка в папке»**

▶ Находим расположение программы Exocad на вашем компьютере


▶ Путь для библиотек цифровой протетики

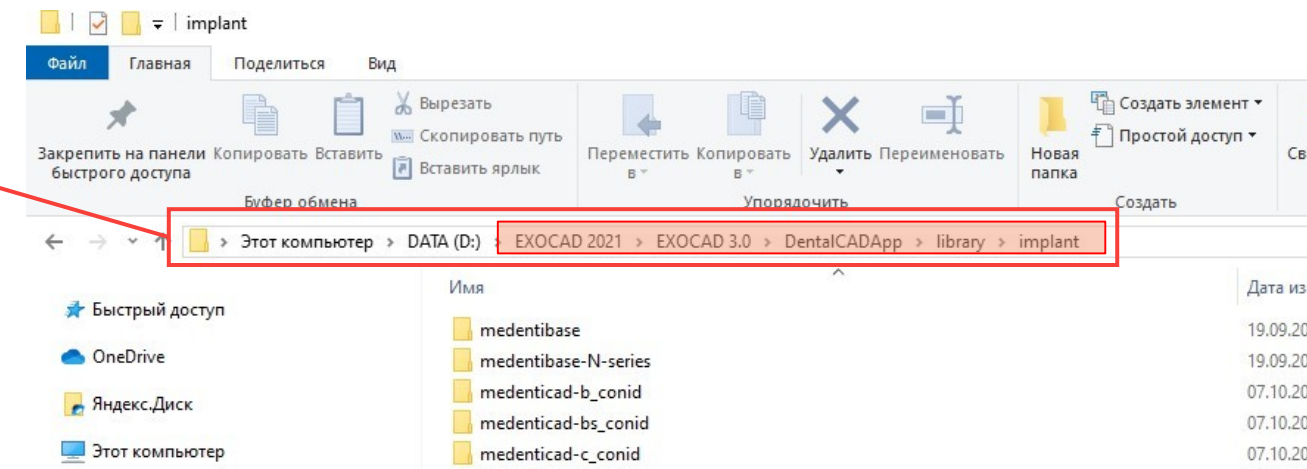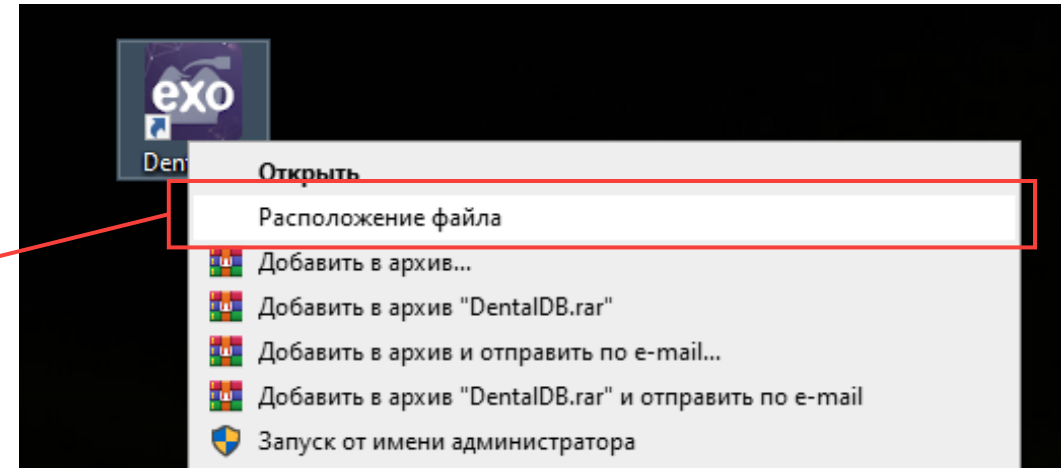

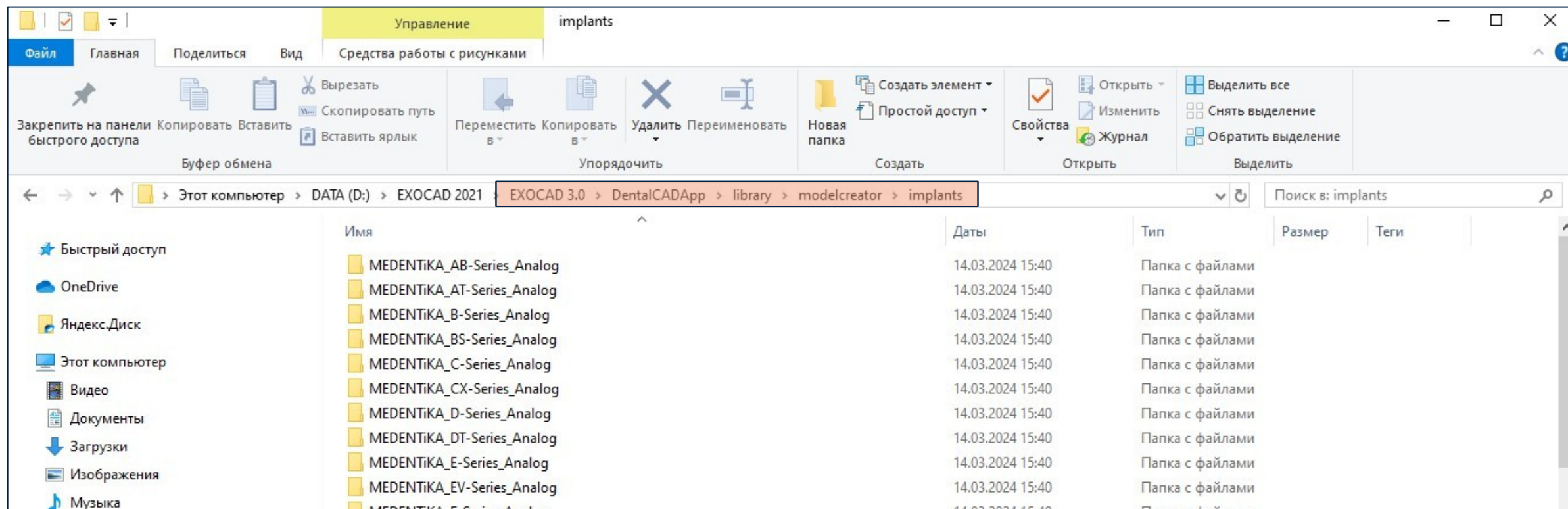


ПУТЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК ЦИФРОВЫХ АНАЛОГОВ


РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ

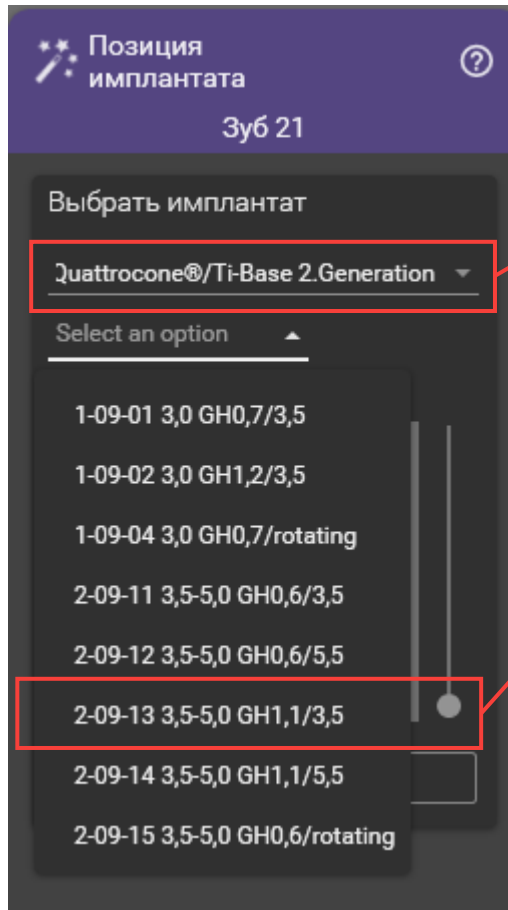


БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ ОСНОВАНИЙ

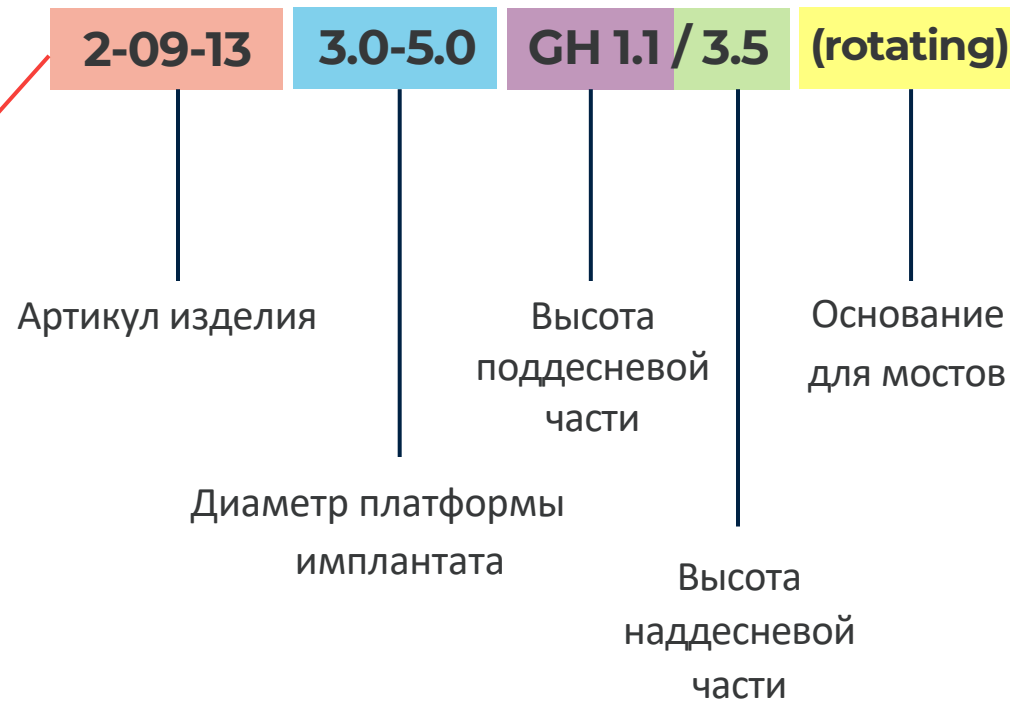



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ

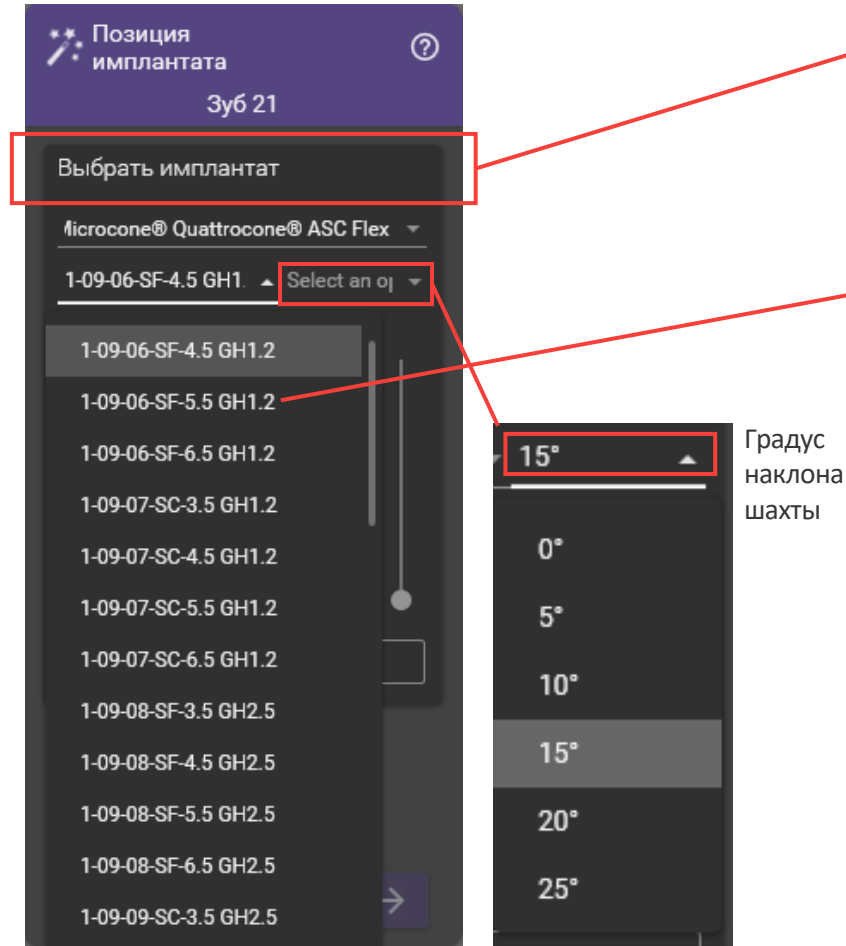

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИТАНОВЫХ ОСНОВАНИЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАКЛОНА ШАХТЫ

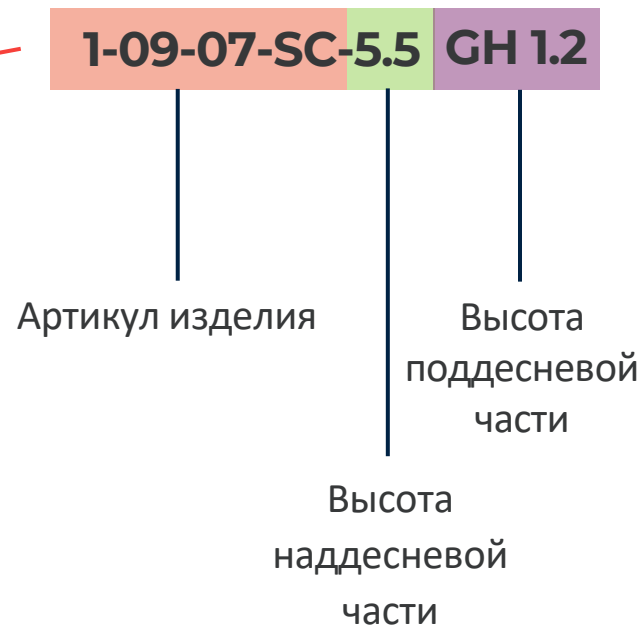

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ

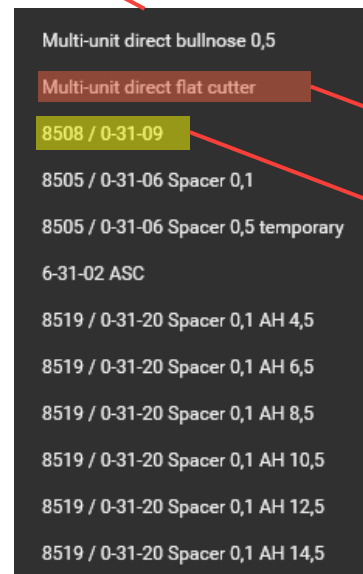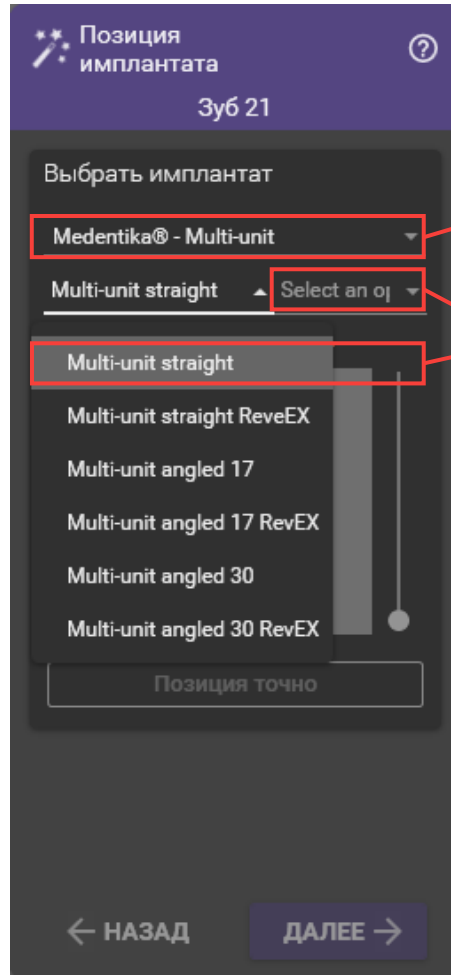

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТ НА МУЛЬТИ-ЮНИТАХ

Multi-Unit Straight/angled 17 RevEX

Тип сканмаркера
0-31-01 для **IPS**
8500 для **MPS**



Скан-аналог
8520



Сканмаркер для
использования
углового аналога




Для изготовления конструкций с
уровня мульти-юнита

8508 / 0-31-09
Артикулы колпачков
на мульти-юнит



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ

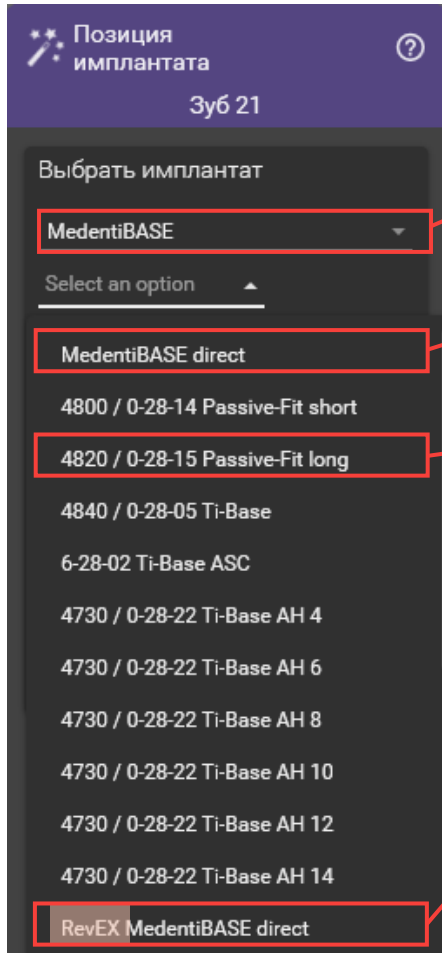

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ РАБОТ НА MEDENTiBASE

Для изготовления конструкций с уровня MedentiBASE

4820 / 0-28-15

Passive-Fit Long

Артикул изделия


Тип титанового колпачка

Использование RevEX сканмаркеров
(скан-аналогов)

4910



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ

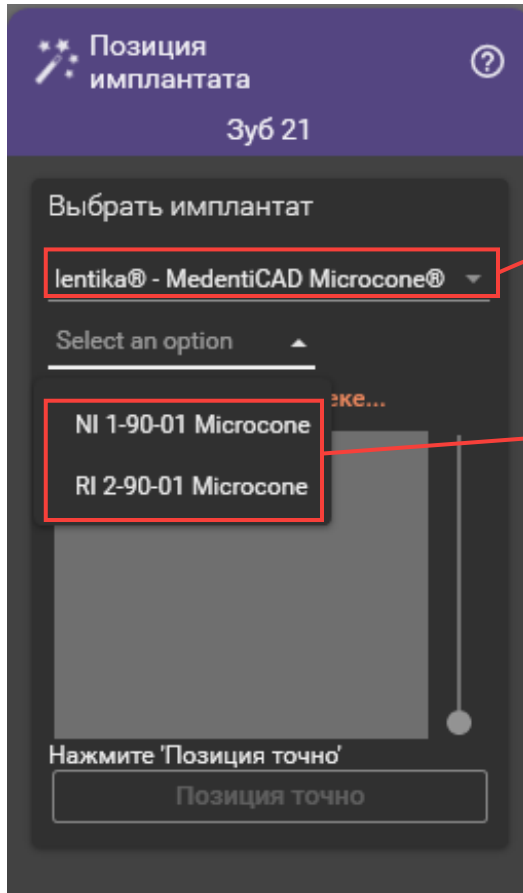


БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PREFACE/ ПРЕМИЛОВ




РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ ПОЗИЦИЙ БИБЛИОТЕК В ПРОГРАММЕ (MPS)



Библитеки для использования MPS протетики, **необходимо выбрать серию** (серия соответствует системе имплантатов)

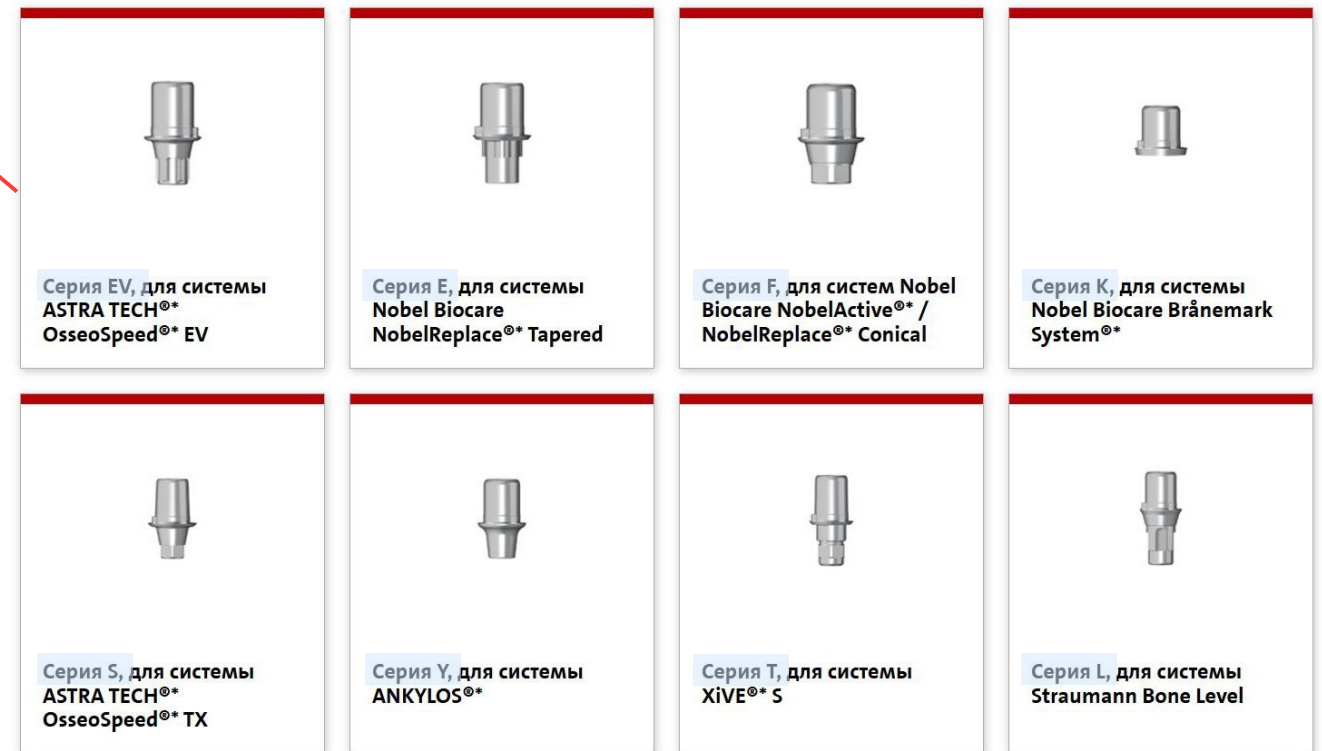

ЦИФРОВЫЕ АНАЛОГИ В ПРОГРАММЕ

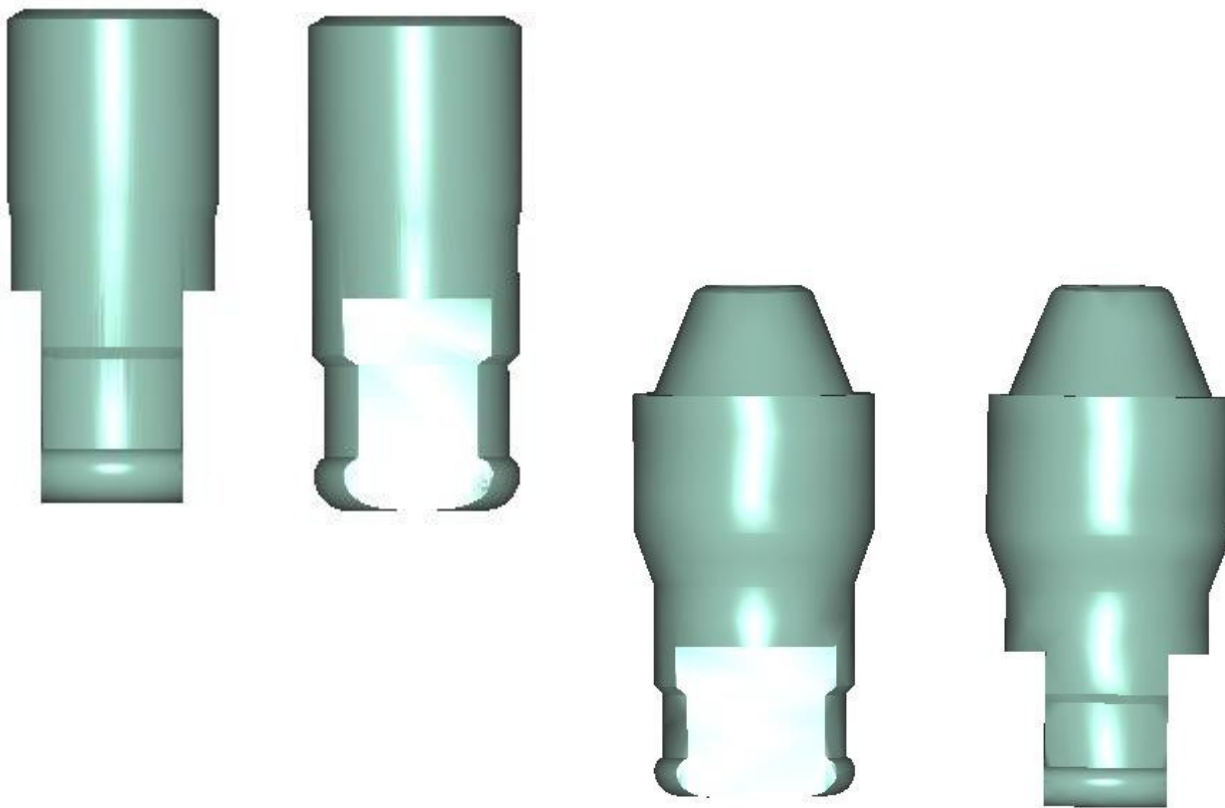


Цифровые аналоги Medentika самые короткие на рынке, в модель должны позиционироваться очень плотно, требуется усилие

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ СКАНМАРКЕРА

Использование бегунка позволяет обрезать сканмаркер и использовать для сопоставления только необходимую геометрию

Чтобы проанализировать сопоставление и убедиться в его точности, зажмите клавишу CTRL и нажмите "Позиция точно"

Изменение позиции интерфейса

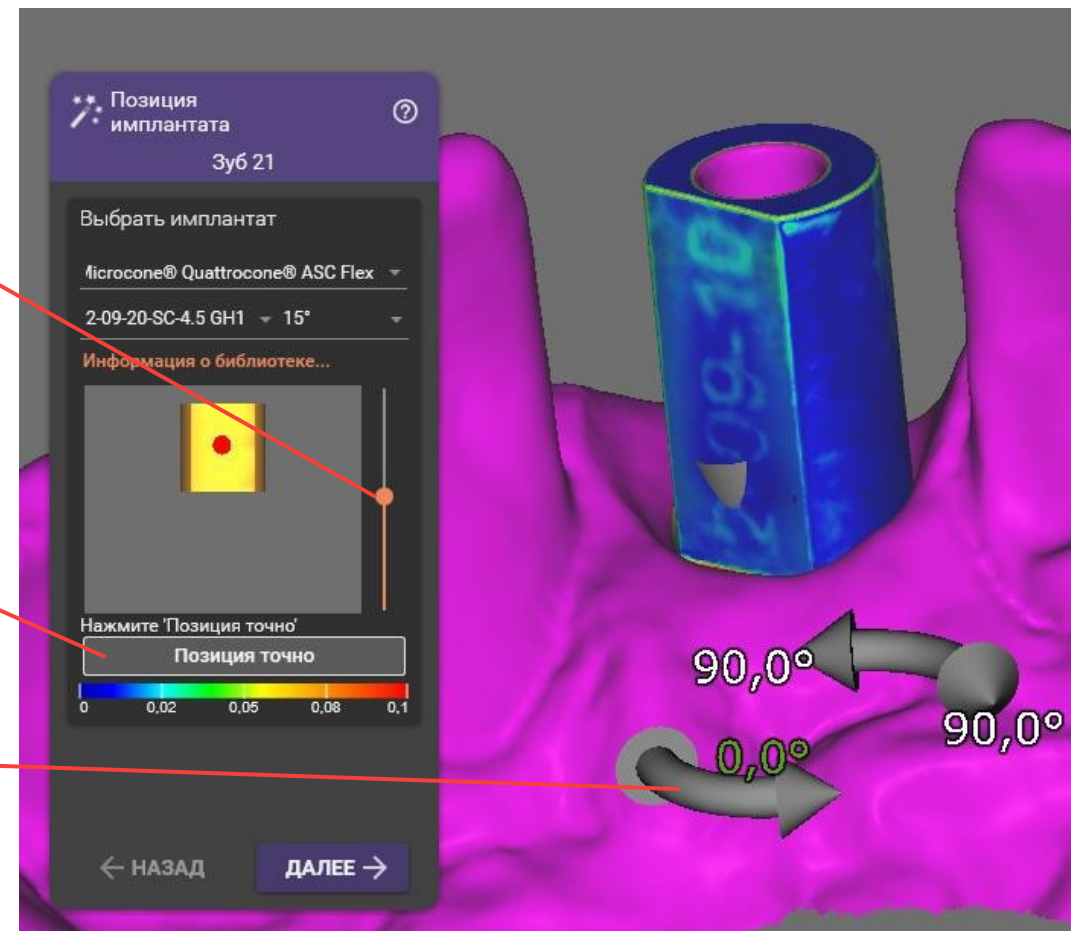

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

[КАТАЛОГ IPS](#)

[КАТАЛОГ MPS](#)

[ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН](#)



Техподдержка