


NEUE EBENEN ERKUNDEN

NEODENT® HELIX SHORT
ARBEITSPROTOKOLL

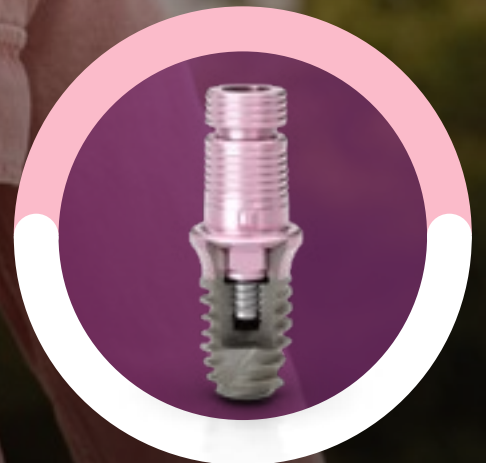

HS
Verbindung



Acqua
Oberfläche

IMPLANTAT

	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
4 mm	140.1082	140.1066	140.1070	140.1074	140.1078
5.5 mm	140.1083	140.1067	140.1071	140.1075	140.1079
7 mm	140.1084	140.1068	140.1072	140.1076	140.1080
8.5 mm	140.1085	140.1069	140.1073	140.1077	140.1081

CHIRURGIKASSETTE



Helix Short
Chirurgiekassette

110.317 Ohne Inhalt

BOHRSEQUENZ

Implantat- durchmesser	Knochen- klassen	Spiralbohrer Ø 2.0	zylindrisch Ø 2.7	konisch Ø 3.75	konisch Ø 3.75+	konisch Ø 4.0	konisch Ø 4.0+	konisch Ø 5.0	konisch Ø 5.0+	konisch Ø 6.0	konisch Ø 6.0+	konisch Ø 7.0	konisch Ø 7.0+	Knochen- profilbohrer
3.75	I/II	*	✓	✓	✓									*
	III/IV	*	✓	✓										
4.0	I/II	*	✓	*		✓	✓							*
	III/IV	*	✓	*		✓								
5.0	I/II	*	✓	*		✓		✓	✓					*
	III/IV	*	✓	*		✓		✓						
6.0	I/II	*	✓	*		✓		✓		✓	✓			
	III/IV	*	✓	*		✓		✓		✓				
7.0	I/II	*	✓	*		✓		✓		✓		✓	✓	
	III/IV	*	✓	*		✓		✓		✓		✓		

✓ Empfohlene Sequenz

* Optional

BOHRSTOPPS

Bohrstopps



- 125.181 4.0 Bohrstopp Ø 2.0 / 2.7 / 3.75 / 4.0
- 125.182 5.5 Bohrstopp Ø 2.0 / 2.7 / 3.75 / 4.0
- 125.183 7.0 Bohrstopp Ø 2.0 / 2.7 / 3.75 / 4.0
- 125.184 8.5 Bohrstopp Ø 2.0 / 2.7 / 3.75 / 4.0

- 125.185 4.0 Bohrstopp Ø 5.0
- 125.186 5.5 Bohrstopp Ø 5.0
- 125.187 7.0 Bohrstopp Ø 5.0
- 125.188 8.5 Bohrstopp Ø 5.0

- 125.189 4.0 Bohrstopp Ø 6.0 / 7.0
- 125.190 5.5 Bohrstopp Ø 6.0 / 7.0
- 125.191 7.0 Bohrstopp Ø 6.0 / 7.0
- 125.192 8.5 Bohrstopp Ø 6.0 / 7.0

RÖNTGENPOSITIONIERER /
RICHTUNGSINDIKATOR



HS Röntgenpositionierer /
Richtungsindikator 2.7/3.75
128.039

SCHRAUBENDREHER UND
DREHMOMENTSCHLÜSSEL



HS Implantat
Schraubendreher – Winkelstück
105.153



HS Implantat
Schraubendreher –
Drehmomentschlüssel
(kurz)
105.154



HS Implantat
Schraubendreher –
Drehmomentschlüssel
105.155



Drehmoment-
schlüssel
104.050

VERSCHLUSSSCHRAUBE



HS
Verschlusschraube
117.025



Neo Handschraubendreher

- 104.058 Kurz
- 104.060 Mittel
- 104.070 Lang

GINGIVAFORMER



HS Gingivaformer
1.5 / 2.5
106.270



HS Gingivaformer
1.5 / 2.5 / 3.5 /
4.5 / 5.5
106.273



Neo Handschraubendreher

- 104.058 Kurz
- 104.060 Mittel
- 104.070 Lang

CHIRURGISCHE
HILFSINSTRUMENTE



HS Höhenmesser
128.038


Prothetisches Arbeitsprotokoll

Verschraubte/zementierte Lösungen | Einzelzahnversorgungen | Implantatniveau


Verschraubte Lösungen | Mehrgliedrige Versorgungen | Implantatniveau

WAHL DES SEKUNDÄRTEILS

HS Titanbasis für Krone Ø 4.5

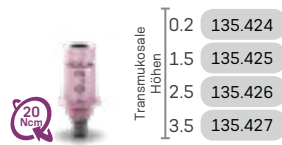

HS Titanbasis für Brücke Ø 4.8

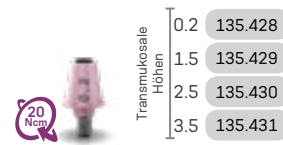


ABFORMUNG / SCANNEN



MODELLHERSTELLUNG




MODELLSCAN

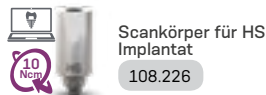


PROVISORISCHE VERSORGUNG

HS Provisoriumssekundärteil für Krone

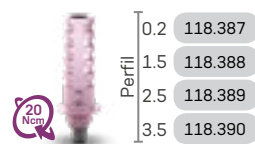


HS Provisoriumssekundärteil für Brücke

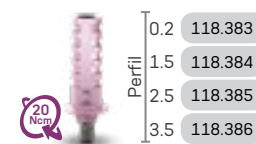


DEFINITIVE VERSORGUNG



Ausbrennbare Kappe für Titanbasis

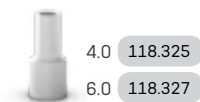



CAD/CAM

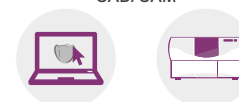

SCHRAUBEN

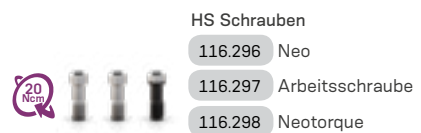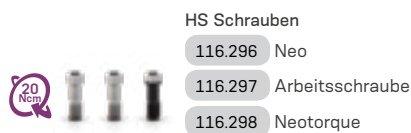


SCHRAUBENDREHER

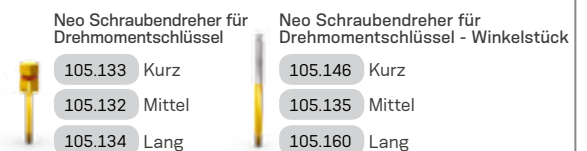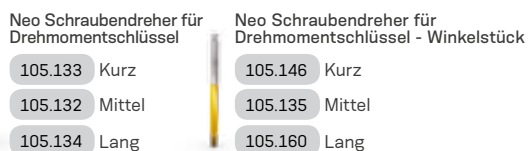

Zementierte Lösungen | Mehrgliedrige Versorgungen | Sekundärteilniveau

Deckprothese

WAHL DES SEKUNDÄRTEILS	<p>HS Mini Konisches Sekundärteil</p> <table border="1"> <tr><td>0.2</td><td>115.291</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>115.292</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>115.293</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>115.294</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>115.295</td></tr> </table> <p>Transmukosale Höhen</p> <p>HS Mini Konisches Sekundärteil 17°</p> <table border="1"> <tr><td>0.6</td><td>115.296</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>115.297</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>115.298</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>115.299</td></tr> </table> <p>Transmukosale Höhen</p>	0.2	115.291	1.5	115.292	2.5	115.293	3.5	115.294	4.5	115.295	0.6	115.296	1.5	115.297	2.5	115.298	3.5	115.299
0.2	115.291																		
1.5	115.292																		
2.5	115.293																		
3.5	115.294																		
4.5	115.295																		
0.6	115.296																		
1.5	115.297																		
2.5	115.298																		
3.5	115.299																		
WINKELGRADMESSE	<p>HS Winkelgradmesser 17°</p> <p>128.037</p>																		
ABFORMUNG / SCANNEN	<p>Scankörper für Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>108.218</p> <p>Abformpfosten für Mini konisches Sekundärteil, offener Löffel Slim</p> <p>108.176</p>																		
PROVISORISCHE VERSORUNG	<p>Kappe, Titan, für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>118.302</p> <p>Schutzzylinder für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>106.268</p>																		
MODELLHERSTELLUNG	<p>Mini Konisches Sekundärteilanalog</p> <p>101.092 Repositionierbares Hybridanalog (herkömmlich/digital)</p> <p>101.020 Standard</p>																		
DEFINITIVE VERSORUNG	<p>CoCr-Kappe für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>118.303</p> <p>Ausbrennbare Kappe für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>118.301</p> <p>One-Step-Hybridkappe für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>118.382</p>																		
SCHRAUBEN UND POLIERSCHUTZ	<p>Polierschutz für Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>123.008</p> <p>Schraube für Neo Mini Konisches Sekundärteil</p> <p>116.269 Titan</p> <p>116.270 Neotorque</p>																		
SCHRAUBENDREHER	<p>Sechskant-Prothetischschraubendreher</p> <p>105.137</p> <p>105.138</p> <p>Neo Schraubendreher für Drehmomentschlüssel</p> <p>105.133 Kurz</p> <p>105.132 Mittel</p> <p>105.134 Lang</p> <p>Neo Schraubendreher für Drehmomentschlüssel – Winkelstück</p> <p>105.146 Kurz</p> <p>105.135 Mittel</p> <p>105.136 Lang</p>																		

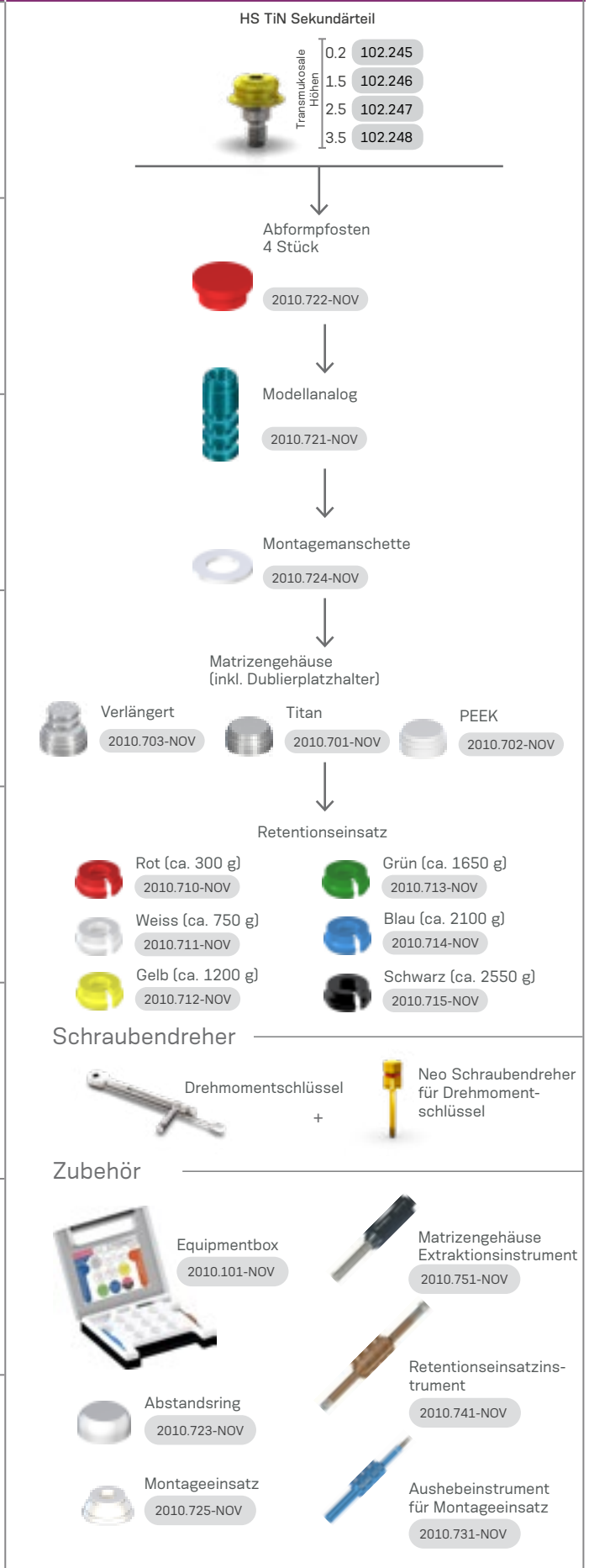

© 2026 – JIGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. All rights reserved. Some products may not be available for purchase yet. For more informations, please contact your local distributor. とひつかりの笑顔

Neodent® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der JIGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

WIR SIND FÜR SIE DA
Kundenberatung: 0761 / 4501 333
Bestellung: order.de@straumann.com

новые улыбки каждый день

Vertrieb
Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg
Tel.: 0761/4501 0
Fax: 0761/4501 149
www.straumann.de

Hersteller
JIGC Indústria e Comércio de
Materiais Dentários S.A.
Juscelino Kubitschek de
Oliveira Avenue, 3291
81270-200 Curitiba (PR)
www.straumann.com/neodent

Distributor Österreich
Straumann GmbH
Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien
Tel.: +43 1 294 06 60
www.straumann.at

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

 **NEODENT.**
A Straumann Group Brand