

CUADRO SINÓPTICO
QUIRÚRGICO

Superficie

Fresa Lanza

Fresa 2.0

Paralelizadores

Secuencia de
Fresas para
Implantes

Conexiones y Llave Carraca
Dinamométrica

Tornillo de Cierre

Cicatrizadores

TitamaxWS
Cortical

Velocidad de fresado: 200-300 rpm | Velocidad de Inserción: 30 rpm | Torque máximo: 60 N.cm



Ø 4.0

NeoPoros
5.0 109.604
6.0 109.605



Ø 5.0

NeoPoros
5.0 109.574
6.0 109.575



Ø 6.0

NeoPoros
5.0 109.576
6.0 109.577



Lanza
103.170



Ø 2.0
103.162



Ø 3.3/4.0
128.021



Ø 4.3/5.0
128.024



Ø 5.3/6.0
128.025

TitamaxWS
Medular

Velocidad de fresado: 200-300 rpm | Velocidad de Inserción: 30 rpm | Torque máximo: 60 N.cm



Ø 5.0

NeoPoros
5.0 109.578
6.0 109.579



Ø 6.0

NeoPoros
5.0 109.580
6.0 109.581






Lanza
103.170



Ø 2.0
103.162



Ø 4.3/5.0
128.024

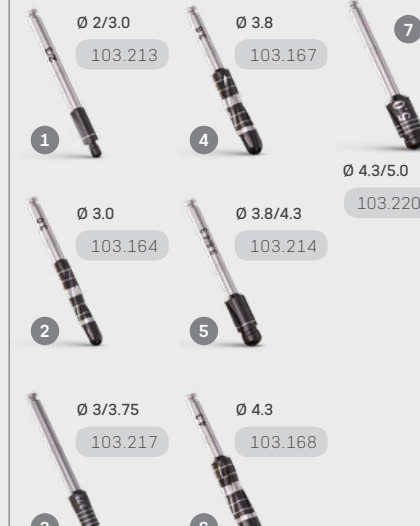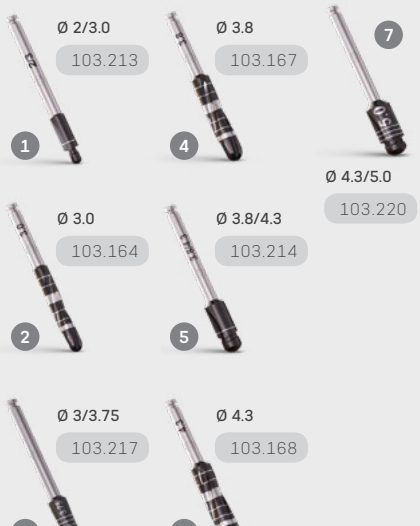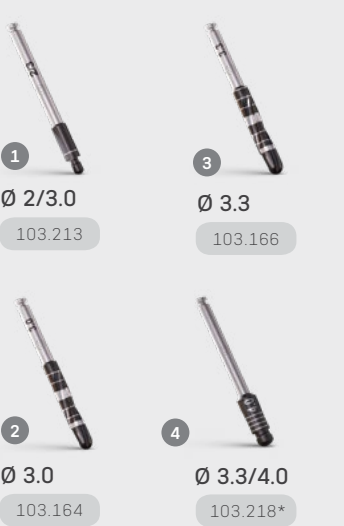

*FRESA OPCIONAL



Conexión hexagonal para
Contra-ángulo
105.002



Conexión hexagonal para Carraca
Corta 105.001
Larga 105.018



Llave Carraca
Dinamométrica
104.050



Tornillo de Cierre
WS
117.016



Desatornillador
Manual 1.2
104.007



Cicatrizadores WS
0.8mm 106.186
1.5mm 106.187
2.5mm 106.188
3.5mm 106.189



Desatornillador
Manual 1.2
104.007

ImplantesWS
Cono Morse

CUADRO
SINÓPTICO



NEODENT®
NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

TIPOS DE RESTAURACIÓN	Soluciones Atornilladas		Soluciones Cementadas
	Unitaria	Múltiples	Unitarias/Múltiples
Nivel de Trabajo	Pilar WS	Mini Pilar Cónico WS	Pilar Muñón Universal WS
Selección del Componente Protésico	Pilar WS  0.8mm 1.5mm 2.5mm 3.5mm 115.180 115.181 115.182 115.183 Conexión Torque 1.6 32N.cm 105.006	Mini Pilar Cónico WS  0.8mm 1.5mm 2.5mm 3.5mm 115.176 115.177 115.178 115.179 Conexión Torque Pilares Protésicos Torque 32N.cm 105.009	Pilar Muñón Universal WS  0.8mm 1.5mm 2.5mm 3.5mm 114.183 114.184 114.185 14.186 4mm 6mm 114.187 114.188 114.189 114.190 Conexión Torque 1.2 32 N.cm 105.005
	Impresión	Transfer Pilar CM  Cubeta Cerrada 108.040  Cubeta Abierta 108.039	Transfer Mini Pilar Cónico  Cubeta Abierta 108.022 Tornillo corto: 116.036  Cubeta Cerrada 108.021  Multifuncional 108.068
Producción del Modelo	Análogo Pilar CM  101.037	Análogo Mini Pilar Cónico  101.020	Análogo Implante WS  101.055 Análogo Muñón Universal  4mm Ø 4.5 101.040  6mm 101.041
Prótesis Temporal	Cilindro Pilar CM Titanio  118.179 Casquillo de Protección Pilar CM  106.102 Conexión Torque 1.2 10 N.cm 105.005	Cilindro Mini Pilar Cónico Titanio  118.113 Casquillo de Protección Mini Pilar Cónico  106.054 Barra Distal  Mini Pilar Cónico 125.011 Cilindro Barra Distal  Mini Pilar Cónico 118.169 Conexión Torque 1.2 10 N.cm 105.005	Cilindro Provisorio Pilar Muñón Universal  4 mm 6 mm Ø 4.5 118.194 118.195
Escaneo del Modelo	No se aplica	No se aplica	No se aplica
Cilindros definitivos	Cilindros Pilar CM  Calcinable 118.180  CoCr 118.242 Conexión Torque 1.2 10 N.cm 105.005	Cilindros Ajuste Pasivo Mini Pilar  Calcinable 118.083  Latón 118.081  Titanio 118.082 Conexión Torque 1.2 10 N.cm 105.005 Cilindros Mini Pilar Cónico  Calcinable 118.112  CoCr 118.209	Cilindro Calcinable Pilar Muñón Universal  4 mm 6 mm Ø 4.5 118.183 118.184 Conjunto Pilar Muñón Universal  4mm Ø 4.5 108.062  6mm Ø 4.5 108.063
Tornillos y Protector de Pulido	Tornillo Cilindro Pilar CM  Neotorque 116.228 Titanio 116.038 Tornillo de Trabajo Ajuste Pasivo Pilar CM  116.087	Tornillo Cilindro Mini Pilar Cónico  Neotorque 116.227 Titanio 116.037 Tornillo de Trabajo Ajuste Pasivo Mini Pilar Cónico  116.086	No se aplica
Conexiones Torque	Conexiones Torque  1.2 105.005  1.6 105.006	Conexión Torque  1.2 105.005 Conexión Torque Pilares Protésicos  105.009	Conexión Torque  1.2 105.005