

UNA NUOVA CONCEZIONE

PROTOCOLLO DI LAVORO PER
NEODENT[®] CERAMIC IMPLANT SYSTEM



Ceramic
Implant System



Connessione
ZiLock[®]

| Impianto Zi Ø 3.75 mm - Chirurgia

| Impianto Zi Ø 4.3 mm - Chirurgia

| Protesi



Ø 3.75

CHIRURGIA


NEODENT®

Lunghezza
impianto



10.0 180.002
11.5 180.003
13.0 180.004

Sequenza di
frese per tutti
i tipi di osso

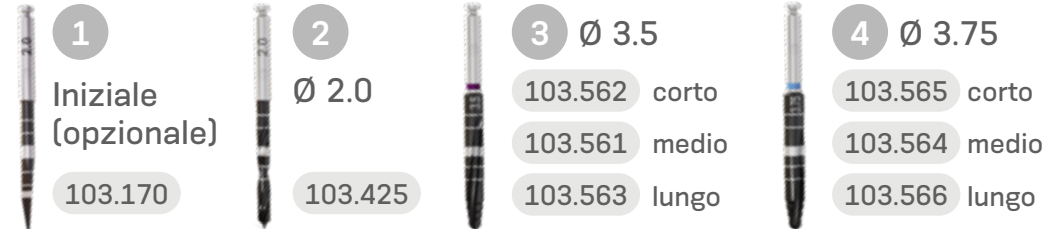

1 Iniziale (opzionale) 103.170
2 Ø 2.0 103.425
3 Ø 3.5 103.562 corto
103.561 medio
103.563 lungo
4 Ø 3.75 103.565 corto
103.564 medio
103.566 lungo

Indicatore
di direzione



Ø 3.0/3.75
128.020

Sequenza
di frese per
osso di tipo
I, II e III



5
Fresa per svasare Ø 3.75
103.488

Sequenza
di frese per
osso di tipo
I e II



6
Maschiatore Ø 3.75
111.046

Fase di
guarigione



Vite di
Copertura
Zi
117.023



Moncone di Guarigione Zi
106.233 3.75x1.5 mm
106.234 3.75x2.5 mm
106.235 4.5x1.5 mm
106.236 4.5x2.5 mm

Inseritori e
Cricchetto di
Serraggio




Cacciavite
Manuale Neo
104.058 Corto
104.060 Medio
104.059 Lungo



Inseritore per
impianti per
contrangolo
105.002



Inseritore per
impianti per
cricchetto di
serraggio
(corto)
105.001

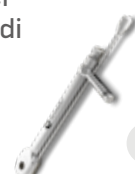

Cricchetto
di
Serraggio
104.050

Ø 4.3

CHIRURGIA

NEODENT®

Lunghezza
impianto



10.0 180.006
11.5 180.007
13.0 180.008

Sequenza di
frese per tutti
i tipi di osso



1
Iniziale
(opzionale)
103.170



2
Ø 2.0
103.425



3 Ø 3.5
103.400 Corto
103.399 Medio
103.401 Lungo



4 Ø 4.3
103.409 Corto
103.408 Medio
103.410 Lungo

Indicatore
di direzione



Ø 3.6/4.3
128.022

Sequenza
di frese per
osso di tipo
I, II e III



5
Fresa per svasare Ø 4.3
103.450

Sequenza
di frese per
osso di tipo
I e II



6
Maschiatore Ø 4.3
111.048

Fase di
guarigione



Vite di
Copertura
Zi
117.023



Moncone di Guarigione Zi

106.233 3.75x1.5 mm
106.234 3.75x2.5 mm
106.235 4.5x1.5 mm
106.236 4.5x2.5 mm

Inseritori e
Cricchetto di
Serraggio



Cacciavite
Manuale Neo
104.058 Corto
104.060 Medio
104.059 Lungo



Inseritore per
impianti per
contrangolo
105.002



Inseritore per
impianti per
cricchetto di
serraggio
(corto)
105.001



Cricchetto
di
Serraggio
104.050



Scelta del moncone



Base Zi

- 135.254 3.75x4x1.5 mm
- 135.255 3.75x4x2.5 mm
- 135.256 4.5x4x1.5 mm
- 135.257 4.5x4x2.5 mm



Base Zi C

- 135.258 4.65x4.70x1.5 mm
- 135.259 4.65x4.70x2.5 mm



Moncone CR

- 114.854 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.855 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.856 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.857 4.5x5.0x2.5 mm



Moncone Anatomico CR 17°

- 114.858 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.859 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.860 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.861 4.5x5.0x2.5 mm

Impronta



Scanbody
Impianto

108.184



Cappetta per Impronta per
Impianto Exact in ceramica -
cucchiaio chiuso e aperto

- | Regolare | Lungo |
|----------|---------|
| 108.186 | 108.187 |
| 108.188 | 108.189 |

Realizzazione del modello



Analogo Ibrido
Riposizionabile

101.080



Analogo per
Moncone CR

- 101.105 4.0x5.0 mm
- 101.106 4.5x5.0 mm

Provvisorio



Moncone PEEK CR

- 114.888 4.0x5.0x1.5 mm
- 114.889 4.0x5.0x2.5 mm
- 114.886 4.5x5.0x1.5 mm
- 114.887 4.5x5.0x2.5 mm



Cappetta per impronta/
cappetta provvisoria

- 108.201 4.0x5.0 mm
- 108.202 4.5x5.0 mm

Cappetta definitiva



CARES
Visual

3Shape

Dental
Wings

Exocad



Cappetta
calcinabile


- 118.343 3.75x4 mm
- 118.325 4.5x4 mm



Cappetta Calcinabile
per Moncone CR

- 118.367 4.0x5.0 mm
- 118.368 4.5x5.0 mm

Inseritori

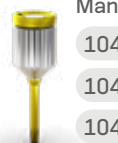

Cacciavite
Manuale Neo

- 104.058 Corto
- 104.060 Medio
- 104.059 Lungo



Cacciavite Neo per
Cricchetto di Serraggio

- 105.133 Corto
- 105.132 Medio
- 105.134 Lungo

© 2023 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. All rights reserved. All brands listed in this material, registered or not, are the property of JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. The reproduction of this material without prior authorization is prohibited. Some products may not be available for purchasing yet. For further information, please contact your local distributor.

Neodent, Acqua, Helix GM, Grand Morse, are trademarks or registered trademarks of JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Dentsply Sirona is a trademark or registered trademark of Dentsply Sirona, Inc. MEDENTiKA is a trademark or registered trademark of Medentika GmbH. Novaloc is a trademark or registered trademark of Valoc AG. Amann Girrbach is a trademark or registered trademark of Amann Girrbach AG.

1016_neodent_gm_brochure_en_eU_E00_hr_211222

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

Produttore

JJGC Indústria e Comércio
de Materiais Dentários S.A.
Juscelino Kubitschek de
Oliveira Avenue, 3291
81270-200 Curitiba (PR)

National Distributor

Institut Straumann AG
Straumann Group Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.neodent.ch

Assistenza tecnica / ordinazioni

Tel. ordini: 0800 810 812
Hotline: 0800 810 814
Tel. supporto digitale: 0800 810 816
E-mail: sales.ch@straumann.com
Online: www.straumann.ch/it/eshop

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

Il suo diritto di opposizione: Se si oppone al trattamento dei suoi dati per scopi promozionali o desidera revocare il consenso, è sufficiente inviare un'e-mail al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo privacy.ch@straumann.com o inviare una lettera a Institut Straumann AG, Datenschutzbeauftragter, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Svizzera. Ciò si applica anche se si oppone al trattamento dei suoi dati per motivi derivanti dalla sua situazione particolare.

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

 **NEODENT**[®]
A Straumann Group Brand

