


*GRANDEZA EM
CASOS GRAVES DE
MAXILA ATRÓFICA
NEODENT[®] GM ZYGOMA-S*





Neodent® GM Zygoma-S

GRANDEZA EM CASOS GRAVES DE MAXILA ATRÓFICA

Melhore sua prática fornecendo uma solução em maxila atrófica grave projetada para atender às expectativas do paciente em relação ao tratamento com implantes.

Atender às expectativas dos pacientes edêntulos com tempos de tratamento mais curtos e realizar melhorias estéticas e funcionais imediatas apresenta desafios significativos para os dentistas, sobretudo em pacientes com deficiências anatômicas.



A busca por uma abordagem de tratamento que proporcione melhor estabilidade à prótese e menor morbidade para o paciente, evitando procedimentos ósseos, faz com que os dentistas precisem de uma solução confiável e eficaz para se adequar a uma maior assertividade do tratamento e taxas de aceitação mais altas.

Além disso, técnicas cirúrgicas complexas requerem protocolos de perfuração eficientes e opções protéticas diretas, respectivamente para evitar o desvio do implante e contribuir para o sucesso do tratamento a longo prazo.

O Neodent® GM Zygoma-S fornece uma solução imediata como alternativa para procedimentos de enxerto ósseo projetados para proporcionar estabilidade, previsibilidade do tratamento e precisão, para atender às expectativas do paciente por meio de seu design versátil e opções adaptadas à eficiência anatômica e relação tecidual.



UM SORRISO PARA TODOS

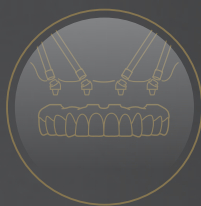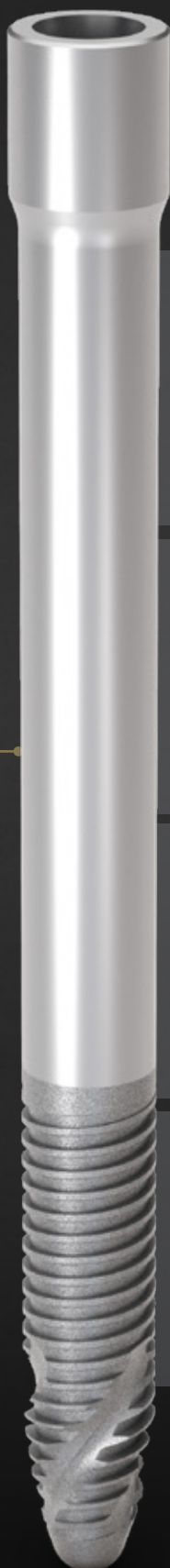

SOLUÇÃO IMEDIATA EXCELENTE PARA TRATAMENTO DE CASOS DE MAXILA ATRÓFICA GRAVE

Função imediata em tempos de tratamento mais curtos, evitando procedimentos de enxerto




EFICIÊNCIA ANATÔMICA E ESTABILIDADE

Projetado para alcançar alta estabilidade primária e compatibilidade anatômica.



VERSATILIDADE PROTÉTICA PARA NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO

Projetado para alcançar alta estabilidade primária e compatibilidade anatômica.

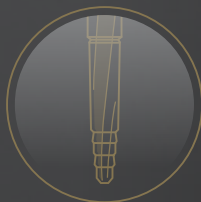


PREVISIBILIDADE DOS RESULTADOS CIRÚRGICOS

Intuição e eficiência em todas as etapas do procedimento.




SOLUÇÃO IMEDIATA EXCELENTE PARA TRATAMENTO DE CASOS DE MAXILA ATRÓFICA GRAVE

O sistema de implantes Neodent® GM Zygoma-S faz parte da solução Grand Morse NeoArch® e oferece uma solução otimizada para protocolos de tratamento fixo imediato em pacientes edêntulos com maxila atrófica grave, permitindo melhorar significativamente a satisfação do paciente^[4].

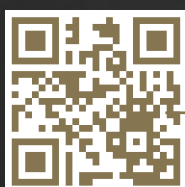


Assista a um vídeo animado desta imagem
Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo:

 neodent.com/zygoma-s_solution

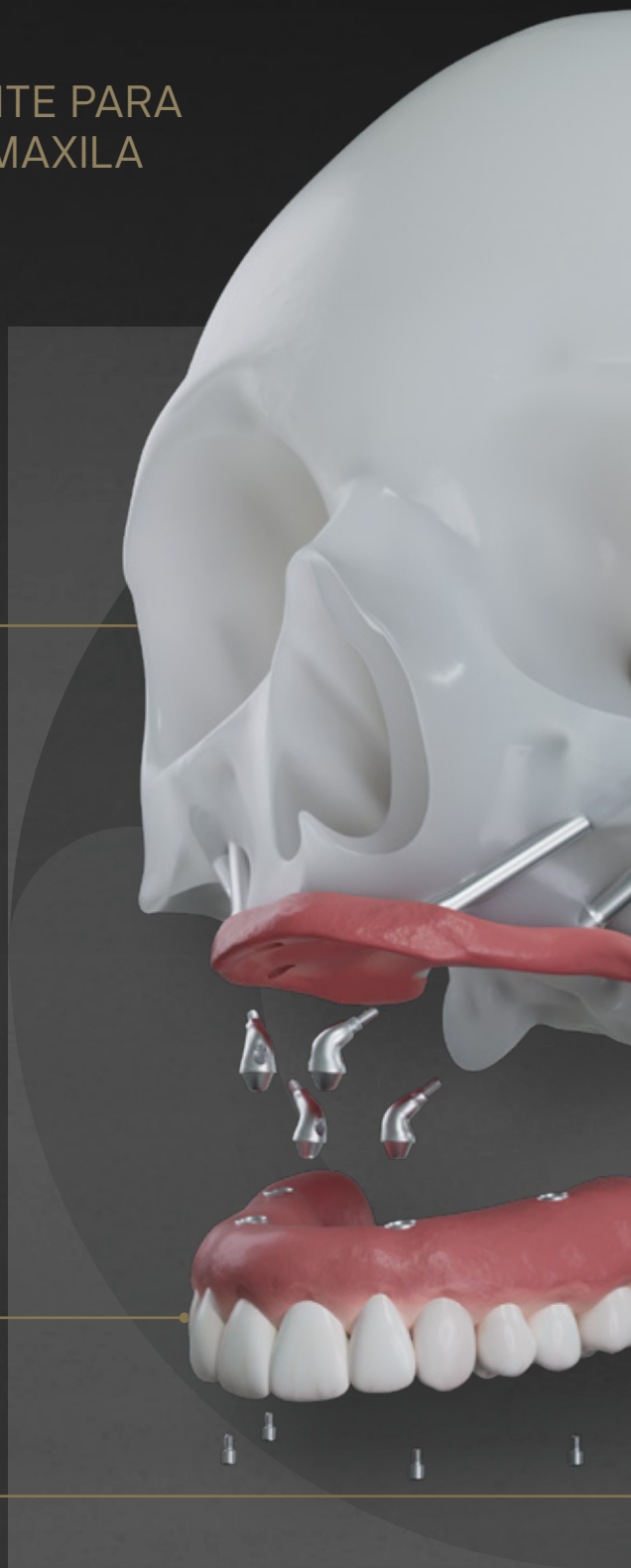

“ O implante Zygoma-S é o resultado da evolução dos conceitos de tratamento da Neodent, com base na versatilidade e nos resultados imediatos. É uma solução de ponta para reabilitação de maxilas atróficas. ”

DR. GENINHO THOMÉ

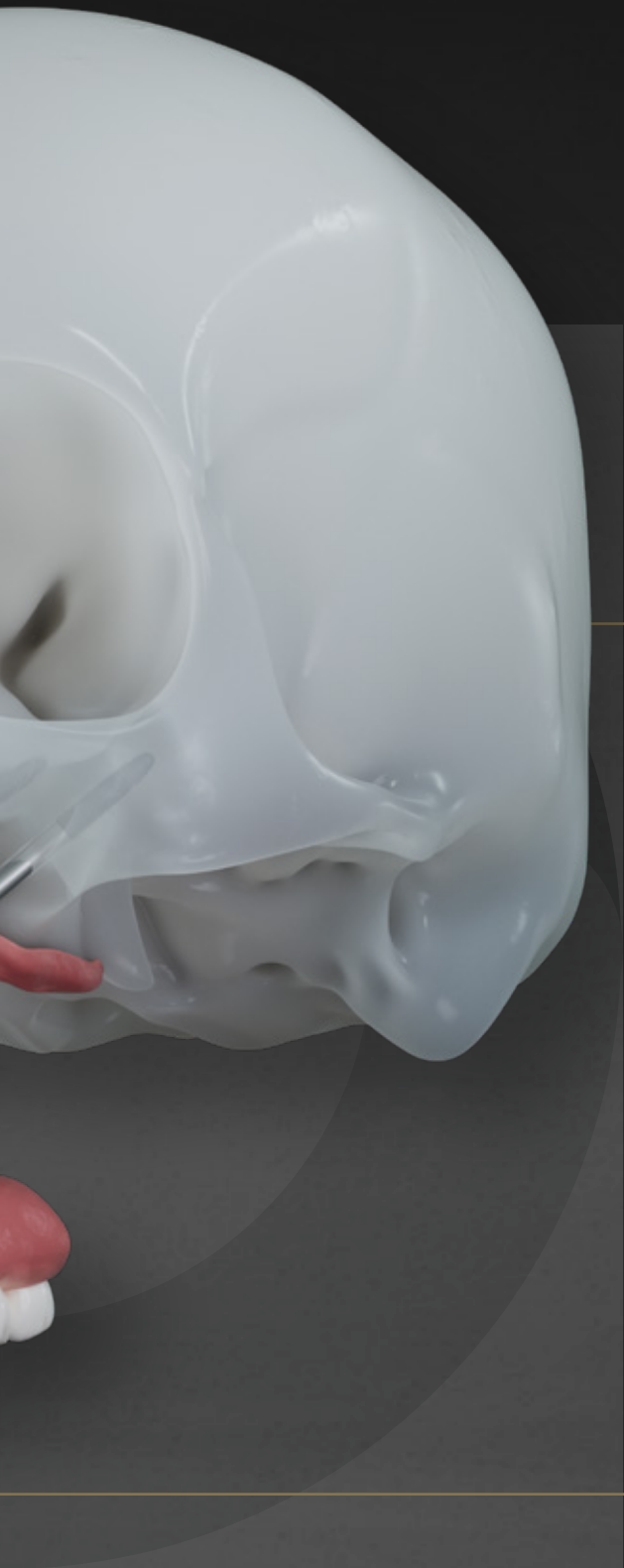

FUNÇÃO IMEDIATA, RESULTANDO EM TEMPOS DE TRATAMENTO MAIS CURTOS.

- Diferentes técnicas de implantes para evitar o uso de procedimento de enxerto.^[1]
- Design do implante otimizado para obter alta estabilidade primária nos ossos tipos I, II, III e IV.^[4]



ESTÉTICA NATURAL IMEDIATA COM OPÇÕES DE RESTAURAÇÃO VERSÁTEIS.

- Ampla variedade de alturas de transmucoso para atender a diversas necessidades clínicas.
- Opções de pilares retos e angulados (0°, 17°, 30°, 45°, 52° e 60°).



TRANQUILIDADE IMEDIATA GRAÇAS A UMA BASE ESTÁVEL.

- Uma conexão, independentemente dos diâmetros.
- Conexão exclusiva, combinando plataforma switching com Cone Morse 16° e uma indexação interna.

Acesse nosso website para obter mais informações sobre o **Zygoma-S**.

 neodent.com/zygoma-s



EFICIÊNCIA ANATÔMICA E ESTABILIDADE




O Neodent® GM Zygoma-S apresenta a versatilidade inigualável do Helix® Grand Morse® para a alta estabilidade primária^[2] para o sucesso a longo prazo. Além disso, para a combinação de características notáveis, o Neodent® GM Zygoma-S oferece uma relação anatômica facilitada, preservação de tecidos moles e opções de tratamento versáteis, resultando na qualidade de vida com a restauração imediata da função e estética^[3].

Assista a um vídeo sobre como a superfície lisa pode otimizar os resultados clínicos
Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo:



neodent.com/zygoma-s_surface

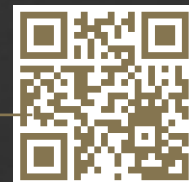

“ A superfície lisa do implante Zygoma-S é um divisor de águas. Sei que muitos pacientes se beneficiarão da técnica extra-sinusal com uma abordagem melhorada do tecido mole desse novo implante. ”


DR. RIAD ALMASRI



Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo e saiba mais sobre este **recurso exclusivo**:



neodent.com/zygoma-s_implant

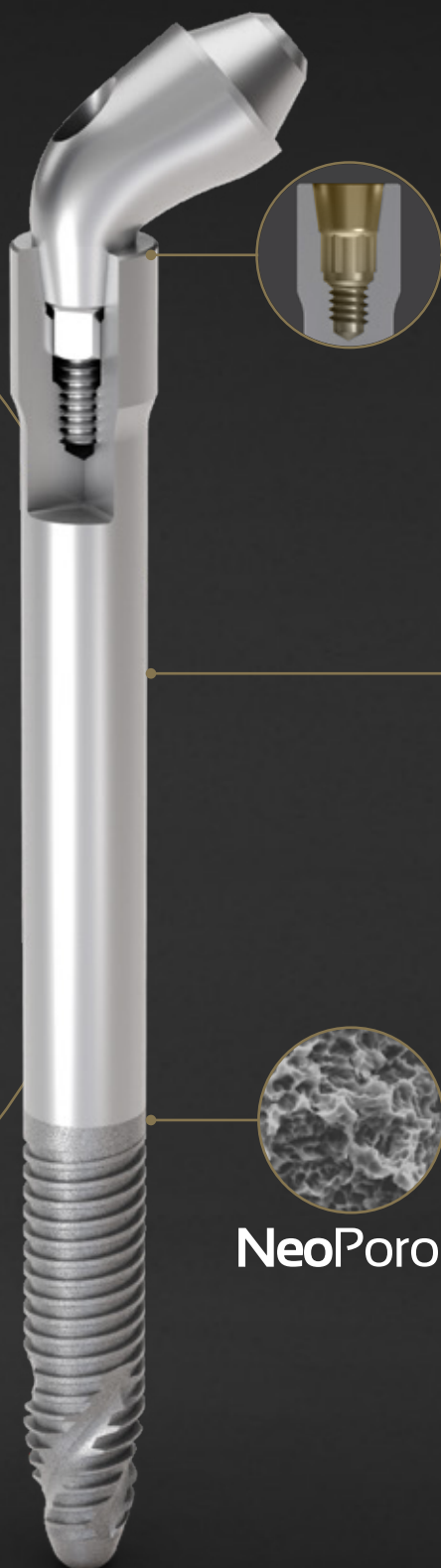

NeoPoros

CONEXÃO GRAND MORSE®: UMA BASE ESTÁVEL E FORTE PROJETADA PARA O SUCESSO A LONGO PRAZO.

- Uma conexão protética para todos os Implantes Grand Morse®: facilidade de uso.
- Conexão Cone Morse 16°: desenhada para garantir um ajuste firme para uma melhor vedação da conexão.
- Conexão Cone Morse de platform switching: atende ao conceito de platform switching.
- Conexão Cone Morse mais profunda: projetada para melhor distribuição da carga.
- Indexação interna: posicionamento preciso do pilar, proteção contra rotação e fácil manuseio.

IMPLANTE PROJETADO PARA FORNECER POSSIBILIDADES VERSÁTEIS DE INSTALAÇÃO^[5], RESULTANDO EM EFICIÊNCIA ANATÔMICA

- Implante projetado para casos extra-maxilares ou intra-sinusais.
- Associado a implantes regulares ou à instalação Quad Z.
- 3.5 mm e 3.75 mm de diâmetro.
- A superfície usinada lisa no corpo do implante mantém a preservação do tecido mole^[2].
- Porção coronal com 4.3 mm de diâmetro projetada para garantir resistência e um ajuste apertado para uma vedação da conexão ideal.
- Dez comprimentos diferentes: 30 / 35 / 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 / 52.5 / 55 mm

IMPLANTE HELIX® GRAND MORSE®: VERSATILIDADE INIGUALÁVEL.

- As roscas de profundidade progressiva na área apical permitem menor preparo da osteotomia.
- Ápice com superfície NeoPoros, potencializando a osseointegração para melhorar a ancoragem zigomática.
- Contorno híbrido: proporciona estabilidade com posicionamento vertical flexível.
- Design de rosca progressiva dinâmica projetado para alcançar alta estabilidade primária em todos os tipos de ossos.
- Ápice ativo: autorrosqueante.

Acesse nosso website para obter mais informações sobre o **Zygoma-S**.




neodent.com/zygoma-s



VERSATILIDADE PROTÉTICA PARA NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO

Hoje em dia, os pacientes esperam qualidade de vida e querem se sentir seguros realizando atividades rotineiras. Portanto, tratamentos odontológicos eficientes com tempos curtos para recuperação devem garantir resultados estéticos. Além disso, os dentistas têm altas expectativas de que as soluções protéticas oferecem assertividade e fácil manipulação para a instalação ou manutenção do procedimento.

O portfólio restaurador Neodent® NeoArch atende a essas necessidades fornecendo opções versáteis e respeitando as distâncias biológicas, oferecendo angulações de pilares ideais e uma ampla variedade de alturas de transmucoso para atender a diferentes necessidades clínicas. Além disso, a obtenção da função imediata com próteses simplifica seu fluxo de trabalho, otimizando o perfil de emergência, independentemente do nível de atrofia da maxila.

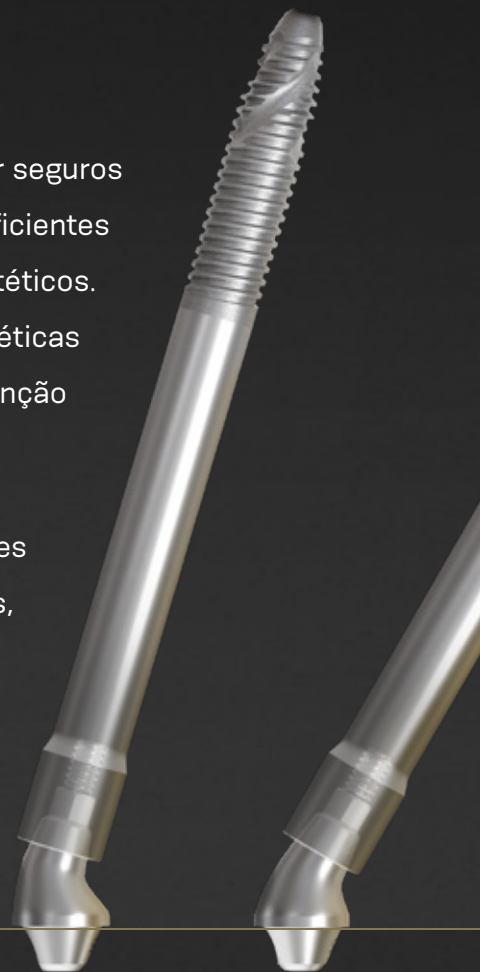

VÁRIAS OPÇÕES DE ALTURAS DE TRANSMUCOSO: ADAPTANDO À DISPONIBILIDADE DE TECIDOS.

Várias alturas e angulações de transmucoso combinadas com formato anatômico, cone curto e ângulo amplo, resultando em um perfil de emergência otimizado.

ANGULAÇÃO IDEAL: 17° ATÉ 60°: ADAPTAÇÃO À ANATOMIA DO PACIENTE.

NÚCLEO CURTO, ÂNGULO LARGO: MAXIMIZA O AJUSTE PASSIVO E A COMPENSAÇÃO DO ÂNGULO.



17°

ALTURAS DE
TRANSMUCOSO

1.5 / 2.5 / 3.5 mm



Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo e saiba mais sobre este **recurso exclusivo**:

 neodent.com/zygoma-s_prosthetic

“

A ampla variedade de ângulos para os mini pilares cônicos e o design GM especial oferecem excelentes resultados para as necessidades do paciente, com próteses favoráveis e funcionais.

”

DR. GENINHO THOMÉ



NOVO

NOVO



30°

45° Slim**

45°*

52°**

60°**

1.5 / 2.5 / 3.5 mm

1.5 / 2.5 mm

1.5 / 2.5 mm

1.5 / 2.5 mm

1.5 / 2.5 mm

*O mini pilar cônico 45° é indicado para uso somente com Helix GM® Long, Zygoma GM™ e Zygoma-S.

**O mini pilar cônico Slim 45°, o mini pilar cônico 52° e mini pilar cônico 60° são indicados para uso somente com Zygoma GM™ e Zygoma-S.

Acesse nosso website para obter mais informações sobre o **Zygoma-S**.

 neodent.com/zygoma-s



PREVISIBILIDADE DOS RESULTADOS CIRÚRGICOS

Os procedimentos cirúrgicos em pacientes com déficit ósseo extremo são complexos e requerem protocolos e precisão eficientes, para evitar o desvio do implante e garantir o sucesso do tratamento a longo prazo.

O sistema Neodent® GM Zygoma-S fornece previsibilidade e gera confiança com seu protocolo cirúrgico simples, projetado para superar procedimentos desafiadores, da instalação extra-maxilar à intra-sinusal, permitindo eficiência em todas as etapas do procedimento.

CONFIANÇA NA PREVISIBILIDADE DOS RESULTADOS CIRÚRGICOS.

O protocolo Neodent® GM Zygoma-S conta com brocas exclusivas projetadas para uma osteotomia mais precisa desde o início do procedimento, proporcionando um nível máximo de confiança à cirurgia através de perfuração inicial precisa, preservando estruturas anatômicas, contribuindo para a precisão da instalação do implante, independentemente das indicações mais exigentes.

NOVO



Duas opções diferentes de brocas codificadas por cores para se adaptar bem a diversas estruturas anatômicas:

- 3.5 e 3.75: 71 mm e 100 mm

NOVO

Mais precisão para preparação cirúrgica inicial:


- Uma broca Spade e uma nova broca lança de corte lateral: Mais precisão para a osteotomia inicial.

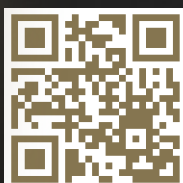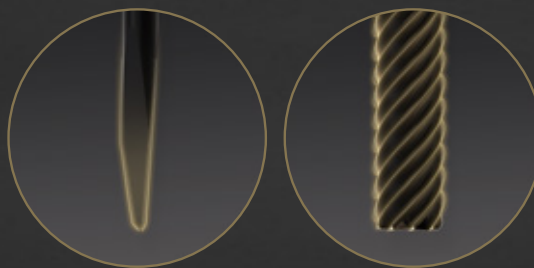

Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo e saiba mais sobre este **recurso exclusivo**:



neodent.com/zygoma-s_drills

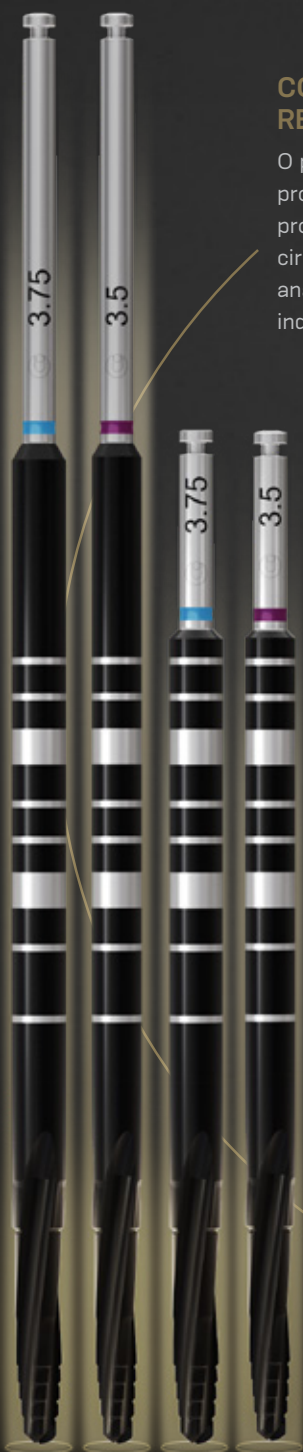


“ O kit cirúrgico Zygoma-S foi especialmente melhorado para a perfuração inicial, o que permite uma osteotomia muito estável e uma instalação do implante mais segura.

DR. LUIS EDUARDO MARQUES PADOVAN ”

O ESTOJO CIRÚRGICO FUNCIONAL E INTUITIVO PERMITE A EFICIÊNCIA CIRÚRGICA.

O sistema Neodent® GM Zygoma-S conta com um protocolo intuitivo, potencializando a previsibilidade e eficiência cirúrgica, simplificando a sequência de perfuração, e inclui um procedimento guiado inicial

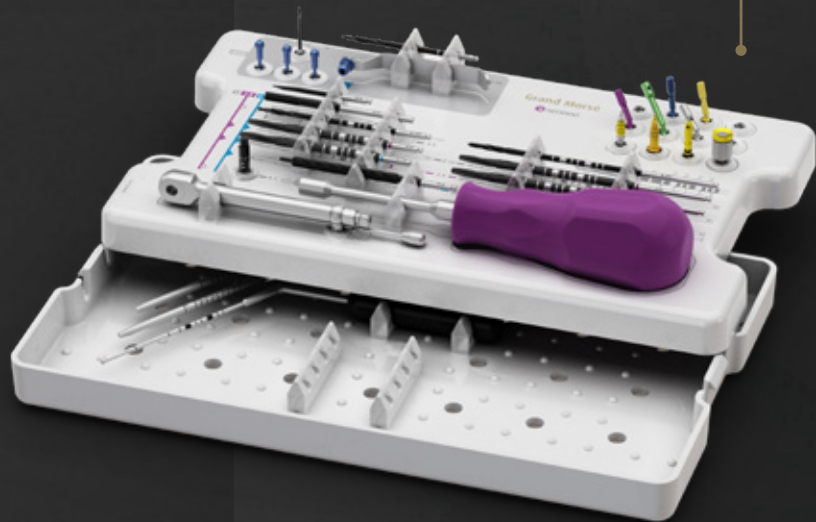

Assista a um vídeo 3D do kit Zygoma-S
Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo:



neodent.com/zygoma-s_kit

Acesse nosso website para obter
mais informações sobre o Zygoma-S.



neodent.com/zygoma-s

CASO CLÍNICO

RESTAURAÇÃO COMPLETA DA ARCADA SUPERIOR COM 4 **IMPLANTES ZYGOMA-S**.

DR. RIAD ALMASRI

ESTADOS UNIDOS

Certificado de especialidade em
prostodontia pela Faculdade de Medicina
Odontológica da Universidade Nova SE


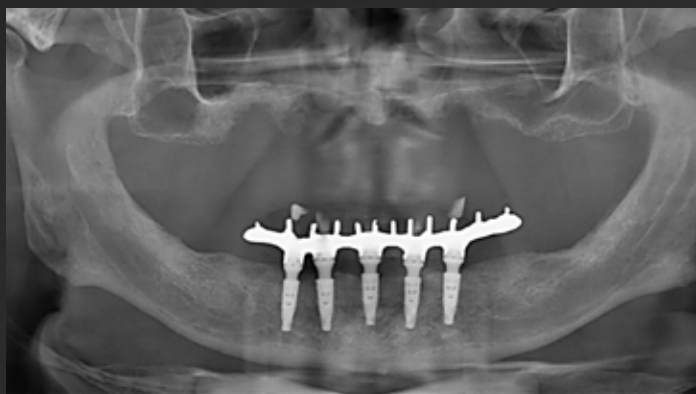


Imagem panorâmica inicial, antes do procedimento



Aspecto clínico depois da
instalação de 4 implantes Zygoma-S

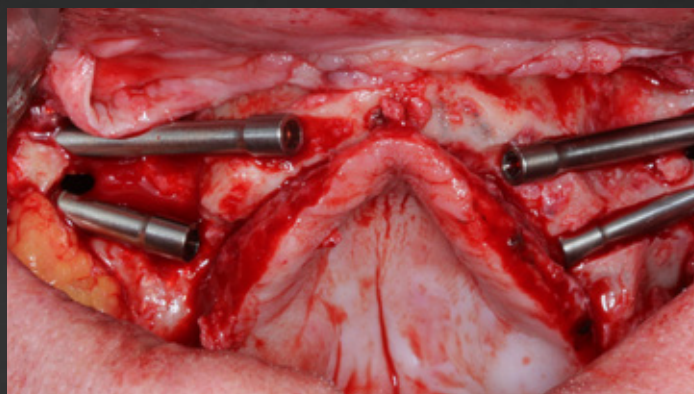

Aspecto clínico da reabilitação final




Imagem panorâmica final, com prótese
protocolo posicionada sobre os pilares



CONFIRA ESTE CASO CLÍNICO COMPLETO



Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo
para localizá-lo:

 **zygoma-s caso clínico 01**

CASO CLÍNICO

RESTAURAÇÃO COMPLETA DA ARCADA SUPERIOR COM **2 IMPLANTES ZYGOMA-S** COMBINADOS COM **3 IMPLANTES HELIX GM**


DR. RIAD ALMASRI

ESTADOS UNIDOS

Certificado de especialidade em
prostodontia pela Faculdade de Medicina
Odontológica da Universidade Nova SE



Imagem panorâmica inicial, antes do procedimento

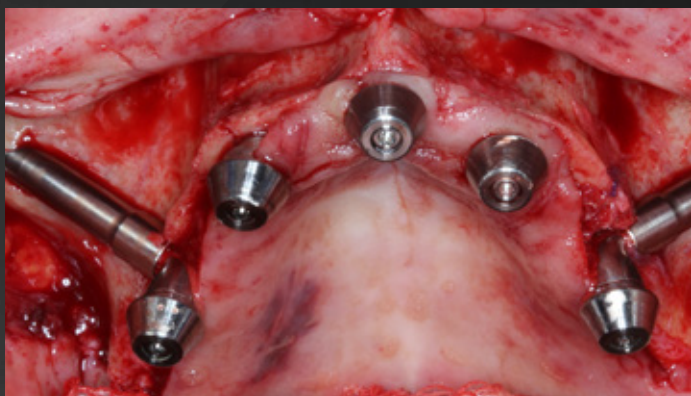

Aspecto clínico depois da instalação de 2 implantes Zygoma-S e 3 implantes Helix GM



Aspecto clínico da reabilitação final

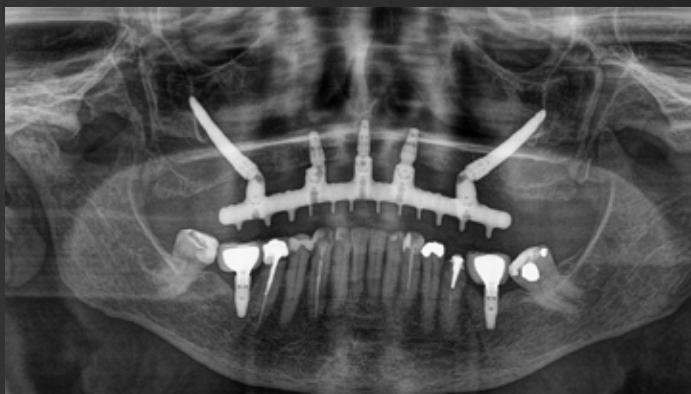


Imagem panorâmica final, com prótese protocolo posicionada sobre os pilares



CONFIRA ESTE CASO CLÍNICO COMPLETO



Escaneie o código QR ou acesse o link abaixo para localizá-lo:



zygoma-s caso clínico 02

 NEODENT

30 anos

Celebrar **é uma escolha**
de quem valoriza a
conquista.

 neodent.com/30years



A Neodent® está celebrando o seu 30º aniversário! Ao longo dos anos, milhões de sorrisos foram criados em parceria com profissionais em todo o mundo. Com o passar dos anos, a empresa continua a celebrar a escolha de criar novos sorrisos todos os dias, para mudar a vida de pacientes em mais de 80 países onde a marca está presente.



MARCA GLOBAL

Disponível em mais de 80 países, com mais de 3 milhões de implantes vendidos anualmente



FUNDADA POR UM DENTISTA PARA DENTISTAS

Um legado de mais de 30 anos focado na facilidade de uso.



CONCEITOS DE TRATAMENTO PROGRESSIVO

Soluções modernas e confiáveis.



ACESSO À TERAPIA E ACESSIBILIDADE

Acessibilidade a soluções comprovadas e viáveis.

Em 2023, a Neodent celebrará todas as conquistas que trouxeram a marca até aqui! Há muitas razões para celebrar, e você pode seguir todas elas nos canais digitais da Neodent. Siga-nos para saber mais sobre a história, a filosofia e as soluções da empresa.

NEODENT GLOBAL PLAY

Neodent Global Play é uma incrível plataforma online de Treinamento e Educação que reúne ótimos conteúdos disponíveis **sob demanda e gratuitamente**. Você vai encontrar casos clínicos, vídeos de treinamento de produtos, tutoriais e muito mais!

O registro é simples e automático, você só precisa preencher o formulário para ter acesso instantâneo a todo conteúdo.



Verifique no endereço:
globalplay.neodent.com



- [1] MS, Haggerty CJ, Fisher GR. Nongrafting implant options for restoration of the edentulous maxilla.
- [2] J, Al-Shammari K, Misch C, Nociti FH Jr, Wang HL. Effects of implant thread geometry on percentage of osseointegration and resistance to reverse torque in the tibia of rabbits. J Periodontol.
- [3] Aparicio C, López-Piriz R, Albrektsson T. ORIS Criteria of Success for the Zygoma-Related Rehabilitation: The (Revisited) Zygoma Success Code. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35:366–378.
- [4] Babbush CA. Post treatment quantification of patient experiences with full-arch implant treatment using a modification of the OHIP-14 questionnaire. J Oral Implantol. 2012 Jun;38(3):251-60.
- [5] DT-2207-080 - Technical Statement,FORM: FORM.P&D.048.013

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS