

*UM NOVO MINDSET*  
*PROTOCOLO DE TRABALHO PARA*  
*NEODENT<sup>®</sup> CERAMIC IMPLANT SYSTEM*



Ceramic  
Implant System



Conexão  
ZiLock<sup>®</sup>



# RESUMO

| Protocolo de trabalho do implante Zi Ø 3.75 mm

| Protocolo de trabalho do implante Zi Ø 4.3 mm

| Procedimentos protéticos



Ø 3.75

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS


NEODENT®

Comprimentos do implante



10.0 180.502  
11.5 180.503  
13.0 180.504

Sequência de brocas para todos os tipos de ossos

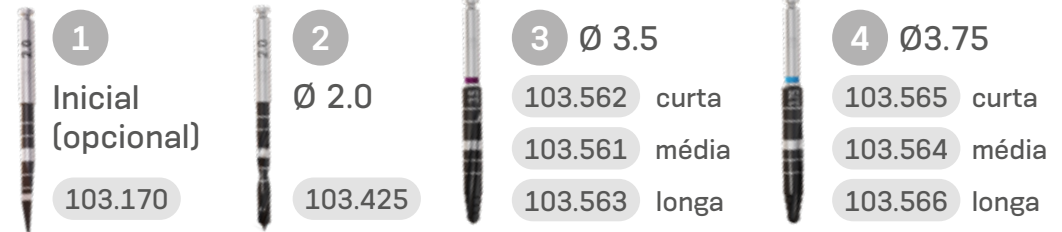

Paralelizador



Ø 3.0/3.75  
128.020

Sequência de brocas para ossos tipo I, II e III



5  
Countersink Ø3.75  
103.609

Sequência de brocas para ossos tipo I e II



6  
Macho de rosca Ø3.75  
111.049

Fase de cicatrização



Parafuso de cobertura Zi  
117.023



Cicatrizador Zi  
106.233 3.75x1.5 mm  
106.234 3.75x2.5 mm  
106.235 4.5x1.5 mm  
106.236 4.5x2.5 mm

Conexões e chave catraca torquímetro



Chave digital Neo  
104.058 curta  
104.060 média  
104.059 longa



Conexão sextavada para contra-ângulo  
105.002



Conexão sextavada curta para catraca  
105.001



Chave catraca torquímetro  
104.050

Ø 4.3

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

NEODENT®

Comprimentos do implante



10.0 180.506

11.5 180.507

13.0 180.508

Sequência de brocas para todos os tipos de ossos



1

Inicial (opcional)

103.170



2

Ø 2.0

103.425



3

Ø 3.5

103.562 curta

103.561 média

103.563 longa



4

Ø 4.3

103.571 curta

103.570 média

103.572 longa

Paralelizador



Ø 3.6/4.3

128.022

Sequência de brocas para ossos tipo I, II e III



5

Countersink Ø4.3

103.610

Sequência de brocas para ossos tipo I e II



6

Macho de rosca Ø4.3

111.050

Fase de cicatrização



Parafuso de cobertura Zi

117.023



Cicatrizador Zi

106.233 3.75x1.5 mm

106.234 3.75x2.5 mm

106.235 4.5x1.5 mm

106.236 4.5x2.5 mm

Conexões e chave catraca torquímetro



Chave digital Neo

104.058 curta

104.060 média

104.059 longa



Conexão sextavada para contra-ângulo

105.002



Conexão sextavada curta para catraca

105.001



Chave catraca torquímetro

104.050

Seleção do pilar



- Base Zi**
- 135.254 3.75x4x1.5 mm
  - 135.255 3.75x4x2.5 mm
  - 135.256 4.5x4x1.5 mm
  - 135.257 4.5x4x2.5 mm



- Base Zi para C**
- 135.258 4.65x4.70x1.5 mm
  - 135.259 4.65x4.70x2.5 mm



- Munhão CR Zi**
- 114.854 4.0x5.0x1.5 mm
  - 114.855 4.0x5.0x2.5 mm
  - 114.856 4.5x5.0x1.5 mm
  - 114.857 4.5x5.0x2.5 mm



- Munhão CR Zi 17°**
- 114.858 4.0x5.0x1.5 mm
  - 114.859 4.0x5.0x2.5 mm
  - 114.860 4.5x5.0x1.5 mm
  - 114.861 4.5x5.0x2.5 mm

Moldagem



- Transfer para escaneamento do implante**
- 108.184



- Transfer Exact para Implante Zi**
- | regular | longa   |
|---------|---------|
| 108.186 | 108.187 |
| 108.188 | 108.189 |

Produção do modelo



- Análogo reposicionável híbrido**
- 101.080



- Análogo Munhão CR Zi**
- 101.105 4.0x5.0 mm
  - 101.106 4.5x5.0 mm

Provisório



- Munhão CR em PEEK**
- 114.888 4.0x5.0x1.5 mm
  - 114.889 4.0x5.0x2.5 mm
  - 114.886 4.5x5.0x1.5 mm
  - 114.887 4.5x5.0x2.5 mm



- Transfer cilindro provisório Munhão CR**
- 108.201 4.0x5.0 mm
  - 108.202 4.5x5.0 mm

Cilindro final



CARE3 Visual



3Shape



Dental Wings



exocad



**Cilindro calcinável**

- 118.343 3.75x4 mm
- 118.325 4.5x4 mm



**Cilindro calcinável Munhão CR Zi**

- 118.367 4.0x5.0 mm
- 118.368 4.5x5.0 mm

Chaves



- Chave digital Neo**
- 104.058 curta
  - 104.060 média
  - 104.059 longa



- Conexão Torque Neo para catraca**
- 105.133 curta
  - 105.132 média
  - 105.134 longa

© 2022 – JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados. Neodent®, Zi® e ZiLock® são marcas comerciais ou marcas registradas de JGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. CARES é uma marca comercial ou marca registrada de Straumann Holding AG. 3Shape é uma marca comercial ou uma marca registrada de 3Shape A/S. exocad é uma marca comercial ou marca registrada de exocad GmbH. Dental Wings é uma marca comercial ou marca registrada de Dental Wings Inc. A reprodução deste material sem autorização prévia é proibida. Alguns produtos podem ainda não estar disponíveis para compra. Para obter mais informações, contate seu distribuidor local

10476\_neodent\_zi\_workingprotocol\_pt\_br\_D00\_hr\_120623

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

