

DenToGo™

Starten Sie durch mit Ihrer
Aligner-Behandlung



Am _____ erhalten Sie Ihre Aligner.

Um gleich mit dem DenToGo™ Monitoring starten zu können, bringen Sie bitte zu dem Termin **Ihr vorbereitetes Smartphone** mit:

In Kürze erhalten Sie eine Mail von DenToGo™:

Sollten Sie diese über Ihr Smartphone öffnen, folgen Sie bitte den Anweisungen.



Sollten Sie diese über den Computer öffnen, klicken Sie bitte auf den Link „Erstelle ein Passwort“ und legen Sie sich ein Kennwort an.



Laden Sie die App „DenToGo™ by Straumann“ auf Ihr Smartphone und loggen sich mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem Kennwort ein.



WICHTIG: Um die App voll nutzen zu können, stimmen Sie sowohl dem Zugriff auf die Kamera als auch auf die Audiofunktion – bei Verwendung der App – zu.

Nur so können Sie Fotos aufnehmen und Audioanweisungen erhalten, auch wenn sich Ihr Smartphone im Stumm-Modus befindet.

Bitte scannen Sie sich noch NICHT!

Für Ihre Scans benötigen Sie Ihre Aligner. Den ersten Scan machen Sie mit Unterstützung in der Praxis.

Beachten Sie, dass Kosten für das mobile Netz anfallen können, wenn Sie nicht im WLAN sind.

Praxisstempel



CH_100.137DE 05/20