

Patienteninformationen über  
die Nachsorge bei einer  
Parodontalbehandlung

Hinweise  
zur Nachbehandlung  
Straumann® Emdogain®

# Wie Sie nach dem chirurgischen Eingriff vorgehen sollten

Nach der Behandlung mit Straumann® Emdogain® sollten die Vorgänge im Zahnfleisch so ungestört wie möglich ablaufen.

Während dieser Heilungsphase sollten Sie folgendes beachten: Um den Prozess der Wundheilung nicht zu beeinflussen, sollten Sie die Zähne im Wundbereich in den ersten Tagen nicht putzen.



## **DIE FOLGENDEN TIPPS/EMPFEHLUNGEN BEGLEITEN SIE DURCH DIE ERSTEN WOCHEN NACH DER BEHANDLUNG.**

### **Woche 1 bis 3**

- Mehrmals täglich eine keimreduzierende (aseptische) Mundspülung anwenden
- Behandelte Stelle nicht mit der Zahnbürste reinigen
- Zahnzwischenräume um und an der behandelten Stelle nicht reinigen
- Auf Alkohol, Nikotin, Kaffee, schwarzen Tee und Frischmilchprodukte verzichten
- Kauen auf der behandelten Stelle vermeiden
- Harte und feste Speisen vermeiden

### **Woche 4 bis 6**

- Weiterhin mehrmals täglich eine keimreduzierende (aseptische) Mundspülung anwenden
- Behandelte Stelle vorsichtig mit der Zahnbürste reinigen
- Zahnzwischenräume an der behandelten Stelle nicht reinigen



- Zahnreinigung wird durch zahnmedizinisches Fachpersonal durchgeführt.

### **Ab der 7. Woche**

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
- Zähne und Zahnzwischenräume an der behandelten Stelle vorsichtig mit der Zahnbürste reinigen
- Regelmässige Kontrolluntersuchungen und Zahnreinigung werden durch zahnmedizinisches Fachpersonal durchgeführt

Je nach individuellen Gegebenheiten kann die Vorgehensweise in den ersten Wochen nach der Behandlung variieren. Aus diesem Grund muss der behandelnde Zahnarzt die Patientin oder den Patienten darüber informieren, wie sie bzw. er sich in dieser Phase zu verhalten hat und wie wichtig es ist, sich gewissenhaft an diese Empfehlungen zu halten. Der behandelnde Zahnarzt wird regelmässige Kontrolluntersuchungen mit Ihnen vereinbaren, um den Fortschritt der Heilung zu beurteilen. Wir empfehlen, die oralhygienischen Massnahmen und regelmässigen Kontrolluntersuchungen nach Abschluss der Regenerationsbehandlung fortzusetzen.

## WELTWEIT FÜHREND, WELTWEITES VERTRAUEN

Wohin das Leben Sie auch führt – ein Zahnarzt, der Straumann-Produkte verwendet, ist immer in der Nähe.

Besuchen Sie [www.straumann.ch/patienten](http://www.straumann.ch/patienten) und fragen Sie Ihren Zahnarzt, um mehr über die Produkte und Lösungen von Straumann zu erfahren.



Das 1954 gegründete Unternehmen Straumann mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein Pionier und Weltmarktführer in der dentalen Implantologie und oralen Geweberegeneration. Zusammen mit führenden Kliniken, Forschungsinstituten und Hochschulen erforscht, entwickelt und produziert Straumann Zahnimplantate, Instrumente, Prothetikkomponenten und Biomaterialien für die Anwendung bei Zahnersatz und -erhalt sowie bei restaurativen und regenerativen Verfahren.

### **Institut Straumann AG**

Straumann Schweiz

Peter Merian-Weg 12

4002 Basel

Tel. 0800 810 812

[ch.sales@straumann.com](mailto:ch.sales@straumann.com)

[www.straumann.ch](http://www.straumann.ch)

© Institut Straumann AG, 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.