



Straumann® Bohrstopp
Basisinformationen

Inhalt

1. Straumann® Bohrstopp – präzise Tiefenkontrolle	2
1.1 Straumann® Bohrstopp-Typen	3
2. Straumann® Bohrstopp-Werkzeug	4
2.1 Montage des Straumann® Bohrstopps	4
2.2 Demontage des Straumann® Bohrstopps	5
3. Artikelliste	6

1. Straumann® Bohrstopp – präzise Tiefenkontrolle

Der Straumann® Bohrstopp sorgt für eine präzise Kontrolle der Bohrtiefe während der Implantatbettpräparation für das Setzen von Straumann® Zahnimplantaten. Der Bohrstopp verhindert, dass tiefer als die vordefinierte Tiefe gebohrt werden kann. Er ist bei sensitiven Indikationen einzusetzen, um den N. mandibularis oder den Sinusboden zu umgehen.

Alle Bohrstopps können von Hand oder mit einem Bohrstopp-Werkzeug schnell und sicher montiert und demontiert werden. Die Farbcodierung erleichtert die Identifizierung der Durchmessergröße.

Die in sterilen Sets gelieferten Straumann® Bohrstopps sind nur für die Einpatientenanwendung gedacht und müssen in Kombination mit den speziell für sie entwickelten Bohrern eingesetzt werden.

- Mehrfach verwendbarer VeloDrill™, kurz
- Einpatientenbohrer, bohrstoppkompatibel, kurz



Bohrstopp-Set für Bohrer \varnothing 2,2 – \varnothing 4,2



Breites Bohrstopp-Set für Bohrer \varnothing 4,7 – \varnothing 6,2

1.1 Straumann® Bohrstopp-Typen

Es sind fünf Straumann® Bohrstopp-Typen erhältlich (A, B, C, D und E). Der Bohrstopp-Typ wird entsprechend der jeweiligen Bohrtiefe bestimmt.

Anhand der folgenden Referenztabelle können Sie bestimmen, welcher Bohrstopp-Typ bei der Präparation der Implantatbetttiefe mit dem kurzen Bohrer verwendet werden kann.

- Schritt 1: Bestimmen Sie die Implantatbetttiefe (4, 6, 8, 10, 12 mm)
- Schritt 2: Wählen Sie den kurzen Bohrer
- Schritt 3: Gleichen Sie die Implantatbetttiefe mit dem Bohrstopp-Typ ab, wie in der Referenztabelle angegeben

Beispiel (in der Abbildung unten rot markiert):

Die Präparation eines 12 mm tiefen Implantatbettes mit einem kurzen Bohrer erfordert einen Straumann® Bohrstopp des Typs A

Kurzer Bohrer	
Implantatbetttiefe	Bohrstopp-Typ
12 mm	A
10 mm	B
8 mm	C
6 mm	D
4 mm	E

Für Bohrdurchmesser über $\varnothing 4,2$ mm sollte ein breites Bohrstopp-Set verwendet werden. Das breite Bohrstopp-Set umfasst ebenfalls fünf Typen (A, B, C, D und E) für unterschiedliche Implantatbettiefen.

Wichtig

Straumann® Bohrstopps sind nicht indiziert für:


- Extraktionsalveolen, bei denen die Knochenkavität häufig breiter ist als der erforderliche Auflagedurchmesser für den Bohrstopp
- die Verwendung mit Bohrmaschinen, aufgrund der Behinderung mit der Schablone

2. Straumann® Bohrstopp-Werkzeug


Das Straumann® Bohrstopp-Werkzeug erleichtert die sichere Montage und Demontage aller Straumann® Bohrstopp-Typen. Es kann vielseitig eingesetzt werden, muss jedoch vor jedem Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.



2.1 Montage des Straumann® Bohrstopps

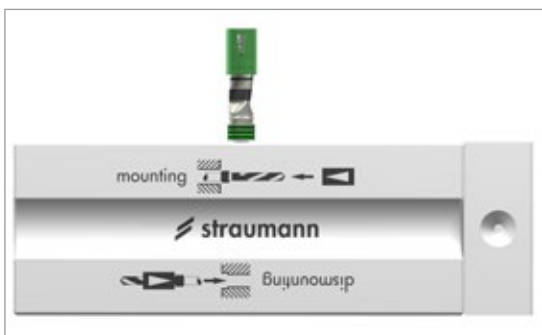


1. Setzen Sie den Bohrer in das Loch des Straumann® Bohrstopp-Werkzeugs ein, das sich auf der mit „mounting“ (Montage) beschrifteten Seite des Bohrstopp-Werkzeugs befindet.

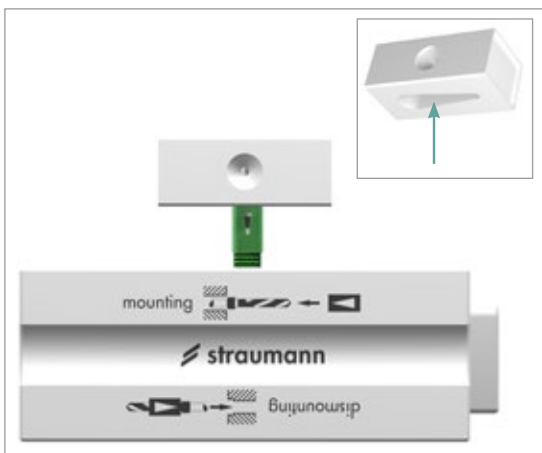

2. Setzen Sie den Bohrstopf auf den schneidenden Teil des Bohrers, wobei der Pfeil zur Dentalkupplung zeigt.
3. Üben Sie mit der breiten Vertiefung des Bohrerstanzschutzes Kraft aus, bis ein Klicken zu hören ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Straumann® Bohrstopp fest auf dem Bohrer sitzt und mit den richtigen Lasermarkierungen am Bohrer ausgerichtet ist.

2.2 Demontage des Straumann® Bohrstopps

Bei der Demontage des Bohrstopps von einem Bohrer, der im gleichen Verfahren weiterverwendet wird, ist die Bohrspitze vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie darauf, den Bohrstopp mit dem Bohrspitzenschutz zu demontieren.

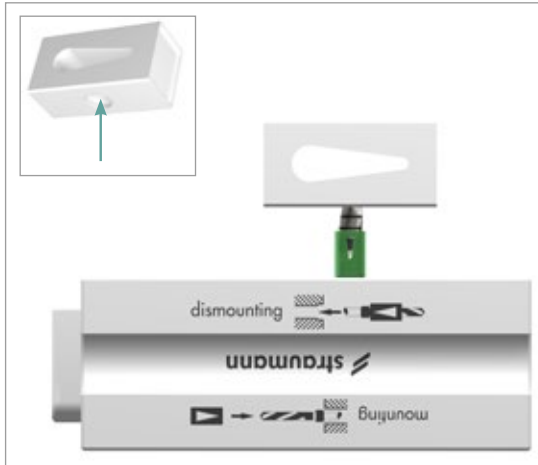

1. Setzen Sie den Bohrschaft in die mit „dismounting“ (Demontage) beschriftete Seite des Straumann® Bohrstopp-Werkzeugs ein. Setzen Sie ihn in das Loch mit dem angegebenen Bohrdurchmesser ein.
2. Üben Sie mit der schmalen Vertiefung des Bohrspitzenschutzes Kraft auf die Bohrspitze aus, bis ein Klicken zu hören ist.
3. Nehmen Sie den gelösten Bohrstopp vom Bohrer ab.

3. Artikelliste

Art.-Nr.	Artikel	Abbildung
040.584S	Bohrstopp-Set, Typ A, für Bohrer Ø 2,2 – 4,2 mm, kurz, 12 mm	
040.585S	Bohrstopp-Set, Typ B, für Bohrer Ø 2,2 – 4,2 mm, kurz, 10 mm	
040.586S	Bohrstopp-Set, Typ C, für Bohrer Ø 2,2 – 4,2 mm, kurz, 8 mm	
040.587S	Bohrstopp-Set, Typ D, für Bohrer Ø 2,2 – 4,2 mm, kurz, 6 mm	
040.588S	Bohrstopp-Set, Typ E, für Bohrer Ø 2,2 – 4,2 mm, kurz, 4 mm	
040.589S	Bohrstopp-Set, Typ A breit, für Bohrer Ø 4,7 – 6,2 mm, kurz, 12 mm	
040.590S	Bohrstopp-Set, Typ B breit, für Bohrer Ø 4,7 – 6,2 mm, kurz, 10 mm	
040.591S	Bohrstopp-Set, Typ C breit, für Bohrer Ø 4,7 – 6,2 mm, kurz, 8 mm	
040.592S	Bohrstopp-Set, Typ D breit, für Bohrer Ø 4,7 – 6,2 mm, kurz, 6 mm	
040.593S	Bohrstopp-Set, Typ E breit, für Bohrer Ø 4,7 – 6,2 mm, kurz, 4 mm	
040.594	Bohrstopp-Werkzeug	

International Headquarters

Institut Straumann AG
 Peter Merian-Weg 12
 CH-4002 Basel, Switzerland
 Phone +41 (0)61 965 11 11
 Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

National Distributor

Institut Straumann AG
 Straumann Schweiz
 Peter Merian-Weg 12
 Postfach
 CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme

Tel. Bestellungen: 0800 810 812
 Tel. Hotline: 0800 810 814
 Tel. CARES®: 0800 810 816
 E-Mail: ch.sales@straumann.com
 Online: www.straumann.ch/eshop

© Institut Straumann AG, 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an privacy.ch@straumann.com oder per Post an Institut Straumann AG, Datenschutzbeauftragter, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Grün-den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.