

# Zugang zu Straumann® CARES® Prothetikkomponenten mit Ihrem 3Shape System.



Individualisierte Straumann® CARES® Prothetiklösungen<sup>1</sup> per **Mausklick verfügbar**. Installieren Sie die Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihrer Software, um Zugang zu den Prothetiklösungen von Straumann zu erhalten – darunter individuelle Abutments und zahngetragene Restaurationen.

## 1. VERSCHAFFEN SIE SICH ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN PROTHETIKLÖSUNGEN.

- Das individuelle Original-Abutment auf Straumann-Implantat<sup>2</sup> für zuverlässige Prothetiklösungen mit Straumann Garantie<sup>3</sup>.
- Qualitativ hochwertige individuelle Prothetikkomponenten – darunter Gerüste aus Kobalt-Chrom-Legierung (coron®) und hoch stabilem Zirkondioxid (zerion®) für höchste Zuverlässigkeit.



## 2. INSTALLIEREN SIE DAS SOFTWAREMODUL FÜR EINE HÖHERE RENTABILITÄT.

- Installation der Straumann® CARES® Materialdatenbank in Ihren bestehenden Softwaremodulen.
- Möglicher Zugang zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen.

## 3. PROFITIEREN SIE VON EINEM EINFACHEN UND EFFIZIENTEN ARBEITSABLAUF.

- Gleicher Konstruktionsprozess wie bei Ihrer aktuellen Software. Keine Schulung erforderlich.



Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf [www.straumann.de/cares8](http://www.straumann.de/cares8)

## WIE ERHALTE ICH MIT 3SHAPE ZUGANG ZU CARES® PROTHETIKKOMPONENTEN?

- Laden Sie das unkonfigurierte Basis-Installationsprogramm von Straumann herunter und importieren Sie es in das 3Shape System.
- Für Ihre individuellen Bedürfnisse stehen zwei verschiedene Straumann DME-Datenpakete zur Verfügung:
  1. CARES® Abutment DME
  2. CARES® Tooth-borne DME
- Download-Quelle
  - Option 1 = 3Shape "Download Center"
  - Option 2 = [www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)
- Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.



## AUCH VERFÜGBAR: DAS STRAUMANN® VARIOBASE™ IMPLANT KIT.

- Option 1: Anbindung in Ihrem System  
Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.9.9.1 (oder höher) der 3Shape Software installiert ist.
- Option 2: DME-Datei Straumann® Variobase™ als Download  
Bitte stellen Sie sicher, dass Version 2.8.8.9 (oder höher – Version 2.9.9.1 ist empfohlen) der 3Shape Software installiert ist
- Download-Quelle: [www.straumann.com/connect2cares](http://www.straumann.com/connect2cares)

Eine großartige Möglichkeit des Zugangs zu Zahnärzten, die auch Produkte von Straumann nutzen. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Zugang zu CARES® Prothetiklösungen!

<sup>1</sup> Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land verschieden sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Support, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie, ob die 3Shape Software in Ihrem Land zugelassen ist; implantatgetragene Prothetiklösungen sind eventuell nicht verfügbar.

<sup>3</sup> 5 oder 10 Jahre Garantie je nach Material. Siehe Straumann Garantie (DE151360) für weitere Einzelheiten.

### International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)

### National Distributor

Straumann GmbH  
Heinrich-von-Stephan-Straße 21  
79100 Freiburg  
Tel.: 0761/4501 0  
[www.straumann.de](http://www.straumann.de)

### Kundenberatung / Bestellannahme

Tel.: 0761/4501 336  
[order.de@straumann.com](mailto:order.de@straumann.com)