

P pro Krone und Brücke

Das professionelle 3D Druck Material zur Herstellung von temporären Front- und Seitenzahnrestaurationen

Erstellen Sie temporäre Restaurationen mit dem P pro Kronen & Brücken Material. Das Material bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, funktionelle und ästhetische Einzelkronen, Brücken, Onlays und Veneers herzustellen. Verwenden Sie die Straumann® CARES® Visual Software, um ein validiertes Design zu erstellen. Mit dem P pro Kronen & Brücken Material können Sie Restaurationen direkt herstellen.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche
(für P20+, P30+, P40)



RFID tags für Prozesssicherheit

P PRO KRONE UND BRÜCKE

Verfügbar für	P20+, P30+, P40
Elastizität	~5000MPa
Biegefestigkeit	~100MPa
Farbe	A1, A2 oder A3

Produktion in 5 Schritten



Druck auf den 3D Druckern der P series



Zentrifugieren des Modells, um überschüssiges Harz zu entfernen



Lichthärten mit der Straumann P cure mit Vakuum-Funktion



Reinigung des Modells in der P wash mit Isopropanol



Finalisierung durch schleifen und polieren der Details

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.



Nicht zur Verwendung auf Implantaten validiert.