

P pro Meistermodell

Das professionelle 3D Druck Material zum Herstellen von dentalen Meistermodellen

P pro Meistermodell Dunkelbeige und P pro Meistermodell Grau sind zur Herstellung von dentalen Meistermodellen mit den Straumann® CARES® P series 3D Druckern optimal geeignet. In Kombination mit weiteren digitalen Lösungen von Straumann entfällt das händische Herstellen von Meistermodellen. Unter Verwendung des Model Builders der Straumann® CARES® Visual Software können validierte Modelle und Stümpfe für alle dentalen Anwendungen design und hergestellt werden.

Verfügbar als 1-Liter-Flasche (für P20+, P30+, P40)

Verfügbar in Kapselform (für P10+ capsule)

RFID tags für Prozesssicherheit

Verfügbar als Kartusche (für P20+ cartridge)

Validierte Temperaturparameter für eine hohe Druckgeschwindigkeit



P PRO MEISTERMODELL DUNKELBEIGE

P PRO MEISTERMODELL GRAU

	P PRO MEISTERMODELL DUNKELBEIGE	P PRO MEISTERMODELL GRAU
Verfügbar für	P10+ capsule, P 20+ cartridge, P20+, P30+, P40	
Elastizität	~1500MPa	
Biegefestigkeit	~80MPa	
Farbe	Dunkelbeige	Grau

Produktion in 3 Schritten



Druck auf den 3D Druckern der P series



Reinigen mit der Straumann P wash mit Isopropanol



Lichthärten mit der Straumann P cure mit Vakuum-Funktion

Hinweis: Bitte beachten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformationen des Herstellers. Beachten Sie immer alle Sekundärproduktinformationen um ein validiertes Produkt herstellen zu können. Fragen Sie Ihre lokale Straumann Organisation für die Produktinformation oder lesen Sie im Knowledge Center auf Ihrem P series 3D Drucker.

