



Straumann® Dental Implant Systems
Lista de comprobación
posoperatoria de
implantes dentales

Qué debe saber y hacer en el momento inmediatamente después de la cirugía.

Hinchazón

Enfríe el área apropiadamente.

Dolor

Si toma los medicamentos que el dentista le ha recetado, el dolor no debería suponer un problema.

Comida

No coma hasta que no se le haya pasado el efecto de la anestesia. Evite las bebidas calientes y las comidas calientes, picantes y ácidos durante el primer día. Deben evitarse durante una semana los alimentos crujientes y duros.

Enjuagues orales

No los utilice durante las 12 primeras horas después de la intervención.

Su corona temporal (o casquillo de cicatrización)

Cúidela y evite masticar cosas duras.

Posición del cuerpo

Mantenga la cabeza más alta que el resto del cuerpo durante el primer día y la primera noche después de la operación. Durante la primera noche, no se acueste sobre el lado donde se le ha colocado el implante.

Movilidad

No conduzca durante las primeras horas después de la operación. Su capacidad para conducir puede verse afectada por la anestesia o los medicamentos. Pregunte a su dentista.

Higiene bucodental

En el área implantada, a partir de las 12 horas de la operación y hasta que le retiren los puntos, utilice un enjuague oral varias veces al día en vez de un cepillo de dientes.

Comportamiento

No tome alcohol, nicotina, café o té negro, y no haga deporte o esfuerzo físico los primeros días después del procedimiento.



LLAME A SU DENTISTA SI:

- siente un dolor punzante el día de la operación
- tiene sensación de entumecimiento en el lugar del implante 12 horas después de la operación
- siente dolor o hinchazón en el lugar del implante al cabo de varios días de la operación
- sigue sangrando
- pierde su diente temporal
- presenta síntomas o tiene preguntas que no se mencionan aquí.

IMPORTANTE: Siga siempre el plan de cuidado bucodental individual que le ha dado su dentista.



0.683/A/00 5/21