

FLUJO DE TRABAJO DE STRAUMANN® REVEX™

De la restauración provisional a la final.

Antes de comenzar con el flujo de trabajo de Straumann® RevEX™, es esencial verificar el ajuste pasivo de tu restauración provisional. Si tu restauración provisional no es pasiva, puedes segmentarla y cementarla en la boca del paciente. Luego verifica de nuevo el ajuste pasivo.

CLÍNICA

De 4 a 6 meses después de colocar los implantes y la restauración provisional

LABORATORIO

1.ª visita
Impresión digital



1 Configuración del escáner intraoral para flujo de trabajo atornillado para puente.



4 Escaneo de mordida intraoral.



7 Importación de todos los archivos como STL en el software CAD/CAM, equiparación y diseño o uso del flujo de trabajo de wax-up para crear la restauración provisional y la plantilla de verificación.



2 Escaneo intraoral de la arcada antagonista.



5 Escaneo intraoral del tejido blando con los pilares atornillados colocados.



8 Fresado del prototipo y plantilla de verificación.



3 Escaneo intraoral con la prótesis provisional atornillada colocada.



6 Escaneo extraoral de la restauración provisional* con los cuerpos de referencia Straumann® RevEX™ colocados.

*Si observas un espacio entre el tejido blando y la restauración, recomendamos realinear la restauración provisional antes de comenzar con el flujo de trabajo de RevEX.

CLÍNICA

LABORATORIO

2.ª visita

Prototipo fresado y comprobación de la plantilla de verificación



Comprobación del prototipo para revisar el diseño, la estética y la fonética. Si es necesario, adaptación del ajuste pasivo en la plantilla de verificación.

3.ª visita

Entrega



Entrega de la restauración final.



Diseño y fabricación de la restauración final.

Pedido del cuerpo de referencia Straumann® RevEX™

N.º de ref.	Producto
025,0082	Cuerpo de referencia/RevEX SRA 3.5
025,0083	Cuerpo de referencia/RevEX SRA 4.6



Obtén más información en
straumann.com/revex

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2023. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.