

Informations destinées  
aux patients sur les  
soins postopératoires des  
implants dentaires

Soins d'une qualité  
optimale pour vos  
prothèses implanto-portées



Plus qu'une restauration.

Une nouvelle qualité de vie.

**Félicitations pour vos nouvelles dents.** Les implants Straumann sont une excellente option et un excellent investissement pour vos dents. L'entretien de votre implant est important pour sa réussite sur le long terme après l'intervention chirurgicale. Et, tout comme les dents naturelles, les implants requièrent le même suivi régulier et la même hygiène orale consciencieuse. Si vous suivez ces directives, la fonctionnalité de vos implants peut durer des dizaines d'années.



**Les thèmes relatifs à l'entretien sont :**

- Ce qu'il faut savoir et faire immédiatement après la chirurgie
- Ce qu'il faut éviter
- Quand contacter votre dentiste
- Comment prendre soin de vos nouvelles dents pour un succès à long terme

# Mesures durant la phase de guérison

## CE QU'IL FAUT SAVOIR ET FAIRE APRÈS LA CHIRURGIE

### **Gonflement : appliquez du froid avec des instruments appropriés**

Mettez du froid sur la zone traitée, à l'extérieur, en utilisant de la glace dès que possible après l'opération afin de prévenir la douleur et la tuméfaction.

### **Douleur : prenez vos médicaments**

Si le dentiste qui vous traite vous a prescrit des médicaments, commencez à les prendre tout de suite comme indiqué.

### **Bains de bouche : faites attention**

Au cours des premières heures suivant l'opération, vous ne devez pas vous rincer la bouche car cela pourrait vous faire saigner. Cependant, vous pouvez boire peu de temps après l'intervention !

### **Votre restauration provisoire : prenez-en soin**

Pendant qu'il cicatrise dans votre bouche, l'implant peut porter une « coiffe de cicatrisation » ou une dent provisoire. Une coiffe de cicatrisation est placée sur l'implant pour permettre à votre bouche de cicatriser avant l'étape suivante de votre traitement. Evitez de mâcher des aliments durs du côté où l'implant a été placé. Cela aidera l'implant à cicatriser sans problème pour préparer l'étape suivante de votre traitement.

## QUE DEVEZ-VOUS ÉVITER ?

- Il vaut mieux s'asseoir que s'allonger. Gardez la tête droite pendant la journée, et la nuit aussi. Ne vous allongez pas sur le côté où a été placé l'implant.
- Ne conduisez pas les premières heures suivant l'opération. Votre capacité à conduire peut être perturbée par l'anesthésie ou les médicaments. Demandez à votre dentiste.

- N'utilisez pas de brosse à dents sur la zone implantée jusqu'au retrait des points de suture. Votre dentiste vous recommandera d'utiliser un bain de bouche plusieurs fois par jour plutôt que de broser vos dents.
- Ne mangez pas avant que l'effet de l'anesthésie disparaisse.
- Les produits tels que l'alcool, la nicotine, le café et le thé noir doivent être évités les premiers jours suivant la procédure. Ne fumez pas.
- Le sport et l'effort physique doivent être évités les premiers jours suivant la procédure.

## QUAND DEVEZ-VOUS CONTACTER VOTRE DENTISTE ?

Les complications sont rares après la mise en place d'un implant dentaire – le traitement est généralement une procédure de routine. Les points de suture sont habituellement retirés sept à dix jours suivant la mise en place de l'implant. Les solutions Straumann ont fait l'objet de recherches approfondies et de tests scientifiques, mais il peut, toutefois, y avoir des effets secondaires. Il est très important de savoir que si vous ressentez des symptômes ou des effets secondaires, vous devez contacter votre dentiste immédiatement.

- Douleur pulsatile le jour de l'opération
- Sensation d'engourdissement au niveau du site de l'implant 12 heures après l'opération
- Douleur ou tuméfaction au niveau du site de l'implant plusieurs jours après l'opération
- Saignement supplémentaire
- Dent provisoire lâche
- Si vous avez des symptômes ou des questions non mentionné(e)s dans cette brochure

# Prenez soin de vos nouvelles dents


**Si vos dents sont importantes pour vous, vous en prenez soin.**

Il en va de même pour vos implants dentaires. Les implants dentaires ne peuvent durer longtemps qu'avec des soins buccaux méticuleux. Comme avec les dents naturelles, du tartre dentaire peut se former et causer des problèmes à votre implant. Utilisez une brosse à poils souples (changez-en régulièrement) ou une brosse à dents électrique pour nettoyer vos dents. De plus, vous devez utiliser tous les accessoires recommandés par votre dentiste tels que les brossettes interdentaires pour nettoyer les espaces entre les dents. Les dents doivent être brossées sur les parties intérieure, extérieure et supérieure utilisées pour la mastication.



### **Une coopération entre votre dentiste et vous**


Des contrôles et des consultations préventives réguliers chez le dentiste sont nécessaires. Un plan de soins buccaux individualisé vous sera décrit par votre dentiste. Vous devriez l'interroger sur les techniques de nettoyage de façon à vous familiariser avec ce que le dentiste veut que vous fassiez pour prendre soin de vos dents. Un soin méticuleux et des contrôles (deux fois par an) aideront votre implant dentaire à rester fermement en place pendant des années.

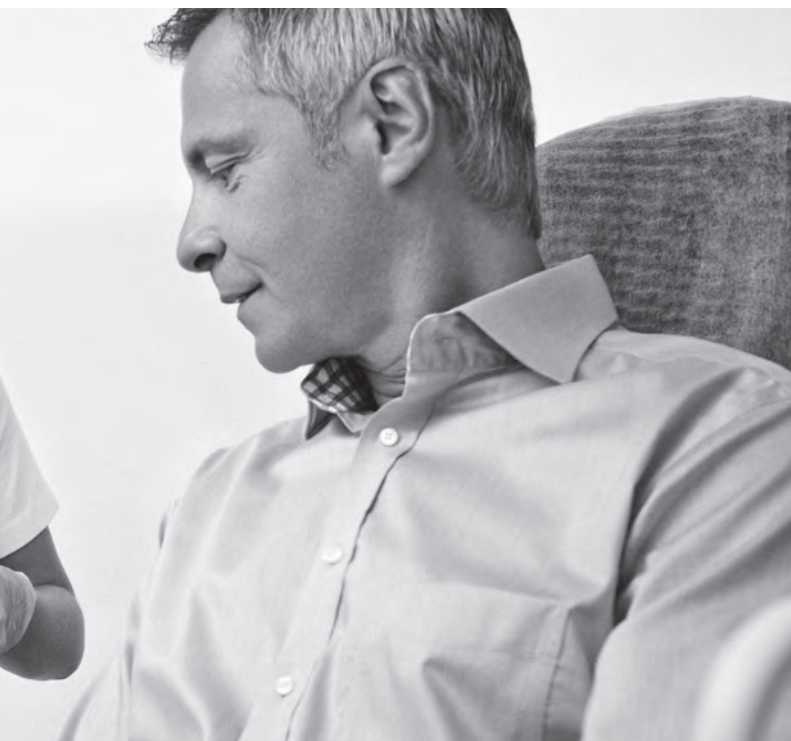

## LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE

Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l'aide qu'il vous faut pour vos implants dentaires Straumann.

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Rendez-vous sur [www.straumann.ch/patients](http://www.straumann.ch/patients) pour en savoir plus sur les produits et solutions de Straumann et demandez conseil à votre dentiste.



### **Straumann Suisse**

Peter Merian-Weg 12

4002 Bâle

Tel. 0800 810 812

[ch.sales@straumann.com](mailto:ch.sales@straumann.com)

© Institut Straumann AG, 2014. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.