

Informations aux patients sur
les soins postopératoires
des traitements parodontaux

Indications sur le
suivi du traitement avec
Straumann® Emdogain®

Que faire après la chirurgie ?

Après un traitement avec Straumann® Emdogain®, les multiples processus qui ont lieu au niveau de la gencive doivent être le moins perturbé possible.

Vous devez respecter quelques règles générales pendant la période de cicatrisation. Afin de ne pas compromettre le processus de cicatrisation, ne nettoyez pas vos dents au niveau de la plaie lors des premiers jours suivant l'intervention chirurgicale.

LES PRECONISATIONS SUIVANTES VOUS DONNENT LA MARCHE À SUIVRE LORS DES PREMIÈRES SEMAINES SUIVANT LE TRAITEMENT

Semaines 1 à 3

- Faites des bains de bouche antiseptiques plusieurs fois par jour.
- Ne nettoyez pas la zone traitée à l'aide d'une brosse à dents.
- Ne nettoyez pas les espaces interdentaires au niveau de la zone traitée.
- Évitez toute consommation d'alcool, de nicotine, de café, de thé noir et de produits laitiers frais.
- Évitez de mâcher dans la zone opérée.
- Évitez les aliments durs et solides.
- Les sutures seront retirées sous 2 à 3 semaines.

Semaines 4 à 6

- Continuez de faire des bains de bouche antiseptiques plusieurs fois par jour.





- Nettoyez soigneusement la zone traitée à l'aide d'une brosse à dents.
- Ne nettoyez pas les espaces interdentaires au niveau de la zone traitée.
- Faites faire un nettoyage de vos dents par un professionnel dentaire

Semaines 7 et suivantes

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
- Nettoyez soigneusement vos dents au niveau de la zone traitée, y compris les espaces interdentaires.
- Effectuez des contrôles réguliers et un nettoyage de vos dents chez un professionnel dentaire.

Au cours des premières semaines suivant le traitement, la procédure peut varier d'un patient à l'autre. Par conséquent, votre chirurgien-dentiste doit vous informer des instructions qu'il est primordial de suivre pendant cette période. Votre chirurgien-dentiste programmera des contrôles réguliers afin d'évaluer l'avancement de la cicatrisation. Nous vous recommandons de conserver une bonne hygiène bucco-dentaire et d'effectuer des contrôles dentaires réguliers après un traitement régénératif.

LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE

Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l'aide dont vous avez besoin pour vos implants dentaires Straumann.

Rendez-vous sur www.straumann.ch/patients pour en savoir plus sur les produits et solutions Straumann et demandez conseil à votre dentiste.



Le groupe Straumann, fondé en 1954 et établi à Bâle, en Suisse, est un pionnier et un leader mondial de la dentisterie implantaire et de la régénération tissulaire orale. En collaboration avec des cliniques de pointe, des instituts de recherche et des universités, Straumann se consacre à la recherche, au développement et à la fabrication d'implants dentaires, d'instruments, de composants prothétiques et de biomatériaux requis lors des procédures de préservation/remplacement et de restauration.

Institut Straumann AG

Straumann Suisse

Peter Merian-Weg 12

4002 Bâle

Tél. 0800 810 812

ch.sales@straumann.com

www.straumann.ch

© Institut Straumann AG, 2015. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.