



Instructions : choix de teinte à l'ère du numérique

La prise de teinte en quatre étapes :

- 1** Détermination grossière de la teinte
à l'aide du teintier « VITA classical A1-D4® »



- 2** En cas de moignons dentaires décolorés :
Déterminer impérativement la teinte du moignon.
Il est recommandé de se servir du teintier « IPS®
Natural Die Material » d'Ivoclar.

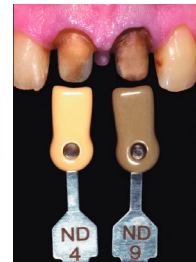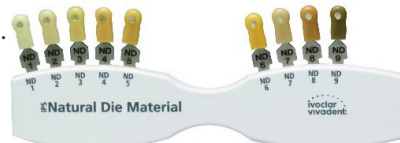

- 3** Photo numérique avec échantillon de teinte en situation :

Matériel :

- Appareil photo reflex numérique avec flash annulaire ou appareil similaire
- Caméra de téléphone mobile (par ex. iPhone)
- Caméra de téléphone mobile avec fonction « Smile Lite MDP » (solution idéale)
- En cas de flux de travail entièrement numérisé (comme c'est le cas avec TRIOS®), nous avons recours en supplément à la colorimétrie numérique (très utile notamment pour la région des dents antérieures).



- 4** En cas de dent antérieur ou d'essai/correction :
Prendre une nouvelle photo avec un échantillon de teinte en situation.



Importante remarque : toutes les teintes déterminées doivent être consignées pour chaque bon de commande du scanner intra-oral ou sur le formulaire ordinaire de commande au laboratoire en cas de prise d'empreinte conventionnelle.



En cas de question ou d'incompréhension :
Tél. 0800 810 817
E-mail : service.ch@etkon-dental.com