

Protesi **Straumann® CARES®**

## Istruzioni: preparazione della cementazione di protesi provvisorie

Per la cementazione delle nostre soluzioni provvisorie prodotte presso etkon (Schweiz) AG, consigliamo l'adesivo visio.link (Bredent GmbH).

Procedura:

- 1** Adattare i gusci provvisori alla situazione della bocca del paziente.
- 2** Sabbiare la superficie da cementare con ossido di alluminio 110 µm, pressione 2-3 bar (in alternativa si può utilizzare anche un abrasivo).
- 3** Bagnare la superficie sabbata (trattata) con un pennellino monouso.
- 4** Far indurire la superficie bagnata mediante fotopolimerizzazione (campo lunghezza d'onda 370-400 nm) per circa 90 secondi.
- 5** Pronti per continuare la lavorazione.  
(In caso di gusci provvisori è possibile continuare la lavorazione sia con PMMA che con composito)



**Importante:** dopo la preparazione evitare il contatto della superficie bagnata con le dita.



In caso di domande e dubbi: tel. 0800 810 817  
e-mail: [service.ch@etkon-dental.com](mailto:service.ch@etkon-dental.com)

Nota sul marchio:

visio.link è un marchio di visio.lign® (parte della Bredent GmbH & Co. KG, Germania).

**straumann**group