

# Scheda tecnica

Sbiancamento alla poltrona GLO  
GLO Science, Inc.



## INDICAZIONI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto	Dispositivi per estetica dentale
Indicazioni	Sbiancamento dentale professionale alla poltrona

## PROPRIETÀ DEL PRODOTTO




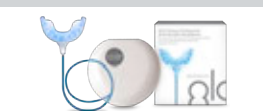




Origine	USA
Temperatura di conservazione	Temperatura ambiente
Specifiche del prodotto	<p>Trattamento eseguito da un professionista del settore odontoiatrico</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il prodotto di sbiancamento dentale è un gel traslucido di consistenza cerosa con profumo di menta, disponibile con concentrazione di perossido di idrogeno al 30%</li><li>• Primo componente - gel sbiancante: perossido di idrogeno (agente sbiancante) in una siringa a doppia camera</li><li>• Secondo componente - gel attivatore: desensibilizzante (KNO<sub>3</sub>), aumentatore di pH (NaOH), remineralizzante dello smalto (NaF)</li><li>• Intervalli di trattamento 4 x 8 min = 32 min</li></ul>
Parti componenti	<p>Ogni kit hardware per trattamento alla poltrona include:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pacchetto batteria GLO Control per l'alimentazione della mascherina sbiancante mediante batteria Li-Ion a polimeri</li><li>• GLO Control include un timer/interruttore automatico di spegnimento da 8 minuti; gli utilizzatori eseguono fino a quattro applicazioni da 8 minuti per volta</li><li>• Cavo di ricarica, docking station</li><li>• La mascherina di sbiancamento è composta da un circuito stampato flessibile che include elementi a emissione luminosa e di calore</li><li>• La mascherina si riscalda fino a 52 °C per attivare il gel sbiancante e accelerare la formazione degli ioni di ossigeno sbiancanti</li></ul> <p>Ogni kit paziente per uso alla poltrona include:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siringa con gel sbiancante professionale (30% HP) + puntale per siringa</li><li>• Siringa con barriera gengivale fotopolimerizzante + puntale per siringa</li><li>• Retrattore per labbra e guance</li><li>• Vitamina E e Aloe GLO per trattamento labbra</li><li>• Guida alle tonalità</li><li>• Manuale d'uso</li></ul>
Sterilizzazione / disinfezione	La mascherina con cavo blu è autoclavabile
Validità	2 anni
Stato regolamentare	Cosmetico CE
Immissione sul mercato	2014

## PRODUZIONE

### Confezione

Scatole di cartone

## LINEA DI PRODOTTI DISPONIBILI

	Descrizione/Imballaggio	Art.
	Training Kit GLO siringhe 30% HP + flaconcini 6% HP (HP- perossido di idrogeno) Peso (kg): 0,62 Dimensioni (cm): 31,8 (L) x 24,2 (P) x 8,1 (A)	259126DM30EU
	Kit hardware GLO con mascherina autoclavabile Peso (kg): 0,03 Dimensioni (cm): 22,86 (L) x 17,78 (P) x 7,62 (A)	158124EU
	6 scatole sbiancamento alla poltrona GLO 30% HP (HP-perossido di idrogeno) Peso (kg): 0,68 Dimensioni (cm): 28 (L) x 15,6 (P) x 7,7 (A)	659124EU
	Mascherina GLO autoclavabile Peso (kg): 0,005 Dimensioni (cm): 10,16 (L) x 11,43 (P) x 3,81 (A)	2581062EU
	6 scatole flaconcini GLO (x10), 6% HP (HP-perossido di idrogeno) + trattamento labbra Peso (kg): 0,45 Dimensioni (cm): 15,2 (L) x 17,7 (P) x 1,91 (A)	2581052106EU
	1 scatola flaconcini GLO (x10), 6% HP (HP-perossido di idrogeno) + trattamento labbra Peso (kg): 0,45 Dimensioni (cm): 15,24 (L) x 17,78 (P) x 1,91 (A)	258105210EU
	Guida alle tonalità GLO Vita con kit Motivational Shade Taking Peso (kg): 0,40 Dimensioni (cm): 21,59 (L) x 10,16 (P) x 5,72 (A)	258101257
	Display accensione sbiancamento GLO / inglese Peso (kg): 0,91 Dimensioni (cm): 40,64 (L) x 21,59 (P) x 16,51 (A)	2581012606
	Opuscolo sbiancamento GLO per il paziente (15 per confezione)	1581081

## HOTLINE

### UK

• (+44) 01 293 651230

### ITALIA

• (+39) 800 810 500

### GERMANIA

(+49) 761 450 13 50

## International Headquarters

Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
Phone +41 (0)61 965 11 11  
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Tutti i diritti riservati.

Straumann® e/o altri marchi commerciali e loghi di Straumann® citati nel presente documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Straumann Holding AG e/o delle sue affiliate.

