







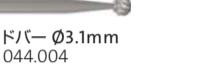


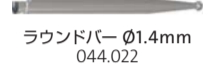


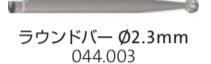


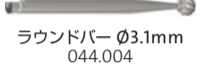







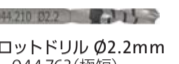


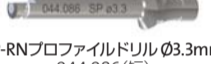
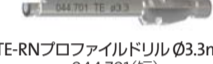
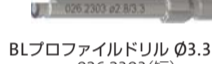
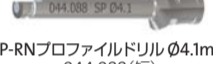
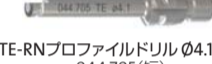
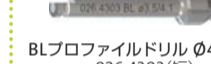
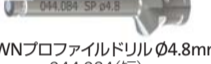
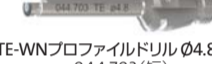
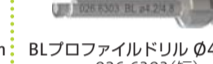
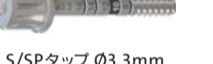
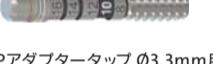
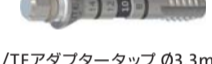
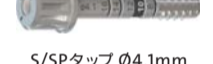
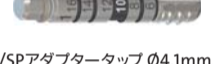
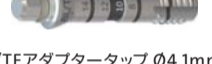
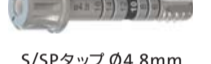
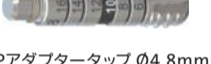


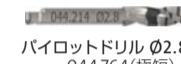
		Ø3.3mm					Ø4.1mm					Ø4.8mm									
		SP Ø3.3NN	S Ø3.3RN	SP Ø3.3RN	TE Ø3.3RN	BL Ø3.3NC	S Ø4.1RN	SP Ø4.1RN	TE Ø4.1RN	BL Ø4.1RC	S Ø4.8RN	SP Ø4.8RN	S Ø4.8WN	SP Ø4.8WN	TE Ø4.8WN	BL Ø4.8RC					
Roxolid® SLActive®	6mm	-	-	-	-	-	033.5305	033.5605	-	-	033.5805	033.5905	033.6005	033.6105	-	-					
	8mm	-	033.5015	033.5115	033.5215	021.2308	033.5315	033.5615	033.5715	021.4308	033.5815	033.5915	033.6015	033.6115	-	021.6308					
	10mm	-	033.5025	033.5125	033.5225	021.2310	033.5325	033.5625	033.5725	021.4310	033.5825	033.5925	033.6025	033.6125	033.6225	021.6310					
	12mm	-	033.5035	033.5135	033.5235	021.2312	033.5335	033.5635	033.5735	021.4312	033.5835	033.5935	033.6035	033.6135	033.6235	021.6312					
	14mm	-	033.5045	033.5145	033.5245	021.2314	033.5345	033.5645	033.5745	021.4314	033.5845	033.5945	-	-	033.6245	021.6314					
Roxolid® SLA®	6mm	-	-	-	-	-	043.1555	043.1615	-	-	043.0615	043.0665	043.0665	043.0655	-	-					
	8mm	-	043.2555	043.2605	-	021.2508	043.1565	043.1625	-	021.4508	043.0625	043.0675	043.0675	043.0655	-	021.6508					
	10mm	-	043.2565	043.2615	-	021.2510	043.1575	043.1635	-	021.4510	043.0635	043.0685	043.0685	043.0655	-	021.6510					
	12mm	-	043.2575	043.2625	-	021.2512	043.1585	043.1645	-	021.4512	043.0645	043.0695	043.0695	043.0655	-	021.6512					
	14mm	-	043.2585	043.2635	-	021.2514	043.1595	043.1655	-	021.4514	043.0655	043.0705	-	-	-	021.6514					
Ti SLA®	6mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	8mm	042.9305	-	043.9115	-	-	-	043.9255	-	-	043.9395	-	-	043.9485	-	-					
	10mm	042.9315	-	043.9125	-	-	-	043.9265	-	-	043.9405	-	-	043.9495	-	-					
	12mm	042.9325	-	043.9135	-	-	-	043.9275	-	-	043.9415	-	-	043.9505	-	-					
14mm	042.9335	-	043.9145	-	-	-	043.9285	-	-	043.9425	-	-	043.9515	-	-						
ラウンドバー		 ラウンドバー Ø1.4mm 044.022		 ラウンドバー Ø2.3mm 044.003		 ラウンドバー Ø3.1mm 044.004		 ラウンドバー Ø1.4mm 044.022		 ラウンドバー Ø2.3mm 044.003		 ラウンドバー Ø3.1mm 044.004		 ラウンドバー Ø1.4mm 044.022		 ラウンドバー Ø2.3mm 044.003		 ラウンドバー Ø3.1mm 044.004			
ドリル		 パイロットドリル Ø2.2mm 044.763(極短) 044.210(短) 044.211(長)		 パイロットドリル Ø2.8mm 044.764(極短) 044.214(短) 044.215(長)		 パイロットドリル Ø2.2mm 044.763(極短) 044.210(短) 044.211(長)		 パイロットドリル Ø2.8mm 044.764(極短) 044.214(短) 044.215(長)		 ツイストドリルPRO Ø3.5mm 044.250(短) 044.251(長)		 パイロットドリル Ø2.2mm 044.763(極短) 044.210(短) 044.211(長)		 パイロットドリル Ø2.8mm 044.764(極短) 044.214(短) 044.215(長)		 ツイストドリルPRO Ø3.5mm 044.250(短) 044.251(長)		 ツイストドリルPRO Ø4.2mm 044.254(短) 044.255(長)			
アライメントピン 深度ゲージ		 アライメントピン Ø2.2mm 046.703		 深度ゲージ Ø2.8mm (ディスタンスインジケータ付) 046.704		 深度ゲージ Ø2.8mm 046.705		 アライメントピン Ø2.2mm 046.703		 深度ゲージ Ø2.8mm (ディスタンスインジケータ付) 046.704		 深度ゲージ Ø2.8mm 046.705		 アライメントピン Ø2.2mm 046.703		 深度ゲージ Ø2.8mm (ディスタンスインジケータ付) 046.704		 深度ゲージ Ø3.5mm 046.706		 深度ゲージ Ø4.2mm 046.707	
プロファイルドリル		 SP-RNプロファイルドリル Ø3.3mm 044.086(短) 044.087(長)		 TE-RNプロファイルドリル Ø3.3mm 044.701(短) 044.708(長)		 BLプロファイルドリル Ø3.3mm 026.2303(短) 026.2306(長)		 SP-RNプロファイルドリル Ø4.1mm 044.088(短) 044.089(長)		 TE-RNプロファイルドリル Ø4.1mm 044.705(短) 044.712(長)		 BLプロファイルドリル Ø4.1mm 026.4303(短) 026.4306(長)		 SP-WNプロファイルドリル Ø4.8mm 044.084(短) 044.085(長)		 TE-WNプロファイルドリル Ø4.8mm 044.703(短) 044.710(長)		 BLプロファイルドリル Ø4.8mm 026.6303(短) 026.6306(長)			
タップ		 S/SPタップ Ø3.3mm 044.590(短) 044.591(長)		 S/SPアダプタータップ Ø3.3mm用 044.575		 BL/TEアダプタータップ Ø3.3mm用 026.2310		 S/SPタップ Ø4.1mm 044.592(短) 044.593(長)		 S/SPアダプタータップ Ø4.1mm用 044.577		 BL/TEアダプタータップ Ø4.1mm用 026.4310		 S/SPタップ Ø4.8mm 044.594(短) 044.595(長)		 S/SPアダプタータップ Ø4.8mm用 044.579		 BL/TEアダプタータップ Ø4.8mm用 026.6310			

封鎖スクリュー	ティッシュレベル	封鎖スクリュー	ヒールキャップ	ボーンレベル	封鎖スクリュー	ヒールキャップ	カスタマイズ ヒールキャップ
封鎖スクリュー	NNヒールキャップ*	封鎖スクリュー	ヒールキャップ	封鎖スクリュー	ヒールキャップ	ヒールキャップ	カスタマイズ ヒールキャップ
048.043*	048.043*	RN WN	RN WN	NC RC	NC RC	NC RC	NC RC
		048.3715 048.3755	048.3735 048.0385	024.21005 024.41005	024.21005 024.41005	024.21005 024.41005	024.2270 024.4270
		048.3715V4	048.0335 048.0395	024.21055 024.41055	024.21055 024.41055	024.22245 024.42245	024.2270 024.4270
			048.0345 048.0395			024.22465 024.42465	
			048.0375 048.0535			024.22345 024.42345	
			048.0285 048.0305			024.22365 024.42365	
			048.0295			024.22665 024.42665	
						024.22465 024.42465	
						024.22365 024.42365	

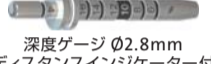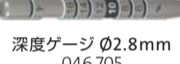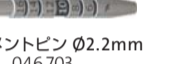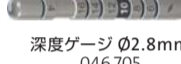Loxim™ トランスファーピースの特長

従来のトランスファーピース

Loxim™ トランスファーピース

Loxim™ の利点

- インプラント埋入アダプターのみで取り外し可能
- ホールディングキーが不要
- インプラントの内部構造を保護



Loxim™ トランスファーピースの操作法

ステップ1 - インプラント挿入アダプターを取り付ける

内部アンブルの側面を持ち、インプラント挿入アダプターをLoxim™ に装着します。カチッと音がするまで挿入してください。

ステップ2 - 内部アンブルからインプラントを取り出す

内部アンブルを下方に引き、インプラント本体をわずかに回転させて取り出します(手で支えて持ち上げてください)。

ステップ3 - インプラントを埋入する

インプラント床にインプラントを埋入します。ラチェット(またはハンドピース)を使って、最終埋入位置に到達するまで15rpm以下で挿入してください。

ステップ4 - インプラントポジションを修正する

最終的なインプラントポジションへと埋入していく際、青色のLoxim™ 上にあるガイドホールが傾斜に正確に向いているか確認します。インプラント内部の4つの軸のポジションが適切な位置にあることにより、適切なアダプメントの装着が可能になります。次のガイドホールまで4分の1回転すると、垂直方向に0.2mm移動します。

ステップ5 - Loxim™ を取り外す


インプラント埋入後、インプラント挿入アダプター上に持ち上げるだけでLoxim™ は外れます。インプラントが完全に埋入される前であれば、Loxim™ を再装着してインプラント埋入を修正できます。インプラント撤去が必要になった場合は、Loxim™ を反時計回りに回します。

Loxim™ ではインプラントの内部構造を保護するため、破折ポイントが80Ncmに設定されています(過剰なトルクがかかった場合、くびれの部分で破折するよう設計されています)。破折した場合は、インプラント挿入アダプター内に残ったLoxim™ の破折片を取り除き、インプラント本体に残ったLoxim™ にインプラント挿入アダプターを装着し、逆回転してインプラント本体を撤去してください。

初期固定が得られていない場合、リリースエイドでインプラントネック部分をおさえることにより、インプラントに力をかけずLoxim™ を取り外すことができます。

リリースエイド

リリースエイド Loxim™ 用
026.4558(R/W)

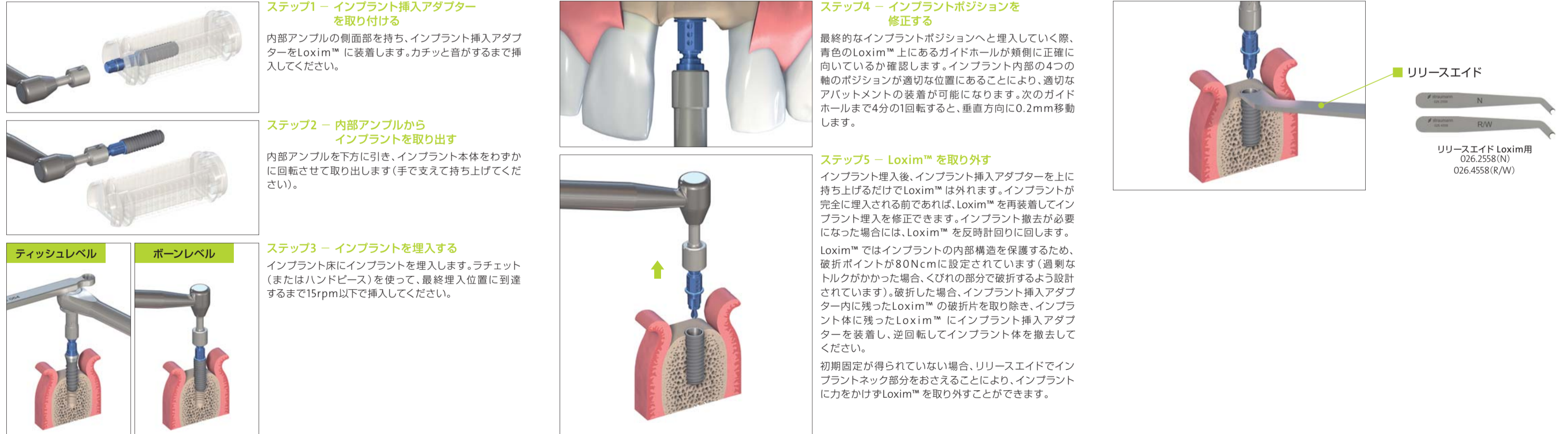

高度特長型番:

ストローマンインプラントヒールキャップ	209008Z00289000
ストローマンインプラント(両面溝)	214008Z0004000
ヒールキャップ(両面溝)	223008Z0017000
ストローマンTiアダプメント	223008Z0011000
ヒールキャップタイプC	223008Z00139000
ストローマンインプラント(SLActive)TL	226008Z0006000
ストローマンインプラント(SLActive)BL	226008Z00257000
ストローマンインプラント(Roxolid SLActive)BL	227008Z00241000
ストローマンインプラント(Roxolid SLActive)TL	227008Z00428000

特長型番:

ストローマンサージカルインスツルメント	227AG8ZX0052000
---------------------	-----------------

一般型番:

深さゲージ	181X10163000107
ラチェット	181X10163000114
ラウンドバー	181X10163000120
プロファイルドリル	181X10163000121
パイロットドリル	181X10163000125
TEプロファイルドリル	181X10163000126
ハンドピース用アダプター	181X10163000127
ツイストドリルPRO	181X10163000153
ストローマンサージカルインスツルメント(ガイド付)	181X10163000172
TEアダプター用タップ	181X10163000201
ストローマンインプラント用マニュアルツール	181X10163000305

価格および記載内容は、2018年1月現在のものです。予告なく変更させて頂く場合がございます。

FC0111/2018.01 © OK-NP

straumann
simply doing more