

# Фрезеруйте на своем оборудовании. Индивидуальный абатмент Straumann с оригинальным соединением.

С заготовками для индивидуальных абатментов Straumann® вы можете фрезеровать на имеющихся у вас CAD/CAM системах однокомпонентные индивидуальные абатменты для имплантатов Straumann® с оригинальным соединением.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

- Идеальное соответствие компонентов системы Straumann (точность посадки и контроль микрозазора)
- Сервис и поддержка клиентов
- Защита Гарантийной программой Straumann\* (пожизненная гарантия на имплантат и постоянный металлический абатмент)



\*Условия Гарантийной программы Straumann (включая территории на которых она работает) изложены в информационном флаере (152.360/ru)

# Как изготовить на своем фрезерном станке однокомпонентный абатмент Straumann® с оригинальным соединением

## Необходимое условие

• Заготовки для индивидуальных абатментов Straumann® совместимы с матрицами для крепления заготовок Medentika, которые используются на постоянно растущем количестве разновидностей фрезерных систем и, в частности, на таких как:

- Dental Concept DC5®
- VHF
- Röders RXD®
- Imes-icore®
- Wissner Gamma 202®
- MB Maschinen Cobra Mill®
- Datron D5®


За дополнительной информацией о совместимости с продукцией Straumann и возможности его интеграции в рабочий процесс обращайтесь к поставщику вашего фрезерного оборудования.

## Программное обеспечение для моделировки

- Скачайте с сайта Straumann оригинальные библиотеки для моделирования индивидуальных абатментов из предварительно отфрезерованных заготовок Straumann® в программном обеспечении Dental Wings, 3shape или Exocad.
- Смоделируйте однокомпонентный титановый абатмент согласно вашим индивидуальным требованиям.

## Информация для заказа

Для заказа доступен следующий ассортимент предварительно отфрезерованных заготовок (премилов) для изготовления индивидуальных абатментов:

	Артикул	Наименование продукта
Bone Level		022.0028 NC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5
		022.0029 NC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8
		022.0030 RC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5
		022.0031 RC Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8
Tissue Level		022.0034 RN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5
		022.0035 RN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8
		022.0036 WN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 11.5
		022.0037 WN Pre-milled Abutment Blank for Medentika Holder Ø 15.8

## Национальный дистрибьютор в России

ООО „Штрауманн“  
119571, Москва  
Ленинский проспект, 119А  
Тел.: +7 495 139 74 69  
Факс: +7 495 139 74 75  
www.straumann.ru