



不只是钛基底基台

更是值得您信赖的长期稳定性



不仅仅拥有整条价值链


更为您的椅旁工作流程提供原厂钛基底基台

种植体支持式修复体的椅旁工作流程让您能够以非常快速、有效且经济的方式修复种植病例。

通过与 Sirona 开展合作, Straumann® Variobase® C 现在可通过 Sirona 软件制作。这样,您就可充分利用椅旁种植工作流程的优势,不仅可以获得 Straumann® 原厂种植体—基台连接而且为骨水平种植体平台实现匹配的穿龈轮廓。



适用于 Straumann® 骨水平种植体的 Variobase® C 的凹形环设计。

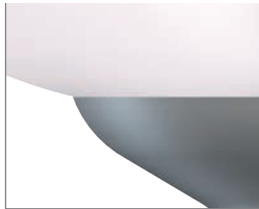

据称适用于 Straumann® 骨水平种植体的 CEREC® 第三方钛基底基台的凸形环设计。

基台设计为您的患者带来不同的体验

我们经过改良的骨水平 NC 和 RC Variobase® C 设计, 可提供最佳的穿龈轮廓, 使您的修复体呈现出最佳的美学效果。此外, 凹形环设计更方便患者清洗。

- NC 和 RC 骨水平 Variobase® C
 - 穿龈高度增加至 1 mm
 - 凹形环设计
- NC 骨水平 Variobase® C
 - 将平台直径从 $\varnothing 4.5 \text{ mm}$ 减小至 $\varnothing 3.8 \text{ mm}$



原厂种植体—基台连接

依赖于士卓曼种植体与其相应修复配件间完美匹配的设计。士卓曼原厂连接配件具有以下优势:

- 完美匹配的配件
 - 经过长期临床验证, 安全可靠
 - 出色的服务和支持

通过 STRAUMANN® VARIOBASE® C 修复士卓曼种植体的方式

第 1 步 – 订购



Variobase® C 适用于 Sirona 扫描体、Sirona 扫描杆和具有预成螺
通道的修复材料。

请按下表所示选择各个部件：

Variobase® C	Sirona 扫描体型号	Sirona 扫描杆型号	修复材料 螺丝孔型号
	L	S BL 4.1 L	L
RC, 穿龈高度 1 mm 022.0044			
	S	S BL 3.3 L *	S
NC, 穿龈高度 1 mm 022.0043			
	S	无	S
NNC 022.0018			
	L	SSO 4.8 L	L
RN 022.0019			
	L	SSO 6.5 L	L
WN 022.0020			

*使用 Sirona 扫描杆进行扫描时, 请使用 L 号扫描体。



- 通过您首选的士卓曼销售渠道订购 Variobase® C
 - 通过 Sirona 分销网络订购 Sirona 扫描体和扫描杆
 - 通过材料制造商的分销网络订购具有预成螺通道的修复材料


第 2 步 – 口腔内扫描



将 Variobase® C 或
Sirona 扫描杆戴入
种植体



将 Sirona 扫描体放
置于 Variobase® C
或 Sirona 扫描杆上

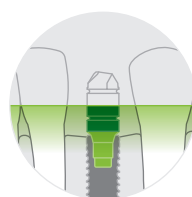


进行口内扫描



第 3 步 – 设计和研磨

使用 Sirona 软件选择原厂 Straumann® Variobase® C。

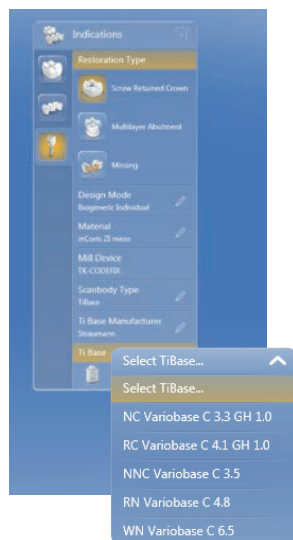


- 从 CAD/CAM 系统的种植体库中选择 Variobase® C, 以设计修复体
- 研磨修复体

Sirona CEREC® 软件
选择框

提供适用于以下 Sirona 软件产品的 Variobase® C 数据包。请从 Sirona 网站上下载 Variobase® C 数据包。

软件	版本
CEREC®	4.3 或更高版本
CEREC® Premium	4.4 或更高版本
In-Lab	15.1 或更高版本

第 4 步 – 最终调整和戴入

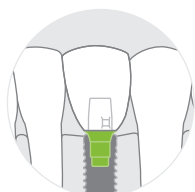

- 口腔内检查修复体放在 Variobase® C 上的密合度
- 按照标准程序调磨修复体
- 将修复体粘接*到 Variobase® C 上
- 最终戴入到患者口内

*有关恰当的粘接操作, 请参阅 ifu.straumann.com 上提供的《使用说明》。





www.straumann.cn

国际总部

Institut Straumann AG Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
电话: +41 (0)61 965 11 11
传真: +41 (0)61 965 11 01

士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司

地址: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座3层303室
100020
电话: +86 10 5775 6555
传真: +86 10 5775 6556

CEREC® and ScanPost® are registered trademarks of Sirona Dental Systems, Inc., USA.

© Institut Straumann AG, 2016. All rights reserved.

Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of Straumann Holding AG and/or its affiliates.