

Su plan de tratamiento ortodónico clearcorrect

A Straumann Group Brand

NOMBRE DEL PACIENTE

LOGOTIPO AQUÍ - ARRASTRAR
Y SOLTAR IMAGEN



NOMBRE DE LA CONSULTA

DIRECCIÓN DE LA CONSULTA

SITIO WEB DE LA CONSULTA

NÚMERO DE CONSULTA

Su tratamiento propuesto con ClearCorrect

Este documento describe nuestro plan de tratamiento propuesto que comentaremos con usted con más detalle.

Los alineadores ClearCorrect están hechos a medida para usted. Con ClearCorrect, puede disfrutar su vida, mientras de manera cómoda y discreta endereza sus dientes.

Los alineadores ClearCorrect son extraíbles, para que pueda comer, beber y cuidar sus dientes como lo haría normalmente. De hecho, puede llevarlos o quitárselos como crea conveniente durante cualquiera de sus actividades diarias sin riesgo añadido de lesión o irritación.

Los alineadores ClearCorrect también son casi invisibles, por lo que la mayoría de las personas ni siquiera sabrán que los lleva.

Una vez que esté satisfecho con el plan que le presentamos, ClearCorrect fabricará sus alineadores. A partir de ahí, sólo tendrá que llevar los alineadores 22 horas al día. Mueven los dientes poco a poco con cada alineador.

¡Esperamos ayudarle en su trayectoria para conseguir la sonrisa que merece!

ACERCA DE NOSOTROS



SUS FOTOGRAFÍAS



SU TRATAMIENTO

VER SU CONFIGURACIÓN 3D

CONTRASEÑA PARA ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

SU INVERSIÓN

Coste total del tratamiento

Opciones de pago

OPCIÓN 1:

OPCIÓN 2:

OPCIÓN 3:

Testimonios

★★★★★

"Mi sonrisa es fantástica ahora y nadie sabe que estaba recibiendo tratamiento. Realmente es invisible".

JAMES T

★★★★★

"El tratamiento ClearCorrect fue muy fácil y me encantó el hecho de poder seguir lavándome los dientes como de costumbre y poder quitármelos para determinadas actividades laborales. Ahora tengo mucha más confianza".

SARAH S

★★★★★

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
"Me siento mucho más segura ahora con mis nuevos dientes rectos. ¡Estoy lista para cada fotografía y ya no me tapo la boca con la mano!"

JUSTINE B

GALERÍA DE SONRISAS



Sus pasos siguientes



Preguntas frecuentes

El tratamiento ortodóncico exitoso implica una asociación entre el dentista y el paciente. Nos dedicamos a lograr el mejor resultado posible para cada paciente. Si lleva sus alineadores según las instrucciones, acude a todas las citas y cuida sus alineadores, su tratamiento debe ir como estaba previsto.

¿Es cómodo el tratamiento?

En comparación con los alambres y brackets, los alineadores transparentes han demostrado ser más cómodos.¹ ClearCorrect también mejora la comodidad al aplicar menos presión inicial que otros alineadores del mercado.²

La tecnología avanzada de ClearCorrect proporciona un ajuste más personalizado y cómodo para una amplia variedad de situaciones dentales.

Es posible que observe cambios en la mordida, la forma en que se juntan los dientes superiores e inferiores. Aunque esto no es doloroso, algunas personas dicen que es necesario acostumbrarse al principio. Los cambios en su mordida suelen ser el primer signo de que sus alineadores ClearCorrect están empezando a funcionar.

Cuanto más tiempo lleve los alineadores, más cómodos y naturales le resultarán.

¿Son realmente invisibles?

Con ClearCorrect puede mostrar su sonrisa y no su tratamiento. Los alineadores ClearCorrect son casi invisibles, por lo que la mayoría de las personas ni siquiera sabrán que los lleva. También se mantienen transparentes: los estudios muestran que los alineadores ClearCorrect resisten las manchas mejor que otras marcas.

¿Afectará a mi habla?

Es posible que hable con un ligero ceceo mientras la lengua se adapta a los alineadores: esto habitualmente desaparece en unos pocos días.

¿Cómo limpio mis alineadores?

Quítese siempre los alineadores para comer. Enjuague sus alineadores con agua fría y guárdelos en un lugar seguro. Es importante que se cepille los dientes y use hilo dental después de cada comida para evitar que los alimentos y las bebidas queden atrapados debajo de los alineadores. Limpie los alineadores con un cepillo de dientes y agua fría. Para una limpieza más profunda, puede utilizar pasta dental no abrasiva, pero no utilice limpiadores para prótesis removibles ni enjuagues bucales. Tenga especial cuidado de mantener los alineadores lejos del alcohol y de líquidos calientes, dulces o pigmentados.

¿Qué son esos relieves raros en mis dientes?

Estas protuberancias (conocidas como ataches) ayudan al alineador a mover los dientes. La buena noticia es que los alineadores ClearCorrect están diseñados específicamente para mover los dientes de manera adecuada y con menos ataches.

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

El tiempo de tratamiento puede variar en función de diversos factores. Algunos pacientes pueden terminar el tratamiento en solo unas semanas, mientras que otros pueden tardar más tiempo. Podrá ver el número previsto de pasos en su plan de tratamiento y calcular el tiempo necesario. Dependiendo de su caso específico, es posible que tenga que llevar cada alineador individual entre 1 y 3 semanas cada uno.

¿Qué es el IPR?

IPR es la abreviada de "interproximal reduction" (reducción interproximal). Se trata de una técnica que consiste en eliminar cuidadosamente pequeñas cantidades de esmalte entre los dientes para reducir su anchura. El IPR a veces es necesario durante el tratamiento para crear el espacio necesario para enderezar los dientes apiñados.

¿Cuál es el tiempo de uso diario?

Debe llevar puesto cada alineador todo el día y toda la noche, excepto mientras come, bebe y se cepilla los dientes. Es importante que lleve los alineadores al menos 22 horas al día, de lo contrario, el proceso de enderezamiento se puede ralentizar, lo que prolongará su tratamiento.

¿Tendré que llevar un retenedor?

Cuando finalice su tratamiento, trabajaremos con usted en un plan de retención que sea el más adecuado para usted. Esto puede incluir un retenedor ClearCorrect, un retenedor con alambres (Hawley) o un retenedor permanente. Sin una solución de retención, los dientes pueden empezar a desplazarse una vez finalizado el tratamiento.

¿De qué están hechos los alineadores ClearCorrect?

Los alineadores ClearCorrect están fabricados con ClearQuartz, un material plástico de tres capas, líder en el sector, que mejora la comodidad y la transparencia al tiempo que mantiene la durabilidad.

¿Contienen BPA o ftalatos los alineadores?

No. Los alineadores ClearCorrect están hechos sin BPA ni ftalatos.

¿Puedo seguir llevando ClearCorrect si estoy embarazada o en periodo de lactancia?

¡Sí! Los alineadores ClearCorrect no contienen productos químicos dañinos y son adecuados para su uso durante el embarazo o la lactancia. En caso de duda o preguntas, consulte siempre con un profesional de la odontología.

