


PRÉDICTIBILITÉ DES DÉPLACEMENTS

Encombrement/espacement

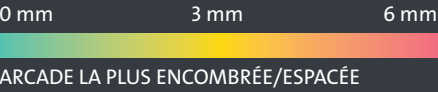


Surplomb vertical (overbite)




Béance




Translation

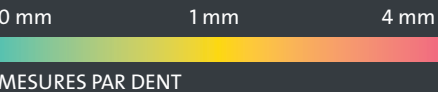


Resserrage

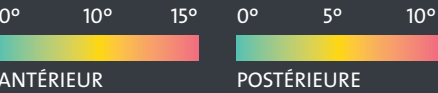



Rotation

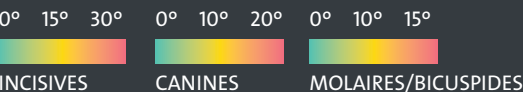

Extrusion

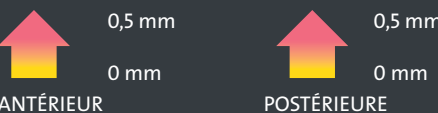


Intrusion

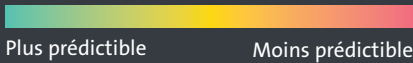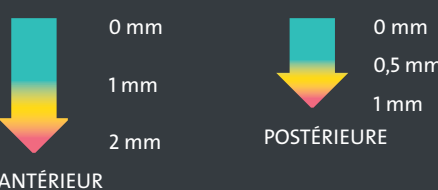



Alignement incorrect de la ligne médiane et surplomb horizontal



Inclinaison mésio-distale

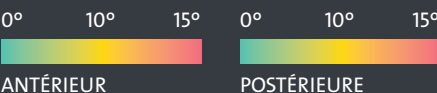

Inclinaison vestibulo-linguale

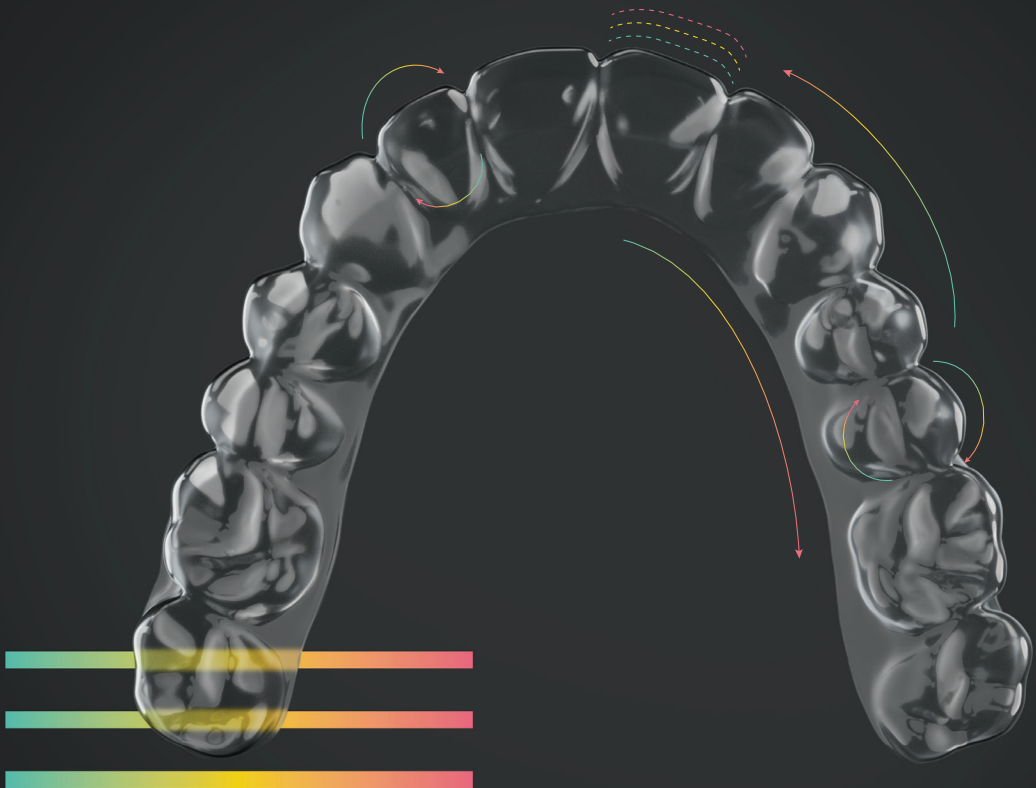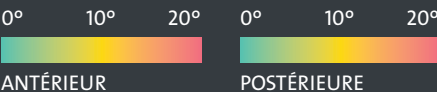

Options de traitement
et paramètres

OPTIONS DE TRAITEMENT ET TABLEAU DES PARAMÈTRES DES CAS

	FLEX	MINI	ONE	TWO	UNLIMITED
ENCOMBREMENT	jusqu'à 3 mm par arcade	jusqu'à 3 mm par arcade	4 mm à 6 mm	6 mm à 8 mm	>8 mm
DIASTÈME/FERMETURE DES ESPACES	jusqu'à 3 mm par arcade	jusqu'à 3 mm par arcade	4 mm à 6 mm	6 mm à 8 mm	> 8 mm
CORRECTION DE LA LIGNE MÉDIANE	jusqu'à 1 mm	jusqu'à 1,5 mm	1,5 mm à 2 mm	2 mm à 3 mm	>3 mm
ROTATION DES INCISIVES	jusqu'à 10°	jusqu'à 15°	de 15° à 30°	de 30° à 40°	>50°
ROTATION DES CANINES	jusqu'à 15°	jusqu'à 20°	de 20° à 35°	de 35° à 45°	>55°
ROTATION DES PRÉMOLAIRES	0	jusqu'à 15°	de 15° à 30°	de 30° à 45°	>55°
ROTATION DES MOAIRES	0	jusqu'à 10°	de 15° à 20°	de 20° à 25°	>30°
EXTRUSION ANTÉRIEURE (PAR ARCADE)	jusqu'à 1 mm	jusqu'à 1 mm	1 mm à 2 mm	2 mm à 3 mm	>3 mm
EXTRUSION POSTÉRIEURE (PAR ARCADE)	0	0	0	jusqu'à 0,5 mm	>0,5 mm
INTRUSION ANTÉRIEURE (PAR ARCADE)	jusqu'à 0,5 mm	jusqu'à 0,5 mm	jusqu'à 0,5 mm	jusqu'à 1 mm	>1 mm
INTRUSION POSTÉRIEURE (PAR ARCADE)	0	jusqu'à 0,5 mm	jusqu'à 0,5 mm	jusqu'à 1 mm	>1 mm
EXPANSION/ DÉVELOPPEMENT DE L'ARCADE	jusqu'à 1 mm par quadrant	jusqu'à 1,5 mm par quadrant	jusqu'à 1,5 mm par quadrant	jusqu'à 2 mm par quadrant	>3 mm par quadrant
CORRECTION ANTÉRO-POSTÉRIEURE	0	jusqu'à 1 mm	1 mm à 2 mm	2 mm à 3 mm	>4 mm
TORQUE DE LA RACINE EN DIRECTION LINGUALE ANTÉRIEURE	jusqu'à 5°	jusqu'à 10°	jusqu'à 10°	jusqu'à 15°	>15°
TORQUE DE LA RACINE EN DIRECTION LINGUALE POSTÉRIEURE	0	jusqu'à 5°	jusqu'à 5°	jusqu'à 10°	>10°
DISTALISATION POSTÉRIEURE (MÂCHOIRE)	0	jusqu'à 1 mm	1 mm à 2 mm	2 mm à 3 mm	>4 mm
MÉSIALISATION POSTÉRIEURE	0	jusqu'à 0,5 mm	0,5 mm à 1 mm	1 mm à 2 mm	>2 mm
	Idéal pour des déplacements simples/ prédictibles			Idéal pour des déplacements de difficulté moyenne à difficiles	

Réf. : "Clear Aligners in Orthodontic Treatment" by T. Weir. Australian Dental Journal, 2017.

GUIDE DES OPTIONS DE TRAITEMENT

Quelle est la bonne option de traitement pour votre cas ?



FLEX

- Si l'on corrige un faible nombre de défauts
- Lorsque vous prévoyez que vous aurez besoin d'un nombre relativement peu important de gouttières (moins de 15 + 2 contentions) pour corriger un défaut de façon efficace
- Cas mineur de rechute orthodontique (c'est-à-dire léger encombrement antérieur)
- Pour le traitement d'une seule arcade
- Prix à la gouttière + configuration de traitement

MINI

- Pour les cas très simples
- Si l'on corrige un faible nombre de défauts
- Lorsque vous prévoyez que vous aurez besoin d'un nombre relativement peu important de gouttières (12 gouttières plus une révision incluse) pour corriger un défaut de façon efficace
- Pour le traitement de la zone esthétique (Social Six)
- Pour une association mineure de traitement (passage d'une orthodontie classique à des gouttières transparentes)
- Forfait comprenant jusqu'à 12 jeux de gouttières, ainsi qu'une révision.
- Jusqu'à six mois de traitement

ONE

- Si l'on corrige un nombre modéré de défauts
- Lorsque le traitement nécessite plus de 12 étapes, mais moins de 24 étapes
- Lors de la correction d'un encombrement/espacement simple
- Pour la réduction d'un surplomb horizontal (overjet) et d'un surplomb vertical (overbite) ou des occlusions croisées simples
- Pour améliorer des dents inclinées et en rotation ou corriger des proclinaisons
- Forfait comprenant 24 jeux de gouttières maximum, une révision et un jeu de contentions.
- Jusqu'à un an de traitement

TWO

- Si l'on corrige un nombre modéré de défauts
- Lorsque le traitement nécessite plus de 24 étapes, mais moins de 48 étapes
- Lors de la correction d'un encombrement/espacement de difficulté moyenne
- Pour la correction d'un surplomb horizontal (overjet) et d'un surplomb vertical (overbite) ou d'une occlusion croisée de difficulté moyenne
- Pour les corrections d'anomalies verticales simples et de difficulté moyenne
- Forfait comprenant 48 jeux de gouttières maximum, ainsi que deux révisions et deux jeux de contentions.
- Jusqu'à deux ans de traitement

UNLIMITED

- Si l'on corrige un nombre important de défauts
- Lorsqu'il existe un risque de révisions multiples
- Lors du traitement de cas avec extractions ou de la correction d'une affection squelettique
- Pour les associations de traitements complexes nécessitant divers auxiliaires, comme les élargisseurs et les distaliseurs dentaires¹
- Dans le cas d'un traitement réalisé en plusieurs phases distinctes²
- Lorsque le respect du traitement par le patient est en doute ou pour les patients chez qui le traitement est susceptible d'être interrompu
- Forfait comprenant toutes les gouttières nécessaires pendant 5 années complètes, ainsi que les remplacements, les révisions et les contentions.

Toutes les options présentées ne sont pas toujours disponibles dans tous les pays.