

# STRAUMANN® EMDOGAIN®

## SOINS POST-TRAITEMENT

En implantologie dentaire et dans le domaine des biomatériaux, Straumann® est le garant d'une qualité suisse haut de gamme, d'une précision et d'une innovation qui génèrent de la confiance chez les patients et les dentistes, soutenu par l'un des plus grands réseaux scientifiques dans le monde. Straumann repousse les limites pour inspirer l'avènement de la prochaine génération de soins dentaires, axée sur la santé des patients, la qualité de vie et la durabilité.

**Ce que vous devez savoir :** si vous souffrez d'un diabète non contrôlé, de plaies qui ne cicatrisent pas, si vous prenez de fortes doses de stéroïdes ou un anticoagulant, si vous souffrez d'une maladie osseuse, si vous êtes traité par radiothérapie ou par d'autres traitements susceptibles de supprimer votre système immunitaire ou si vous avez déjà eu des problèmes dans le passé après une intervention chirurgicale, ce traitement peut présenter certains risques pour vous. Ces affections ne sont pas associées à Straumann® Emdogain®, mais peuvent être associées à la chirurgie buccale. Veuillez consulter votre praticien pour savoir si Straumann® Emdogain® serait un bon traitement pour vous. Vous pouvez également présenter une complication après le traitement. Contactez immédiatement votre praticien le cas échéant. Pour que le traitement par Straumann® Emdogain® soit optimal, vous devez respecter les instructions de votre praticien en matière d'hygiène buccale.

### Straumann Group France

2 rue Roger Salengro - 94 120 Fontenay sous Bois  
Téléphone : 01 64 17 30 08 - Fax : 01 64 17 30 10  
[www.straumann.fr](http://www.straumann.fr)

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.



# STRAUMANN® EMDOGAIN®

INFORMATIONS POUR LES PATIENTS  
RELATIVES AU SOINS POST-TRAITEMENT



430133/fr/8/00-FR-06/24



# QUE FAIRE APRÈS L'OPÉRATION ?



Après le traitement par Straumann® Emdogain®, évitez toute perturbation de la gencive, afin de permettre aux processus impliqués dans la cicatrisation de se dérouler correctement.

Vous devez suivre quelques règles générales pendant la période de cicatrisation. Afin de ne pas perturber la cicatrisation, ne lavez pas les dents dans la zone de la plaie pendant les premiers jours suivant l'opération.

## LES INSTRUCTIONS SUIVANTES VOUS GUIDERONT TOUT AU LONG DES PREMIÈRES SEMAINES SUIVANT LE TRAITEMENT.

### Semaine 1 - 3

- Utilisez un bain de bouche antiseptique plusieurs fois par jour
- Ne nettoyez pas la zone traitée avec une brosse à dents
- Ne nettoyez pas les espaces interdentaires dans la zone traitée
- Évitez l'alcool et la nicotine
- Évitez la zone traitée lors de la mastication
- Évitez les aliments durs et nécessitant une mastication prolongée
- Les sutures seront retirées après 2 à 3 semaines

### Semaine 4 - 6

- Continuez à utiliser un bain de bouche antiseptique plusieurs fois par jour
- Nettoyez soigneusement la zone traitée avec une brosse à dents
- Ne nettoyez pas les espaces interdentaires dans la zone traitée
- Nettoyage professionnel des dents par un professionnel dentaire

### À partir de la semaine 7

- Nettoyez soigneusement les dents dans la zone traitée, y compris les espaces interdentaires
- Prévoyez un suivi régulier, ainsi qu'un nettoyage professionnel



## Au cours des premières semaines suivant le traitement, la procédure peut varier en fonction de chaque patient.

Le dentiste traitant doit donc vous donner des instructions importantes que vous devez suivre pendant cette période. Le dentiste traitant prévoira un suivi régulier pour évaluer l'évolution de la cicatrisation. Après la restauration, nous recommandons le maintien d'une bonne hygiène bucco-dentaire et d'effectuer des contrôles dentaires fréquents.

