

Caso Clinico

- Profilo: F.E.
Maschio, 57 aa
Sabbio Chiese, Brescia


- Situazione clinica:

Sella edentula in 4.6 e presenza di residuo radicolare di 4.7 e 4.8 entrambi con area radiotrasparente periapicale
Posizionamento in posizione 4.6, area edentula, di un impianto Drive CM (3,5 x 10mm) con torque > 60N.cm;
In sede post estrattiva di 4.7, dopo attenta toelettatura alveolare si inserisce impianto Drive CM (4,3 x 10mm) con torque di 50 N.cm2, nell'alveolo distale rettificato.

- Soluzione protesica:

Guarigione transmucosa grazie al torque elevato . Corone in ceramica

Estrazione dente	Posizionamento impianto	Restauro provvisorio	Restauro definitivo
10/2016	10/2016		04/2017

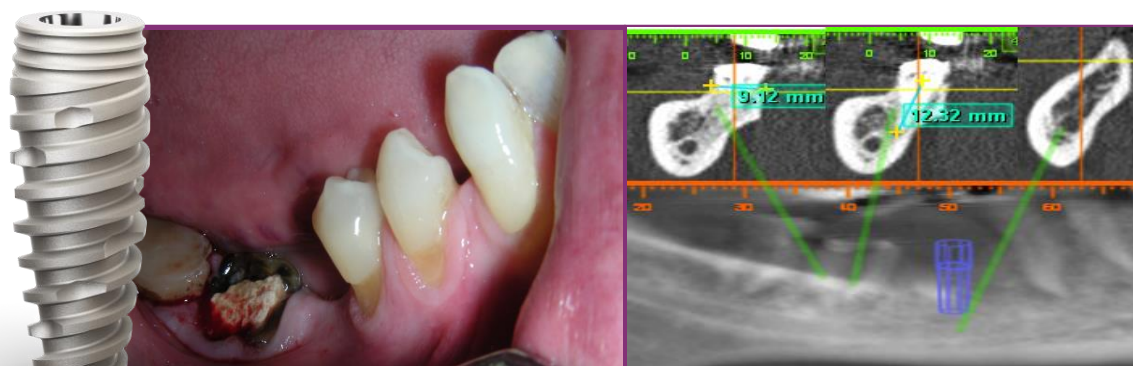

Dr. Gallo - S.D.Ass. Bossini-Gallo

- Cellatica, Brescia


- Il Dott. Francesco Gallo si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Brescia nel 1996 con il massimo dei voti e la lode. Dal 1999 è titolare insieme al Dott. Stefano Bossini dello studio Dentistico Associato Bossini Gallo. Frequenta numerosi corsi delle varie aree specialistiche odontoiatriche e si specializza in Protesi nel 2005 presso la Associação Brasileira de Odontologia, a Natal, Brasile. Esercita la professione nelle due sedi dello studio associato, Cellatica e Sabbio Chiese, con particolare attenzione alla protesi, alla chirurgia implantare e parodontale



Caso Clinico



Sella edentula in 4.6 e residui radicolari di 4.7 e 4.8

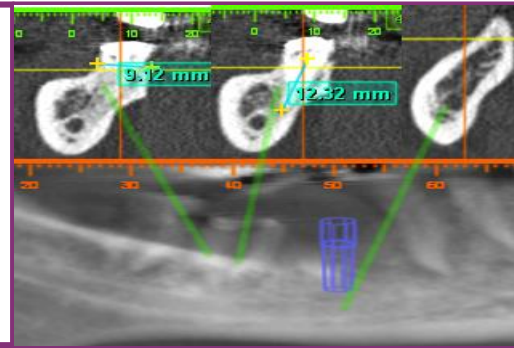


Situazione radiografica iniziale: elementi 4.7 e 4.8 con radiotrasparenza apicale, già sede di episodi ascessuali in passato




Particolare della recessione gengivale associata all'edentulia e alle abrasioni ai colletti di 4.4 e 4.5



Preparazione del lembo a spessore misto e delle radici di 4.4 e 4.5 per la copertura delle recessioni con lembo a scorrimento coronale a spessore parziale associato a quello a spessore totale a fini implantari

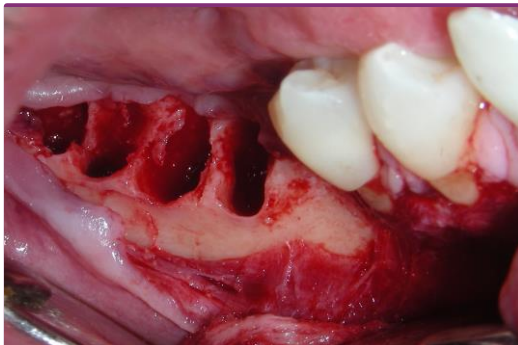

Area bonificata e pronta per ricevere le fixtures

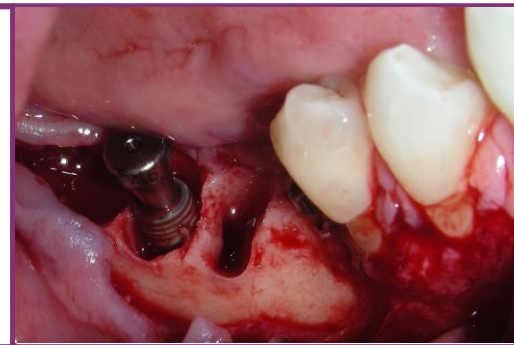


Impianto Drive CM 3,5x10mm inserito nella sella edentula di 4.6 e impianto Drive CM 4,3x10mm inserito nell'alveolo distale rettificato di 4.7 dopo avulsione e attenta toelettatura degli alveoli postestrattivi


Caso Clinico



Dettaglio della conservazione del periostio perimplantare per favorire l'attecchimento del lembo e la formazione di mucosa cheratinizzata attorno alla vite di guarigione

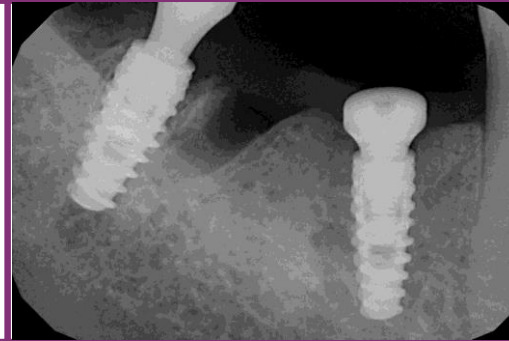


Radiografia postoperatoria. Notare il volontario posizionamento delle fixtures sotto il margine osseo

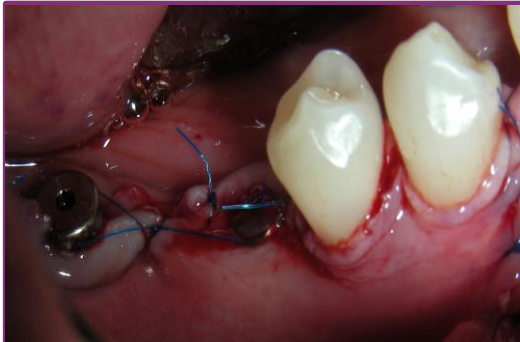

Chiusura del lembo a spessore misto per copertura delle recessioni, chiusura degli alveoli postestrattivi e adattamento alle viti di guarigione implantari



Guarigione del canale mucoso con abbondante mucosa cheratinizzata

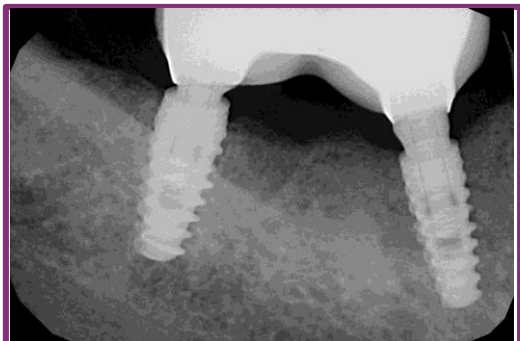

Visione rx del risultato protesico: notare la crescita di osso coronalmente alla piattaforma in 4.6 e distalmente a 4.7 (dove la fixture era al di sotto del margine osseo al momento dell'inserimento).



Risultato finale: abbondante mucosa cheratinizzata riempie i volumi gengivali e impedisce il ristagno di cibo. Notare il recupero quasi totale delle scoperture radicolari di 4.5 e 4.4