


Straumann® iEXCEL – sélection de la partie secondaire de cicatrisation BLC/BLX

GUIDE RAPIDE

La hauteur totale d'une partie secondaire de cicatrisation pour BLC/BLX se compose de deux parties :

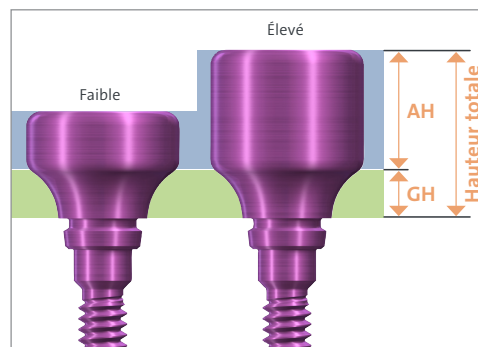

Hauteur gingivale (GH) :
Partie émergente de la partie secondaire de cicatrisation, disponible avec des hauteurs de 0,75 mm à 3,5 mm. Profil uniforme à travers la gamme prothétique.


Hauteur de partie secondaire (AH) :
Partie cylindrique de la partie secondaire de cicatrisation, disponible en deux hauteurs - 2 mm (faible) ou 4 mm (élevé).

Communiquer toujours le diamètre de l'implant et la partie secondaire de cicatrisation sélectionnée au laboratoire dentaire !

Veuillez prendre en compte que la sélection de la partie secondaire de cicatrisation détermine les options disponibles pour la restauration définitive.

Couronne unitaire au profil étroit

Partie secondaire de cicatrisation **RB/WB**

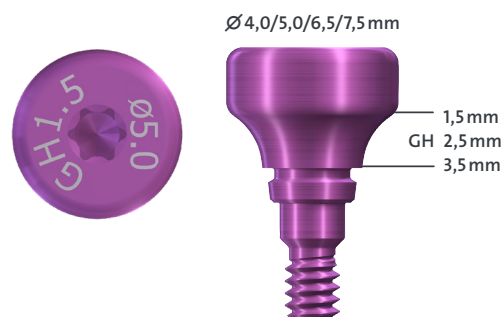


Après cicatrisation, aucune restauration avec une couronne à profil large (WB) ou bridge n'est possible.

Remarque : utiliser une partie secondaire de cicatrisation Ø 5,0, GH 1,5 mm pour Variobase® SA et des parties secondaires RB/WB CARES®.

Couronne unitaire à profil large, molaire

Partie secondaire de cicatrisation **WB**

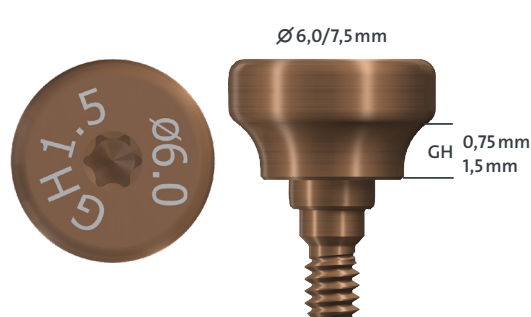


Remarque : pour les implants BLC/BLX WB

Pour obtenir plus d'informations, consulter le document : *Système implantaire Straumann® BLX Consistent Emergence Profiles™ et sélection de la partie secondaire de cicatrisation* (704659/fr).


Bridge

Partie secondaire de cicatrisation **RB/WB** pour bridge/barre

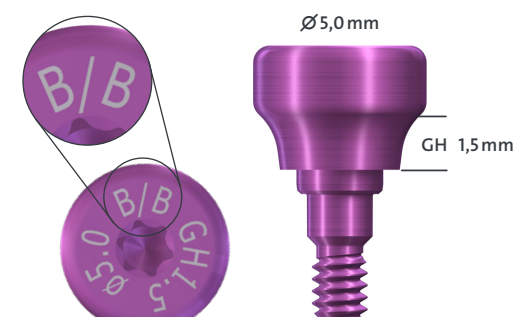


Remarque : utiliser cette partie secondaire de cicatrisation si le choix entre une restauration avec couronnes unitaires et une restauration avec bridge n'a pas encore été fait.


Couronne unitaire : une WB Variobase® ne peut pas être posée !

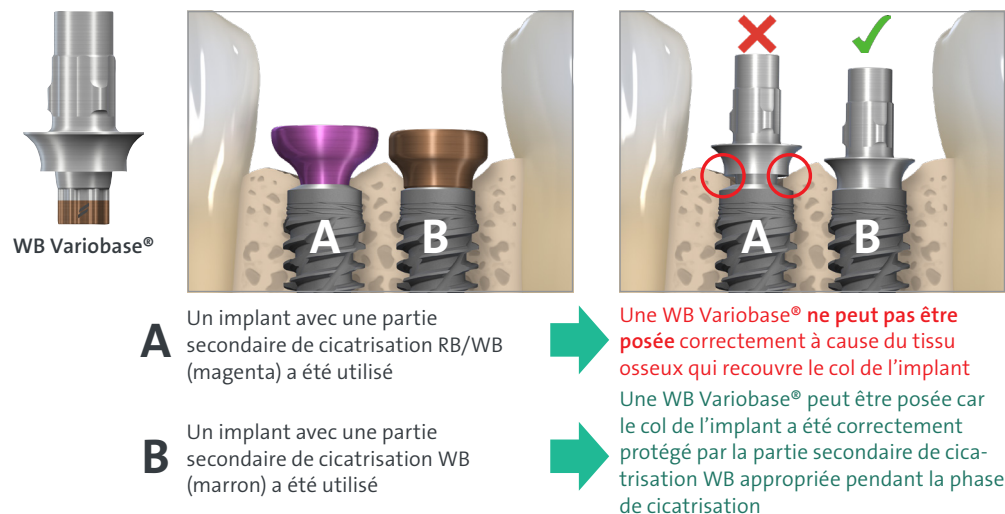

Partie secondaire de cicatrisation RB/WB pour couronne unitaire

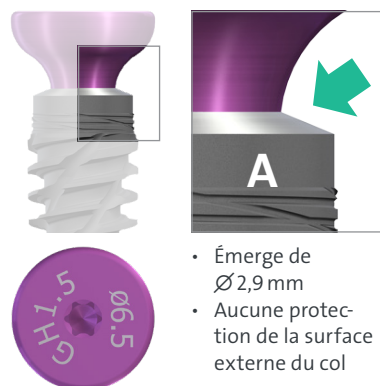

Partie secondaire de cicatrisation WB pour bridge/barre

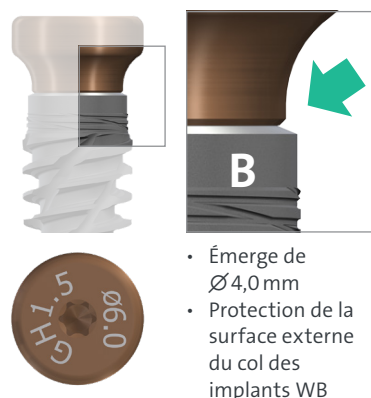


International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com


© Institut Straumann AG, 2023. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.


Restauration avec bridge/bar : une Variobase® pour bridge/bar ne peut pas être posée !

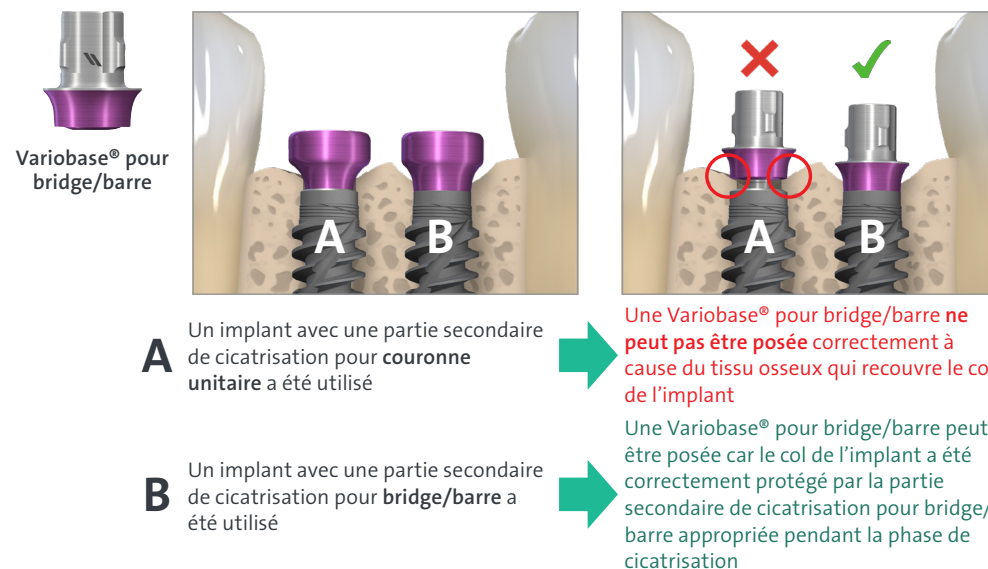

Partie secondaire de cicatrisation RB/WB pour couronne unitaire

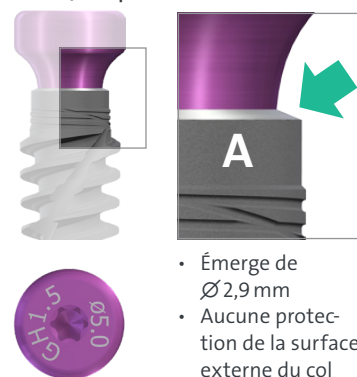

Partie secondaire de cicatrisation RB/WB pour bridge/barre

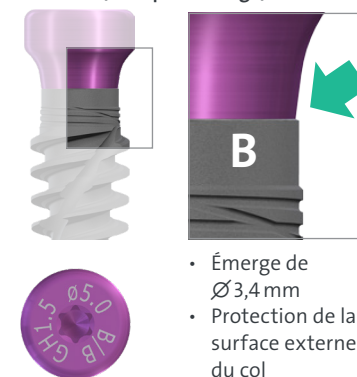

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical.

Produits non-remboursés par les organismes de santé.