



Informations aux patients
sur les soins post-opératoires
des prothèses implanto-portées

Prendre soin
de vos prothèses implanto-portées.

 **straumann**
simply doing more*

*En faire plus tout simplement



Plus qu'une restauration.

Une nouvelle qualité de vie.

Félicitations pour vos nouvelles dents.

Pour la réussite de votre traitement sur le long terme, les implants, tout comme les dents naturelles, requièrent un suivi régulier et une hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Si vous suivez ces conseils, vos prothèses implanto-portées peuvent durer des dizaines d'années.



Thèmes relatifs à l'entretien de vos prothèses implanto-portées :

- Que devez-vous savoir et faire après la chirurgie ?
- Que devez-vous éviter de faire ?
- Quand devez-vous contacter votre dentiste ?
- Comment prendre soin de vos nouvelles dents pour un succès à long terme ?

Conseils

pendant la phase de guérison.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR ET FAIRE APRÈS LA CHIRURGIE ?

Gonflement :

Afin de prévenir la douleur et la tuméfaction, appliquez, dès que possible après l'opération, du froid à l'extérieur sur la zone traitée (ex. poche de glace sur la joue).

Douleur :

Si votre dentiste traitant vous a prescrit des médicaments contre la douleur, n'attendez pas ! Prenez les comme indiqué tout de suite après l'intervention.

Bains de bouche :

Au cours des premières heures suivant l'opération, vous ne devez pas vous rincer la bouche car cela pourrait vous faire saigner. Cependant, vous pouvez boire peu de temps après l'intervention !

Votre restauration provisoire :

Votre dentiste a pu mettre en place une « coiffe de cicatrisation » ou une dent provisoire sur l'implant en attendant que ce dernier cicatrise. Pour aider l'implant à cicatriser sans problème et pouvoir passer à l'étape suivante de votre traitement, évitez de mâcher des aliments durs du côté de l'implant.

QUE DEVEZ-VOUS ÉVITER DE FAIRE ?

- Il est préférable d'être assis plutôt qu'allongé. Gardez la tête droite pendant la journée, et la nuit aussi. Ne vous allongez pas sur le côté où a été placé l'implant.
- Ne conduisez pas les premières heures suivant l'intervention. Votre capacité à conduire peut être perturbée par l'anesthésie ou les médicaments. Demandez conseil à votre dentiste.

- N'utilisez pas de brosse à dents sur la zone implantée jusqu'au retrait des points de suture. Votre dentiste vous recommandera d'utiliser un bain de bouche plusieurs fois par jour plutôt que de brosser vos dents.
- Ne mangez pas avant que l'effet de l'anesthésie disparaisse.
- Les produits tels que l'alcool, la nicotine, le café et le thé noir doivent être évités les premiers jours suivant l'intervention.
- Ne fumez pas.
- Le sport et l'effort physique doivent être évités les premiers jours suivant l'intervention.

QUAND DEVEZ-VOUS CONTACTER VOTRE DENTISTE ?

Les complications sont rares après la mise en place d'un implant dentaire – le traitement est généralement une procédure de routine. Les points de suture sont habituellement retirés sept à dix jours suivant l'intervention. Les solutions Straumann ont fait l'objet de recherches approfondies et de tests scientifiques, mais il peut toutefois y avoir des effets secondaires. Il est très important de savoir que, si vous ressentez des symptômes ou des effets secondaires, vous devez contacter immédiatement votre dentiste :

- Douleur pulsatile le jour de l'opération (sensation de ressentir son pouls)
- Sensation d'engourdissement au niveau du site de l'implant 12 heures après l'opération
- Douleur ou tuméfaction au niveau du site de l'implant plusieurs jours après l'opération
- Saignement anormal
- Dent provisoire mobile
- Si vous avez des symptômes ou des questions non mentionné(e)s dans cette brochure

Prenez soin de vos nouvelles dents.

Si vos dents sont importantes pour vous, vous en prenez soin.

Il en va de même pour vos implants dentaires. Les implants dentaires ne peuvent durer longtemps qu'avec des soins rigoureux. Comme avec les dents naturelles, du tartre peut se former et causer des problèmes à votre implant. Utilisez une brosse à dents à poils souples (changez-en régulièrement) ou une brosse à dents électrique pour nettoyer vos dents. De plus, utilisez tous les accessoires recommandés par votre dentiste telles que les brossettes interdentaires pour nettoyer les espaces entre les dents. Les dents doivent être brossées sur les parties utilisées pour la mastication (intérieure, extérieure et supérieure).



Une coopération entre votre dentiste et vous.

Des contrôles et des consultations préventives réguliers chez votre dentiste sont nécessaires. Un plan de soins bucco-dentaires individualisé vous sera décrit par votre dentiste. N'hésitez pas à l'interroger sur les techniques de nettoyage afin de prendre soin de vos dents de façon optimale. Un soin méticuleux et des contrôles (deux fois par an) aideront votre implant dentaire à rester en place pendant de nombreuses années.



LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE

Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l'aide qu'il vous faut pour vos implants dentaires Straumann.

Rendez-vous sur www.straumann.fr pour en savoir plus sur les produits et solutions Straumann et demandez conseil à votre dentiste.

Straumann France

3 rue de la Galmy

CS70264 Chessy

77701 Marne la Vallée - Cedex 4

www.straumann.fr

© Institut Straumann AG, 2015. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.