

SYSTÈME DE FIXATION POUR IMPLANTS STRAUMANN® **LOCATOR FIXED®**

La solution fixe basée sur le concept amovible
connu et fiable LOCATOR®.



Présentation du produit

RESTAURE CONFIANCE EN SOI ET ESTIME DE SOI.

LOCATOR FIXED® pour implants Straumann® offre aux professionnels dentaires la possibilité de fournir à leurs patients un plan de traitement d'arcade complète fixe abordable. Comme vous utilisez la même partie secondaire LOCATOR® et le même flux de travail que pour le système de fixation amovible LOCATOR®, LOCATOR FIXED® est une option flexible, facile à utiliser, et qui vous est familière.

LOCATOR FIXED® fournit la fonctionnalité que vous attendez d'une solution d'arcade complète fixe à un prix abordable. Réduction du temps passé au fauteuil avec LOCATOR FIXED® : plus de 40 minutes en moins lors de la pose de la prothèse initiale et plus de 35 minutes en moins pour les visites de suivi*. LOCATOR FIXED® est basé sur des protocoles de traitement existants et bien établis, utilise les mêmes parties secondaires que pour le système de fixation amovible LOCATOR® et peut compenser une divergence totale allant jusqu'à 40° entre deux parties secondaires LOCATOR®. Cela permet de convertir facilement un cas amovible existant en une solution d'arcade complète fixe. Fixe pour le patient, mais amovible pour le professionnel dentaire ! LOCATOR FIXED® peut également être utilisé dans des cas avec mise en charge immédiate** de sorte que vos patients puissent désormais manger ce qu'ils veulent et pas seulement ce qu'ils peuvent.

* Données internes

** Tous les implants doivent avoir une stabilité primaire adéquate.





CONFORT DU PATIENT

LOCATOR FIXED® est conçu pour fournir une véritable prothèse d'arcade complète fixe pour les patients, afin d'améliorer les aspects fonctionnel et esthétique avec une procédure moins invasive.



EFFICACITÉ

Basée sur des protocoles de traitement existants et bien établis, la conception simple offre une solution efficace et réduit le temps passé au fauteuil lors du traitement de patients édentés.



FLEXIBILITÉ

En utilisant les mêmes parties secondaires que le système de fixation amovible LOCATOR®, les patients peuvent facilement passés d'une solution amovible à fixe sans le coût et la gêne associés au remplacement de parties secondaires.





ACCESSIBILITÉ

La réduction du temps passé au fauteuil pour la pose et l'entretien, les procédures prothétiques simples et les protocoles chirurgicaux moins invasifs conduisent à un coût total moins important pour le patient.

Améliorez la prothèse amovible LOCATOR® existante de vos patients en la convertissant facilement en une prothèse d'arcade complète fixe.

D'une prothèse **amovible**

à **fixe**

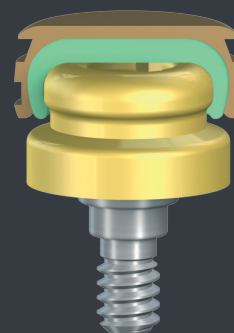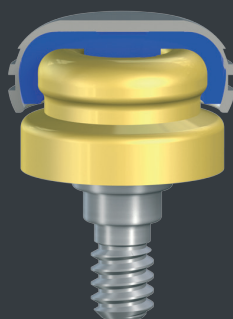

Même partie secondaire. Même flux de travail.

Système de fixation LOCATOR FIXED®

3

MÊME PARTIE SECONDAIRE. MÊME FLUX DE TRAVAIL.

1 NOUVEAU BOÎTIER LOCATOR FIXED®

- Force de liaison optimale pour une connexion fixe
- Même méthode de transfert que pour les boîtiers amovibles LOCATOR®
- Même espace prothétique requis que pour les boîtiers amovibles LOCATOR®

2 NOUVEAUX INSERTS LOCATOR FIXED®

- Insert rigide extrêmement résistant pour une solution d'arcade complète fixe
- Compensation d'angles de divergences allant jusqu'à 40° entre deux implants


3 PARTIES SECONDAIRES LOCATOR®

- Partie secondaire LOCATOR® éprouvée et fiable
- Même flux de travail que le système de fixation amovible LOCATOR®
- Fournit une solution d'arcade complète fixe avec des parties secondaires LOCATOR®

4 CONFIANCE EN IMPLANTOLOGIE


- Le système implantaire dentaire Straumann®
 - Éprouvé, simple et flexible.
- Les parties secondaires LOCATOR® sont disponibles sur toutes les plateformes d'implants Straumann® (RB/WB, NT, RT, WT, RN, WN, NNC, RC, NC)



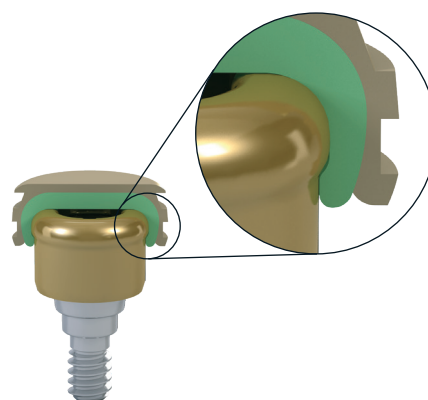


FIXATION

Inserts fabriqués avec une extrême précision et dotés d'une connexion par emboîtement qui **fournit les forces de rétention** nécessaires pour une prothèse fixe.

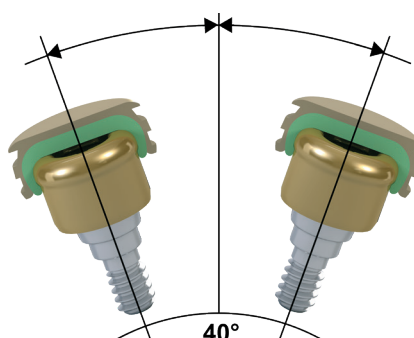


DIVERGENCE DES IMPLANTS

Compense jusqu'à **40° de divergence** entre deux parties secondaires LOCATOR®.

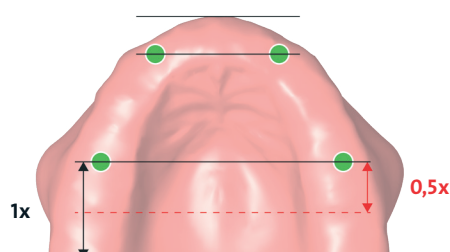

POSE DE L'IMPLANT

Un minimum de quatre implants, porte à faux 1x l'écart antéro-postérieur (0,5x pour les patients souffrant de bruxisme).

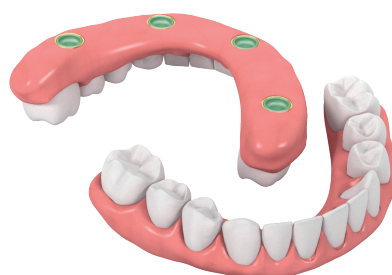

CONCEPTION DE LA PROTHÈSE

Surface basale convexe **nettoyable**. Renforcement de la prothèse recommandé. Espace vertical minimum de 9 mm.

ÉTABLISSEZ UNE RELATION FORTE ENTRE VOS PATIENTS ET VOTRE CABINET.

C'est le moment de repenser vos options de traitement d'arcade complète. LOCATOR FIXED® est une solution de traitement d'arcade complète FIXE qui utilise la même partie secondaire et le même flux de travail que le système de fixation amovible LOCATOR® original.

La différence réside dans les inserts et les boîtiers. La solution amovible LOCATOR® utilise un insert en nylon flexible et un boîtier en argent, la solution FIXE utilise des inserts rigides brevetés et un boîtier en or avec une rétention particulièrement importante.

Avec LOCATOR FIXED®, vous pouvez facilement remplacer les prothèses amovibles LOCATOR® existantes de vos patients par des prothèses FIXES permanentes, sans avoir à modifier les parties secondaires LOCATOR® présentes. Il vous suffit d'un minimum de quatre implants pour commencer à utiliser LOCATOR FIXED®.

IDENTIQUE →


NOUVEAU boîtier



Partie secondaire



Unité de montage

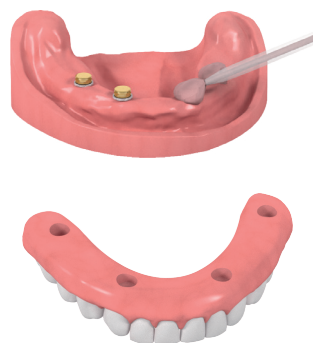

Méthode de transfert



Boîtier

D'une prothèse amovible




Insert flexible

à fixe




Insert rigide

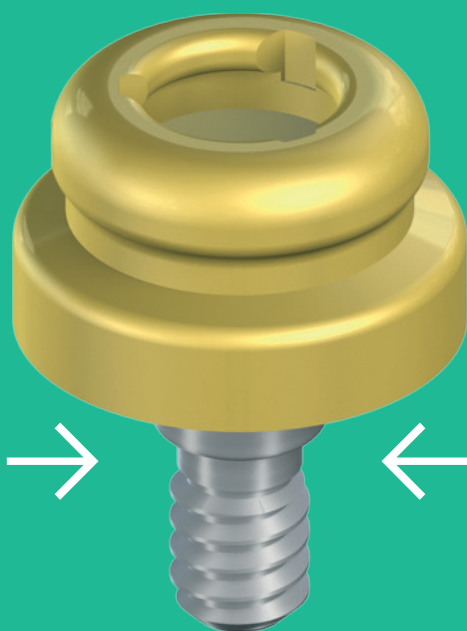

Utilisez la même partie secondaire LOCATOR®

NOUVEL insert

Type de prothèses différent

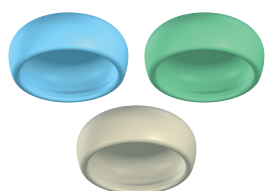

Inserts fixés




Prothèse

Un flux de travail simplifié utilisant des techniques de transfert bien établies réduit la formation requise par les professionnels dentaires pour commencer à effectuer des conversions, des planifications chirurgicales et des restaurations avec LOCATOR FIXED®.

Le corps de scannage LOCATOR® permet d'utiliser des flux de travail numériques efficaces pour la conception et la fabrication de prothèses LOCATOR FIXED®.

SYSTÈME DE FIXATION POUR IMPLANTS STRAUMANN® LOCATOR FIXED®

- La solution de traitement d'arcade complète LOCATOR FIXED® utilise la même partie secondaire et le même flux de travail que le système de fixation amovible LOCATOR® original
- Améliorez la prothèse amovible LOCATOR® existante de vos patients en la convertissant facilement en une prothèse d'arcade complète fixe.

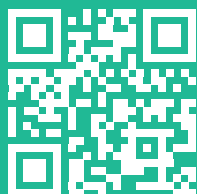

Visitez notre site Web
afin d'obtenir plus
d'informations sur
LOCATOR FIXED® pour
implants Straumann®.

Visitez zestdent.com/eifu pour consulter le mode d'emploi du fabricant, comprenant des informations de prescription, telles que les indications, contre-indications, ainsi que les avertissements et précautions.



490.866/fr/A/00-FR 09/23

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Fabricant

Zest Anchors LLC
Carlsbad, CA 92010, États-Unis

Distributeur

Institut Straumann AG
4002 Basel, Switzerland

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

LOCATOR® et LOCATOR FIXED® sont des marques déposées de Zest IP Holdings LLC, États-Unis.

© Institut Straumann AG, 2023. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

