


STRAUMANN® **VARIOBASE®** XC

L'alliance de l'efficacité et
de la flexibilité.

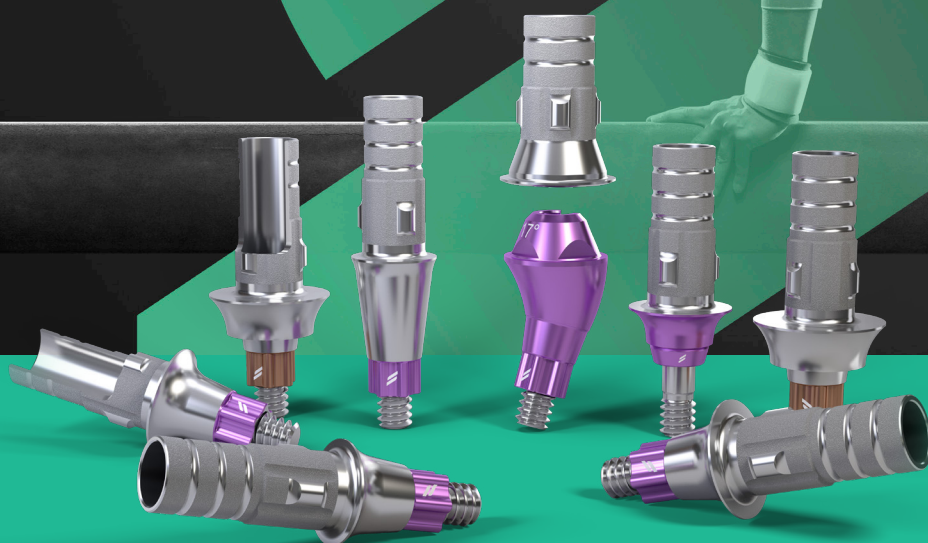

Présentation du produit

STRAUMANN® VARIOBASE® XC

L'ALLIANCE DE L'EFFICACITÉ ET DE LA FLEXIBILITÉ

Découvrez la fiabilité d'un système en lequel plus de 95 000 professionnels dentaires font confiance dans le monde entier. La gamme Straumann® Variobase® XC pour le système de performance Straumann iEXCEL™ permet aux techniciens dentaires et aux dentistes de fournir une restauration sur mesure pour chaque cas avec une flexibilité et une précision inégalées.



FIABILITÉ

Avec Straumann® Variobase® XC et sa connexion implant-partie secondaire Straumann originale, vous bénéficiez d'un ajustement, d'une intégrité structurelle et d'une rétention fiables. La nouvelle génération offre les performances cliniquement éprouvées du modèle antérieur, avec une force d'adhérence partie secondaire-couronne plus importante qui réduit le risque de décollement.



EFFICACITÉ

Straumann® Variobase® XC vous permet d'obtenir une esthétique sans compromis, du début à la fin. Passez des commandes plus facilement avec la connexion Straumann® TorcFit™ et personnalisez avec le fût de collage polyvalent de 7 mm de hauteur. Grâce à la conservation de la surface traitée au laser brevetée, aucun sablage n'est nécessaire à la fin.



FLEXIBILITÉ

Qu'il s'agisse de restaurations vissées ou scellées, numériques ou classiques, la gamme complète et simplifiée Straumann® Variobase® XC vous permet d'offrir facilement des restaurations personnalisées, même dans les cas complexes.



STRAUMANN® VARIOBASE® XC

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VARIOBASE®

1 RAINURES DE COUPE INTÉGRÉES

Personnalisez le fût de collage de 7 mm de hauteur rapidement et avec précision.

2 SURFACE BREVETÉE TRAITÉE AU LASER


Permet une meilleure rétention scellée pour optimiser le collage.

3 RAINURES INDEXÉES

Empêche toute rotation et augmente la surface de contact pour une plus grande stabilité.

4 GAMME DE HAUTEURS GINGIVALES

Offre plusieurs options pour satisfaire aux besoins de vos patients.

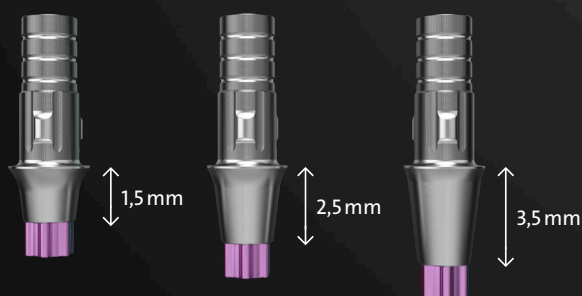

1

2

3

4

FLEXIBILITÉ D'ANGULATION

Permet de compenser l'angulation jusqu'à 25°, afin d'élargir les possibilités de traitement.



jusqu'à 25°

APPLICATIONS POLYVALENTES

Compatibles avec les restaurations unitaires et plures.


INTÉGRATION NUMÉRIQUE HARMONIEUSE

Compatible avec vos systèmes de flux de travail numérique préférés.



CONSISTENT EMERGENCE PROFILES™

Optimisez le processus de gestion des tissus mous avec le profil d'émergence uniforme des parties secondaires Bone Level Straumann iXCEL™.

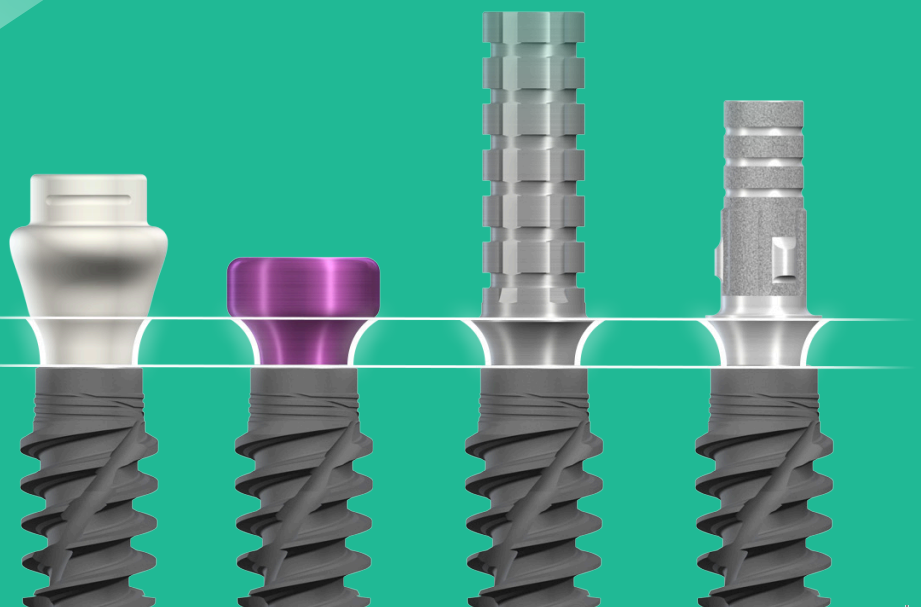

UN MEILLEUR COLLAGE

POUR UN AJUSTEMENT FIABLE


SURFACE USINÉE

Straumann® Variobase®




SURFACE TRAITÉE AU LASER*

Straumann® Variobase® XC

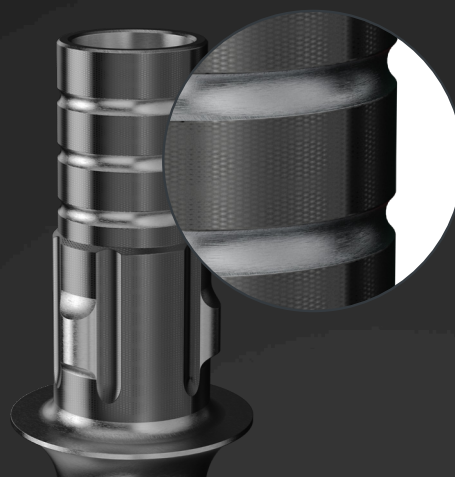

*Brevetée

TOUS LES AVANTAGES DU SABLAGE. SANS LES RISQUES ASSOCIÉS

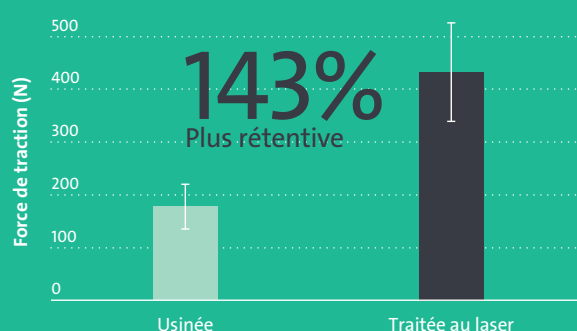

Un traitement laser breveté assure la rugosité de la surface, éliminant ainsi l'étape du sablage et les risques qui y sont associés :

- Altération des tolérances ou des éléments structurels
- Réduction de la résistance structurelle
- Contamination potentielle


REMARQUE : La longueur la plus courte (3,5 mm) a été utilisée pour cette étude en laboratoire.

Profitez de la sérénité que procure Straumann® Variobase® XC, en sachant que l'ingénierie et la précision de fabrication de Straumann sont toujours là.


LES BASES DE LA QUALITÉ AUTHENTIQUE DES **STRAUMANN®** **ORIGINAL**

Confiance et sérénité :


- Une conception harmonieuse entre l'implant et la partie secondaire associée à une très grande précision de fabrication
- Des performances excellentes aux tests de résistance à la fatigue
- Données cliniques à long terme
- Garantie de disponibilité à long terme des composants prothétiques
- Un service et une assistance exceptionnels comprenant la garantie Straumann

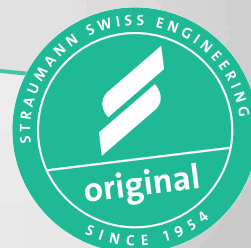

COMPATIBLE N'EST PAS SYNONYME D'ORIGINAL EN LEQUEL AVEZ-VOUS CONFIANCE ?

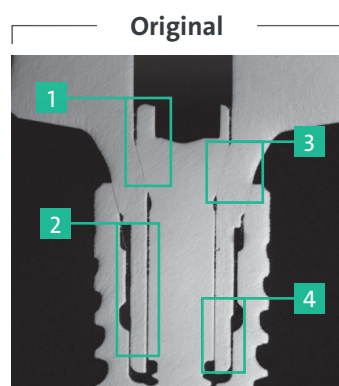

Partie secondaire en Ti Straumann® CARES® sur implant Straumann® RC 4.1

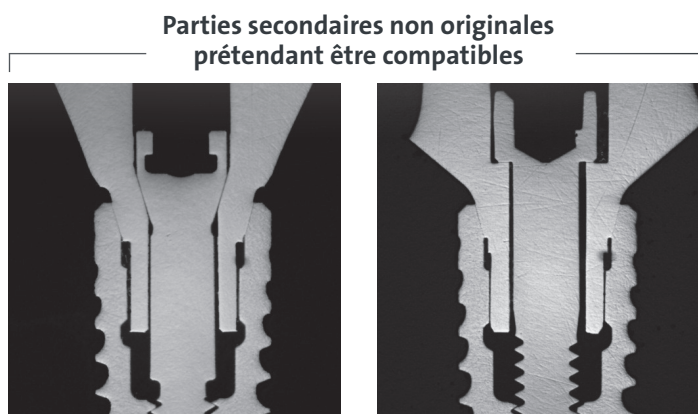

Partie secondaire en Ti NobelProCera™ CAD/CAM sur implant Straumann® RC 4.1

Partie secondaire en Ti Atlantis™ CAD/CAM sur implant Straumann® RC 4.1

GARANTIE À VIE SUR LES PARTIES SECONDAIRES STRAUMANN® VARIOBASE® XC

- Nous avons une confiance telle en la performance et en la fiabilité de la Straumann® Variobase® XC que nous offrons la garantie à vie Straumann
- Pour obtenir plus d'informations, consultez www.straumann.com/guarantee




Straumann® Variobase® XC

STRAUMANN® VARIOBASE® XC

FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

REMARQUE : Des flux de travail centralisés et classiques sont également disponibles.

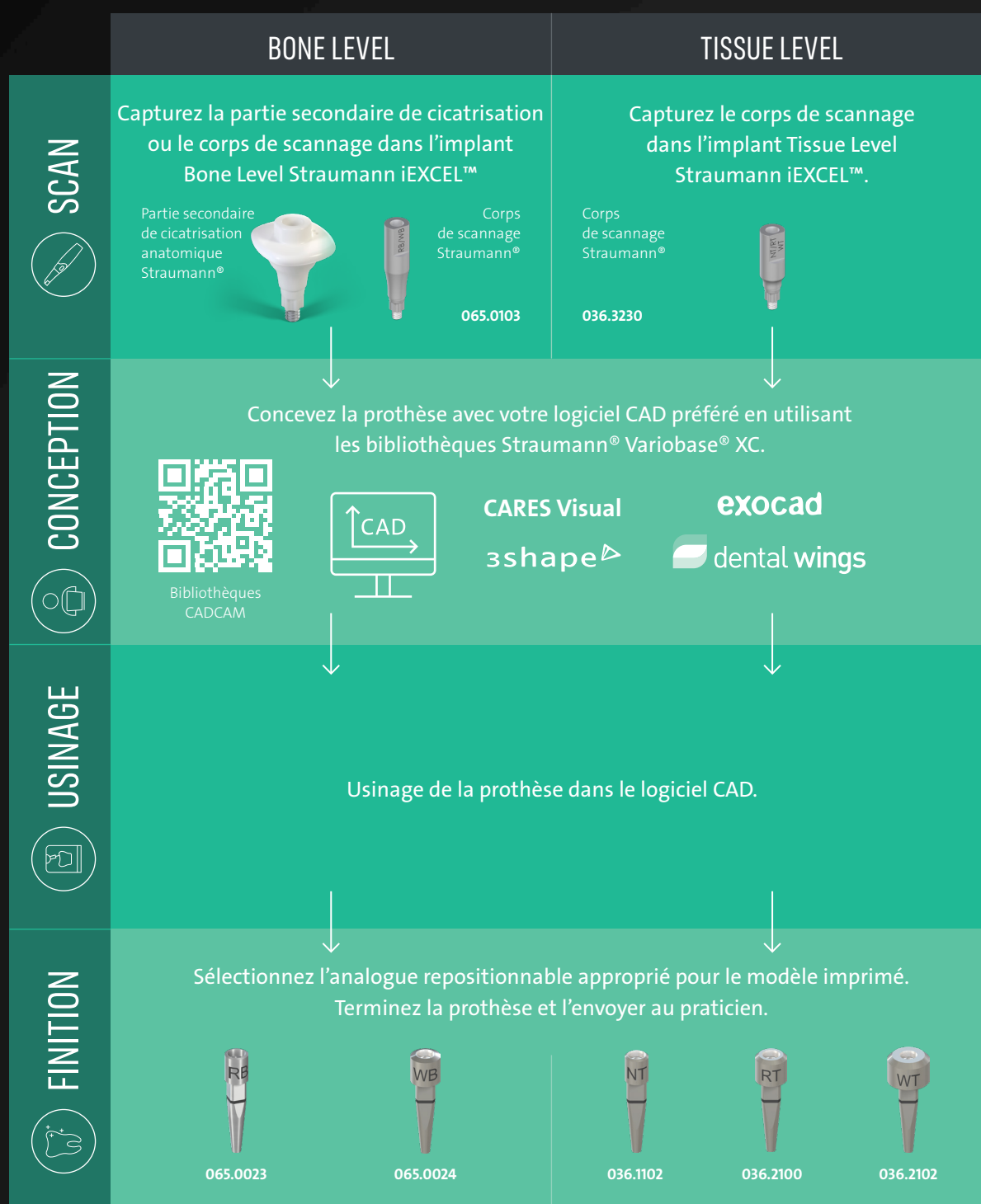



GAMME STRAUMANN® VARIOBASE® XC

POUR LES RESTAURATIONS UNITAIRES

		POUR COURONNE		POUR COURONNE SA	
					
		Hauteur gingivale (mm)	Référence	Hauteur gingivale (mm)	Référence
Straumann iEXCEL™ BL (BLX/BLC)	RB/WB Ø 3,8	1,5	062.5017	Pas disponible	
		2,5	062.5018		
		3,5	062.5019		
	RB/WB Ø 4,5	1,5	062.5020	1,5	062.5009
		2,5	062.5021	2,5	062.5010
		3,5	062.5022	3,5	062.5011
	WB Ø 5,5	0.75	062.5023	0.75	062.5012
		1,5	062.5024	1,5	062.5013
		2,5	062.5059	2,5	062.5060
	WB Ø 6,5	1,5	062.5061	1,5	062.5063
		2,5	062.5062	2,5	062.5064
Straumann iEXCEL™ TL (TLX/TLC)	NT		062.5025		062.5014
	RT		062.5026		062.5015
	WT		062.5027		062.5016




GAMME STRAUMANN® VARIOBASE® XC POUR RESTAURATIONS PLURALES

AU NIVEAU DE L'IMPLANT

		POUR LES BARRES ET LES BRIDGES		POUR LES BARRES ET LES BRIDGES SA	
					
		Hauteur gingivale (mm)	Référence	Hauteur gingivale (mm)	Référence
Straumann iEXCEL™ BL (BLX/BLC)	RB/WB Ø 3,8	1,5	062.5065	Pas disponible	
		2,5	062.5066		
		3,5	062.5067		
	RB/WB Ø 4,5	1,5	062.5068	1,5	062.5073
		2,5	062.5069	2,5	062.5074
		3,5	062.5070	3,5	062.5075
	WB Ø 5,5	0.75	062.5071	0.75	062.5076
		1,5	062.5072	1,5	062.5077
Straumann iEXCEL™ TL (TLX/TLC)	NT		062.5003		062.4992
	RT		062.5004		062.4993
	WT		062.5005		062.4994

GAMME STRAUMANN® VARIOBASE® XC POUR
RESTAURATIONS PLURALES


AU NIVEAU DE LA PARTIE SECONDAIRE

POUR COURONNE			POUR LES BARRES ET LES BRIDGES		POUR LES BARRES ET LES BRIDGES SA	
						
Diamètre de partie secondaire vissée (mm)	Référence		Diamètre de partie secondaire vissée (mm)	Référence	Diamètre de partie secondaire vissée (mm)	Référence
4,6	023.0038		4,6	023.0040	4,6	023.0041

BL*


*Straumann iEXCEL™ BL (BLX/BLC)

STRAUMANN® VARIOBASE® XC – L'ALLIANCE DE L'EFFICACITÉ ET DE LA FLEXIBILITÉ.

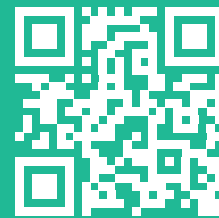

Découvrez
Straumann® Variobase® XC

- Pensé pour la liberté, conçu pour la confiance
- Choisie par des professionnels dentaires expérimentés,
perfectionnée pour répondre aux défis d'aujourd'hui

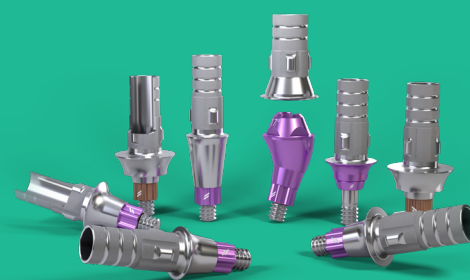

491.048/fr/A/00-FR 07/25

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

© Institut Straumann AG, 2025. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées.

