



Félicitations pour votre nouveau sourire ! S'ils sont correctement entretenus, vos implants Straumann® sont conçus pour durer toute une vie. Et nous sommes là pour vous fournir des informations et des conseils utiles pour faciliter votre cicatrisation après votre opération et au-delà.

Comme les dents naturelles, vos implants et les prothèses dentaires nécessitent des bilans réguliers et une bonne hygiène bucco-dentaire. Continuez donc à vous brosser les dents et à utiliser du fil dentaire régulièrement, et ne manquez aucune consultation. Avec de bonnes habitudes, votre nouveau sourire restera radieux pendant des décennies.

PLUS QUE DE NOUVELLES DENTS. UNE PLUS GRANDE CONFIANCE EN SOI ET UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.

N'oubliez pas que vous et votre dentiste jouez un rôle essentiel dans la longévité, ainsi que dans les aspects fonctionnel et esthétique de votre restauration implantaire. Des bilans réguliers et des soins préventifs sont nécessaires. Votre dentiste vous aidera à établir un plan adapté à vos besoins.

Nous voulons que votre sourire dure très, très longtemps.



En implantologie dentaire, Straumann® est le garant d'une qualité suisse haut de gamme, d'une précision et d'une innovation qui génèrent de la confiance chez les patients et les dentistes, soutenu par l'un des plus grands réseaux scientifiques dans le monde. Straumann repousse les limites pour inspirer l'avènement de la prochaine génération de soins dentaires, axée sur la santé des patients, la qualité de vie et la durabilité.



Le traitement implantaire ne convient pas à tous les patients. Pour évaluer si un traitement implantaire est adapté à votre situation et pour obtenir des informations sur les risques et les contre-indications du traitement implantaire, veuillez consulter votre dentiste.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

 **straumann**


www.straumann.com/patients

491.005/ft/A/00-FR 02/25

 **straumann**

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE NOUVEAU SOURIRE.

Guide des soins ultérieurs
des implants dentaires

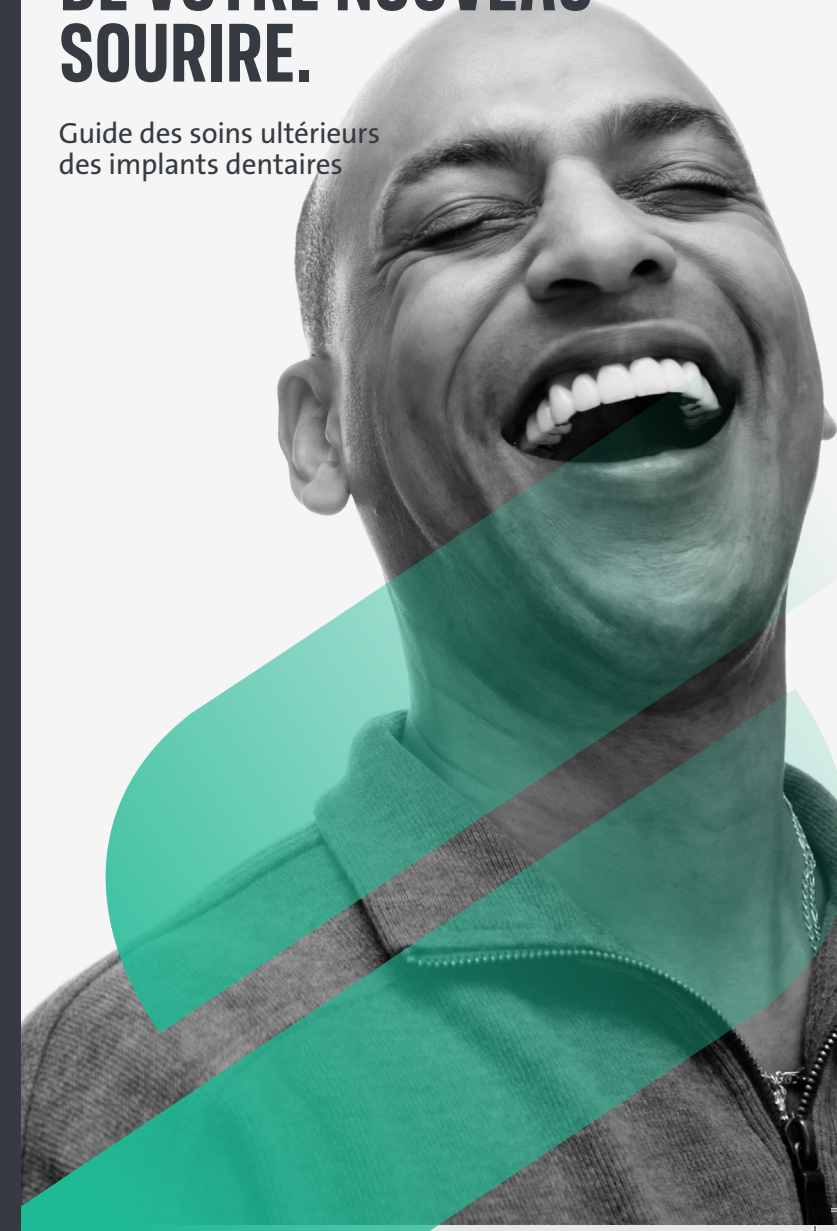

APRÈS L'INTERVENTION CHIRURGICALE.



Gonflement : Afin de prévenir ou de minimiser la douleur et le gonflement, utilisez de la glace ou des packs de refroidissement sur la partie externe de la zone traitée dès que possible après l'intervention. La durée et la fréquence d'application seront déterminées par votre équipe dentaire.

Douleur : Prenez tout médicament contre la douleur conformément aux instructions et à la prescription.

Bains de bouche : N'utilisez aucun rince-bouche dans les premières heures suivant l'intervention, car cela pourrait perturber la coagulation, voire déloger le caillot sanguin. Continuer à boire de l'eau et des liquides pour rester hydraté. Évitez, toutefois, l'utilisation de pailles afin de réduire le risque que des forces d'aspiration délogent le caillot sanguin.

Votre restauration provisoire : Après l'intervention, votre dentiste peut placer une coiffe de cicatrisation ou une dent de remplacement provisoire. Vos besoins uniques guideront la prise de décisions. Suivez les instructions de votre dentiste concernant la mastication dans la zone de votre nouvel implant.

Posture du corps : Il est préférable de vous asseoir plutôt que de vous allonger. Suivez les instructions de votre dentiste, comme garder la tête surélevée dans les premiers jours suivant l'opération. Évitez de vous allonger sur le côté ayant reçu l'implant.

Conduite de véhicule : Si vous avez reçu des anesthésiques, ne conduisez pas de véhicule pendant les premières heures suivant l'intervention, car l'anesthésie ou les médicaments pourraient affecter votre aptitude au volant.

Hygiène bucco-dentaire : Votre dentiste vous indiquera comment nettoyer soigneusement la zone affectée jusqu'au retrait des points de suture.

Alimentation : Évitez de manger jusqu'à ce que les effets de l'anesthésie aient disparu. Vous pouvez souffrir de nausée après l'anesthésie. Votre dentiste peut donc vous conseiller d'éviter de manger pendant un certain temps afin de réduire le risque de vomissement. Évitez toute boisson chaude et tout aliment épicé, acide, croquant ou dur le premier jour suivant l'intervention.

Il s'agit de recommandations générales. Veuillez suivre les conseils de votre dentiste sur la façon la plus appropriée de gérer cette situation.

- Une douleur excessive le jour de l'intervention
- Une sensation d'engourdissement au niveau de l'implant 12 heures après l'intervention
- Une gêne inhabituelle ou un gonflement au niveau du site d'implantation plusieurs jours après l'opération
- Des saignements continus
- Une perte de la restauration provisoire

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre dentiste, votre hygiéniste, votre coordinateur d'implants ou un autre membre de votre équipe dentaire.

PRENDRE SOIN DE VOTRE NOUVEAU SOURIRE.



S'ils sont correctement entretenus à la maison et par le dentiste, les implants dentaires peuvent durer toute une vie. L'accumulation de plaque dentaire peut affecter vos dents naturelles comme votre implant. Un brossage régulier, l'utilisation de fil dentaire et des bilans sont donc essentiels à l'entretien à long terme de vos nouvelles dents.

- Choisissez une brosse à dents avec des poils souples
- et changez-la régulièrement
- Utilisez d'autres aides au nettoyage dentaire recommandées par votre dentiste, telles que des brosses interdentaires ou du fil dentaire pour nettoyer l'espace entre les dents
- Veillez à brosser toutes les surfaces de vos dents où vous mâchez, y compris l'intérieur, l'extérieur et la partie supérieure
- Demandez à votre hygiéniste dentaire de vous expliquer les techniques spécifiques de nettoyage et d'entretien des implants dentaires

QUAND DOIS-JE CONTACTER MON ÉQUIPE DENTAIRE ?

Les complications après la pose d'un implant dentaire sont rares. La douleur ou les temps de repos nécessaires rapportés sont souvent minimes, et les points de suture sont généralement retirés sept à dix jours après l'opération.

Des effets secondaires sont possibles. Il est très important de contacter immédiatement votre dentiste si vous présentez certains symptômes ou effets secondaires, notamment :