



Straumann® Dental Implant Systems
Checklist dopo un
impianto dentale

Cosa sapere e cosa fare nel periodo immediatamente successivo ad un intervento di implantologia.

Gonfiore

Raffreddi la zona in modo appropriato.

Dolore

Se assumerà i farmaci che le ha prescritto il dentista, il dolore non dovrebbe essere un problema.

Cibo

Non mangi fino a che non sarà passato l'effetto dell'anestetico. Nel primo giorno eviti bevande calde e cibi caldi, piccanti e acidi. Gli alimenti croccanti e duri devono essere evitati per una settimana.

Risciacqui orali

Non faccia risciacqui nelle prime 12 ore dopo l'intervento.

La corona provvisoria (o la cappetta di guarigione provvisoria)

La tratti con cura ed evitati di masticare alimenti duri.

Posizione del corpo

Il primo giorno e la prima notte dopo l'intervento dovrà tenere la testa più sollevata rispetto al resto del corpo. La prima notte non si sdrai sul lato dove è stato inserito l'impianto.

Mobilità

Non guidi nelle prime ore dopo l'intervento. La sua capacità di guidare potrebbe essere compromessa dall'anestetico o dai farmaci. Consulti il suo dentista.

Igiene orale

Nella zona dell'impianto, a partire da 12 ore dopo l'intervento e fino alla rimozione dei punti di sutura, usi più volte al giorno un collutorio orale al posto dello spazzolino.

Comportamento

Nei primi giorni dopo la procedura dovrà evitare alcol, nicotina, caffè, tè nero, sport o sforzi fisici.



CONTATTI IL SUO DENTISTA SE:

- il giorno dell'intervento avverte un dolore pulsante
- avverte una sensazione di intorpidimento nella zona dell'impianto 12 ore dopo l'intervento
- avverte dolore o gonfiore nella zona dell'impianto alcuni giorni dopo l'intervento
- il sanguinamento non si arresta
- perde il dente provvisorio
- avverte sintomi o ha domande non menzionati qui.

IMPORTANTE: Segua sempre il piano individuale di igiene orale che le è stato prescritto dal dentista.



00.683/A/00 05/21