



Straumann® Dental Implant Systems
Checklist per la cura degli
impianti dentali

Gli impianti possono durare per tutta la vita con una manutenzione appropriata.

- Gli impianti dentali richiedono gli stessi controlli regolari, visite preventive e igiene orale dei denti naturali.
- Utilizzare uno spazzolino morbido (e cambiarlo regolarmente) o uno spazzolino elettrico per la pulizia dei denti.
- Spazzolare i denti su tutti i lati.
- Utilizzare gli ausili raccomandati dal proprio dentista come scovolini interdentali, filo interdentale o dispositivi di irrigazione orale per pulire lo spazio tra i denti.
- Utilizzare un dentifricio poco abrasivo ed evitare prodotti con bicarbonato di sodio, smacchianti o dentifrici per fumatori, tra gli altri.
- Chiedere al proprio dentista informazioni su tecniche di pulizia speciali, in modo da acquisire familiarità con esse.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva - procedere con cautela sulla protesi e sull'area dell'impianto.
- Prendere misure preventive contro abitudini come il digrignare e lo stringere i denti.

IMPORTANTE: seguire sempre il piano individuale di cura orale indicato dal proprio dentista.