

Straumann®

Il post-trattamento implantare

Impianti che durano una vita, con le giuste cure



Gli impianti di qualità sono un'ottima scelta e un investimento per la sua salute.

Per un successo a lungo termine dell'impianto, è importante prendersene cura. Esattamente come i denti naturali, l'impianto richiede controlli regolari e un'accurata igiene orale. Seguendo queste indicazioni è possibile mantenere in salute gli impianti per decenni.

Le complicazioni dopo l'inserimento di un impianto dentale sono un evento raro; i punti possono essere tolti generalmente dopo 7-10 giorni dalla procedura.

Le soluzioni Straumann sono oggetto di accurate ricerche e test scientifici.

Tuttavia, esiste la possibilità che si verifichino effetti collaterali. È molto importante quindi contattare immediatamente il dentista qualora si accusi uno dei seguenti sintomi:

Gonfiore: ridurlo e raffreddare l'area

Raffreddare esternamente l'area trattata appena possibile dopo l'intervento, per ridurre il dolore e il gonfiore.

Dolore: assumere farmaci

Se il medico dentista ha prescritto dei farmaci, assumerli immediatamente come indicato.

Risciacqui orali: fare attenzione

Durante le prime ore dopo l'intervento, è bene non fare risciacqui orali, poiché potrebbero causare sanguinamento. È consentito invece bere acqua.

Restauro provvisorio: prendersene buona cura

Durante la fase di guarigione dell'impianto, il dentista potrebbe aver inserito una "cappetta di guarigione" o un restauro dentale provvisorio. Questo tipo di restauro è inserito sull'impianto per agevolare la guarigione. È importante non masticare cibi duri con il lato della bocca in cui è stato inserito l'impianto, così da favorire un'adeguata guarigione dell'impianto, in preparazione alla fase successiva del trattamento.

2

Quando contattare il dentista

- Se si sente un dolore pulsante nel giorno dell'intervento
- Se si prova una sensazione di intorpidimento nell'area dell'impianto 12 ore dopo l'intervento
- Se sente dolore o gonfiore nella zona dell'impianto a diversi giorni dall'intervento
- Il sanguinamento non cessa
- Il dente provvisorio cade
- Si presentano sintomi o sorgono dubbi non menzionati qui

3

Cosa evitare

1. È preferibile stare seduti anziché sdraiati. Si consiglia di tenere la testa sollevata, sia di giorno che di notte.
2. Non coricarsi sul lato in cui è stato inserito l'impianto.
3. Non guidare durante le prime ore dopo l'operazione. La capacità di guidare potrebbe essere alterata dall'anestetico o dai farmaci. Chieda indicazioni al suo dentista.
4. Non utilizzare lo spazzolino nell'area dell'impianto fino alla rimozione dei punti. Il dentista le consiglierà di eseguire dei risciacqui diverse volte al giorno anziché spazzolare i denti.
5. Non mangiare fino all'esaurimento dell'effetto anestetico.
6. Durante i primi giorni dopo la procedura: eliminare gli alcolici, la nicotina, il caffè, il tè nero, gli sport o gli sforzi fisici.

4

La cura dei denti è un gesto di amore per sé stessi

La stessa cura si deve applicare agli impianti dentali, per fare in modo che durino a lungo.

Come

- Usare uno spazzolino morbido (sostituendolo regolarmente) o uno spazzolino elettrico
- I denti devono essere spazzolati internamente, esternamente e nella parte superiore, su cui si mastica
- Usare gli scovolini interdentali, se suggerito dal dentista

5

Un lavoro di collaborazione tra lei e il suo dentista

Il successo a lungo termine della procedura di impianto dentale dipende anche dalla collaborazione tra dentista e paziente. È necessario recarsi regolarmente dal dentista per i controlli e le visite di prevenzione.

Perché

- Il medico dentista fornirà un piano di cura personalizzato
- Il paziente riceverà indicazioni specifiche e aggiornate sulle tecniche di pulizia
- Una buona cura dell'impianto e controlli regolari due volte l'anno assicurano la salute dell'impianto per anni

Straumann Italia srl
Bodio Center – V.le L. Bodio 37/A Pal. 4
20158 Milano (MI)
Tel +39 023932 831
Fax +39 02 3932 8365
www.straumann.it

© Institut Straumann AG, 2014. All rights reserved.
Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann®
mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of
Straumann Holding AG and/or its affiliates.